

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

МЕДКОМ-МП

140055, Московская область, Люберецкий район,
г.Котельники, микрорайон Белая Дача,
промзона Технопром
тел./факс (495) 363-60-33
ИНН 7725203410 КПП 502701001

р/сч 40702810000000001066
КБ "БФГ-КРЕДИТ" (ООО) в г. Москва
к/сч. 30101810100000000162
БИК 044579162

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Пленка инцизная операционная на полимерной основе, стерильная

Производитель: «Фармапласт С.А.Е.», Египет / Pharmaplast S.A.E., Amria
Free Zone, 23512 Alexandria, Egypt. Тел.: 00203-4500264, факс: 00303-
4500263, e-mail: mamdouh@pharmaplast-online.com.

Инструкция по применению

Пленка инцизная операционная на полимерной основе, стерильная:

- антимикробная с содержанием повидон-йода;
- без содержания дополнительных компонентов.

- Извлечь пленку из индивидуальной стерильной упаковки.
- Пленка покрыта с двух сторон защитными прозрачными пленками.
Отделить и выбросить одну часть прозрачной пленки.
- Уложить пленку вскрытой частью на место, где будет проводиться надрез.
- Медленно отделяя с одной стороны другую часть прозрачной пленки,
разгладить пленку в противоположный край.

Меры предосторожности и противопоказания

- Предназначены для хирургических процедур, когда существует опасность бактериального заражения ран от микрофлоры близлежащей кожи, в частности в: ортопедии, нейрохирургии, хирургии брюшной полости и имплантации, пластической хирургии и др.
- Не использовать пленки на пациентах с известной чувствительностью к йоду.

Условия хранения

Гидрогель следует хранить в сухом прохладном темном месте при комнатной температуре.

Срок годности – 5 лет.

Генеральный директор
ООО «Медком-МП»



Кирсенко К.В.

Лист 9

