


«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Медком-МП»


Кирсенко К.В.
«16» мая 2012 г.

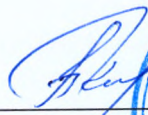

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Повязки медицинские стерильные

Производства «Фармапласт С.А.Е.» (Pharmaplast S.A.E.), Египет

Инструкция по применению повязок медицинских стерильных

Повязки медицинские стерильные, производства компании «Фармапласт С.А.Е.» (Pharmaplast S.A.E.), Египет, применяются при местном лечении ран, в отношении которых существует риск заражения. Коллоидный абсорбент, используемый в обоих вариантах исполнения повязок, впитывает экссудаты из раны и превращает их в гель. Это препятствует скоплению жидкости в ране, но способствует образованию влажной среды, благоприятной для заживления ран, а также безболезненному удалению повязки при необходимости. Коллоидный абсорбент содержит частицы наноструктурного алюмосиликатного цеолита с включенными в него ионами серебра, которые оказывают бактерицидное действие. Благодаря контролируемому высвобождению ионов серебра из структуры цеолита, серебро не окрашивает ткани и не оказывает цитотоксического действия.

Повязки медицинские стерильные представлены двумя вариантами исполнения:

1. Повязка раневая липидокolloидная бактерицидная стерильная неадгезивная на полимерной сетчатой основе с ионами серебра.
2. Повязка раневая бактерицидная гидроколлоидная стерильная адгезивная на полимерной основе с ионами серебра.

Показания к применению:

- влажные раны,
- ожоги первой и второй степени,
- язвы ног,
- пролежни,
- повторно травмированные раны,
- ссадины
- послеоперационные швы,
- при трансплантации кожи и донорских участков.

Способ применения.

- Промыть рану и прилегающий к ней участок кожи физиологическим раствором. Рана и прилегающий участок кожи должны быть сухими.
- Приготовить повязку – удалить защитное покрытие с повязки. В загнутом состоянии это покрытие помогает наложить повязку на рану таким образом, чтобы не касаться при этом поверхности повязки, предназначенной для контакта с раной.
- Наложить повязку непосредственно на поверхность раны, при необходимости использовать стерильные инструменты (щипчики).
- Чтобы адаптировать размеры повязки к размерам раны, её можно предварительно обрезать с помощью стерильных ножниц.
- Зафиксировать края повязки, не допуская возникновения складок. При необходимости зафиксировать повязку с помощью эластичного бинта, лейкопластыря или эластичной сетки.
- Повязку необходимо менять в зависимости от типа раны и от того, как развивается процесс заживления.

Противопоказания:

- Противопоказан новорожденным, детям до 1 года и женщинам в период беременности.
- Чувствительность к любому компоненту/материалу изделия.
- Ожоги 3 степени мышц и сухожилий.

Меры предосторожности и хранения:

- Не использовать при наличии чувствительности к любому компоненту/материалу повязки.
- Избегать контакта с электродами или электропроводящий гель при электронных измерениях (ЭЭГ, ЭКГ).
- Не использовать пациентам во время проведения исследования МРТ.
- Избегать использования окисляющих агентов (гипохлорит, перекись водорода).
- Не рекомендуется использовать мази или другие повязки, содержащие масла или воски перед наложением повязки.
- При лечении рваных, глубоких ран или ран со сложным рельефом, нужно накладывать повязку таким образом, чтобы её можно было в любой момент осмотреть, и чтобы к ней в любой момент имелся доступ.
- Повязки стерилизованы гамма-излучением. Не подлежат повторной стерилизации.
- Повязки следует хранить в горизонтальном положении в сухом прохладном темном месте при температуре ниже 25°C.
- Срок хранения: 3 года.

Генеральный директор
ООО «Медком-МП»



Кирсенко К.В.

Всего прокурировано, ошито
и скреплено пером 3 листа
Тек. директор ООО "Медком-МТ"
Харченко К. В.

