


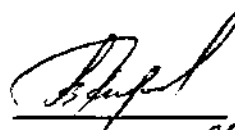

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Медком-МП»


Кирсенко К.В.
«28» октября 2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

**Повязки раневые стерильные бактерицидные на тканой, нетканой и
полимерной основах**

Производства Pharmaplast S.A.E., («Фармапласт С.А.Е.»), Египет

Инструкция по применению повязок раневых стерильных бактерицидных на тканой, нетканой и полимерной основах

Повязки раневые стерильные бактерицидные на тканой, нетканой и полимерной основах:

1. С полиуретановой абсорбирующей подушечкой с ионами серебра
2. С вязкозной подушечкой с ионами серебра
3. Гидрогелевые с ионами серебра
4. С хлоргексидином
5. С повидон-йодом


Способ применения.

- Промыть рану и прилегающий к ней участок кожи физиологическим раствором. Рана и прилегающий участок кожи должны быть сухими.
- Приготовить повязку – удалить защитное покрытие с повязки. В загнутом состоянии это покрытие помогает наложить повязку на рану таким образом, чтобы не касаться при этом поверхности повязки, предназначенной для контакта с раной.
- Наложить повязку непосредственно на поверхность раны.
- Чтобы адаптировать размеры повязки к размерам раны, её можно предварительно обрезать с помощью стерильных ножниц.
- Зафиксировать края повязки, не допуская возникновения складок. При необходимости зафиксировать повязку с помощью эластичного бинта, лейкопластыря или эластичной сетки.
- Повязку необходимо менять в зависимости от типа раны и от того, как развивается процесс заживления.

Меры предосторожности и хранения:

- Повязки прилипают к хирургическим перчаткам из латекса. В этом случае для того, чтобы облегчить работу рекомендуется смочить перчатки физиологическим раствором.
- При наличии клинических признаков, указывающих на наличие местной инфекции, настоятельно рекомендуется предварительно провести курс лечения с применением тонких антибактериальных повязок.
- При лечении рваных, глубоких ран или ран со сложным рельефом, нужно накладывать повязку таким образом, чтобы её можно было в любой момент осмотреть, и чтобы к ней в любой момент имелся доступ.
- Повязка не подлежит повторной стерилизации.
- Повязки следует хранить в горизонтальном положении в сухом прохладном темном месте при температуре ниже 25°C.
- Срок хранения: 3 года.

**Генеральный директор
ООО «Медком-МП»**

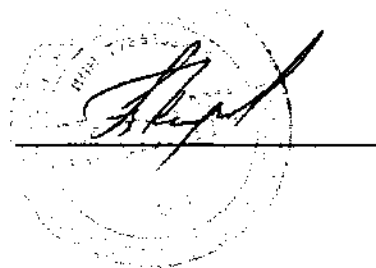

Кирсенко К.В.