

72
«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Медком-МП»



Кирсенко К.В.
_____ 2012 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Повязки медицинские стерильные

Производства «Фармапласт С.А.Е.» (Pharmaplast S.A.E.), Египет

2012

Инструкция по применению повязок медицинских стерильных

Повязки медицинские стерильные, производства компании «Фармапласт С.А.Е.» (Pharmaplast S.A.E.), Египет, предназначены для фиксации, герметизации, изоляции ран и послеоперационных швов от внешних возбудителей болезни и загрязнения. Липидоколлоидный абсорбент, используемый в обоих вариантах исполнения повязок, впитывает экссудаты из раны и превращает их в гель. Это препятствует скоплению жидкости в ране, но способствует образованию влажной среды, благоприятной для заживления ран, а также безболезненному удалению повязки при необходимости.

Повязки медицинские стерильные, варианты исполнения:

1. Повязка раневая липидоколлоидная стерильная неадгезивная на полимерной сетчатой основе.
2. Повязка раневая липидоколлоидная стерильная адгезивная абсорбирующая на полимерной основе.

Показания к применению:

- влажные раны,
- ожоги первой и второй степени,
- язвы ног и ступней,
- пролежневые и трофические язвы,
- пролежни,
- повторно травмированные раны,
- хронические раны с медленным заживлением,
- ссадины
- послеоперационные швы,
- при трансплантации кожи и донорских участков.

Способ применения.

- Промыть рану и прилегающий к ней участок кожи физиологическим раствором. Рана и прилегающий участок кожи должны быть сухими.
- Приготовить повязку – удалить защитное покрытие с повязки. В загнутом состоянии это покрытие помогает наложить повязку на рану таким образом, чтобы не касаться при этом поверхности повязки, предназначенной для контакта с раной.
- Наложить повязку непосредственно на поверхность раны, при необходимости использовать стерильные инструменты (щипчики).
- Чтобы адаптировать размеры повязки к размерам раны, её можно предварительно обрезать с помощью стерильных ножниц.
- Зафиксировать края повязки, не допуская возникновения складок. При необходимости зафиксировать повязку с помощью эластичного бинта, лейкопластыря или эластичной сетки.
- Повязку необходимо менять в зависимости от типа раны и от того, как развивается процесс заживления.

Меры предосторожности и хранения:

- При наличии клинических признаков, указывающих на наличие местной инфекции, настоятельно рекомендуется предварительно провести курс лечения.

- 74
- Не использовать при наличии чувствительности к любому компоненту/материалу повязки.
 - При лечении рваных, глубоких ран или ран со сложным рельефом, нужно накладывать повязку таким образом, чтобы её можно было в любой момент осмотреть, и чтобы к ней в любой момент имелся доступ.
 - Повязки стерилизованы гамма-излучением. Не подлежат повторной стерилизации.
 - Повязки следует хранить в горизонтальном положении в сухом прохладном темном месте при температуре ниже 25°C.
 - Срок хранения: 5 лет.

Генеральный директор
ООО «Медком-МП»



Кирсенко К.В.

Было промуштровано, скановано и
скреплено печатью 3 листа
Ген. директор ООО "Медком-МП"
Киреевко К. В.

