



ООО "Объединение Альфапластик"
Массажеры реабилитационные
из полимерных материалов



КОВРИК РЕЗИНОВЫЙ МАССАЖНЫЙ

тип М

ТУ 9396-042-00149535-2008

ПУ №ФСР 2008/03693 от 09.02.2016 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

НАЗНАЧЕНИЕ

Коврик резиновый массажный тип М предназначен исключительно для медицинской реабилитации инвалидов. Рекомендуется для индивидуального использования в домашних условиях, либо в профильных лечебных и спортивно - оздоровительных учреждениях.

Коврик резиновый массажный тип М может использоваться для:

- массажа различных участков тела;
- лечебной гимнастики;
- профилактики и лечения ряда заболеваний опорно - двигательного аппарата;
- улучшения трофики (питания рубцово - измененных кожных покровов и мышц);
- профилактики плоскостопия.

Размер коврика массажного 265*280 мм.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед применением следует провести дезинфекцию изделия методом погружения на 30 мин. в емкость, содержащую 3% раствор перекиси водорода при температуре не менее 18 °С. Затем изделие ополаскивают проточной водой.

ХРАНЕНИЕ

Коврик массажный следует хранить при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности воздуха не выше 80%, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Изделие не должно подвергаться действию масел, кислот, щелочей, растворителей и других веществ, разрушающих резину.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация коврика массажного после окончания использования должна производиться в соответствии с инструкцией, действующей в лечебном учреждении и разработанной в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 для отходов класса Б после дезинфекции их по МУ 287 - 113. Неиспользованное изделие по окончании срока годности относят к медицинским отходам класса А и утилизируют как бытовые отходы.

Дата изготовления:

Гарантийный срок годности - 3 года.

Штамп ТК:

Номер упаковщика:

Производитель: ООО "Объединение Альфапластик"
Россия, 107150, г. Москва,
4-й проезд Подбельского, д. 3.
302011, г. Орел, Новосильское шоссе, д. 14.
тел.: (4862)59-84-10
сайт: www.alpha-plastic.ru



4 601835 002335



ООО "Объединение Альфапластик"



ISO 9001: 2015

Массажеры реабилитационные
из полимерных материалов

Коврик резиновый для массажа тип М

Количество: **25 шт.**

ТУ 9396-042-00149535 -2008

ПУ № ФСР 2008/ 03693 от 09.02.2016 г.

Дата изготовления:

Гарантийный срок годности -
3 года

Штамп ТК

Номер упаковщика:

Производитель: ООО
«Объединение Альфапластик»,
Россия, 107150, г. Москва,
4-й проезд Подбельского, д. 3
302011, г. Орел,
Новосильское шоссе, д. 14



4 601835 002342

Копия верна
И.О. директора ОЗРЧ
ООО "Объединение Альфапластик"





ООО "Объединение Альфапластик"
Массажеры реабилитационные
из полимерных материалов



КОВРИК РЕЗИНОВЫЙ МАССАЖНЫЙ

тип Т

ТУ 9396-042-00149535-2008
ПУ №ФСР 2008/03693 от 09.02.2016 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

НАЗНАЧЕНИЕ

Коврик резиновый массажный тип Т предназначен исключительно для медицинской реабилитации инвалидов. Рекомендуется для индивидуального использования в домашних условиях, либо в профильных лечебных и спортивно-оздоровительных учреждениях.

Коврик резиновый массажный тип М может использоваться для:

- массажа различных участков тела;
- лечебной гимнастики;
- профилактики и лечения ряда заболеваний опорно-двигательного аппарата;
- улучшения трофики (питания рубцово-измененных кожных покровов и мышц);
- профилактики плоскостопия.

Размер коврика массажного: 265*280 мм.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед применением следует провести дезинфекцию изделия методом погружения на 30 мин. в емкость, содержащую 3% раствор перекиси водорода при температуре не менее 18 °С. Затем изделие ополаскивают проточной водой.

ХРАНЕНИЕ

Коврик массажный следует хранить при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности воздуха не выше 80%, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Изделие не должно подвергаться действию масел, кислот, щелочей, растворителей и других веществ, разрушающих резину.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация коврика массажного после окончания использования должна производиться в соответствии с инструкцией, действующей в лечебном учреждении и разработанной в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 для отходов класса Б после дезинфекции их по МУ 287 - 113. Неиспользованное изделие по окончании срока годности относят к медицинским отходам класса А и утилизируют как бытовые отходы.

Дата изготовления:

Гарантийный срок годности - 3 года.

Штамп ТК:

Номер упаковщика:

Производитель: ООО "Объединение Альфапластик"
Россия, 107150, г. Москва,
4-й проезд Подбельского, д.3.
302011, г. Орел, Новосильское шоссе, д. 14.
тел.: (4862)59-84-10
сайт: www.alphaplastic.ru



4 601835 000676



ООО
"Объединение Альфапластик"



ISO 9001: 2015

Массажеры реабилитационные
из полимерных материалов

Коврик резиновый для массажа тип Т

Количество: **25 шт.**

ТУ 9396-042-00149535 -2008

ПУ №ФСР 2008/03693 от 09.02.2016 г.

Дата изготовления:

Гарантийный срок годности -
3 года

Штамп ТК

Номер упаковщика:

Производитель: ООО
«Объединение Альфапластик»,
Россия, 107150, г. Москва,
4-й проезд Подбельского, д. 3
302011, г. Орел,
Новосильское шоссе, д.14



4 601835 000782



Копия верна
И.О. директора ОЗРЧ
ООО "Объединение Альфапластик"



ООО "Объединение Альфапластик"
Массажеры реабилитационные
из полимерных материалов

ШАРИК МАССАЖНЫЙ

ТУ 9396-042-00149535-2008
ПУ №ФСР 2008/03693 от 09.02.2016 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

НАЗНАЧЕНИЕ

Шарик массажный предназначен исключительно для медицинской реабилитации инвалидов. Рекомендуется для индивидуального использования в домашних условиях, либо в профильных лечебных и спортивно-оздоровительных учреждениях.

Шарик массажный может использоваться для:

- массажа различных участков тела;
- лечебной гимнастики;
- профилактики и лечения ряда заболеваний опорно - двигательного аппарата;
- улучшения трофики (питания рубцовой - измененных кожных покровов и мышц);

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед применением следует провести дезинфекцию изделия методом погружения на 30 мин. в емкость, содержащую 3% раствор перекиси водорода при температуре не менее 18 °С. Затем изделие ополаскивают проточной водой.

ХРАНЕНИЕ

Шарик массажный следует хранить при температуре от 0 до 25 °С. относительной влажности воздуха не выше 80%, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Изделие не должно подвергаться действию масел, кислот, щелочей, растворителей и других веществ, разрушающих резину.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация шарика массажного после окончания использования должна производиться в соответствии с инструкцией, действующей в лечебном учреждении и разработанной в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 для отходов класса Б после дезинфекции их по МУ 287 - 113. Неиспользованное изделие по окончании срока годности относят к медицинским отходам класса А и утилизируют как бытовые отходы.

Дата изготовления:

Гарантийный срок годности - 2 года.

Штамп ТК:

Номер упаковщика:

Производитель: ООО "Объединение Альфапластик"
Россия, 107150, г.Москва,
4-й проезд Подбельского, д.3.
302011, г. Орел, Новосильское шоссе, д. 14.
тел.: (4862)59-84-10
сайт: www.alphaplastic.ru



ООО
"Объединение Альфапластик"



ISO 9001: 2008

Массажеры реабилитационные
из полимерных материалов

Массажные шарики

Количество: **25** шт.

ТУ 9396-042-00149535-2008

ПУ № ФСР 2008/ 03693 от 09.02.2016 г.


Дата изготовления:

Срок годности - 2 года

Штамп ТК

Номер упаковщика

Производитель: ООО
«Объединение Альфапластик»,
Россия, 107150, г. Москва,
4-й проезд Подбельского, д. 3
302011, г. Орел,
Новосильское шоссе, д.14

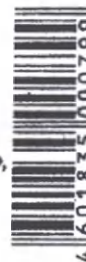

Копия верна
И.О. директора ОЗРЧ
ООО "Объединение Альфапластик"
Н.Н. Спиридонова





ООО "Объединение Альфапластик"
Массажеры реабилитационные
из полимерных материалов



эспандер - тренажер
тип М

ТУ 9396-042-00149535-2008
ПУ №ФСР 2008/03693 от 09.02.2016 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

НАЗНАЧЕНИЕ

Эспандер - тренажер тип М предназначен исключительно для медико-цинской реабилитации инвалидов. Рекомендуется для индивидуального использования в домашних условиях, либо в профильных лечебных и спортивно-оздоровительных учреждениях.

Эспандер - тренажер может использоваться для:

- лечебной гимнастики;
- профилактики и лечения ряда заболеваний опорно-двигательного аппарата;
- улучшения трофики (питания) рубцово-измененных кожных покровов и мышц;

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед применением следует провести дезинфекцию изделия методом погружения на 30 мин. в емкость, содержащую 3% раствор перекиси водорода при температуре не менее 18 °С. Затем изделие ополаскивают проточной водой.

ХРАНЕНИЕ

Эспандер - тренажер следует хранить при температуре от 0 до 25 °С. относительной влажности воздуха не выше 80%, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Изделие не должно подвергаться воздействию масел, кислот, щелочей, растворителей и других веществ, разрушающих резину.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация эспандера - тренажера после окончания использования должна производиться в соответствии с инструкцией, действующей в лечебном учреждении и разработанной в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 для отходов класса Б после дезинфекции их по МУ 287 - 113. Неиспользованное изделие по окончании срока годности относят к медицинским отходам класса А и утилизируют как бытовые отходы.

Дата изготовления:

Гарантийный срок годности - 1,5 года.

Штамп ТК:

Номер упаковщика:

Производитель: ООО "Объединение Альфапластик"
Россия, 107150, г. Москва,
4-й проезд Подбельского, д. 3.
302011, г. Орел, Новосильское шоссе, д. 14.
тел.: (4862) 59-84-10
сайт: www.alphaplasti.ru



4601835 000690



ООО
"Объединение Альфапластик"



ISO 9001: 2015

Массажеры реабилитационные
из полимерных материалов
Эспандеры-тренажеры
тип М

Количество: 50 шт.

ТУ 9396-042-00149535-2008

ПУ № ФСР 2008/ 03693 от 09.02.2016 г.


Дата изготовления:

Срок годности - 1,5 года

Штамп ТК

Номер упаковщика

Производитель: ООО
«Объединение Альфапластик»,
Россия, 107150, г. Москва,
4-й проезд Подбельского, д. 3
302011, г. Орел,
Новосильское шоссе, д. 14

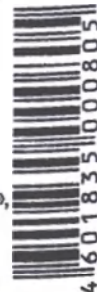

4601835 000805

Копия верна
И.О. директора ОЗРИ
ООО "Объединение Альфапластик"





ООО "Объединение Альфапластик"
Массажеры реабилитационные
из полимерных материалов



эспандер - тренажер

тип Т

ТУ 9396-042-00149535-2008
ПУ №ФСР 2008/03693 от 09.02.2016 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

НАЗНАЧЕНИЕ

Эспандер - тренажер тип Т предназначен исключительно для медико-цинской реабилитации инвалидов. Рекомендуется для индивидуального использования в домашних условиях, либо в профильных лечебных и спортивно-оздоровительных учреждениях.

Эспандер - тренажер может использоваться для:

- лечебной гимнастики;
- профилактики и лечения ряда заболеваний опорно-двигательного аппарата;
- улучшения трофики (питания) рубцовой - измененных кожных покровов и мышц;

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед применением следует провести дезинфекцию изделия методом погружения на 30 мин. в емкость, содержащую 3% раствор перекиси водорода при температуре не менее 18 °С. Затем изделие ополаскивают проточной водой.

ХРАНЕНИЕ

Эспандер - тренажер следует хранить при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности воздуха не выше 80%, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Изделие не должно подвергаться действию масел, кислот, щелочей, растворителей и других веществ, разрушающих резину.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация эспандера - тренажера после окончания использования должна производиться в соответствии с инструкцией, действующей в лечебном учреждении и разработанной в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 для отходов класса Б после дезинфекции их по МУ 287 - 113. Неиспользованное изделие по окончании срока годности относят к медицинским отходам класса А и утилизируют как бытовые отходы.

Дата изготовления:

Гарантийный срок годности - 1,5 года.

Штамп ТК:

Номер упаковщика:

Производитель: ООО "Объединение Альфапластик"
Россия, 107150, г. Москва,
4-й проезд Подбельского, д. 3.
302011, г. Орел, Новосильское шоссе, д. 14.
тел.: (4882)59-84-10
сайт: www.alphaelastic.ru



4601835000706



ООО
"Объединение Альфапластик"



ISO 9001: 2015

Массажеры реабилитационные из полимерных материалов Эспандеры-тренажеры тип Т

Количество: 50 шт.

ТУ 9396-042-00149535-2008

ПУ № ФСР 2008/ 03693 от 09.02.2016 г.

Дата изготовления:


Срок годности - 1,5 года

Штамп ТК

Номер упаковщика

Производитель: ООО

"Объединение Альфапластик",
Россия, 107150, г. Москва,
4-й проезд Подбельского, д. 3
302011, г. Орел,
Новосильское шоссе, д. 14

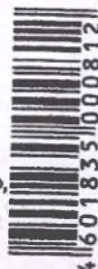

4 601835 000812

Копии верна
И.о. директора ОЗРЧ
ООО "Объединение Альфапластик"

И.Н. Спиридонова

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью

5 (пять)


_____ листов



И.о. Директора ОЗРИ ООО
«Объединение Альфапластик»

Н.Н.Спиридонова

_____ 2020г.

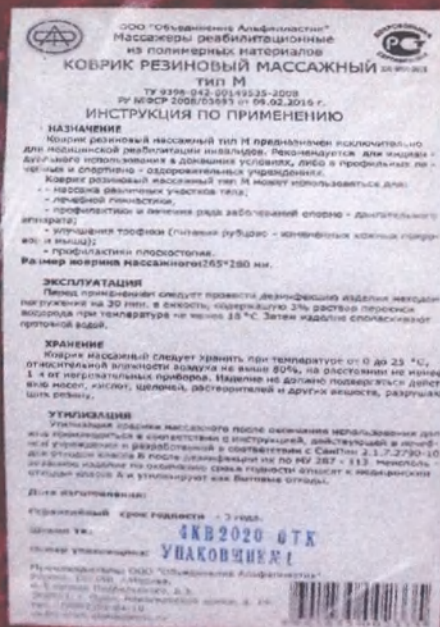

Коврик резиновый массажный тип М
по ТУ 9396-042-00149535-2008

в индивидуальной упаковке

Копия верна

о. директора ВЗРЧ

ОО. Объединение Анонимистов





Коврик резиновый массажный тип М
по ТУ 9396-042-00149535-2008
в индивидуальной упаковке

Копия верна
директора ВЗРЧ

Объединение Альфапластик



Степидонов



Коврик резиновый массажный тип Т
по ТУ 9396-042-00149535-2008
в индивидуальной упаковке

Копия
директора ОЗРи
Объединение Альянспластик





Коврик резиновый массажный тип Т
по ТУ 9396-042-00149535-2008
в индивидуальной упаковке

Копия верна
директора ОЗРЧ
Объединение Альфапластик



Смирнова



ООО "Объединение Альфапластик"
Массажеры реабилитационные
из полимерных материалов



ШАРИК МАССАЖНЫЙ

ТУ 9396-042-00149535-2008
ПУ №ФСР 2008/03693 от 09.02.2016 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

НАЗНАЧЕНИЕ

Шарик массажный предназначен исключительно для медицинской реабилитации инвалидов. Рекомендуется для индивидуального использования в домашних условиях, либо в профильных лечебных и спортивно-оздоровительных учреждениях.

Шарик массажный может использоваться для:

- массажа различных участков тела;
- лечебной гимнастики;
- профилактики и лечения ряда заболеваний опорно - двигательного аппарата;
- улучшения трофики (питания рубцово - измененных кожных покровов и мышц);

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед применением следует провести дезинфекцию изделия методом погружения на 30 мин. в емкость, содержащую 3% раствор перекиси водорода при температуре не менее 18°C. Затем изделие ополаскивают проточной водой.

ХРАНЕНИЕ

Шарик массажный следует хранить при температуре от 0 до 25 °C, относительной влажности воздуха не выше 80%, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Изделие не должно подвергаться действию масел, кислот, щелочей, растворителей и других веществ, разрушающих резину.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация шарика массажного после окончания использования должна производиться в соответствии с инструкцией, действующей в лечебном учреждении и разработанной в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 для отходов класса Б после дезинфекции их по МУ 287 - 113. Неиспользованное изделие по окончании срока годности относят к медицинским отходам класса А и утилизируют как бытовые отходы.

Дата изготовления:

Гарантийный срок годности:

Штук ТК:

Номер упаковщика:

Производитель: ООО "Объединение Альфапластик"
Россия, 107150, г. Москва,
4-й проезд Покровского, д. 3.
тел.: (495) 59-84-10
сайт: www.alpha-plastic.ru



Шарик массажный
по ТУ 9396-042-00149535-2008
в индивидуальной упаковке



Копия верна
И.О. директора ОЗРЧ
ООО "Объединение Альфапластик"



Шарик массажный
по ТУ 9396-042-00149535-2008
в индивидуальной упаковке

Копия верна
И.о. директора ОЗРИ
ООО "Объединение Альфапластик"





ООО "Объединение Альфапластик"
Массажеры реабилитационные
из полимерных материалов



эспандер - тренажер
тип М

ТУ 9396-042-00149535-2008
ПУ №ФСР 2008/03693 от 09.02.2016 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

НАЗНАЧЕНИЕ

Эспандер - тренажер тип М предназначен исключительно для медико-реабилитации инвалидов. Рекомендуется для индивидуального использования в домашних условиях, либо в профильных лечебных и спортивно - оздоровительных учреждениях.

Эспандер - тренажер может использоваться для:

- лечебной гимнастики;
- профилактики и лечения ряда заболеваний опорно - двигательного аппарата;
- улучшения трофики (питания) рубцово - измененных кожных покровов и мышц);

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед применением следует провести дезинфекцию изделия методом погружения на 30 мин. в емкость, содержащую 3% раствор перекиси водорода при температуре не менее 18 °С. Затем изделие ополаскивают проточной водой.

ХРАНЕНИЕ

Эспандер - тренажер следует хранить при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности воздуха не выше 80%, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Изделие не должно подвергаться действию масел, кислот, щелочей, растворителей и других веществ, разрушающих резину.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация эспандера - тренажера после окончания использования должна производиться в соответствии с инструкцией, действующей в лечебном учреждении и разработанной в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 для отходов класса Б после дезинфекции их по МУ 287 - 113. Неиспользованное изделие по окончании срока годности относят к медицинским отходам класса А и утилизируют как бытовые отходы.

Дата изготовления:

Гарантийный срок годности - 1,5 года.

Штамп ТК:

Номер упаковщика:

Производитель: ООО "Объединение Альфапластик"
Россия, 107150, г. Москва,
4-й проезд Подбельского, д.3.
302011, г. Орел, Новосильское шоссе, д. 14.
тел.: (4862)59-84-10
сайт: www.alpha-plastic.ru

4КВ2020 ОТК
УПАКОВЩИК №1



4601835000690

Эспандер-тренажёр тип М
по ТУ 9396-042-00149535-2008

В индивидуальной упаковке

Копия верна
директора ОЗРИ

Объединение Альфапластик






Эспандер-тренажёр тип М
по ТУ 9396-042-00149535-2008
в индивидуальной упаковке

*Копия верна
И.о. директора ЦЗРи
ООО «Объединение Асфальтастик»*



Смирдинова

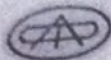

ООО "Объединение Альфапластик"
Массажеры реабилитационные
из полимерных материалов

эспандер - тренажер
тип Т

ТУ 9396-042-00149535-2008
ПУ №ФСР 2008/03693 от 09.02.2016 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

НАЗНАЧЕНИЕ

Эспандер - тренажер тип Т предназначен исключительно для медико-реабилитации инвалидов. Рекомендуется для индивидуального использования в домашних условиях, либо в профильных лечебных и спортивно - оздоровительных учреждениях.

Эспандер - тренажер может использоваться для:

- лечебной гимнастики;
- профилактики и лечения ряда заболеваний опорно - двигательного аппарата;
- улучшения трофики (питания рубцовой - измененных кожных покровов и мышц);

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед применением следует провести дезинфекцию изделия методом погружения на 30 мин. в емкость, содержащую 3% раствор перекиси водорода при температуре не менее 18 °С. Затем изделие ополаскивают проточной водой.

ХРАНЕНИЕ

Эспандер - тренажер следует хранить при температуре от 0 до 25 °С, относительной влажности воздуха не выше 80%, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Изделие не должно подвергаться действию масел, кислот, щелочей, растворителей и других веществ, разрушающих резину.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация эспандера - тренажера после окончания использования должна производиться в соответствии с инструкцией, действующей в лечебном учреждении и разработанной в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 для отходов класса Б после дезинфекции их по МУ 287 - 113. Неиспользованное изделие по окончании срока годности относят к медицинским отходам класса А и утилизируют как бытовые отходы.

Дата изготовления:

Гарантийный срок годности - 1,5 года.

Штамп ТК:

4КВ2020 ОТК
УПАКОВЩИК №1

Номер упаковщика:

Производитель: ООО "Объединение Альфапластик"
Россия, 107150, г.Москва,
4-й проезд Подбельского, д.3,
302011, г.Орел, Новосильское шоссе, д.14.
тел.: (4862)59-84-10
e-mail: www.alpha-plastic.ru



Эспандер-тренажёр тип Т
по ТУ 9396-042-00149535-2008
в индивидуальной упаковке

Копия верна
И.О. директора ОЗРИ

ООО "Объединение Альфапластик"





Эспандер-тренажёр тип Т
по ТУ 9396-042-00149535-2008
в индивидуальной упаковке

Копия верна
0. директора ЦЗРЧ
0. Объединение Аналитических



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью

10 (десять)

____ листов



И.о. Директора ОЗРИ ООО
«Объединение Альфапластик»
Н.И. Спиридонова
2020г.