

ПАСПОРТ и РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Кровать медицинская функциональная в вариантах исполнения по
ТУ 32.50.30-001-07514618-2020:

- 1) Кровать медицинская функциональная, вариант исполнения МСК-124 по ТУ 32.50.30-001-07514618-2020.
 2) Кровать медицинская функциональная, вариант исполнения МСК-132 по ТУ 32.50.30-001-07514618-2020
 (КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МСК-124, КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ С ПОДГОЛОВНИКОМ МСК-132)

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1 Кровать медицинская функциональная в вариантах исполнения (далее по тексту – кровать) предназначенная для кратковременного или длительного размещения пациентов и создания максимального комфорта.
 1.2 Кровать изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.
 1.3 Показания к применению: размещение пациентов при прохождении лечения и обследований в медицинских организациях
 1.4 Противопоказания: не выявлены в рамках установленного производителем назначения.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные параметры и размеры.

2.1.1 Основные параметры и размеры кровати указаны в таблице 1.

Таблица 1.

Параметры	МСК-124	МСК-132
1. Габаритные размеры, мм., ±5мм		
Длина	1986	1986
Ширина	840	840
Высота	760	760
2. Длина ложа, мм, ±5мм	1900	1900
3. Ширина ложа, мм, ±5мм	800	800
4. Угол наклона подголовника, град	-	0 - 45
5. Масса, кг, не более	31,5	31,5

2.2 Характеристики:

- 2.2.1 Кровати изготовлены по единой технологии в виде сборно-разборной конструкции с использованием металлического профиля круглого и П-образного профиля, листового металла и металлической сетки.
 2.2.2 Кровать выдерживает статическую равномерно распределенную по ложу нагрузку не более 130 кг.
 2.2.3 Металлические детали имеют защитно-декоративное покрытие краской порошковой эпоксидно-полиэфирной по ТУ 2329-001-66151901-2011, нетоксичной пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.
 2.2.4 Покрытие металлических деталей соответствует требованиям ГОСТ 9.303-84 для группы условий эксплуатации 1.
 2.2.5 Покрытие металлических деталей выполнено по ГОСТ 9.032-74 для группы условий эксплуатации III климатического исполнения УХЛ 4.2, наружные поверхности выполнены не ниже IV класса.
 2.2.6 Кровать при эксплуатации устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444-92 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.
 2.2.7 Кровать при транспортировании и хранении устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-69 для группы 5 транспортирования и группы 5 хранения.
 2.2.8 Поверхности кровати устойчивы к обработке с дезинфицирующими средствами, разрешенными для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и МУ-287-113.
 2.2.9 Средний срок службы кровати до списания не менее 6 лет.
 За критерий предельного состояния кровати принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки кровати соответствует указанному в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование	МСК-124 МСК-132
	Кол-во, шт.
Ложе	1
Спинка	2
Болт М6х16	12
Гайка М6	12
Шайба пружинная	12
Паспорт	1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1 Кровать представляет собой сборно-разборную конструкцию.
- 4.2 Ложе кровати изготовлено из стального П-образного профиля и металлической сетки толщиной 4 мм с размером ячейки 50х50мм.
- 4.3 Спинки изготовлены из стального профиля круглого сечения.
- 4.4 Угол наклона подголовника регулируется при помощи зубчатой рейки.

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1 К сборке и эксплуатации кровати допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

6. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

- 6.1 После транспортирования кровати в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать ее в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.
- 6.2 Распаковать кровать и проверить целостность покрытия.
- 6.3 Проверить комплектность.
- 6.4 Осуществить сборку согласно инструкции.

7. ПОРЯДОК СБОРКИ

- 7.1 Перед сборкой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 6 настоящего паспорта.
- 7.2 Прикрепите ложе к спинкам болтами М6х16.
- 7.3 Перед началом эксплуатации проверьте надежность крепления всех узлов. Установите кровать на место.

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 8.1 Регулировка положений углов наклона подголовника.
Регулировка угла наклона подголовника проводится вручную. Для этого упор совместить с пазом на гребенках с дальнейшей фиксацией упора в пазах гребенок.
Для возврата подголовника приподнять подголовник, чтоб упор вышел из паза гребенок.
Приподнять упор и отпустить подголовник в исходное положение.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 9.1 Кровать имеет простую надежную конструкцию и не требует специального обслуживания.
- 9.2 Периодический осмотр включает в себя проверку надежности крепления резьбовых соединений.
- 9.3 В случае обнаружения ослабленных соединений необходимо затянуть болты шестигранным ключ

10. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 10.1 Кровать в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется простыми транспортными средствами при температуре от - 50°C до + 50°C и относительной влажности 100% при температуре + 25°C.
- 10.2 Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных средств, воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 11.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кровати требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.
- 11.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.
- 11.3 В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

12. УТИЛИЗАЦИЯ

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кровать медицинская (МСК-124/МСК-132)

Дата выпуска

М.П.

Соответствует ТУ 32.50.30-001-07514618-2020 и признана годной к эксплуатации.

Подпись лиц ответственных за приемку.

14. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

срока
Изделие

на ремонт (замену) в течение гарантийного

наименование и тип изделия

номер ГОСТ или ТУ

Дата
выпуска

Приобретено

дата, подпись, штамп торгующей организации

15. ПРЕТЕНЗИИ

Контактная информация производителя для рассмотрения рекламаций, а также для обращения потребителей: АО «БАЗ», 368222, РД, г. Буйнакск, ул. Закарьяева 1. Тел. 8 (499)-705-85-59, email: oao.baz@mail.ru

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

3 (Три) листов
цифрами прописью
Должность _____
Подпись [подпись]
« 07 » 09 20 20 г. М. П.

