

Директор

«08» июля 2020 г.



«Профессиональная одежда»

П. М. Кузьмин

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Комплект одежды медицинской многоразового использования
под товарным знаком Kuzmin
по ТУ 14.12.30-002-38480115-2019**

2019

1. Назначение и область применения

Комплект одежды медицинской многоразового использования под товарным знаком Kuzmin (далее по тексту – Комплекты, изделия), предназначенный для защиты больных и медицинского персонала от возбудителей инфекционных заболеваний при оказании лечебно-профилактической помощи медицинским персоналом пациентам в медицинских учреждениях.

Потенциальные потребители: работники учреждений, связанные с медобслуживанием населения, ношение изделий обязательно в: поликлиниках, частных клиниках, стоматологиях, лабораториях, специализированных больницах, учебных медицинских заведениях.

2. Противопоказания к применению и побочные действия

Показания к применению: используются для защиты больных и медицинского персонала от возбудителей инфекционных заболеваний при оказании лечебно-профилактической помощи медицинским персоналом пациентам в медицинских учреждениях.

Противопоказания к применению: аллергическая реакция на хлопок.

Побочные действия: не выявлено

Не допускается:

- подвергать изделия процедуре стерилизации перед применением;
- применять изделия в ходе хирургических и других инвазивных процедурах.

3. Описание медицинского изделия

Комплекты выпускаются в следующих вариантах исполнения:

Варианты исполнения:

1. Комплект одежды медицинской многоразового использования № 1 в составе:

1.1 Куртка медицинская многоразового использования мужская – 1 шт., вариант исполнения:

1) 102-05 (размеры: 84,88,92,96,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140).

1.2 Брюки медицинские многоразового использования мужские – 1 шт., вариант исполнения:

1) 103-03 (размеры: 84,88,92,96,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140).

2. Комплект одежды медицинской многоразового использования № 2 в составе:

2.1 Куртка медицинская многоразового использования мужская – 1 шт., вариант исполнения:

1) 102-16 (размеры: 84,88,92,96,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140).

2.2 Брюки медицинские многоразового использования мужские – 1 шт., вариант исполнения:

1) 103-07 (размеры: 84,88,92,96,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140).

2.3 Колпак медицинский многоразового использования мужской – 1 шт., вариант исполнения:

1) 304-16 (размеры: 56, 58, 60).

3. Комплект одежды медицинской многоразового использования № 3 в составе:

3.1 Куртка медицинская многоразового использования мужская – 1 шт., вариант исполнения:

1) 102-19 (размеры: 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140).

3.2 Брюки медицинские многоразового использования мужские – 1 шт., вариант исполнения:

1) 103-06 (размеры: 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140).

4. Комплект одежды медицинской многоразового использования № 4 в составе:

4.1 Куртка медицинская многоразового использования мужская – 1 шт., вариант исполнения:

1) 102-20 (размеры: 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140).

4.2 Брюки медицинские многоразового использования мужские – 1 шт., вариант исполнения:

1) 103-09 (размеры: 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140).

5. Комплект одежды медицинской многоразового использования № 5 в составе:

5.1 Куртка медицинская многоразового использования мужская – 1 шт., вариант исполнения:

1) 102-22 (размеры: 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140).

5.2 Брюки медицинские многоразового использования мужские – 1 шт., вариант исполнения:

1) 103-07 (размеры: 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140).

5.3 Колпак медицинский многоразового использования мужской – 1 шт., вариант исполнения:

1) 304-16 (размеры: 56, 58, 60).

6. Комплект одежды медицинской многоразового использования № 6 в составе:

6.1 Куртка медицинская многоразового использования мужская – 1 шт., вариант исполнения:

1) 102-24 (размеры: 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140).

6.2 Брюки медицинские многоразового использования мужские – 1 шт., вариант исполнения:

1) 103-07 (размеры: 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140).

7. Комплект одежды медицинской многоразового использования № 7 в составе:

7.1 Куртка медицинская многоразового использования мужская – 1 шт., вариант исполнения:

1) 102-28 (размеры: 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140).

7.2 Брюки медицинские многоразового использования мужские – 1 шт., вариант исполнения:

1) 103-07 (размеры: 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140).

8. Комплект одежды медицинской многоразового использования № 8 в составе:

8.1 Куртка медицинская многоразового использования мужская – 1 шт., вариант исполнения:

1) 102-29 (размеры: 84,88,92,96,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140).

8.2 Брюки медицинские многоразового использования мужские – 1 шт., вариант исполнения:

1) 103-10 (размеры:84,88,92,96,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140).

9. Комплект одежды медицинской многоразового использования № 9 в составе:

8.1 Куртка медицинская многоразового использования мужская – 1 шт., вариант исполнения:

1) 102-30 (размеры: 84,88,92,96,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140).

8.2 Брюки медицинские многоразового использования мужские – 1 шт., вариант исполнения:

1) 103-07 (размеры:84,88,92,96,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140).

8.3 Колпак медицинский многоразового использования мужской – 1 шт., вариант исполнения:

1) 304-16 (размеры:56,58,60).

10. Комплект одежды медицинской многоразового использования № 10 в составе:

5.1 Куртка медицинская многоразового использования мужская – 1 шт., вариант исполнения:

1) 102-34 (размеры: 84,88,92,96,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140).

5.2 Брюки медицинские многоразового использования мужские – 1 шт., вариант исполнения:

1) 103-13 (размеры:84,88,92,96,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140).

11. Комплект одежды медицинской многоразового использования № 11 в составе:

11.1 Куртка медицинская многоразового использования мужская – 1 шт., вариант исполнения:

1) 102-502 (размеры: 84,88,92,96,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140).

11.2 Брюки медицинские многоразового использования мужские – 1 шт., вариант исполнения:

1) 103-07 (размеры:84,88,92,96,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140).

11.3 Колпак медицинский многоразового использования мужской – 1 шт., вариант исполнения:

1) 304-502 (размеры:56,58,60).

11.4 Фартук медицинский многоразового использования мужской -1 шт., вариант исполнения:

1) 307-02 (размеры 84,88,92,96,100,104,108,112,116,118)

12. Комплект одежды медицинской многоразового использования №12 в составе:

12.1 Куртка медицинская многоразового использования мужская – 1 шт., вариант исполнения:

1) 102-505 (размеры: 84,88,92,96,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140).

12.2 Брюки медицинские многоразового использования мужские – 1 шт., вариант исполнения:

1) 103-07 (размеры:84,88,92,96,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140).

12.3 Колпак медицинский многоразового использования мужской – 1 шт., вариант исполнения:

1) 304-502 (размеры: 56, 58, 60).

12.4 Фартук медицинский многоразового использования мужской - 1 шт., вариант исполнения:

1) 307-04 (размеры 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 118)

13. Комплект одежды медицинской многоразового использования № 13 в составе:

13.1 Куртка медицинская многоразового использования мужская – 1 шт., вариант исполнения:

1) 102-508 (размеры: 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140).

13.2 Брюки медицинские многоразового использования мужские – 1 шт., вариант исполнения:

1) 103-07 (размеры: 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140).

13.3 Колпак медицинский многоразового использования мужской – 1 шт., вариант исполнения:

1) 304-502 (размеры: 56, 58, 60).

14. Комплект одежды медицинской многоразового использования № 14 в составе:

14.1 Блуза медицинская многоразового использования женская – 1 шт., вариант исполнения:

1) 202-06 (размеры: 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132).

14.2 Брюки медицинские многоразового использования женские – 1 шт., вариант исполнения:

1) 203-19 (размеры: 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132).

15. Комплект одежды медицинской многоразового использования № 15 в составе:

15.1 Блуза медицинская многоразового использования женская – 1 шт., вариант исполнения:

1) 202-07 (размеры: 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132).

15.2 Брюки медицинские многоразового использования женские – 1 шт., вариант исполнения:

1) 203-19 (размеры: 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132).

15.3 Колпак медицинский многоразового использования женский – 1 шт., вариант исполнения:

1) 304-16 (размеры: 56, 58, 60).

16. Комплект одежды медицинской многоразового использования № 16 в составе:

16.1 Блуза медицинская многоразового использования женская – 1 шт., вариант исполнения:

1) 202-14 (размеры: 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132).

16.2 Брюки медицинские многоразового использования женские – 1 шт., вариант исполнения:

1) 203-20 (размеры: 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132).

16.3 Пилотка медицинская многоразового использования женская – 1 шт., вариант исполнения:

1) 204-13 (размеры: 56, 58, 60).

16.4 Фартук медицинский многоразового использования женский - 1 шт., вариант исполнения:

1) 307-02 (размеры 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 118)

17. Комплект одежды медицинской многоразового использования № 17 в составе:

17.1 Блуза медицинская многоразового использования женская – 1 шт., вариант исполнения:

1) 202-21 (размеры: 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124).

17.2 Брюки медицинские многоразового использования женские – 1 шт., вариант исполнения:

1) 203-19 (размеры: 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132).

18. Комплект одежды медицинской многоразового использования № 18 в составе:

18.1 Блуза медицинская многоразового использования женская – 1 шт., вариант исполнения:

1) 202-28 (размеры: 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124).

18.2 Брюки медицинские многоразового использования женские – 1 шт., вариант исполнения:

1) 203-19 (размеры: 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132).

19. Комплект одежды медицинской многоразового использования № 19 в составе:

19.1 Блуза медицинская многоразового использования женская – 1 шт., вариант исполнения:

1) 202-31 (размеры: 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124).

19.2 Брюки медицинские многоразового использования женские – 1 шт., вариант исполнения:

1) 203-19 (размеры: 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132).

19.3 Косынка медицинская многоразового использования женская – 1 шт., вариант исполнения:

1) К-01 (размеры: 56, 58, 60).

20. Комплект одежды медицинской многоразового использования № 20 в составе:

20.1 Блуза медицинская многоразового использования женская – 1 шт., вариант исполнения:

1) 202-36 (размеры: 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132).

20.2 Брюки медицинские многоразового использования женские – 1 шт., вариант исполнения:

1) 203-14 (размеры: 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132).

21. Комплект одежды медицинской многоразового использования № 21 в составе:

21.1 Блуза медицинская многоразового использования женская – 1 шт., вариант исполнения:

1) 202-40 (размеры: 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132).

21.2 Брюки медицинские многоразового использования женские – 1 шт., вариант исполнения:

1) 203-19 (размеры: 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132).

21.3 Колпак медицинский многоразового использования женский – 1 шт., вариант исполнения:

1) 304-502 (размеры: 56, 58, 60).

21.4 Фартук медицинский многоразового использования женский – 1 шт., вариант исполнения:

1) 307-04 (размеры 84,88,92,96,100,104,108,112,116,118)

22. Комплект одежды медицинской многоразового использования № 22 в составе:

22.1 Блуза медицинская многоразового использования женская – 1 шт., вариант исполнения:

1) 202-42 (размеры: 76,80,84,88,92,96,100,104,108,112,116,120,124,128,132).

22.2 Брюки медицинские многоразового использования женские – 1 шт., вариант исполнения:

1) 203-20 (размеры: 76,80,84,88,92,96,100,104,108,112,116,120,124,128,132).

22.3 Колпак медицинский многоразового использования женский – 1 шт., вариант исполнения:

1) 304-16 (размеры: 56,58,60).

23. Комплект одежды медицинской многоразового использования № 23 в составе:

23.1 Блуза медицинская многоразового использования женская – 1 шт., вариант исполнения:

1) 202-45 (размеры: 76,80,84,88,92,96,100,104,108,112,116,120,124).

23.2 Брюки медицинские многоразового использования женские – 1 шт., вариант исполнения:

1) 203-19 (размеры: 76,80,84,88,92,96,100,104,108,112,116,120,124,128,132).

24. Комплект одежды медицинской многоразового использования № 24 в составе:

24.1 Блуза медицинская многоразового использования женская – 1 шт., вариант исполнения:

1) 202-47 (размеры: 76,80,84,88,92,96,100,104,108,112,116,120,124).

24.2 Брюки медицинские многоразового использования женские – 1 шт., вариант исполнения:

1) 203-19 (размеры: 76,80,84,88,92,96,100,104,108,112,116,120,124,128,132).

25. Комплект одежды медицинской многоразового использования № 25 в составе:

25.1 Блуза медицинская многоразового использования женская – 1 шт., вариант исполнения:

1) 202-48 (размеры: 76,80,84,88,92,96,100,104,108,112,116,120).

25.2 Брюки медицинские многоразового использования женские – 1 шт., вариант исполнения:

1) 203-20 (размеры: 76,80,84,88,92,96,100,104,108,112,116,120).

26. Комплект одежды медицинской многоразового использования № 26 в составе:

26.1 Блуза медицинская многоразового использования женская – 1 шт., вариант исполнения:

1) 202-50 (размеры: 76,80,84,88,92,96,100,104,108,112,116,120).

26.2 Брюки медицинские многоразового использования женские – 1 шт., вариант исполнения:

1) 203-18 (размеры: 76,80,84,88,92,96,100,104,108,112,116,120).

27. Комплект одежды медицинской многоразового использования № 27 в составе:

27.1 Блуза медицинская многоразового использования женская – 1 шт., вариант исполнения:

1) 202-51 (размеры: 76,80,84,88,92,96,100,104,108,112,116,120).

27.2 Брюки медицинские многоразового использования женские – 1 шт., вариант исполнения:

1) 203-20 (размеры: 76,80,84,88,92,96,100,104,108,112,116,120).

28. Комплект одежды медицинской многоразового использования № 28 в составе:

28.1 Блуза медицинская многоразового использования женская – 1 шт., вариант исполнения:

1) 202-52 (размеры: 76,80,84,88,92,96,100,104,108,112,116,120).

28.2 Брюки медицинские многоразового использования женские – 1 шт., вариант исполнения:

1) 203-19 (размеры: 76,80,84,88,92,96,100,104,108,112,116,120).

29. Комплект одежды медицинской многоразового использования № 29 в составе:

29.1 Блуза медицинская многоразового использования женская – 1 шт., вариант исполнения:

1) 202-55 (размеры: 76,80,84,88,92,96,100,104,108,112,116,120).

29.2 Брюки медицинские многоразового использования женские – 1 шт., вариант исполнения:

1) 203-19 (размеры: 76,80,84,88,92,96,100,104,108,112,116,120).

30. Комплект одежды медицинской многоразового использования № 30 в составе:

30.1 Блуза медицинская многоразового использования женская – 1 шт., вариант исполнения:

1) 202-63 (размеры: 76,80,84,88,92,96,100,104,108).

30.2 Брюки медицинские многоразового использования женские – 1 шт., вариант исполнения:

1) 203-26 (размеры: 76,80,84,88,92,96,100,104,108).

31. Комплект одежды медицинской многоразового использования № 31 в составе:

31.1 Блуза медицинская многоразового использования женская – 1 шт., вариант исполнения:

1) 202-64 (размеры: 76,80,84,88,92,96,100,104,108,112).

31.2 Брюки медицинские многоразового использования женские – 1 шт., вариант исполнения:

1) 203-24 (размеры: 76,80,84,88,92,96,100,104,108).

32. Комплект одежды медицинской многоразового использования № 32 в составе:

32.1 Блуза медицинская многоразового использования женская – 1 шт., вариант исполнения:

1) 202-57 (размеры: 76,80,84,88,92,96,100,104,108,112,116,120).

32.2 Брюки медицинские многоразового использования женские – 1 шт., вариант исполнения:

1) 203-22 (размеры: 76,80,84,88,92,96,100,104,108,112,116,120).

33. Комплект одежды медицинской многоразового использования № 33 в составе:

33.1 Блуза медицинская многоразового использования женская – 1 шт., вариант исполнения:

1) 202-65 (размеры: 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112).

33.2 Брюки медицинские многоразового использования женские – 1 шт., вариант исполнения:

1) 203-23 (размеры: 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112).

34. Комплект одежды медицинской многоразового использования № 34 в составе:

34.1 Блуза медицинская многоразового использования женская – 1 шт., вариант исполнения:

1) 202-66 (размеры: 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108).

34.2 Брюки медицинские многоразового использования женские – 1 шт., вариант исполнения:

1) 203-23 (размеры: 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112).

При изготовлении используются материалы в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Наименование материала	Нормативный документ	Изготовитель
Ткань марки "Тиси", состав: 35% хлопок, 65% полиэфир. Плотность 120 г/м2.	-	«GUANGZHOU JANKIST INTERNATIONAL TRADING DEVELOPMENT CO., LTD.», Китай
Ткань марки "Сатори", состав: 50% хлопок, 50% полиэфир. Плотность 150 г/м2.	СТО 22071849-020-2015	ООО «АдвентумТехнолоджис», Россия
Ткань марки "Саторилайт", состав: 50% хлопок, 50% полиэфир. Плотность 115 г/м2.	СТО 22071849-019-2015	ООО «АдвентумТехнолоджис», Россия
Ткань марки "Сатори", состав: 55% хлопок, 42% полиэфир, 3% эластан. Плотность 150 г/м2.	СТО 22071849-020-2015	ООО «АдвентумТехнолоджис», Россия
Ткань марки "АУМАН", состав: 35% хлопок, 65% полиэфир. Плотность 106 г/м2.	-	«PENFABRIK SDN.BERHAD», Малайзия
Белый краситель марки КД-2С	ТУ 2463-161-05800142-2003	ПАО «Пигмент»
Красный краситель марки 2С	ГОСТ 14091-78	ПАО «Пигмент»
Бордовый краситель марки СВ С	ГОСТ 22363-77	ПАО «Пигмент»
Синий краситель марки 2К	ГОСТ 13559-77	ПАО «Пигмент»
Черный краситель марки 2С	ГОСТ 21810-76	ПАО «Пигмент»
Бирюзовый краситель марки К	ГОСТ 22698-77	ПАО «Пигмент»
Серый краситель марки СВ	ГОСТ 22364-77	ПАО «Пигмент»
Зеленый краситель марки ЖД	ГОСТ 16220-79	ПАО «Пигмент»
Пуговица из аминопласта d17, белая или бесцветная	ОСТ 17-699	ООО «Мир Пуговиц»
Кнопка сорочечная, латунь d10	-	«Prym Fashion Zhongshan Co. Ltd.», Китай

Общий вид изделий представлен на рисунках 1-11.



Рисунок 1. Блуза медицинская женская. Тип А

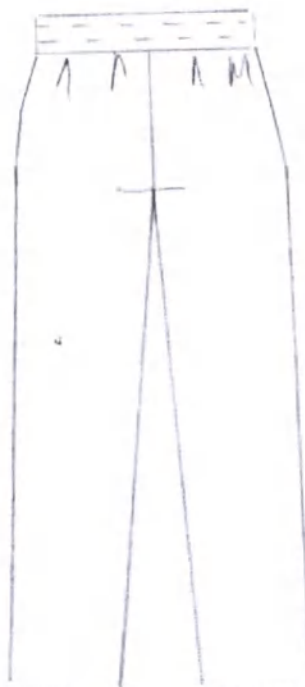
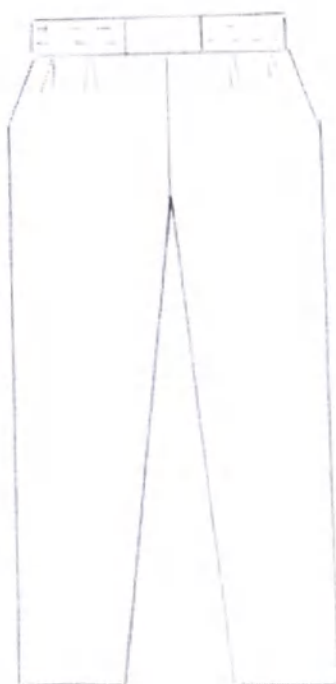


Рисунок 2. Брюки медицинские женские. Тип А

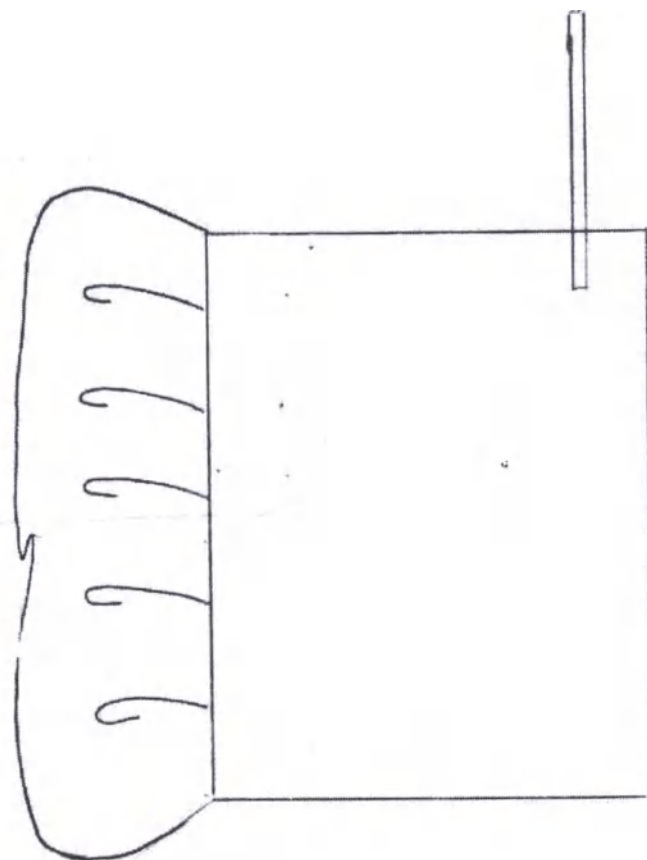


Рисунок 3. Колпак медицинский женский. Тип А

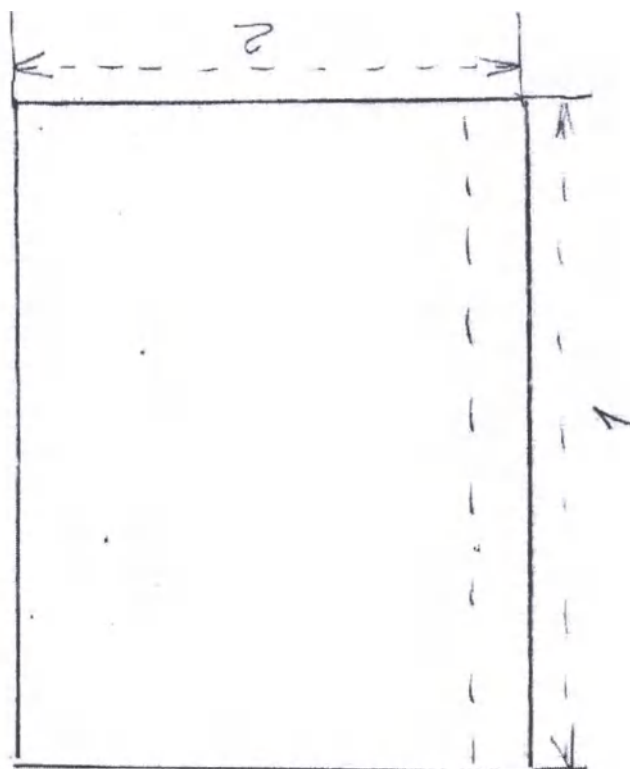


Рисунок 4. Пилотка медицинская женская. Тип А



Рисунок 5. Косынка медицинская женская. Тип А

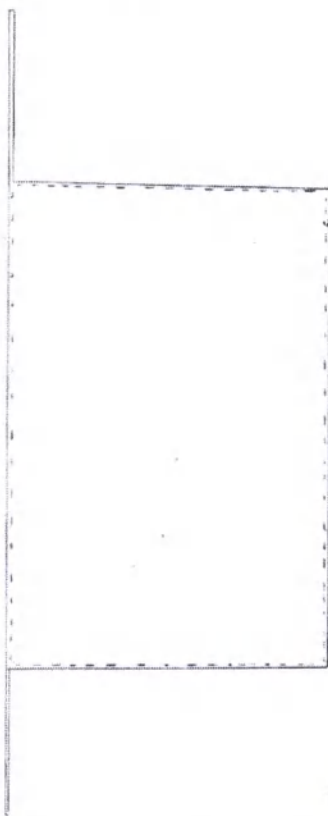


Рисунок 6. Фартук медицинский женский. Тип А

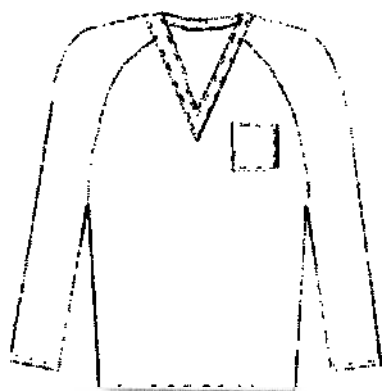


Рисунок 7. Куртка медицинская мужская. Тип А

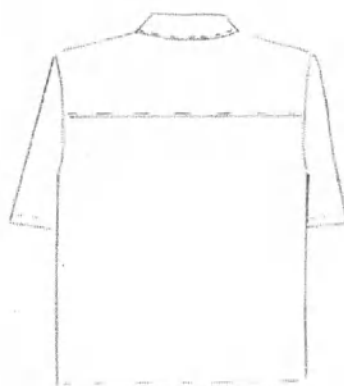


Рисунок 8. Куртка медицинская мужская. Тип В

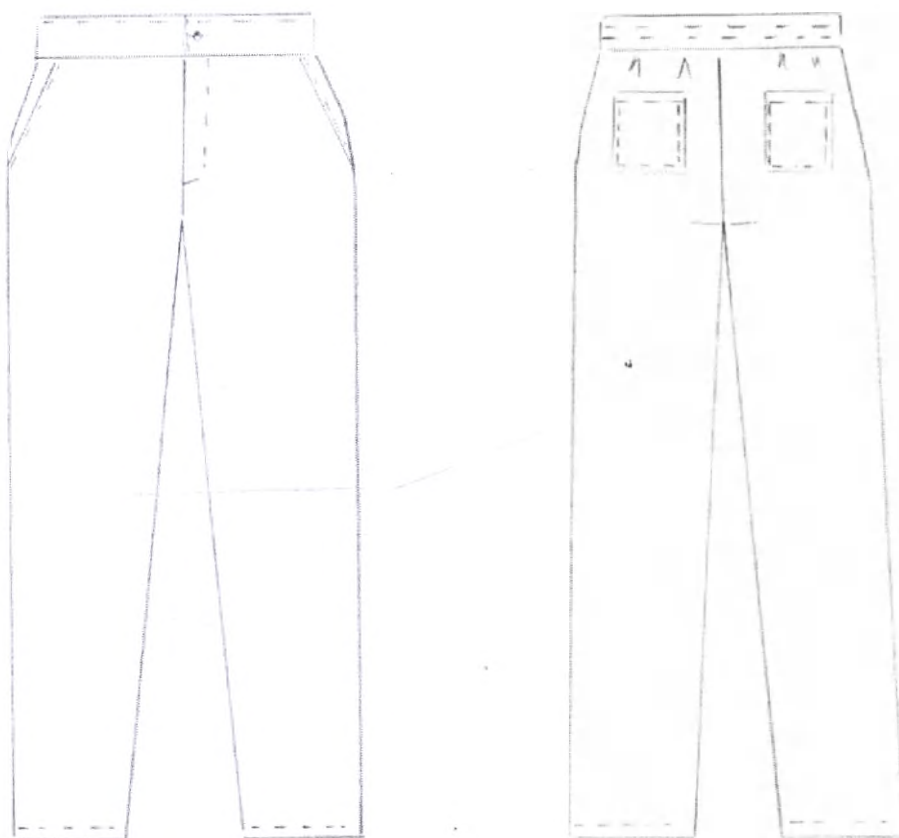


Рисунок 9. Брюки медицинские мужские. Тип А

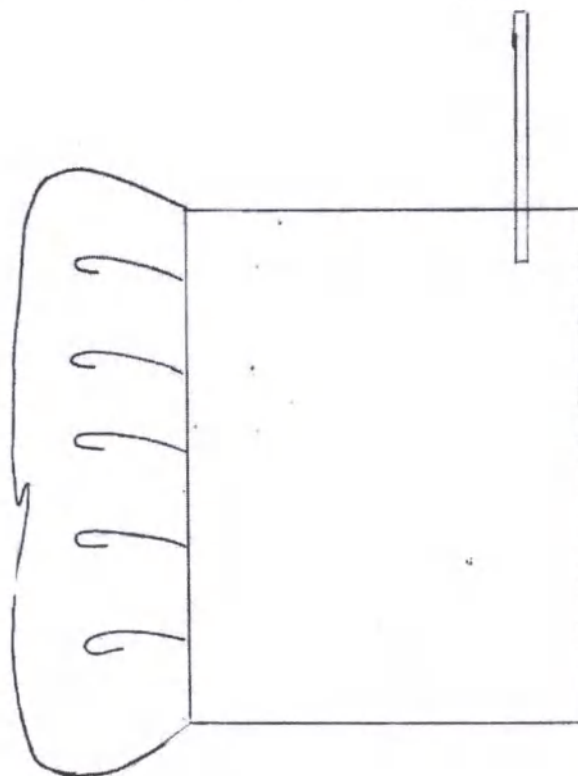


Рисунок 10. Колпак медицинский мужской. Тип А

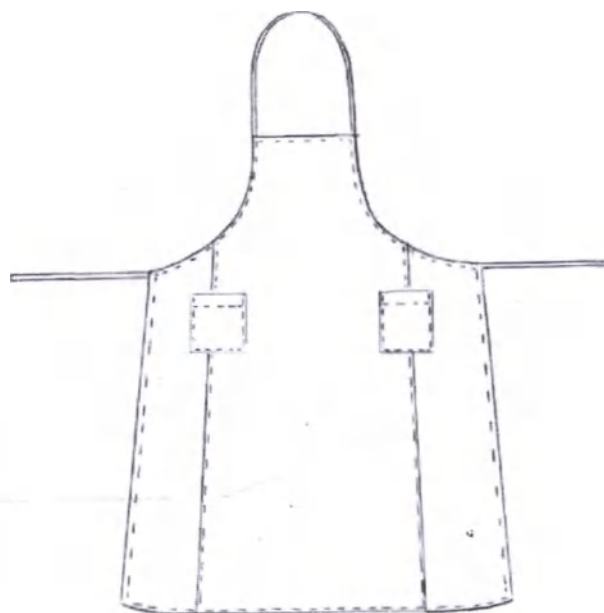


Рисунок 11. Фартук медицинский мужской. Тип А

Линейная плотность материала, используемого при изготовлении изделий, должна быть в пределах 106 г/м — 150г/м.

Изменение размеров после мокрой обработки, %, не более: по основе: -3,0, по утку: $\pm 2,0$.

Комплекты поставляются нестерильными. Изделие многоразового применения.

3.1. Основные линейные размеры блузы и брюк женских должны соответствовать значениям таблицы 2.

Таблица 2

Наименование измерения	Рост типовой фигуры, см	Обхват груди типовой фигуры, см						Допускаем ое отклонени е, см
		I подгруппа			II подгруппа			
		88, 92	96, 100	104, 108	112, 116	124, 130	128, 132	
БЛУЗА								
Длина спинки	146, 152	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	±1,0
	158, 164	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	
	170, 176	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	
Ширина спинки	-	40,6	42,6	44,6	46,6	48,6	50,6	±1,0
Длина переда:								
Тип А	146, 152	68,6	70,0	71,4	71,6	73,2	74,8	±1,0
	158, 164	72,6	74,0	75,4	75,6	77,2	78,8	
	170, 176	76,6	78,0	79,4	79,6	81,2	82,8	
Тип Б	146, 152	69,9	71,3	72,7	72,9	74,5	76,1	

	158, 164	73,9	75,3	76,7	76,9	78,5	80,1	
	170, 176	77,9	79,3	80,7	80,9	82,5	84,1	
Ширина изделия на уровне глубины проймы								
Тип А	-	54,0	58,0	62,0	66,0	70,0	74,0	± 1,0
Тип Б	-	57,0	61,0	65,0	69,0	73,0	77,0	
Ширина изделия внизу								
Тип А	-	54,0	58,0	62,0	66,8	71,4	76,0	± 1,0
Тип Б	-	57,0	61,0	65,0	69,8	74,4	79,0	
Длина рукава	146, 152	68,0	68,0	68,0	69,5	69,5	69,5	± 1,0
	158, 164	72,0	72,0	72,0	73,5	73,5	73,5	
	170, 176	76,0	76,0	76,0	77,5	77,5	77,5	
Ширина рукава сверху								
Тип А	-	23,1	24,5	25,9	27,0	28,1	29,2	± 0,5
Тип Б	-	20,6	22,0	23,4	24,5	25,6	26,7	
Ширина рукава внизу	-	13,4	14,0	14,6	15,2	15,8	16,4	± 0,5
Длина воротника:								
Тип Б	-	44,4	46,0	47,6	49,2	50,8	52,4	±1,0
БРЮКИ								
Длина по боковому шву	146, 152	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	±1,0
	158, 164	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	
	170, 176	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	
Длина по шаговому шву	146, 152	67,5	66,8	66,1	66,1	65,4	64,7	±1,0
	158, 164	74,3	73,6	72,9	72,9	72,2	71,5	
	170, 176	81,1	80,4	79,7	79,7	79,0	78,3	
Ширина на уровне среднего шва	-	34,3	36,9	39,5	42,8	45,4	48,0	±1,0
Ширина брюк в талии (при растянутой эластичной ленте)	-	52,0	56,0	60,0	66,0	70,0	74,0	±1,0
Ширина внизу	-	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	± 0,5

Измеряемые параметры обозначены на чертежах в п.3.8.

Блуза женская должна быть полуприлегающего/прямого силуэта с центральной бортовой застежкой/асимметричной застежкой/асимметричной потайной застежкой на 5-6 кнопок/пуговиц/молнии или с центральной притачной планкой на 6-7 кнопок, либо без них. Воротником/воротником стойкой/воротником отложным с острыми концами на стойке/V-образным вырезом/фигурным вырезом или без него. Полочки с рельефными швами, горизонтальными кокетками, с одним или двумя нагрудным карманом и двумя нижними кармана с отделочной полосой или без нее. Спинка с рельефными швами, по центральной части вшит хлястик, варианты: с кокеткой, с различными складками на спине или без нее, со шлицей или разрезами в среднем шве спинки, боковых швах и рельефах.

Рукава втачные одношовные, могут быть выполнены разной длины, с манжетами прямой и фигурной формы и отделочной полосой. Все отделочные строчки по рельефным швам, швам соединения кокеток, хлястика, по краю борта обрабатываются на 0,1-0,5 см. Низ изделия и рукава обрабатываются швом вподгибку с закрытым срезом, шириной 2,0 см в готовом виде.

Брюки женские прямого силуэта/зауженные к низу, цельнокроенный/притачной пояс со шнуром и эластичной тесьмой. Брюки имеют боковые прорезные карманы и два задних накладных кармана. Линия талии может фиксироваться эластичной лентой. По правому боковому шву может быть накладной карман "портфель" с клапаном. По низу брюк могут быть расположены полосы из светоотражающей ленты. Низ изделия обрабатывается швом вподгибку с закрытым срезом, шириной 2,0 см в готовом виде.

Символы по уходу вкладывается в шов втачивания воротника, посередине спинки женской блузы, мужской куртки, а также, в боковой шов женских и мужских брюк. На фартук вшивается этикетка в боковой шов. На колпаки и пилотки вшивается бирка с символами в задний шов с внутренней стороны.

Сигнальные элементы настрачиваются на женских блузах, мужских куртках на груди, спине, на линии талии, на средней и нижней части рукавов. На женских и мужских брюках сигнальные элементы настрачиваются по низу брюк по 1 или 2 полосам.

3.2 Основные линейные размеры колпака женского должны соответствовать значениям таблицы 3.

Таблица 3

Наименование измерения	Размер			Допускаемое отклонение, см
	56	58	60	
	54,5-56,4	56,5-58,4	58,5-60,4	
КОЛПАК И ПИЛОТКА				

Тип А				
Длина околыша, сложенного вдвое	28,5	29,5	30,5	±0,5
Ширина околыша	14,0	14,0	14,0	±0,5
Высота донышка	21,0	21,0	21,0	±0,5
Тип Б				
Длина пилотки	28,5	29,5	30,5	±0,5
Высота пилотки	20,5	20,5	20,5	±0,5

Измеряемые параметры обозначены на чертежах в п.3.8.

Колпак женский с двойным околышем и донышком, по шву притачивания донышка складки, с завязками из хлопчатобумажной ткани. Завязки пришивают на околыше головного убора длиной не менее 15,0 см на расстоянии не менее 6,0 см от низа. Низ изделия обрабатывается швом вподгибку с закрытым срезом, шириной 2,0 см в готовом виде.

Пилотка женская. Низ изделия обрабатывается швом вподгибку с закрытым срезом, шириной 2,0 см в готовом виде.

3.3 Готовый фартук женский должны быть длиной 60-80 см, шириной 60-115 см.

Фартук женский должен быть прямоугольной формы с завязками по линии талии. Завязки пришивают по линии талии фартука длиной не менее 60,0 см с каждой стороны. Низ изделия обрабатывается швом вподгибку с закрытым срезом, шириной 1,5 см в готовом виде.

3.4 Косынка женская должна быть длиной посередине 110-120 см, шириной посередине 30-35 см.

Косынка женская должна быть удлиненной эллипсообразной и треугольной формы. Низ изделия обрабатывается швом вподгибку с закрытым срезом, шириной 1,5 см в готовом виде.

3.5 Прочность завязок на отрыв для всех изделий составляет колпак - не менее 25Н; фартук - не менее 90Н.

3.6 Изделия должны быть устойчивы к стирке в растворе, содержащем 5 г/дм³ любого моющего препарата в стиральной машине при температуре не выше 40°С в течение 10 мин с последующей промывкой. Глажение изделий производится утюгом или гладильным прессом при температуре 120-150 °С.

3.7 Прочность крепления на отрыв для всех изделий составляет не менее 100Н.

3.8 Изделия должны быть устойчивы к дезинфекции воздушным методом сухим горячим воздухом при температуре $(120 \pm 3)^\circ\text{С}$ в течение 45 мин.

3.9 Основные линейные размеры куртки и брюк мужских должны соответствовать значениям таблицы 4.

Таблица 4

Наименование измерения	Рост типовой фигуры, см	Обхват груди типовой фигуры, см					Допускаем ое отклонени е, см
		I подгруппа			II подгруппа		
		88, 92	96, 100	104, 108	112, 116	120, 124	
КУРТКА							
Длина спинки	158, 164	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	±1,0
	170, 176	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	
	182, 188	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	
Ширина спинки Типы Б, В	-	44,6	46,6	48,6	50,6	52,6	±1,0
Длина переда:							
Тип А	158, 164	64,8	66,0	67,2	68,7	70,3	±1,0
	170, 176	68,8	70,0	71,2	72,7	74,3	
	182, 188	72,8	74,0	75,2	76,7	78,3	
Типы Б, В	158, 164	70,3	71,5	72,7	74,2	75,8	
	170, 176	74,3	75,5	76,7	78,2	79,8	
	182, 188	78,3	79,5	80,7	82,2	83,8	
Ширина изделия на уровне глубины проймы							
Тип А	-	61,0	65,0	69,0	72,0	76,0	± 1,0
Типы Б, В	-	57,0	61,0	65,0	68,0	72,0	
Ширина изделия внизу							
Тип А	-	55,0	59,0	63,0	67,0	71,0	± 1,0
Типы Б, В	-	55,0	59,5	63,5	67,5	71,5	
Длина рукава	158, 164	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	± 1,0
	170, 176	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	
	182, 188	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	
Ширина рукава вверху							
Тип А	-	25,6	27,1	28,6	30,1	31,6	± 0,5
Типы Б, В	-	22,0	23,5	25,0	26,5	28,0	
Ширина рукава внизу	-	14,4	15,0	15,6	15,6	16,8	± 0,5
Длина воротника:							

Типы Б, В	-	44,4	46,0	48,0	50,0	52,0	±1,0
БРЮКИ							
Длина по боковому шву	158, 164	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	±1,0
	170, 176	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	
	182, 188	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	
Длина по шаговому шву	158, 164	71,2	70,2	69,2	68,2	67,2	±1,0
	170, 176	78,0	77,0	76,0	75,0	74,0	
	182, 188	84,8	83,8	82,8	81,8	80,8	
Ширина на уровне среднего шва	-	33,3	35,5	37,7	39,9	42,1	±1,0
Ширина брюк в талии (при растянутой эластичной ленте)	-	48,0	54,0	60,0	60,0	72,0	±1,0
Ширина внизу	-	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	± 0,5

Измеряемые параметры обозначены на чертежах в п.3.8.

Куртка мужская должна быть классического прямого силуэта с центральной бортовой застежкой на 6-7 кнопок/пуговиц или цельнокроенная с V-образным вырезом. Полочка прямая без кокетки или с кокеткой. На полочке один или два нагрудных и два боковых накладных кармана, прямой формы. Спинка цельная без швов или с кокеткой.

Рукав втачной разной длины, одношовный, на манжете с застежкой на пуговицу.

Воротник втачной отложного вида, с острыми концами, стойка.

Изделие может быть со светоотражающей лентой: на куртке на уровне кокетки, на полочках и спинке, на рукавах по две полосы. На нагрудном кармане полочки может быть значок 03. На спинке может быть логотип предприятия.

Все отделочные строчки по швам соединения деталей обрабатываются на 0,1 см и 0,5 см на двухигольной спецмашине челночного стежка.

Низ куртки и рукава обрабатывается швом вподгибку с закрытым срезом, шириной 2,0 см в готовом виде двойной отделочной строчкой.

Брюки мужские прямого силуэта с притачным поясом, застежкой на пуговицу с центральной застежкой молнией. Линия талии может фиксироваться эластичной лентой. На задней половинке брюк один накладной карман или на передней половинке брюк боковые втачные карманы. Задняя половинка брюк может быть с двумя накладными карманами прямой формы. Низ изделия обрабатывается швом вподгибку с закрытым срезом, шириной 2,0 см в готовом виде.

3.10 Основные линейные размеры колпака мужского должны соответствовать значениям таблицы 5.

Таблица 5

Наименование измерения	Размер			Допускаемое отклонение, см
	56	58	60	
	Обхват груди			
	54,5-56,4	56,5-58,4	58,5-60,4	
КОЛПАК				
Тип А				
Длина околыша, сложенного вдвое	28,5	29,5	30,5	±0,5
Ширина околыша	17,5	17,5	17,5	±0,5
Высота донышка	20,5	20,5	20,5	±0,5

Измеряемые параметры обозначены на чертежах в п.3.8.

Колпак мужской с двойным околышем и донышком, по шву притачивания донышка складки, с завязками из хлопчатобумажной тесьмы. Завязки пришивают на околыше головного убора длиной не менее 15,0 см на расстоянии не менее 6,0 см от низа. Низ изделия обрабатывается швом вподгибку с закрытым срезом, шириной 2,0 см в готовом виде.

3.11 Основные линейные размеры фартука мужского должны соответствовать значениям таблицы 6

Таблица 6

Наименование измерения	Рост типовой фигуры человека	Размер			Допускаемое отклонение, см
		76, 88	92, 104	108, 112	
ФАРТУК					
Длина фартука посередине от верхнего края до нижнего	158, 164	95,0	95,0	95,0	± 1,0
	170, 176	105,0	105,0	105,0	
	182, 188	115,0	115,0	115,0	
Длина нагрудника посередине от верхнего края до линии талии (на уровне пришитых боковых завязок)	-	25,0	27,0	29,0	±0,5
Ширина нагрудника в верхней части фартука	-	22,0	24,0	26,0	±0,5

Ширина фартука на уровне боковых узлов	-	69,0	75,0	81,0	$\pm 1,0$
Ширина фартука внизу от одного края до другого	-	91,0	97,0	103,0	$\pm 1,0$
Длина шейной бретели (измерять между швами притачивания)	-	57,0	59,0	61,0	$\pm 1,0$

Измеряемые параметры обозначены на чертежах в п.3.8.

Фартук мужской должен быть прямоугольной формы с завязками по линии талии.

Завязки пришивают по линии талии фартука длиной не менее 60,0 см с каждой стороны. Низ изделия обрабатывается швом вподгибку с закрытым срезом, шириной 2,0 см в готовом виде.

3.12 Цветовые исполнения изделий должны соответствовать сведениям, указанным в таблице 7

Таблица 7

Изделие	Цветовое исполнение
Женские	
Блуза 202-21	Белый, зеленый
Блуза 202-40	Серый, черный
Блуза 202-42	Синий, красный
Брюки 203-19	Черный
Брюки 203-20	Синий
Колпак 304-16	Белый
Колпак 304-502	Белый
Пилотка 304-12	Белый
Косынка 01	Белый
Фартук 307-02	Белый
Мужские	
Куртка 102-19	Бордовый
Куртка 102-30	Серый, белый, бирюзовый
Куртка 102-502	Синий, белый
Брюки 103-06	Бордовый
Брюки 103-07	Серый
Брюки 103-07	Белый
Колпак 304-16	Белый
Фартук 307-04	Белый

3.13 Измеряемые параметры и чертежи изделий указаны на рисунках 12-20 и таблицах 8-

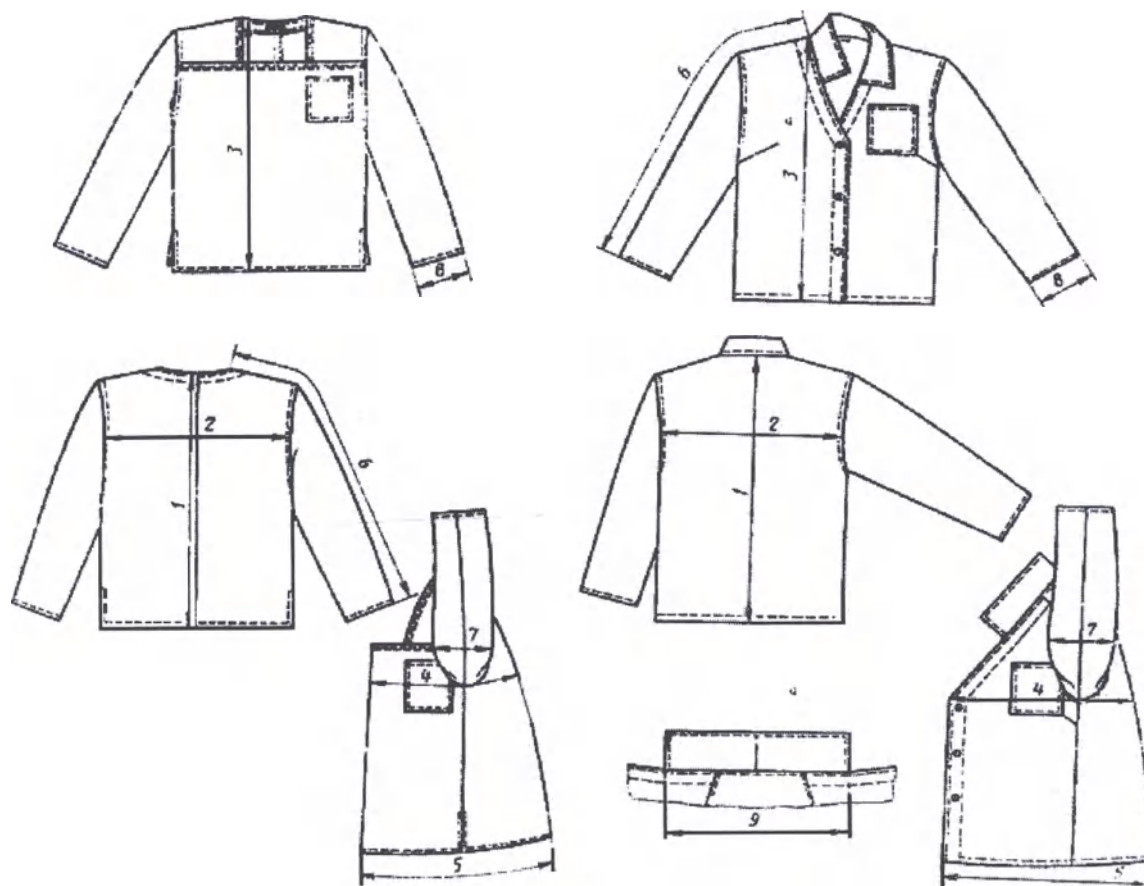


Рисунок 12. Блуза женская

Таблица 8

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения
1	Длина спинки
2	Ширина спинки
3	Длина переда
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы
5	Ширина изделия внизу
6	Длина рукава
7	Ширина рукава вверху
8	Ширина рукава внизу
9	Длина воротника

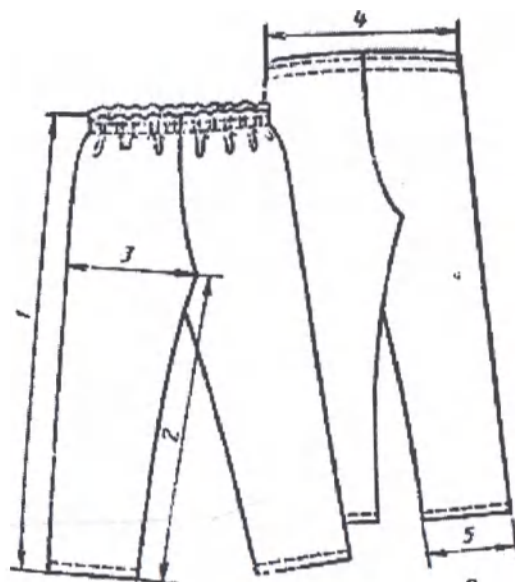


Рисунок 13. Брюки женские

Таблица 9

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения
1	Длина по боковому шву
2	Длина по шаговому шву
3	Ширина на уровне среднего шва
4	Ширина брюк в талии (на уровне растянутой эластичной ленте)
5	Ширина внизу

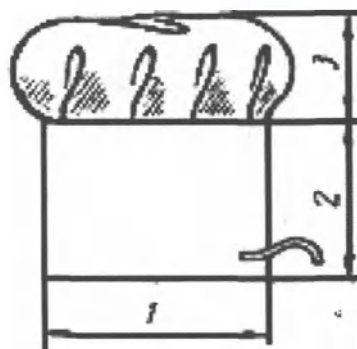


Рисунок 14. Колпак женский

Таблица 10

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения
1	Длина околыша сложенного вдвое
2	Длина околыша
3	Высота донышка

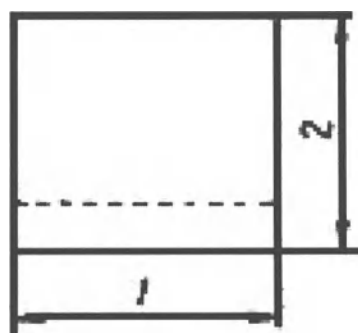


Рисунок 15. Пилотка женская

Таблица 11

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения
1	Длина пилотки
2	Высота пилотки



Рисунок 16. Косынка женская


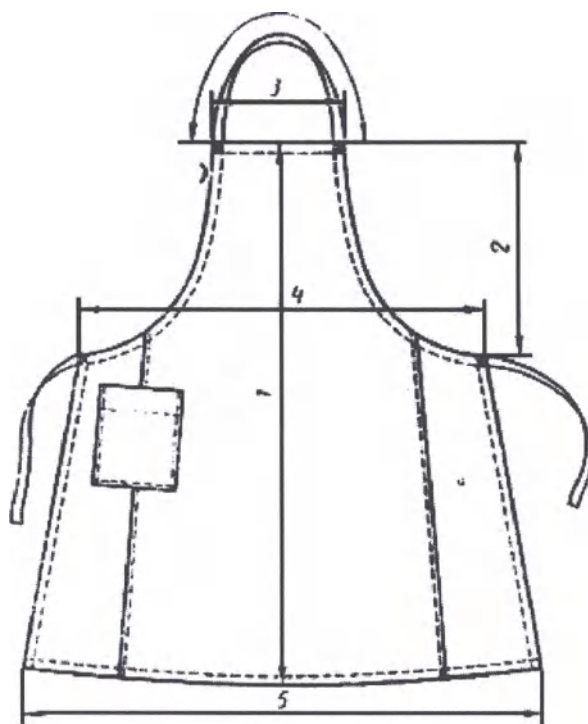


Рисунок 17. Фартук женский

Таблица 12

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения
1	Длина фартука посередине от верхнего края до нижнего
2	Длина нагрудника посередине от верхнего края до линии талии (на уровне пришитых боковых завязок)
3	Ширина нагрудника в верхней части фартука
4	Ширина фартука на уровне боковых узлов
5	Ширина фартука внизу от одного края до другого
6	Длина шейной бретели (измерять между швами притачивания)

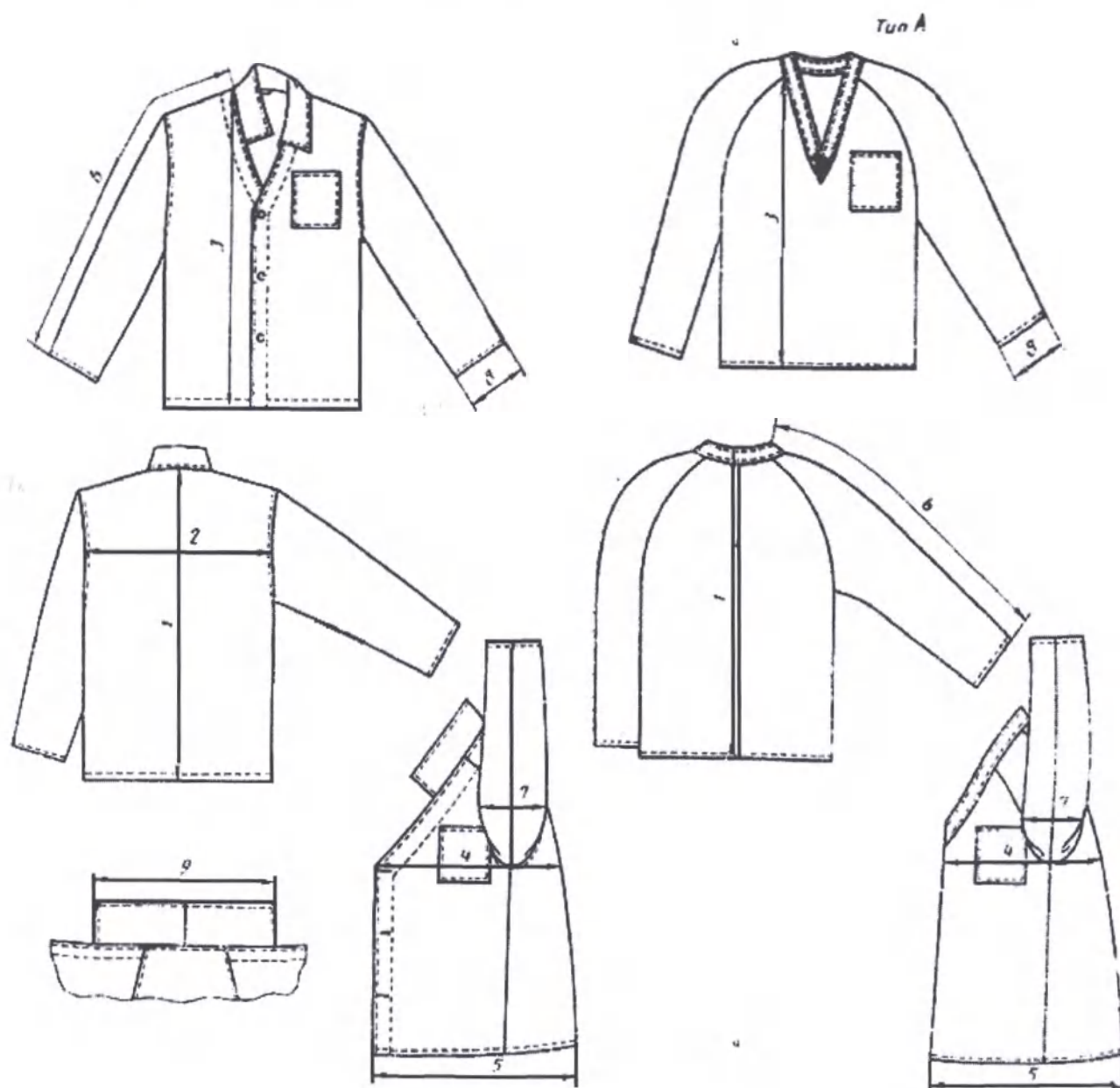

Тип 8

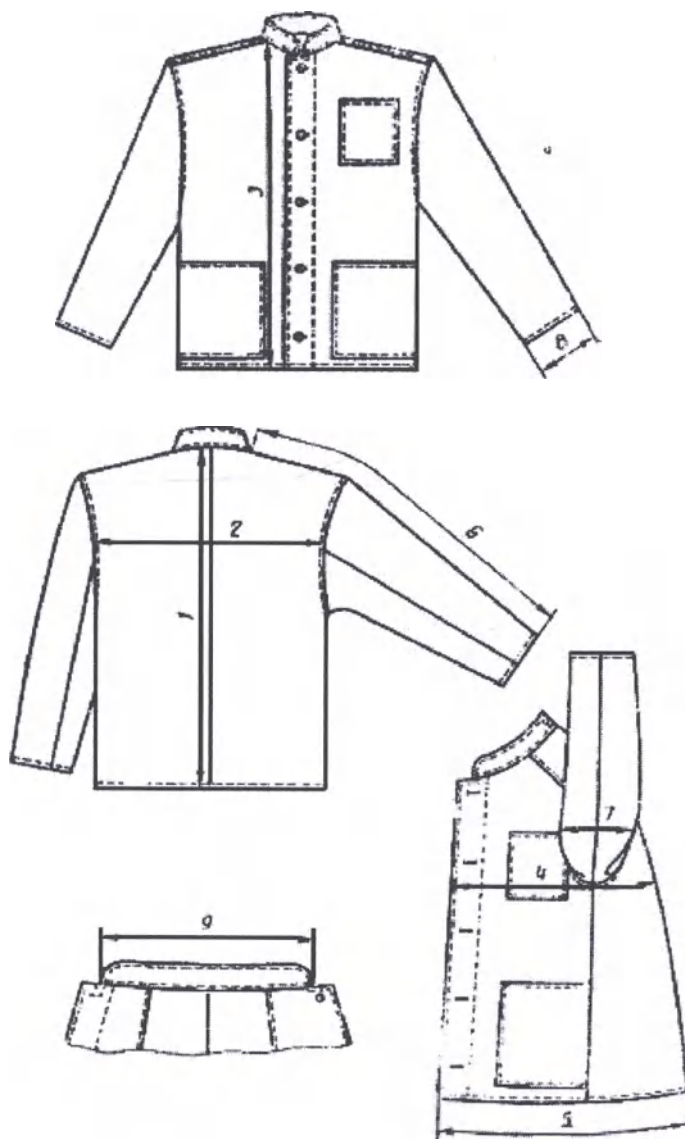


Рисунок 18. Куртка мужская

Таблица 13

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения
1	Длина спинки
2	Ширина спинки
3	Длина переда
4	Ширина изделия на уровне глубины проймы
5	Ширина изделия внизу
6	Длина рукава
7	Ширина рукава сверху
8	Ширина рукава внизу
9	Длина воротника

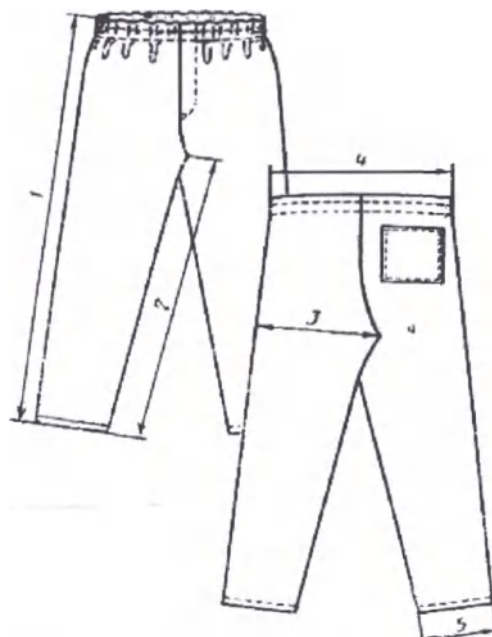


Рисунок 19. Брюки мужские

Таблица 14

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения
1	Длина по боковому шву
2	Длина по шаговому шву
3	Ширина на уровне среднего шва
4	Ширина брюк в талии (на уровне растянутой эластичной ленте)
5	Ширина внизу

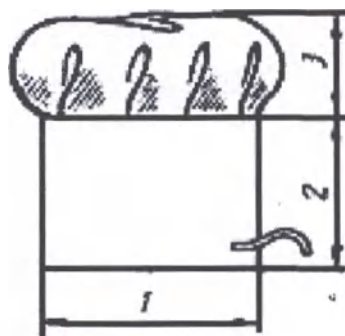


Рисунок 20. Колпак мужской

Таблица 15

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения
1	Длина околыша сложенного вдвое
2	Длина околыша
3	Высота донышка

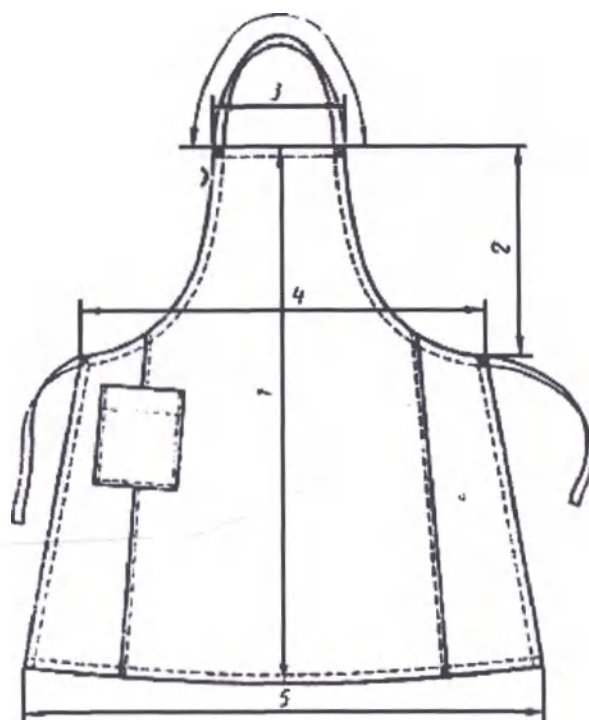


Рисунок 21. Фартук мужской

Таблица 16

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения
1	Длина фартука посередине от верхнего края до нижнего
2	Длина нагрудника посередине от верхнего края до линии талии (на уровне пришитых боковых завязок)
3	Ширина нагрудника в верхней части фартука
4	Ширина фартука на уровне боковых узлов
5	Ширина фартука внизу от одного края до другого
6	Длина шейной бретели (измерять между швами притачивания)

3.14 Масса изделий в комплектах должна соответствовать параметрам, указанным в таблице 17.

Таблица 17

Масса комплектов*

№	Наименование изделий	Масса, г
1	2	3
1	Комплект одежды медицинской многоразового использования № 1	От 350 до 1500
2	Комплект одежды медицинской многоразового использования № 2	От 400 до 1600
3	Комплект одежды медицинской многоразового использования № 3	От 350 до 1500
4	Комплект одежды медицинской многоразового использования № 4	От 350 до 1500

5	Комплект одежды медицинской многоразового использования № 5	От 400 до 1600
6	Комплект одежды медицинской многоразового использования № 6	От 350 до 1500
7	Комплект одежды медицинской многоразового использования № 7	От 350 до 1500
8	Комплект одежды медицинской многоразового использования № 8	От 350 до 1500
9	Комплект одежды медицинской многоразового использования № 9	От 400 до 1600
10	Комплект одежды медицинской многоразового использования № 10	От 350 до 1500
11	Комплект одежды медицинской многоразового использования № 11	От 800 до 2800
12	Комплект одежды медицинской многоразового использования № 12	От 800 до 2800
13	Комплект одежды медицинской многоразового использования № 13	От 600 до 2400
14	Комплект одежды медицинской многоразового использования № 14	От 350 до 1500
15	Комплект одежды медицинской многоразового использования № 15	От 400 до 1600
16	Комплект одежды медицинской многоразового использования № 16	От 600 до 1800
17	Комплект одежды медицинской многоразового использования № 17	От 350 до 1500
18	Комплект одежды медицинской многоразового использования № 18	От 350 до 1500
19	Комплект одежды медицинской многоразового использования № 19	От 400 до 1600
20	Комплект одежды медицинской многоразового использования № 20	От 350 до 1500
21	Комплект одежды медицинской многоразового использования № 21	От 600 до 1800
22	Комплект одежды медицинской многоразового использования № 22	От 400 до 1500
23	Комплект одежды медицинской многоразового использования № 23	От 350 до 1500
24	Комплект одежды медицинской многоразового использования № 24	От 350 до 1500
25	Комплект одежды медицинской многоразового использования № 25	От 350 до 1500
26	Комплект одежды медицинской многоразового использования № 26	От 350 до 1500
27	Комплект одежды медицинской многоразового использования № 27	От 350 до 1500
28	Комплект одежды медицинской многоразового использования № 28	От 350 до 1500
29	Комплект одежды медицинской многоразового использования № 29	От 350 до 1500
30	Комплект одежды медицинской многоразового использования № 30	От 350 до 1500
31	Комплект одежды медицинской многоразового использования № 31	От 350 до 1500
32	Комплект одежды медицинской многоразового использования № 32	От 350 до 1500
33	Комплект одежды медицинской многоразового использования № 33	От 350 до 1500
34	Комплект одежды медицинской многоразового использования № 34	От 350 до 1500

**Таблица 3 содержит сведения о минимальных и максимальных массах комплектов, исходя из информации об их составе (см. Приложение Е настоящих технических условий).*

4. Инструкция по применению

Медицинский персонал перед входом к пациенту для защиты больных и медицинского персонала от возбудителей инфекционных заболеваний при оказании лечебно-профилактической помощи медицинским персоналом пациентам в медицинских учреждениях.

5. Указания по эксплуатации и уходу за изделием

При уходе за изделием следует руководствоваться информацией на этикетке.

Символы, приведенные на ней, расшифрованы в таблице 18.

Таблица 18

	Обычная стирка при температуре воды до 40 °С
	Отбеливание запрещено
	Глажка при температуре подошвы утюга до 150 °С
	Деликатная барабанная сушка при пониженной температуре 60 °С, уменьшенной продолжительности сушки и количестве загруженного белья

Процесс обработки изделий включает в себя стирку, полоскание и сушку. Изделия не требуют специального технического обслуживания или ремонта.

При эксплуатации изделий не рекомендуется:

- использовать изделия в качестве средства индивидуальной защиты при работе с органическими растворителями, щелочами, кислотами, а также в помещениях при температуре выше 24°С и относительной влажности выше 50%;
- выбирать режимы стирки, не рекомендованные инструкциями к стиральным машинам и паспортом изделия;
- применять химическую чистку.

6. Условия хранения и транспортирования

Изделия транспортируются всеми видами крытых транспортных средств, кроме неотапливаемых отсеков самолетов в соответствии с ГОСТ 7000 и правилами, утверждёнными в установленном порядке для каждого вида транспорта.

Транспортирование морским транспортом должно производиться в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов». Вид отправки – контейнерами или иным способом по согласованию с потребителем.

Условия транспортирования - по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150.

Хранение изделий у поставщика (потребителя) должно производиться на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.

Условия хранения по группе 1 (Л) по ГОСТ 15150 при температуре от +5 °С до +40 °С.

Изделия должны храниться отдельно от веществ, выделяющих пары с резким запахом, или должны храниться в таре, защищающей от этих воздействий.

7. Маркировка

Маркировка представлена на Рисунке 22.

Комплект одежды медицинской многоразового использования под товарным знаком Kuzmin по ТУ 14.12.30- 002-38480115-2019 №3 в составе: 1. Куртка медицинская многоразового использования мужская – 1 шт., вариант исполнения 102-19 размер 108 2. Брюки медицинские многоразового использования мужские – 1 шт., вариант исполнения 103-06 размер 108 Ткань: тиси Состав: 35% хлопок, 65% полиэфир. Плотность: 120г/м² ООО «Профессиональная одежда» 450064, Россия, г. Уфа, ул. Интернациональная, д.17А тел/факс: (347) 240-01-16	№ партии Дата изготовления РУ № _____ 
--	---



Рисунок 22. Товарный ярлык

8. Гарантии производителя

Гарантийный срок годности Комплектов—12 месяцев со дня изготовления. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции нормативным требованиям при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

По вопросам гарантии и качества медицинского изделия обращаться к изготовителю:

ООО "Профессиональная одежда"

450064, Россия, г. Уфа, ул. Интернациональная, д.17А.

Тел./факс: 8 (927) 351-08-58, 8 (347) 240-01-16.

9. Способы утилизации

При производстве изделий, образующиеся отходы складываются в контейнеры и утилизируются в установленном порядке.

Использованные изделия относятся к отходам класса А, Б или В (в зависимости от больничного учреждения и пациентов, которые контактируют с изделиями), неиспользованные (просроченные, непригодные для использования) - к классу А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

