

ОКП 93 9812

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «Спецмедтехника»



А.В. Миляев

«18» августа 2017 г

Аптечка первой помощи групповая
АППГ

ПАСПОРТ

СМАН.027.000.000.000 ПС

И.в. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл

Взам. инв. №

Подп. и дата

№ подл.

Иг

1 Основные сведения

Аптечка первой помощи групповая АППГ (далее – аптечка АППГ) предназначена для оснащения военной техники на колесном и гусеничном ходу, подразделений и отсеков кораблей и судов ВМФ и рассчитана на оказания первой помощи четырем человекам в порядке само- и взаимопомощи.

Вложения аптечки (первый вариант поставки) предназначены для; обработки окружности раны; промывания глаз антисептиком; наложения первичных асептических и окклюзионных повязок; временной остановки кровотечения; снятия головной боли; дегазации зараженных участков кожи и прилегающих участков обмундирования; обработки пораженных участков кожи при термических и радиационных ожогах.

Область применения – весь спектр общевойсковых подразделений и подразделений ВДВ, ВВС и ВВ.

СМАН.027.000.000.000 ПС

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Разработал	Таскин			17.08.17
Проверил	Куриной			17.08.17
Иг 000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU 8.17				
Утвердил	Миляев			17.08.17

Аптечка первой помощи
групповая
АППГ
Паспорт

Лит.	Лист.	Листов.
А	2	17
ООО «Спецмедтехника»		

2 Технические данные

2.1 Масса аптечки должна быть, кг, не более:

АППГ (вариант 1) – 1,3;

АППГ (вариант 2) – 1,15.

2.2 Габаритные размеры аптечки должны быть, мм, не более:

АППГ (вариант 1) - 230×120×150;

АППГ (вариант 2) - 230×120×150.

3 Комплектность

Комплект поставки аптечки первой помощи групповой АППГ указан в таблице 1.

Таблица 1 Комплект поставки аптечки первой помощи групповой

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Количество	
			№1	№2
Аптечка первой помощи групповая АППГ, вариант 1	СМАН.027.000.000.000		+	-
Аптечка первой помощи групповая АППГ, вариант 2	СМАН.027.000.000.000-01		-	+
Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный (Пакет перевязочный медицинский индивидуальный) или (Пакет перевязочный медицинский стерильный по ГОСТ 1179-93) или (Пакет перевязочный медицинский стерильный по ГОСТ 1179-93) или (Пакет перевязочный медицинский стерильный по ГОСТ 1179-93) или (Пакет перевязочный медицинский по ГОСТ 1179-93)	ГОСТ 1179 РУ № ФСР 2009/05126, производства ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия РУ № ФСР 2008/03791, производства ООО «Ингакамф», Россия РУ № РЗН 2014/1814, производства ООО «Навтекс», Россия РУ № РЗН 2014/1656, производства ООО ПКФ «Пионер», Россия РУ № ФСР 2010/07563, производства ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», Россия	шт.	2	2

СМАН.027.000.000.000 ПС

Лист

3

Иг. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Иав. № дубл	Подп. и дата

Продолжение таблицы 1

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Количество	
			№1	№2
Средство перевязочное гемостатическое «Гемостоп» стерильное (на основе производных цеолитов), 50 г в упаковке (Средство перевязочное гемостатическое «ГЕМОСТОП™», стерильное)	ТУ 9393-001-18152288-2009 РУ № ФСР 2010/07420, производства НПЦ «Фармзащита», Россия	уп.	3	-
Парацетамол 0,5 в таблетке, 10 штук в упаковке (Парацетамол 500 мг в таблетке, 10 штук в упаковке или Парацетамол 0,5 г в таблетке, 10 штук в упаковке или Парацетамол Авексима 500 мг в таблетке, 10 штук в упаковке или Парацетамол-УБФ, 500 мг в таблетке, 10 штук в упаковке)	РУ № ЛС-001364, производства ОАО «Фармстандарт-Лексредства», Россия РУ № ЛСР-004786/07, производства, ЗАО "ПФК "Обновление", Россия РУ № ЛСР-000271/08, производства ОАО «Татхимфармпрепараты», Россия РУ № Р N002697/01, производства ОАО «Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А.Семашко», Россия РУ № ЛС-001990, производства ОАО «Органика», Россия РУ № ЛСР-001927/08, производства ООО «Анжеро-Судженский химико-фармацевтический завод», Россия РУ № Р N002526/01, производства ОАО «Уралбиофарм», Россия	уп.	1	1
Средство перевязочное гидрогелевое, противоожоговое, стерильное с иммобилизованными лекарственными средствами «Лиоксазин-СП», салфетка 24,0х24,0 см в упаковке (Средство перевязочное гидрогелевое, противоожоговое, стерильное «Лиоксазин-СП»)	ТУ 9393-002-18152288-2010 РУ № ФСР 2010/08888, производства НПЦ «Фармзащита», Россия	уп.	4	4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

СМАН.027.000.000.000 ПС

Продолжение таблицы 1

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Количество	
			№1	№2
Сульфацил-натрия 20% раствор, глазные капли во флаконе (Сульфацил-натрия, капли глазные 20% по 5 мл в тубик-капельнице полимерной или флакон-капельнице полимерной или Сульфацил натрия, капли глазные 20%, по 5 мл в тубик-капельнице или Сульфацил-натрия, капли глазные 20%, по 5 мл во флакон-капельнице полимерной или Сульфацил натрия-ДИА, капли глазные 20%, по 5 мл во флаконе или флаконе-капельнице или Сульфацил-натрий, капли глазные 20%, по 5 мл во флаконе)	РУ № Р N001084/01, производства ФГУП «Московский эндокринный завод», Россия РУ № ЛС-001909, производства ЗАО «Производственная фармацевтическая компания «Обновление», Россия РУ № ЛСР-001756/09, производства ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», Россия РУ № Р N001943/01-2002, производства ЗАО «Диафарм институт молекулярной диагностики», Россия РУ № П N015331/01, производства РУП «Белмед-препараты», Республика Беларусь	флак.	2	2
Йода 5% спиртовой раствор во флаконе (Йод раствор для наружного применения спиртовой 5% по 10 мл во флаконе)	РУ № ЛСР-006245/10, производства ООО «Гиппократ», Россия РУ № Р N002181/01-2003, производства ООО «Йодные технологии и маркетинг», Россия РУ № ЛСР-008849/10, производства ОАО «Флора Кавказа», Россия РУ № ЛП-000440, производства ОАО «Тульская фармацевтическая фабрика», Россия РУ № ЛП-002039, производства ОАО «Татхим-фармпрепараты», Россия	флак.	2	2

Инв. № дубл	Подп. и дата
Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата

СМАН.027.000.000.000 ПС

Лист

5

Продолжение таблицы 1

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Количество	
			№1	№2
Лейкопластырь длиной 5 м, шириной 1 см (Лейкопластырь Верофарм длиной 5 м, шириной 1 см или Лейкопластырь «Унипласт фиксирующий» или Лейкопластырь медицинский фиксирующий длиной 5 м, шириной 1 см или Лейкопластырь медицинский фиксирующий рулонный Medrull длиной 5 м, шириной 1 см)	ТУ 9393-015-45961725-2009 РУ № ФСР 2009/05363, производства АО «ВЕРОФАРМ», Россия ТУ 9393-010-45961725-2010 РУ № ФСР 2008/03212, производства АО «ВЕРОФАРМ», Россия РУ № ФСЗ 2008/01645, производства ООО «ГАЛТЕЯФАРМ», Респу- блика Беларусь РУ № ФСР 2007/01017, производства ООО «Лей- ко», Россия РУ № ФСЗ 2011/10189, производства АО «Форанс Эсти», Эстония	шт.	1	1

Иг. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл	Подп. и дата

Иг. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СМАН.027.000.000.000 ПС

Продолжение таблицы 1

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Количество	
			№1	№2
Бинт марлевый медицинский стерильный, размер 5 м×10 см (Бинт марлевый медицинский стерильный, размер 5 м×10 см или Бинт марлевый медицинский стерильный «Амелия», размер 5 м×10 см)	ГОСТ 1172-93 РУ № ФСР 2007/01317, производства ООО «ЭВТЕКС», Россия РУ № ФСР 2010/09194, производства АОЗТ «Фабрика медицинских изделий и материалов «Ника», Россия РУ № ФСР 2011/12237, производства ООО «Фарм-Глобал», Россия РУ № ФСР 2012/12990, производства ООО «Компания «Бинт и вата», Россия РУ № РЗН 2013/919, производства ФКУ ИК-12 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю, Россия РУ № ФСР 2008/03792, производства ООО «ИНГАКАМФ», Россия РУ № РЗН 2014/1629, производства ООО «Навтекс», Россия РУ № ФСР 2007/01006, производства ЗАО «Гигровата-Санкт-Петербург», Россия	шт.	1	1

№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Иг				

СМАН.027.000.000.000 ПС

Лист

7

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Изм. Лист. № докум. Подп. Дата

Продолжение таблицы 1

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Количество	
			№1	№2
Бинт марлевый медицинский стерильный, размер 7 м×14 см (Бинт марлевый медицинский стерильный, размер 7 м×14 см)	ГОСТ 1172-93 РУ № ФСР 2007/01317, производства ООО «ЭВТЕКС», Россия или РУ № ФСР 2010/09194, производства АОЗТ «Фабрика медицинских изделий и материалов «Ника», Россия РУ № ФСР 2011/12237, производства ООО «Фарм-Глобал», Россия РУ № ФСР 2012/12990, производства ООО «Компания «Бинт и вата», Россия РУ № РЗН 2013/919, производства ФКУ ИК-12 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю, Россия РУ № ФСР 2008/03792, производства ООО «ИНГАКАМФ», Россия РУ № РЗН 2014/1629, производства ООО «Навтекс», Россия			
или Бинт марлевый медицинский стерильный «Амелия», размер 7 м×14 см)	РУ № ФСР 2007/01006, производства ЗАО «Гигровата-Санкт-Петербург», Россия	шт.	1	1
Косынка медицинская перевязочная 155х80 см (треугольная) (Повязка косыночная ПКБ)	РУ № ФСР 2010/08612, производства ООО ППИЦ «Омнмед», Россия ТУ 8157-002-16758213-2004, производства ООО ПКФ «Ахтамар», Россия ТУ 9396-003-48508104-01 РУ № ФСР 2011/10261, производства ООО «Интерлин», Россия			
или Косынка медицинская фиксирующая размером 155х80 см				
или Повязка из эластичного полотна косыночного типа для фиксации предплечья К-Трио-МИД)				
Булавки безопасные		шт.	5	5

№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата
И				

СМАН.027.000.000.000 ПС

Лист

8

Продолжение таблицы 1

Наименование	Обозначение документа	Ед. изм.	Количество	
			№1	№2
Жгут кровоостанавливающий резиновый (Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха для применения в стационарных условиях)	РУ № ФСР 2007/00032, производства ОАО «Объединение Альфапластик», Россия	шт.	1	1
Памятка-вкладыш «Аптечка первой помощи групповая АППГ»	СМАН.027.010.005.000	шт.	1	1
Этикетка	СМАН.027.000.000.000 ЭТ	шт.	1	1
Паспорт	СМАН.027.000.000.000 ПС	шт.	1	1
Чехол аптечки АППГ	СМАН.014.003.000.000	шт.	1	1
Транспортная тара *	СМАН.024.008.000.000	шт.	1	1
Примечания - 1 * - транспортная тара на 42 шт. аптечек. 2 Допускается замена комплектующих на аналогичные, имеющие действующие Регистрационные Удостоверения Росздравнадзора.				

4 Назначение лекарственных средств и медицинских изделий

Назначение лекарственных средств (ЛС) и медицинских изделий (МИ), входящих в состав аптечки АППГ, согласно таблице 2.

Таблица 2 Назначение лекарственных средств и медицинских изделий

Наименование ЛС или МИ	Назначение ЛС или МИ
Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный	Предназначен для наложения первичных асептических и окклюзионных повязок
Средство перевязочное гемостатическое «Гемостоп» стерильное (на основе производных цеолитов), 50 г в упаковке	Предназначено для временной остановки наружного кровотечения, в том числе массивного при ранениях шеи, подмышечной области, паха, ягодиц
Парацетамол 0,5 в таблетке, 10 штук в упаковке	Предназначен для снятия головной боли и понижения температуры тела

Инв. № дубл. Подп. и дата

Инв. № подл.

Продолжение таблицы 2

Наименование ЛС или МИ	Назначение ЛС или МИ
Средство перевязочное гидрогелевое, противоожоговое, стерильное с иммобилизованными лекарственными средствами «Лиоксазин-СП», салфетка 24,0х24,0 см в упаковке	Предназначен для обработки пораженных участков кожи при термических и радиационных ожогах
Сульфацил-натрия 20% раствор, глазные капли во флаконе	Предназначен для промывания глаз антисептиком
Йода 5% спиртовой раствор во флаконе	Предназначен для обработки окружающей раны
Лейкопластырь длиной 5м, шириной 1 см	Предназначен для фиксирования временных повязок
Бинт марлевый медицинский стерильный, размер 5м×10 см	Предназначен для временной остановки кровотечения
Бинт марлевый медицинский стерильный, размер 7м×14 см	Предназначен для временной остановки кровотечения
Косынка медицинская перевязочная 155х80 см (треугольная)	Предназначена для фиксации верхней конечности при повреждениях
Булавки безопасные	Предназначена для фиксации косынки медицинской (перевязочной)
Жгут кровоостанавливающий резиновый	Предназначен для временной остановки наружного кровотечения, в том числе массивного при ранениях шеи, подмышечной области, паха, ягодиц

5 Применение лекарственных средств и медицинских изделий

Применение лекарственных средств и медицинских изделий согласно инструкциям на эти ЛС и МИ, которые являются неотъемлемой частью поставки данных товаров.

Иг. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

6 Гарантии изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ 9398-001-58379990-2010 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

6.3 Гарантийный срок хранения изделия – 6 месяцев с момента продажи.

Примечание – Гарантийные сроки покупных изделий в соответствии с нормативной документацией на эти изделия.

№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата	СМАН.027.000.000.000 ПС					Лист
										11
ИИ	000 ЦИРМИ	INFO@CIRMI.RU	WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU	Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата		

7 Свидетельство о консервации

Аптечка первой помощи групповая АППГ, заводской номер _____, подвергнута консервации на предприятии-изготовителе ООО «Спецмедтехника» согласно требованиям технических условий ТУ 9398-001-58379990-2010.

Консервант - технический силикагель в изолированном объеме упаковки.

Срок защиты в соответствии с условиями хранения 1, по ГОСТ 15150-69– три года, но при температурах от плюс 5 °С до плюс 15 °С.

Консервацию произвел _____
личная подпись
расшифровка подписи

 год, месяц, число

Изделие после консервации принял

личная подпись
расшифровка подписи

 год, месяц, число

Ин. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

8 Свидетельство об упаковывании

Аптечка первой помощи групповая АППГ, заводской номер _____, упакована на предприятии-изготовителе ООО «Спецмедтехника» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковывание произвел _____
личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

Изделие после упаковывания принял

личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата
Иг	000 ЦИРМИ	INFO@CIRMI.RU	WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU	Изм. Лист.
№ докум.	Подп.	Дата		

9 Свидетельство о приемке

Аптечка первой помощи групповая АППГ, заводской номер _____, соответствует требованиям технических условий ТУ 9398-001-58379990-2010 и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

МП

личная подпись
(оттиск личного клейма)

расшифровка подписи

год, месяц, число

Представитель заказчика

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Изделие опломбировано пломбой предприятия-изготовителя и пломбой представителя заказчика

Иг	№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата
Иг	000 ЦИРМИ	INFO@CIRMI.RU	WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU		
Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата	

СМАН.027.000.000.000 ПС

Лист

14

10 Утилизация

10.1 Образующиеся при процедурах отходы медицинских изделий складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют, в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-2010.

10.2 Чехлы аптечек, вышедшие из строя, разбирают и утилизируют как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-2010.

10.3 Лекарственные средства утилизируют в соответствии с инструкцией о порядке уничтожения лекарственных средств, пришедших в негодность, лекарственных средств с истекшим сроком годности и лекарственных средств, являющихся подделками или незаконными копиями зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных средств, принятой Приказом Минздрава России №382 от 15.12.2002.

И	№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата
000 ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU Изм. Лист. № докум. Подп. Дата					
СМАН.027.000.000.000 ПС					Лист
					15

11 Транспортирование и хранение

11.1 Транспортирование аптечек в транспортной таре может производиться всеми видами транспорта без ограничения в соответствии с ГОСТ 15150 по группе 1, но при температурах от плюс 5°C до плюс 15 °C.

11.2 Изделия должны храниться на складах изготовителя и потребителя в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150 при отсутствии в воздухе паров веществ, вызывающих коррозию, но при температурах от плюс 5°C до плюс 15 °C.

№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата
ИИ	000 ЦИРМИ	INFO@CIRMI.RU	WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

СМАН.027.000.000.000 ПС

Лист 16

Лист регистрации изменений

[illegible]

№ п/п	№ инв.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1	2	3	4	5

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 17 лист(ов)

Руководитель организации

