

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор



С.А. Абрамов

2011г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Устройство для противогрибковой обработки обуви (взрослой и
детской) УПОО «Тимсон»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения о назначении прибора.....	3
2. Основные технические характеристики.....	3
3. Комплектность поставки.....	4
4. Подготовка прибора к эксплуатации.....	4
5. Порядок эксплуатации прибора.....	5
6. Меры безопасности.....	5

1. Общие сведения о назначении прибора

- 1.1. Устройство для противогрибковой обработки обуви (взрослой и детской) УПОО «Тимсон» является уникальным изобретением, технический результат которого – высокая эффективность при уничтожении грибов, бактерий и неприятного запаха внутри обуви.

Устройство производится в двух исполнениях:

1 исполнение – для детской обуви «УПОО – Д – «Тимсон», пяти типоразмеров:

УПОО – 01Д - «Тимсон»,

УПОО – 02Д - «Тимсон»,

УПОО – 03Д - «Тимсон»,

УПОО – 04Д - «Тимсон»,

УПОО – 05Д - «Тимсон».

2 исполнение – для взрослой обуви «УПОО – В – «Тимсон», пяти типоразмеров:

УПОО – 01В - «Тимсон»,

УПОО – 02В - «Тимсон»,

УПОО – 03В - «Тимсон»,

УПОО – 04В - «Тимсон»,

УПОО – 05В - «Тимсон».

- 1.2. Прибор обеспечивает надежную противогрибковую и антибактериальную защиту обуви.
- 1.3. Прибор полностью просушивает обувь в щадящем режиме $+60^{\circ}\text{C}$ - $+70^{\circ}\text{C}$.
- 1.4. Прибор используется для соблюдения личной гигиены и профилактики грибковых заболеваний.
- 1.5. Обеспечивает сохранение качества обуви и продлевает срок ее службы.
- 1.6. Изготовитель ООО «Тимсон», 143920, Московская обл., город Железнодорожный, ул. Победы, д. 2А.
Тел./факс: (499) 197-29-64
Адрес электронной почты: info@timson.ru
Сайт: www.timson.ru

2. Основные технические характеристики

- 2.1. Устройство для противогрибковой обработки обуви (взрослой и детской) УПОО «Тимсон» соответствует требованиям, предъявленным к изделиям Медицинской техники ГОСТ 12.2.025, выполнен по классу II тип В.

Состоит из двух идентичных корпусов округлой формы (в виде обувной колодки). Эти корпуса соединены электрическими проводами посредством «удвоителя», из которого исходит шнур с электрической вилкой, предназначенный для включения в электросеть.

Габаритные размеры устройства мм,

Детские:

УПОО – 01Д - «Тимсон» - $(132 \times 46 \times 71) \pm 1,5 \text{ мм}$

УПОО – 02Д - «Тимсон» - $(115 \times 36 \times 70) \pm 1,5 \text{ мм}$

УПОО – 03Д - «Тимсон» - $(106 \times 32 \times 70) \pm 1,5 \text{ мм}$

УПОО – 04Д - «Тимсон» - $(120 \times 40 \times 70) \pm 1,5 \text{ мм}$

УПОО – 05Д - «Тимсон» - $(128 \times 42 \times 71) \pm 1,5 \text{ мм}$

Взрослые:

УПОО – 01В - «Тимсон» - (132х42х71) ±1,5мм

УПОО – 02В - «Тимсон» - (168х52х75) ±1,5мм

УПОО – 03В - «Тимсон» - (135х38х76) ±1,5мм

УПОО – 04В - «Тимсон» - (148х46х76) ±1,5мм

УПОО – 05В - «Тимсон» - (172х54х78) ±1,5мм

Масса устройства: должна быть не более, кг.

Детские:

УПОО – 01Д - «Тимсон» - 0,2

УПОО – 02Д - «Тимсон» - 0,2

УПОО – 03Д - «Тимсон» - 0,2

УПОО – 04Д - «Тимсон» - 0,2

УПОО – 05Д - «Тимсон» - 0,2

Взрослые:

УПОО – 01В - «Тимсон» - 0,2

УПОО – 02В - «Тимсон» - 0,3

УПОО – 03В - «Тимсон» - 0,2

УПОО – 04В - «Тимсон» - 0,2

УПОО – 05В - «Тимсон» - 0,3

- 2.2. В каждом корпусе имеются отверстия (окна вентиляции) для распространения ультрафиолетового излучения и конвекции тепла.
- 2.3. Напряжение питания – 220V±10%
Род электрического тока – переменный
Частота – 50Гц
Сопротивление нагревательных элементов – 13,5кОм ± 3%
Потребляемая мощность – не более 7 Вт
Масса – не более 0,5 кг
Время выхода на режим работы – не более 30 минут
Время обработки обуви – не менее 6-8 часов
Для больших размеров обуви выше 45-го – 10-12 часов
Количество ультрафиолетовых ламп в каждом корпусе – 4шт.
Количество нагревательных элементов в каждом корпусе – 1шт.
Класс прибора по электробезопасности – класс II тип В

3. Комплектность поставки

- 3.1. Устройство для противогрибковой обработки обуви (взрослой и детской)
УПОО «Тимсон» - 1 шт.
- 3.2. Инструкция по применению с гарантийным талоном – 1 шт.
- 3.3. Буклет – 1 шт.
- 3.4. Индивидуальная упаковка – 1 шт.

4. Подготовка прибора к эксплуатации.

- 4.1. После длительного хранения или транспортирования при температуре ниже +10°C перед включением выдержите прибор в помещении с температурой от 10°C до +30°C не менее 4 часов.
- 4.2. Проверьте отсутствие внутри обуви снега, воды и металлических предметов.

- 4.3. Установите Устройство для противогрибковой обработки обуви (взрослой и детской) УЦОО «Тимсон» внутри обуви, включите вилку электрического шнура в розетку с напряжением 220V.

5. Порядок эксплуатации прибора

- 5.1. На вход прибора подается напряжение, происходит одновременное включение источников ультрафиолетового излучения и резистивных нагревательных элементов.
- 5.2. Ультрафиолетовое излучение и тепло согласованно воздействуют на внутреннюю поверхность обрабатываемой обуви. В результате внутри обуви уничтожаются грибки, бактерии, неприятный запах и одновременно полностью просушивается обувь.

6. Меры безопасности

Внимание! Хранить в местах, недоступных для детей!

- 6.1. Запрещается:
- Смотреть с близкого расстояния на свет ультрафиолетовых ламп
 - Включать в сеть с неисправной электропроводкой
 - Использовать прибор, имеющий механические повреждения корпусов и электрического шнура. Замена электрического шнура производится только предприятием производителем.
 - Переносить прибор во включенном состоянии или подвешивать на электрическом шнуре
 - Самостоятельно вскрывать прибор и близко смотреть на свет ультрафиолетовых ламп
 - Оставлять работающий прибор без присмотра
- 6.2. Не допускать попадания жидкости, металлических предметов внутрь корпуса
- 6.3. Категорически запрещается помещать устройство в жидкую среду
- 6.4. По окончании работы через 6 – 8 часов не забывайте выключить его из электрической сети.

Адрес, реквизиты, телефон

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт(замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники

«Устройство для противогрибковой обработки обуви (взрослой и детской) УПОО

«Гимсон»

наименование изделия

обозначение

заводской номер

выпущенные

(по свидетельству о приемке)

приобретенные

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

введены в эксплуатацию


(дата, подпись)

приняты на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

(адрес ремонтного предприятия)

МП Подпись руководителя и
печать ремонтного предприятия

МП Подпись руководителя и
печать предприятия-владельца

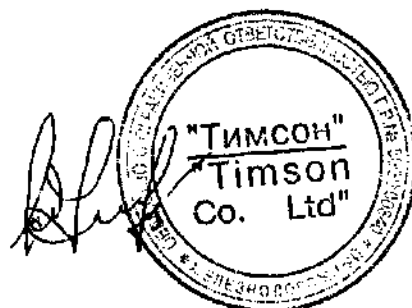

6 лисм.