

КОД ОКП 93 9370

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Фирма «ФИНКО»



Ветчинкин Д.Н.

ИНСТРУКЦИЯ

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Материалы перевязочные впитывающие

**Соответствует требованиям международных стандартов
и технической документации производителя**

ISO 9001:2000, Сертифицировано в соответствии с требованиями директивы 93/42 ЕЕС и
требованиями СЕ

Соответствует требованиям национальных стандартов

ГОСТ Р 51148-98

2011

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Материалы перевязочные впитывающие

Впитывающая повязка для инфицированных и гнойных ран «Фливактив»

(Vliwaktiv) –лечебная повязка, содержащая в качестве внутреннего слоя активированный уголь. Обладает высокой впитывающей способностью, хорошо очищает рану, удаляет неприятный запах. Применяется для инфицированных и гнойных ран, имеющих неприятный запах (язвы, пролежни, фекальные свищи, инфицированные поверхностные раны и др.) Впитывает раневой экссудат, запах и абсорбирует бактерии. Прилегающий к раневой поверхности слой изготовлен из не прилипающего к ране нетканого материала, внутренний слой изготовлен из вискозных волокон с добавлением активированного угля и нетканого материала с высокими впитывающими свойствами. Наружный слой имеет защиту от сквозного промокания и защищает нательное и постельное бельё от загрязнений.

Форма выпуска и размер: 10 x 10 см, упаковка 20 штук.; 10 x 20 см, упаковка 20 штук.

Применение:

1. Вскрыть упаковку.
2. Наложить повязку впитывающей стороной на предварительно обработанную рану.
3. Зафиксировать повязку с помощью бинта или пластыря.

Компресс «Флиवासофт» (Vliwasoft) – универсальная многослойная салфетка из мягкого нетканого материала для обработки ран. Нежная структура ткани. Не оставляет ворсинок. Обладает сильными впитывающими свойствами, сохраняет свою форму после впитывания большого количества экссудата. Выпускается также в виде повязки с Y-образным разрезом для фиксации дренажей и канюль (например, при диализе). Изготовлен из мягкого нетканого материала.

Состав: 67% вискозы и 33% полиэстера.

Используется для обработки любых видов ран, а в тех же случаях, что и марля.

Впитываемость 4-х слойного компресса соответствует марлевой салфетке, сложенной в 12 раз.

Компресс (повязка) пропускает воздух, легко и безболезненно удаляется. Предназначен для закрытия послеоперационной раны.

Форма выпуска:

- 4-х слойные (5x5 см, 7.5x7.5 см, 10x10 см, 10x20 см) нестерильные.
- 4-х слойные (5x5 см, 7.5x7.5 см, 10x10 см, 10x20 см) стерильные.
- 6-ти слойные (5x5 см, 7.5x7.5 см, 10x10 см, 10x20 см) нестерильные.
- 6-ти слойные (5x5 см, 7.5x7.5 см, 10x10 см, 10x20 см) стерильные.

Применение:

1. Вскрыть упаковку.
2. Наложить повязку впитывающей стороной на предварительно обработанную рану.
3. Зафиксировать повязку с помощью бинта или пластыря.

Использовать также для обработки раны во время перевязки. Смочить компресс Флиवासофт антисептическим средством. Бережно протереть рану. Использованные компрессы утилизировать согласно инструкции по утилизации медицинских отходов.

Впитывающая подушечка на рану с наполнителем из волокнистой целлюлозы и не промокающим верхним слоем «Фливацель» (Vliwazell)– применяется для ран с обильным отделяемым, обладает высокой впитывающей способностью. Изготовлена из очень мягкого нетканого материала (прочёс), который быстро впитывает экссудат во внутренний слой повязки. Внутренний слой состоит из целлюлозы и отличается сильными

абсорбирующими свойствами, многократно превышающими аналогичные марлевые повязки. Наружная сторона подушечки имеет защитный слой от сквозного промокания. Использование подушечек позволяет: сократить количество перевязок ран с сильной экссудацией, провести перевязку нетравматично, для пациента, защитить нательное и постельное бельё от загрязнений.

Форма выпуска и размер: 10 x 10 см, 10 x 20 см, 20 x 20 см, 20 x 40 см стерильные и нестерильные

Применение:

1. Вскрыть упаковку.
2. Наложить повязку впитывающей стороной на предварительно обработанную рану.
3. Зафиксировать повязку с помощью бинта или пластыря.

Генеральный директор
ООО «Фирма «Финко»



Д.Н. Ветчинкин