

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО «КонваТек»

Шер О.А.
«12» апреля 2012 г.
М.П. «КонваТек»

ИНСТРУКЦИЯ
по применению изделий медицинского назначения:

**Средства реабилитации для стомического использования при колостомах,
илеостомах в отдельных упаковках и наборах.**

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Средства реабилитации для стомического использования при колостомах, илеостомах предназначены для сбора содержимого, выделяющегося из стомы, устранения его агрессивного воздействия на кожу, защиты кожи вокруг стомы у стомированных пациентов.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Уникальный гидроколлоидный материал «Дурагезив» (Durahesive) и «Система 3 Плюс» (System 3 Plus) однокомпонентных сборных мешков (калоприемников) «Эстим+» (Esteem+) обладает выраженными адгезивными и защитными свойствами, способствуют заживлению, надежно прикрепляется к коже вокруг стомы, эффективно защищает ее от повреждений, связанных с воздействием на кожу содержимого из стомы.
2. Большое разнообразие сборных мешков (калоприемников) различных типов, форм и размеров, удовлетворяющее потребности пациентов с различными типами стом.
3. Угольные фильтры (регулируемые) для устранения неприятного запаха из мешка, конструкция фильтров позволяет регулировать поток воздуха, что препятствует раздуванию или слипанию мешка.
4. Усовершенствованное бесфланцевое соединение сборных мешков (калоприемников) для двухкомпонентных систем надежно фиксирует мешок к пластине, не допуская случайного разъединения.
5. Встроенная застежка «Инвизиклоуз» (Invisiclose) для дренируемых сборных мешков (калоприемников) - уникальный двойной запирающий механизм, встроенный в удлиненную горловину, исключает случайное открытие мешков во время использования.

3. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЙ К РАБОТЕ

Руки и кожа вокруг стомы должны быть чистыми, сухими, не должны подвергаться воздействию растворителей или жиросодержащих веществ.


Убедитесь в выборе сборного мешка (калоприемника) подходящего размера и типа.

ПОДГОТОВКА МЕШКОВ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВЫРЕЗАННЫМ ОТВЕРСТИЕМ:


1. Выберите сборный мешок с предварительно вырезанным отверстием, диаметр которого равен наибольшему диаметру стомы.
2. **Не увеличивайте предварительно вырезанное отверстие!**

ПОДГОТОВКА МЕШКОВ, СТАРТОВОЕ ОТВЕРСТИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДОВЫРЕЗАТЬ:

1. Используя маркировку на защитной бумаге пластины, начертите точный контур стомы.

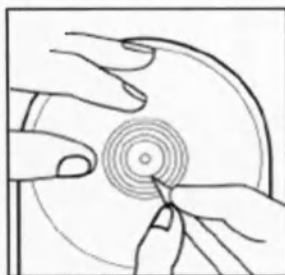

2. Вырезайте по нанесенному контуру. Не заходите за последнюю линию маркировки на защитной бумаге.

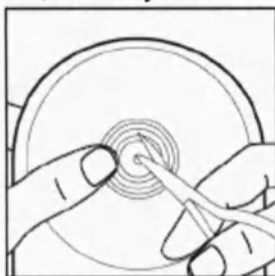


3. Удалите защитную бумагу. Убедитесь, что кожа вокруг стомы остается чистой и сухой.


4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЙ

Однокомпонентные средства реабилитации - сборные мешки (калоприемники)


1. Необходимо пропустить в мешок некоторое количество воздуха перед его присоединением к пластине путем его аккуратного расправления.

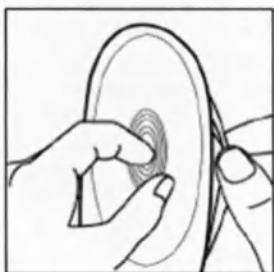

2. Снимите защитную пленку с гибкого адгезивного гидроколлоидного покрытия.

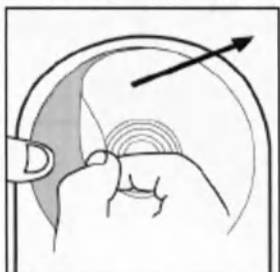

3. Выровняйте отверстие адгезивного гидроколлоидного покрытия по центру стомы.
4. Приложите изделие адгезивной частью к предварительно обработанной и осушенной коже вокруг стомы, слегка прижав рукой к коже на 30 секунд для лучшего приклепления.

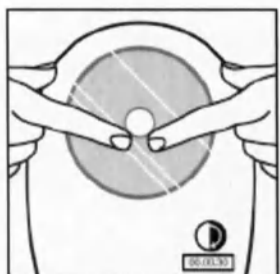


Средства реабилитации – сборные мешки (калоприемники) к двухкомпонентным системам

1. Наложите пластину на кожу вокруг стомы, пользуясь инструкцией по наложению пластин.
2. Убедитесь, что диаметр пластины совпадает с диаметром мешка
3. Необходимо пропустить в сборный мешок некоторое количество воздуха перед его присоединением к пластине путем его аккуратного расправления.
4. Снимите защитную бумагу с клейкой части мешка и присоедините мешок точно к стыковочной площадке пластины, начиная с его нижней части.
5. Сборный мешок можно при необходимости отсоединять от пластины для замены, при этом пластина может оставаться на теле и заменена в соответствии с рекомендациями в инструкции к пластине.


Дренируемые мешки имеют встроенную застежку «Инвизиклоуз»

Закрытие мешка

1. Сверните горловину мешка 3 раза до совмещения обеих частей застежки.

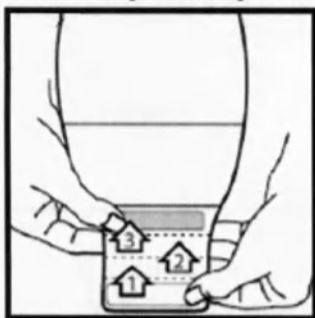

2. Сожмите застежку по всей ее длине, пока не почувствуете ее закрытия.

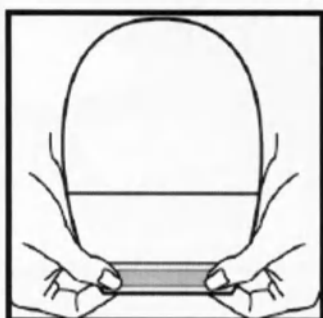


3. Сложите горловину мешка с застежкой еще раз, заправив ее под нетканую панель мешка.



Опорожнение мешка

1. Разъедините встроенную застежку «Инвизиклоуз».
2. Разверните горловину мешка.

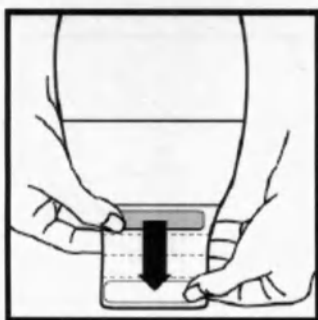

3. Сожмите горловину мешка большим и указательным пальцами по бокам и опорожните мешок.



5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЙ

Во время контакта с водой (принятие душа, ванны) все отверстия фильтра должны быть заклеены специальной бумагой. Необходимо освобождать отверстия фильтра после высыхания сборного мешка. Наклейки необходимо использовать для регулировки выхода газов. Избегайте слипания или чрезмерного раздувания мешка. Во избежание слипания сборного мешка необходимо оставлять незаклееным как минимум одно отверстие фильтра.

Внимание: фильтр не функционирует при намокании.

Уход за изделиями.

Для выпуска газов необходимо отогнуть сборный мешок за специальное ушко.

Перед обратным приклеиванием мешка убедитесь в том, что стыковочная площадка пластины и адгезивное кольцо мешка являются сухими и чистыми.

Смена мешка.

Однокомпонентные средства реабилитации - сборные мешки (калоприемники)

При необходимости смены сборного мешка (калоприемника), придерживая кожу у края адгезивной гидроколлоидной части, отделите ее от кожи брюшной стенки.



Средства реабилитации – сборные мешки (калоприемники) к двухкомпонентным системам

Отделите клейкую часть мешка от стыковочной площадки пластины и замените мешок.

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ

Перед использованием системы медицинский работник должен оценить необходимость использования того или иного вида изделий, подходящих пациенту.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. В течение дня можно менять несколько изделий. Максимальное время использования составляет 12 часов в день.
2. Необходимо следить за состоянием стомы. В случае изменения цвета, влажности и др. характеристик стомы, следует временно прекратить использование изделия. При сохранении симптомов следует проконсультироваться с медицинским работником.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Срок годности изделий 5 лет с даты изготовления.

Хранить в сухом месте при температуре 10-30° С.

