

证明书

CERTIFICATE



中国国际贸易促进委员会暨中国国际商会

China Council for the Promotion of International Trade is China Chamber of International Commerce

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

64291
27.08.2020

中国国际贸易促进委员会

China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

证明书

CERTIFICATE



号码 No. 203302A0/018120

兹证明：在所附文件上的宁波亿通照明科技有限公司的印章属实。

THIS IS TO CERTIFY THAT: the seal of NINGBO INTBRIGHT TECHNOLOGY CO., LTD on the annexed DOCUMENT is genuine.



授权签字:

Authorized
Signature:

Yang Jinjin

日期: 2020年04月27日

(Date: Apr. 27, 2020)

证明书查

Website for verifying the certificate: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

УТВЕРЖДАЮ


NINGBO INTBRIGHT TECHNOLOGY CO., LTD

Генеральный директор (General Manager)

(должность)

Чень Сяоцин (Chen Xiaoqin)

(ФИО)

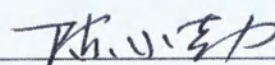

(подпись)

«11» февраля 2020 г.

М.П.

宁波亿通照明科技有限公司
NINGBO INTBRIGHT TECHNOLOGY CO., LTD

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Лампа бестеневая,
зарегистрированный товарный знак MED-MOS

NINGBO INTBRIGHT TECHNOLOGY CO., LTD

Оглавление

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	3
2. ОПИСАНИЕ	5
3. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	8
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	9
5. МАТЕРИАЛЫ	57
6. ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И УХОДЕ.	61
7. ГАРАНТИЯ	64

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Лампа бестеневая, зарегистрированный товарный знак MED-MOS:

I. 9101LED-A, 9101LED-B, 9001LED-TS, 9002LED-TS, 9003 LED- TS, 9005LED-TS

Состав:

- корпус лампы – 1 шт;
- светодиодный набор- 1 шт.;
- переключатель - 1 шт.;
- блок питания- 1 шт.;
- линза - 1 шт. (при необходимости);
- набор линз -1 шт. (при необходимости);
- запасной светодиодный набор- 1 шт. (при необходимости);
- подставка - 1 шт. (при необходимости)
- руководство по эксплуатации.

II. 9001LED-FS, 9001LED-7-FS, 9002LED-FS, 9003LED-FS, 9003LED-7-FS, 9005LED-7-FS, 9005LED-FS

Состав:

- корпус лампы – 1 шт;
- светодиодный набор- 1 шт.;
- переключатель - 1 шт.;
- блок питания- 1 шт.;
- запасной светодиодный набор-1 шт. (при необходимости);
- линза -1шт. (при необходимости);
- набор линз 1 шт. (при необходимости);
- металлический кронштейн со штативом - 1 шт. (при необходимости);
- руководство по эксплуатации.

III. 9001LED, 9001LED-7, 9002LED, 9003LED, 9003LED -7, 9005LED, 9005LED-7, 9006LED, 9006LED-TS, 9006LED-FS

Состав:

- корпус лампы – 1 шт;
- светодиодный набор- 1 шт.;
- переключатель -1 шт.;
- блок питания -1 шт.;
- запасной светодиодный набор- 1 шт. (при необходимости);
- линза -1шт. (при необходимости);
- набор линз 1 шт. (при необходимости);
- струбина -1 шт. (при необходимости);
- руководство по эксплуатации.

Назначение: Лампа бестеневая, зарегистрированный товарный знак MED-MOS предназначена для проведения визуального осмотра состояния кожи и ногтей пациента, для оказания медицинских услуг.

Показания к применению:

Лампа бестеневая, зарегистрированный товарный знак MED-MOS (далее по тексту «Лампа бестеневая», «Лампа», «Медицинское изделие», «Прибор») широко используется в медицинской деятельности. Она позволяет точно оценить состояние кожного покрова и ногтей пациента, визуализировать кожные дефекты и назначить правильное лечение.

Условия применения: используется в медицинских учреждениях.

Область применения: Дерматология.

Потенциальный пользователь: квалифицированный медицинский персонал.

Противопоказания

Противопоказаний к использованию Лампы бестеневой не выявлено.

Побочные действия

Побочных действий не выявлено.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Во время настройки лампы не располагайте руки между верхним и нижним рычагом (как показано на рисунке) во избежание травм:



- Приступайте к работе с чистыми руками;
- Отключайте питание после завершения работы;
- Если вы длительное время не используете лампу, убедитесь, что она хранится в надлежащих условиях;
- Используйте только в закрытых помещениях. Не используйте лампу в помещениях с высокой влажностью, таких как ванная комната. Не используйте лампу под прямыми солнечными лучами;
- Не разбирайте лампу самостоятельно, если Вы не являетесь квалифицированным электриком;
- Перед ремонтом необходимо снять штепсель;
- Если поврежден наружный гибкий кабель, замену можно произвести только в сервисном центре во избежание получения травм;
- При возникновении неисправностей, обращайтесь в специализированные мастерские по ремонту;
- При повреждении кабеля, приобретайте новый у изготовителя данной модели.

РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ

Анализ рисков для Лампы бестеневой выполнен согласно EN ISO 14971. Нет риска для здоровья пользователя и пациента. Преимущества огромны, остаточный риск является приемлемым.

2. ОПИСАНИЕ

Лампа бестеневая, зарегистрированный товарный знак MED-MOS предназначена для проведения визуального осмотра состояния кожи и ногтей пациента, для оказания медицинских услуг.

Лампы представлены различными модификациями в зависимости от варианта крепления изделия:

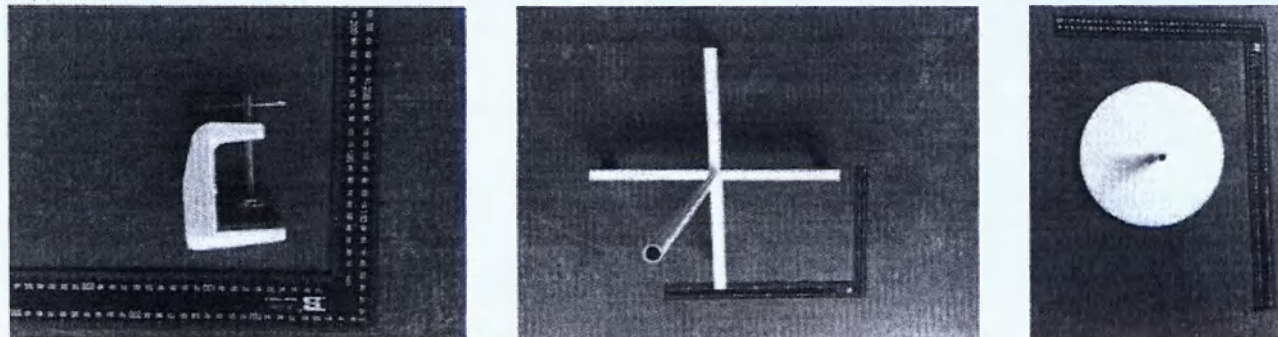


Рисунок 1. Варианты крепления медицинского изделия

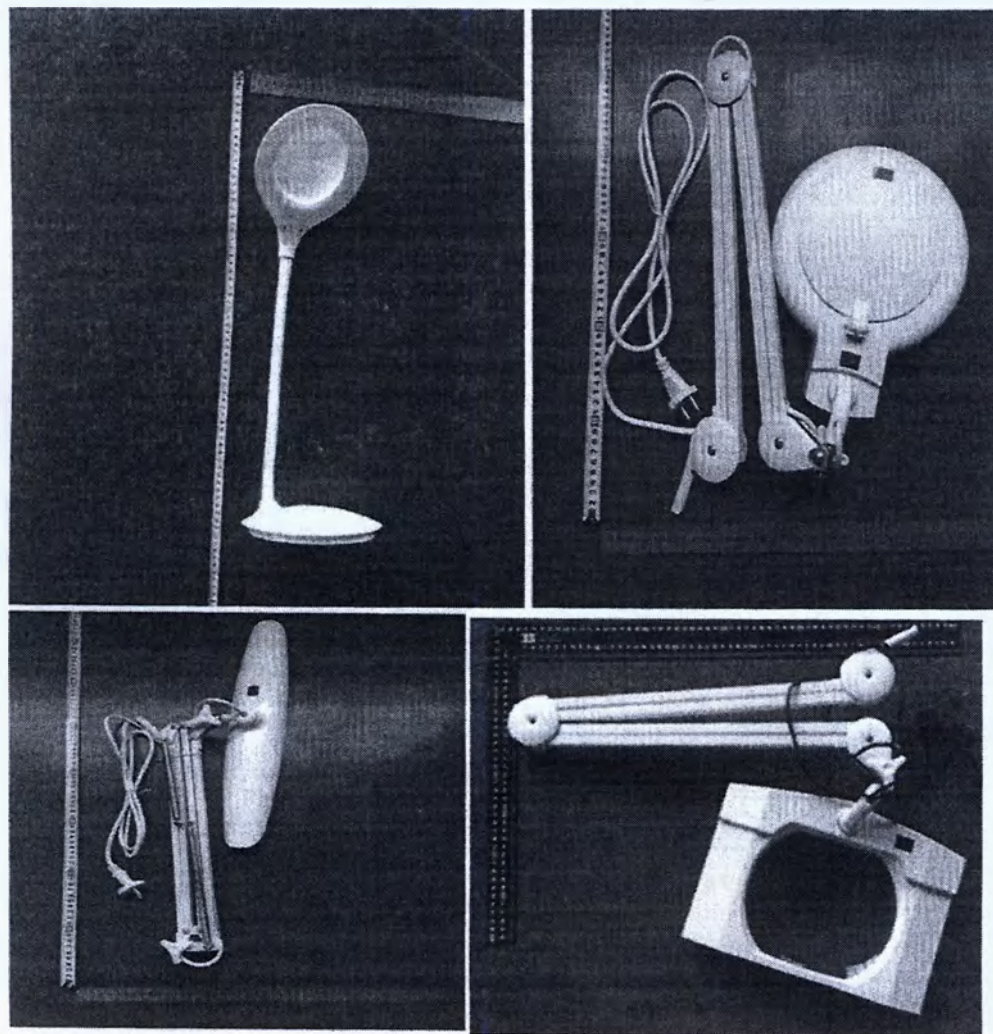


Рисунок 2. Внешний вид медицинского изделия

Конструкция основного блока изделия


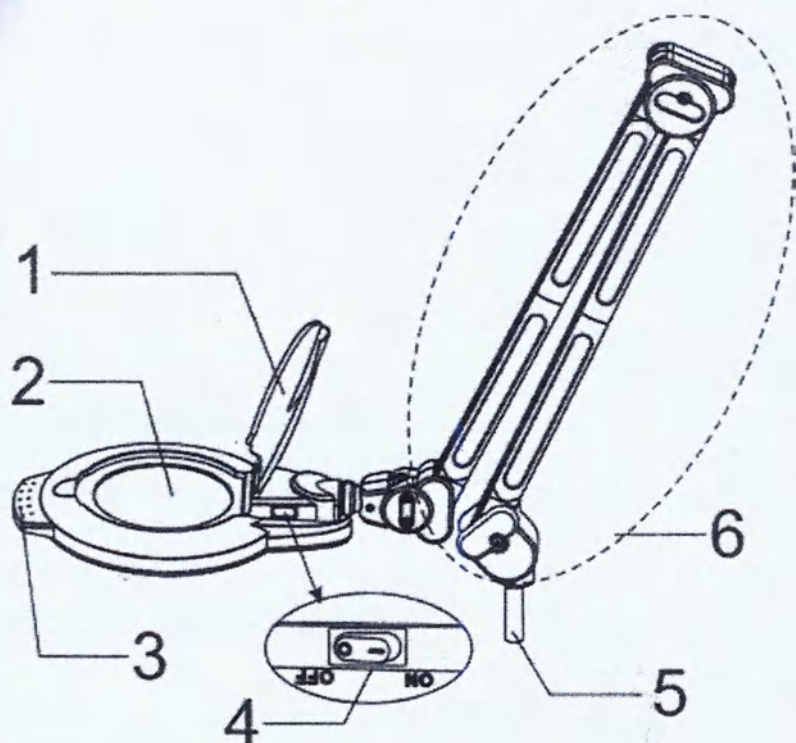



Рисунок 3. Конструкция основного блока изделия.

1. Защитная крышка (часть корпуса лампы)
2. Линза
3. Ручка регулировки (часть корпуса лампы)
4. Переключатель
5. Крепление корпуса лампы
6. Каркас (часть корпуса лампы)

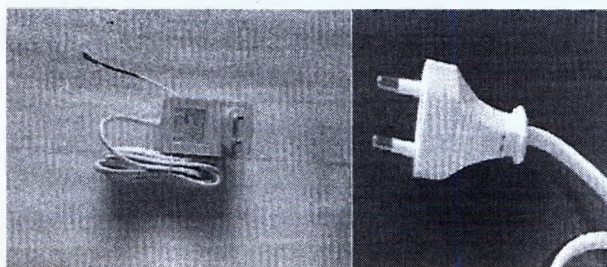




Блок питания

Блок питания это электрический прибор, преобразующий электрическую энергию из одного её представления в другое.

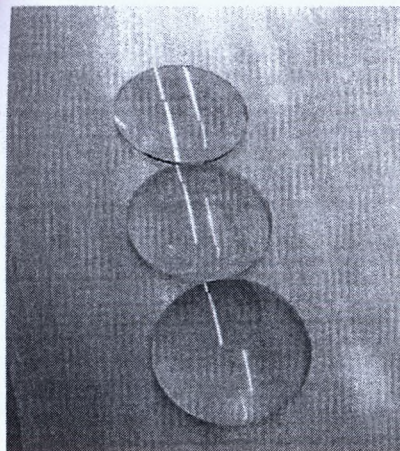

Набор линз


Линза это прозрачное тело, ограниченное двумя поверхностями, преломляющими световые лучи, способное формировать оптич. изображения предметов, светящихся собственным или отражённым светом. С их помощью врач сможет рассмотреть определенный участок кожи тщательнее, что существенно поможет в работе и сократит время на проведение осмотра и процедур.

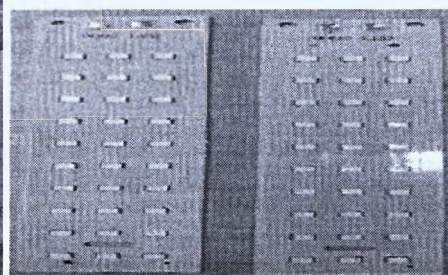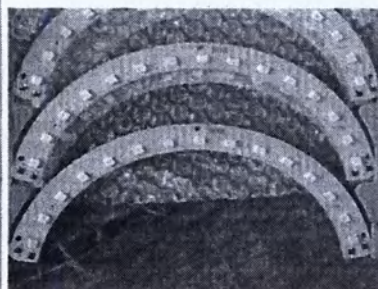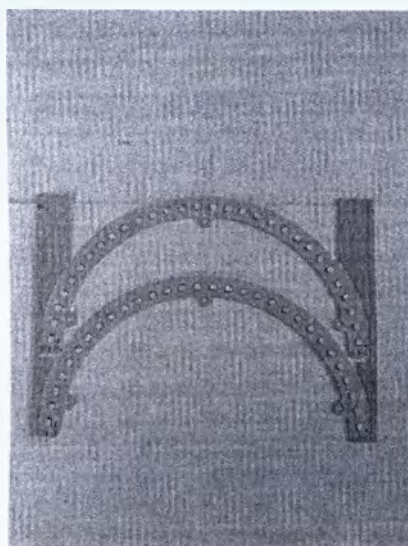

Запасной светодиодный набор

Светодиоды - эти источники света наиболее экономичные и экологичные. Они позволяют экономить энергию и обеспечить превосходное освещение.

Запасной светодиодный набор используется для замены или ремонта основного набора.

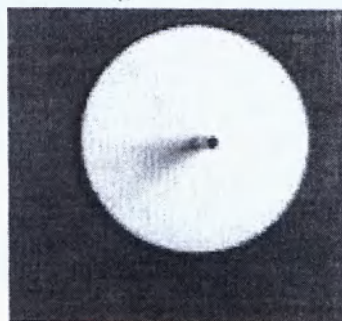

Подставка

Подставка дает возможность устанавливать лампу на любую ровную поверхность.

3. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Распаковка и осмотр

1. Перед подключением лампы убедитесь, что изделие не было повреждено во время транспортировки, что упаковка не была повреждена с последующим смещением или исчезновением деталей. В случае обнаружения повреждений или нехватки каких-либо деталей немедленно сообщите об этом производителю, сфотографировав доставленное вам оборудование. Производитель не несет ответственности за повреждения аппарата, возникшие после доставки.
2. Перед установкой лампы необходимо проверить и подготовить место инсталляции: убедитесь, что частота и напряжение прибора соответствуют частоте и напряжению соединительных элементов, находящихся в кабинете.
3. Зафиксируйте изделие на полу/на столе, в зависимости от варианта исполнения изделия.
4. Включите лампу в электросеть.
5. Откройте защитную крышку и отрегулируйте лампу.
6. Установите требуемый угол падения света.

Установка и эксплуатация

Закрепите кронштейн до края любой горизонтальной поверхности, которую вы выбрали. Вставьте нижний стержень рычага в отверстие в кронштейне. Вставьте лампу.

Правильная установка линзы

1. Поставьте лупу на стол и вытяните штепсель.
2. Поверните линзу против часовой стрелки до разблокировки.
3. Поставьте другую линзу и поверните по часовой стрелке до полной блокировки.
4. Соедините лупу с кронштейном и вставьте лупу.
5. Будьте осторожны, так как линза хрупкая.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Медицинское изделие пригодно к эксплуатации при температуре от -5°C до $+40^{\circ}\text{C}$, при относительной влажности воздуха не более 95% и устойчиво к воздействию биологических жидкостей организма.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортировка

Транспортировка должна производиться крытым транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида, с обеспечением предохранения от механических повреждений и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах. При погрузке/разгрузке и транспортировки необходимо бережное обращение с изделием. Не рекомендуется подвергать сильной тряске и ударам. В случае несоблюдения данных рекомендаций возможен преждевременный выход лампы из строя и возможность использовать ее по назначению.

Хранение

Необходимо, чтобы прибор был помещен в закрытое, чистое, хорошо освещенное, с постоянной температурой помещение без повышенного уровня влажности и пылеобразования. Прежде чем оставить изделие на продолжительное хранение, нужно убедиться, что:

- прибор выключен;

- розетка заземлена.

Хранить и транспортировать медицинское изделие следует при температуре от -5°C до +40°C, при относительной влажности воздуха не более 95%.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лампа бестеневая, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, вариант исполнения 9101LED-A:

Наименование характеристики	Значение
	
Тип крепления	Подставка
Линза	
Количество линз в комплекте	1
Материал линз	Стекло
Размеры линз	Ø 100 мм (полезный - Ø 95 мм)
Увеличение линз	3/5 диоптрий (набор линз 8/10/12/15 диоптрий)
Лампа	
Тип лампы	Светодиодная, двухполосная
Исполнение (с затемнением/без затемнения)	Без затемнения
Режимы яркости свечения (в % от максимальной яркости)	100%
Материал плафона	Пластик
Количество светодиодов	60
Цветовая температура светодиодов	5600K~6000K
Яркость светодиодов	600 lm
Угол рассеивания светодиодов	120°
Размеры корпуса (длина x ширина x толщина или диаметр x толщина)	170*140*330 мм
Наличие откидной крышки плафона	Да
Фиксация лампы относительно держателя	Фиксированное положение
Держатель лампы-лупы	
Конструкция держателя	с фиксацией в промежуточных положениях

Материал держателя	Сталь с высококачественным полимерным покрытием
Длина секций держателя (по осям шарниров)	308 мм
Тип фиксации промежуточных положений/ количество промежуточных положений	Встроенный пружинный механизм с автофиксацией в выбранном положении/ бесступенчато
Подставка	
Материал подставки	Сталь
Размеры плоского основания подставки	220 x 180 мм
Переключатель	
Размер	14,8 мм
Тип переключателя	Кнопочный, круглый
Блок питания	
Входное напряжение	100-240 В
Выходное напряжение	10-12 В
Размер	72,8x41 мм
Набор линз	
Количество шт в наборе	4 шт
Светодиодный набор	
Количество шт в наборе	30 шт
Общие параметры:	
Отклонение лампы от точки крепления держателя (расстояние по горизонтали от оси крепления к штативу (струбцине) до центра лампы-луны)	28,5 – 106 см
Угол вращения лампы в горизонтальной плоскости вокруг точки крепления к держателю	+180°/ -180°, бесступенчато
Угол поворота лампы вокруг горизонтальной оси (от себя/ на себя)	+115°/ -115°, бесступенчато
Угол наклона лампы относительно точки крепления к держателю (вверх/ вниз)	Вниз – 90°, вверх - 135°
Угол вращения держателя относительно оси крепления к штативу (струбцине)	360°
Диапазон изменения угла между секциями держателя	От 0 до 230°
Угол наклона нижней секции держателя относительно горизонтальной плоскости	От 0 до 115°
Источник питания	Сеть переменного тока 220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	7.5 Вт
Длина сетевого шнура	1,6 м
Цвет изделия	Белый/ светло-серый
Масса изделия нетто (в сборе)	1,2 кг

Масса изделия брутто (в упаковке)	2 кг
Количество в упаковке	1 комплект
Размеры упаковки	28х21х32 см
Гарантия	12 месяцев
Степень защиты корпуса от проникания воды и твердых частиц в соответствии с МЭК 60529	IPX0


Лампа бестеневая, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, вариант исполнения 9101LED-B:

Наименование характеристики	Значение
	
Тип крепления	Подставка
Линза	
Количество линз в комплекте	1
Материал линз	Стекло
Размеры линз	Ø 127 мм (полезный - Ø 125 мм)
Увеличение линз	3/5 диоптрий (набор линз 8/10/12/15 диоптрий)
Лампа	
Тип лампы	Светодиодная, двухполосная
Исполнение (с затемнением/без затемнения)	с затемнением
Режимы яркости свечения (в % от максимальной яркости)	100% - 75% - 50% - 25%
Материал плафона	Пластик
Количество светодиодов	60
Цветовая температура светодиодов	5600K~6000K
Яркость светодиодов	1200 lm
Угол рассеивания светодиодов	120°

Размеры корпуса (длина x ширина x толщина или диаметр x толщина)	220 x 180 x 330 мм
Наличие откидной крышки плафона	Да
Фиксация лампы относительно держателя	Фиксированное положение
Держатель лампы-лупы	
Конструкция держателя	с фиксацией в промежуточных положениях
Материал держателя	Сталь с высококачественным полимерным покрытием
Длина секций держателя (по осям шарниров)	40 - 41,3 мм (в зависимости от положения)
Тип фиксации промежуточных положений/ количество промежуточных положений	Типа "гусиная шея"/ бесступенчато
Подставка	
Материал подставки	Сталь
Размеры плоского основания подставки	220 x 180 мм
Переключатель	
Размер	16,3 мм
Тип переключателя	Кнопочный, круглый
Блок питания	
Входное напряжение	100-240 В
Выходное напряжение	18,5 В
Размер	72,8x41 мм
Набор линз	
Количество шт в наборе	4 шт
Светодиодный набор	
Количество шт в наборе	60 шт
Общие параметры:	
Отклонение лампы от точки крепления держателя (расстояние по горизонтали от оси крепления к штативу (струбцине) до центра лампы-лупы)	28,5 – 106 см
Угол вращения лампы в горизонтальной плоскости вокруг точки крепления к держателю	+1800/ -1800, бесступенчато
Угол поворота лампы вокруг горизонтальной оси (от себя/ на себя)	+1150/ -1150, бесступенчато
Угол наклона лампы относительно точки крепления к держателю (вверх/ вниз)	Вниз – 900, вверх - 1350

Угол вращения держателя относительно оси крепления к штативу (струбцине)	3600
Диапазон изменения угла между секциями держателя	От 0 до 2300
Угол наклона нижней секции держателя относительно горизонтальной плоскости	От 0 до 1150
Источник питания	Сеть переменного тока 220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	14 Вт
Длина сетевого шнура	1,6 м
Цвет изделия	Белый/ светло-серый
Масса изделия нетто (в сборе)	2, 2кг
Масса изделия брутто (в упаковке)	2 , 75кг
Количество в упаковке	1 комплект
Размеры упаковки	28 x21 x 32 см
Гарантия	12 месяцев
Степень защиты корпуса от проникания воды и твердых частиц в соответствии с МЭК 60529	IPX0

Лампа бестеневая, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, вариант исполнения 9001LED-TS:

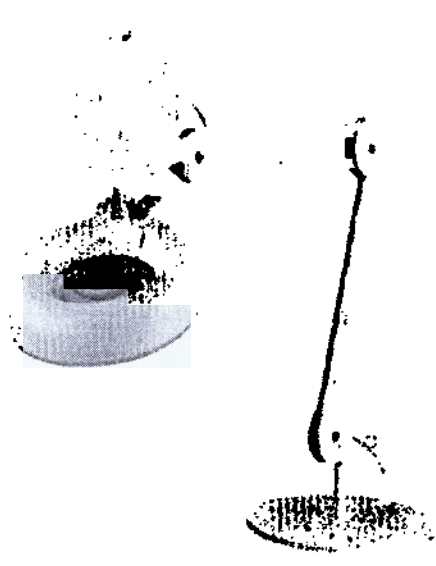Наименование характеристики	Значение
	
Тип крепления	Подставка
Линза	
Количество линз в комплекте	1
Материал линз	Стекло
Размеры линз	Ø 127 мм (полезный - Ø 125 мм)

Увеличение линз	3/5/8 диоптрий(набор линз 10/12/15 диоптрий)
Лампа	
Тип лампы	Светодиодная, двухполосная
Исполнение (с затемнением/без затемнения)	Без затемнения
Режимы яркости свечения (в % от максимальной яркости)	100%
Материал плафона	Пластик
Количество светодиодов	60
Цветовая температура светодиодов	5600K~6000K
Яркость светодиодов	1200 lm
Угол рассеивания светодиодов	120°
Размеры корпуса (длина x ширина x толщина или диаметр x толщина)	298 x 215 x 39 мм
Наличие откидной крышки плафона	Да
Фиксация лампы относительно держателя	Фиксированное положение
Держатель лампы-лупы	
Конструкция держателя	Двухсекционный, двухрычажный, с внутренней пружиной, с фиксацией в промежуточных положениях
Материал держателя	Сталь с высококачественным полимерным покрытием
Длина секций держателя (по осям шарниров)	40 - 41,3 мм (в зависимости от положения)
Тип фиксации промежуточных положений/ количество промежуточных положений	Встроенный пружинный механизм с автофиксацией в выбранном положении/ бесступенчато
Подставка	
Материал подставки	Сталь
Размеры плоского основания подставки	220 x 180 мм
Переключатель	
Размер	20,6 x 14,7 мм
Тип переключателя	Кнопочный, прямоугольный
Блок питания	
Входное напряжение	110-220 В
Выходное напряжение	24-25 В
Размер	60 x 35 мм
Набор линз	
Количество шт в наборе	4 шт

Светодиодный набор	
Количество шт в наборе	60 шт
Общие параметры:	
Отклонение лампы от точки крепления держателя (расстояние по горизонтали от оси крепления к штативу (струбцине) до центра лампы-лупы)	28,5 – 106 см
Угол вращения лампы в горизонтальной плоскости вокруг точки крепления к держателю	+1800/ -1800, бесступенчато
Угол поворота лампы вокруг горизонтальной оси (от себя/ на себя)	+1150/ -1150, бесступенчато
Угол наклона лампы относительно точки крепления к держателю (вверх/ вниз)	Вниз – 900, вверх - 1350
Угол вращения держателя относительно оси крепления к штативу (струбцине)	3600
Диапазон изменения угла между секциями держателя	От 0 до 2300
Угол наклона нижней секции держателя относительно горизонтальной плоскости	От 0 до 1150
Источник питания	Сеть переменного тока 220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	12 Вт
Длина сетевого шнура	1,6 м
Цвет изделия	Белый/ светло-серый
Масса изделия нетто (в сборе)	8,5 кг
Масса изделия брутто (в упаковке)	9,5 кг
Количество в упаковке	1 комплект
Размеры упаковки	59 x 26,5 x 14 см
Гарантия	12 месяцев
Степень защиты корпуса от проникания воды и твердых частиц в соответствии с МЭК 60529	IPX0

Лампа бестеневая, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, вариант исполнения 9002LED-TS:

Наименование характеристики	Значение
Внешний вид	
Тип крепления	Подставка
Линза	
Количество линз в комплекте	1
Материал линз	Стекло
Размеры линз	189x157 мм (полезные – 185x155 мм)
Увеличение линз	3/5(набор линз 8/10/12/15 диоптрий)
Лампа	
Тип лампы	Светодиодная, двухполосная
Исполнение (с затемнением/без затемнения)	Без затемнения
Режимы яркости свечения (в % от максимальной яркости)	100%
Материал плафона	Пластик
Количество светодиодов	60
Цветовая температура светодиодов	5600K~6000K
Яркость светодиодов	1200 lm
Угол рассеивания светодиодов	120°
Размеры корпуса (длина x ширина x толщина или диаметр x толщина)	298 x 215 x 39 мм
Наличие откидной крышки плафона	нет
Фиксация лампы относительно держателя	Фиксированное положение
Держатель лампы-лупы	
Конструкция держателя	Двухсекционный, двухрычажный, с внутренней пружиной, с фиксацией в промежуточных положениях
Материал держателя	Сталь с высококачественным полимерным покрытием
Длина секций держателя (по осям шарниров)	40 - 41,3 мм (в зависимости от положения)
Тип фиксации промежуточных положений/ количество промежуточных положений	Встроенный пружинный механизм с автофиксацией в выбранном положении/ бесступенчато
Подставка	
Материал подставки	Сталь
Габаритные размеры подставки	220x270x60 мм
Переключатель	
Размер	20,6 x 14,7 мм

Тип переключателя	Кнопочный, прямоугольный
Блок питания	
Входное напряжение	110-220 В
Выходное напряжение	24-25 В
Размер	60 x 35 мм
Набор линз	
Количество шт в наборе	5 шт
Светодиодный набор	
Количество шт в наборе	60 шт
Общие параметры:	
Отклонение лампы от точки крепления держателя (расстояние по горизонтали от оси крепления к штативу (струбцине) до центра лампы-лупы)	28,5 – 106 см
Угол вращения лампы в горизонтальной плоскости вокруг точки крепления к держателю	+180°/ -180°, бесступенчато
Угол поворота лампы вокруг горизонтальной оси (от себя/ на себя)	+115°/ -115°, бесступенчато
Угол наклона лампы относительно точки крепления к держателю (вверх/ вниз)	Вниз – 90°, вверх - 135°
Угол вращения держателя относительно оси крепления к штативу (струбцине)	360°
Диапазон изменения угла между секциями держателя	От 0 до 230°
Угол наклона нижней секции держателя относительно горизонтальной плоскости	От 0 до 115°
Источник питания	Сеть переменного тока 220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	12 Вт
Длина сетевого шнура	1,6 м
Цвет изделия	Белый/ светло-серый
Масса изделия нетто (в сборе)	4,2 кг
Масса изделия брутто (в упаковке)	5 кг
Количество в упаковке	1 комплект
Размеры упаковки	59 x 26,5 x 14 см
Гарантия	12 месяцев
Степень защиты корпуса от проникания воды и твердых частиц в соответствии с МЭК 60529	IPX0

Лампа бестеневая, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, вариант исполнения 9003LED-TS:

Наименование характеристики	Значение
Внешний вид	
Тип крепления	Подставка
Линза	
Количество линз в комплекте	1
Материал линз	Стекло
Размеры линз	Ø 127 мм (полезный - Ø 125 мм)
Увеличение линз	3/5/8 диоптрий(набор линз 10/12/15 диоптрий)
Лампа	
Тип лампы	Светодиодная, двухполосная
Исполнение (с затемнением/без затемнения)	С затемнением
Режимы яркости свечения (в % от максимальной яркости)	100% - 75% - 50% - 25%
Материал плафона	Пластик
Количество светодиодов	60
Цветовая температура светодиодов	5600K~6000K
Яркость светодиодов	1200 lm
Угол рассеивания светодиодов	120°
Размеры корпуса (длина x ширина x толщина или диаметр x толщина)	298 x 215 x 39 мм
Наличие откидной крышки плафона	Да
Фиксация лампы относительно держателя	Фиксированное положение
Держатель лампы-лупы	
Конструкция держателя	Двухсекционный, двухрычажный, с внутренней пружиной, с фиксацией в промежуточных положениях
Материал держателя	Сталь с высококачественным полимерным покрытием
Длина секций держателя (по осям шарниров)	40 - 41,3 мм (в зависимости от положения)
Тип фиксации промежуточных положений/ количество промежуточных положений	Встроенный пружинный механизм с автофиксацией в выбранном положении/ бесступенчато

Подставка	
Материал подставки	Сталь
Размеры плоского основания подставки	220 x 180 мм
Переключатель	
Размер	18 x 12 мм
Тип переключателя	Кнопочный, прямоугольный
Блок питания	
Входное напряжение	100-240 В
Выходное напряжение	18,5 В
Размер	72,8x41 мм
Набор линз	
Количество шт в наборе	3 шт
Светодиодный набор	
Количество шт в наборе	60 шт
Общие параметры:	
Отклонение лампы от точки крепления держателя (расстояние по горизонтали от оси крепления к штативу (струбцине) до центра лампы-лупы)	28,5 – 106 см
Угол вращения лампы в горизонтальной плоскости вокруг точки крепления к держателю	+180°/ -180°, бесступенчато
Угол поворота лампы вокруг горизонтальной оси (от себя/ на себя)	+115°/ -115°, бесступенчато
Угол наклона лампы относительно точки крепления к держателю (вверх/ вниз)	Вниз – 90°, вверх - 135°
Угол вращения держателя относительно оси крепления к штативу (струбцине)	360°
Диапазон изменения угла между секциями держателя	От 0 до 230°
Угол наклона нижней секции держателя относительно горизонтальной плоскости	От 0 до 115°
Источник питания	Сеть переменного тока 220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	14 Вт
Длина сетевого шнура	1,6 м
Цвет изделия	Белый/ светло-серый
Масса изделия нетто (в сборе)	8,2 кг
Масса изделия брутто (в упаковке)	9,5 кг
Количество в упаковке	1 комплект
Размеры упаковки	59 x 26,5 x 14 см
Гарантия	12 месяцев
Степень защиты корпуса от проникания воды и твердых частиц в соответствии с МЭК 60529	IPX0

Лампа бестеневая, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, вариант исполнения 9005LED-TS:

Наименование характеристики	Значение
Внешний вид	
Тип крепления	Подставка
Линза	
Количество линз в комплекте	1
Материал линз	Стекло
Размеры линз	Ø 127 мм (полезный - Ø 125 мм)
Увеличение линз	3/5/8 диоптрий (набор линз 10/12/15 диоптрий)
Лампа	
Тип лампы	Светодиодная, двухполосная
Исполнение (с затемнением/без затемнения)	Без затемнения
Режимы яркости свечения (в % от максимальной яркости)	100%
Материал плафона	Пластик
Количество светодиодов	60
Цветовая температура светодиодов	5600K~6000K
Яркость светодиодов	1200 lm
Угол рассеивания светодиодов	120°
Размеры корпуса (длина x ширина x толщина или диаметр x толщина)	298 x 215 x 39 мм
Наличие откидной крышки плафона	Да
Фиксация лампы относительно держателя	Барашковый винт
Держатель лампы-лупы	
Конструкция держателя	Двухсекционный, двухрычажный, с внутренней пружиной, с фиксацией в промежуточных положениях
Материал держателя	Сталь с высококачественным полимерным покрытием
Длина секций держателя (по осям шарниров)	40 - 41,3 мм (в зависимости от положения)
Тип фиксации промежуточных положений/ количество промежуточных положений	Встроенный пружинный механизм с автофиксацией в выбранном положении/ бесступенчато

Подставка	
Материал подставки	Сталь
Размеры плоского основания подставки	220 x 180 мм
Переключатель	
Размер	16,3
Тип переключателя	Кнопочный, круглый
Блок питания	
Входное напряжение	110-220 В
Выходное напряжение	24-25 В
Размер	60 x 35 мм
Набор линз	
Количество шт в наборе	4 шт
Светодиодный набор	
Количество шт в наборе	60 шт
Размер	60 x 35мм (прямоугольный)
Общие параметры:	
Отклонение лампы от точки крепления держателя (расстояние по горизонтали от оси крепления к штативу (струбине) до центра лампы-лупы)	28,5 – 106 см
Угол вращения лампы в горизонтальной плоскости вокруг точки крепления к держателю	+180°/ -180°, бесступенчато
Угол поворота лампы вокруг горизонтальной оси (от себя/ на себя)	+115°/ -115°, бесступенчато
Угол наклона лампы относительно точки крепления к держателю (вверх/ вниз)	Вниз – 90°, вверх - 135°
Угол вращения держателя относительно оси крепления к штативу (струбине)	360°
Диапазон изменения угла между секциями держателя	От 0 до 230°
Угол наклона нижней секции держателя относительно горизонтальной плоскости	От 0 до 115°
Источник питания	Сеть переменного тока 220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	12 Вт
Длина сетевого шнура	1,6 м
Цвет изделия	Белый/ светло-серый
Масса изделия нетто (в сборе)	8,5 кг
Масса изделия брутто (в упаковке)	9, 5 кг
Количество в упаковке	1 комплект
Размеры упаковки	59 x 26,5 x 14 см
Гарантия	12 месяцев
Степень защиты корпуса от проникания воды и твердых частиц в соответствии с МЭК 60529	IPX0

Лампа бестеневая, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, вариант исполнения 9001LED-FS:

Наименование характеристики	Значение
Внешний вид	
Тип крепления	Металлический кронштейн со штативом
Линза	
Количество линз в комплекте	1
Материал линз	Стекло
Диаметр линз	Ø 127 мм (полезный - Ø 122 мм)
Увеличение линз	3/5/8 диоптрий(набор линз 10/12/15 диоптрий)
Лампа	
Тип лампы	Кольцевая, светодиодная
Исполнение (с затемнением/без затемнения)	Без затемнения
Режимы яркости свечения (в % от максимальной яркости)	100%
Материал плафона	Пластик
Количество светодиодов	60
Цветовая температура светодиодов	5600K~6000K
Яркость светодиодов	1200 lm
Угол рассеивания светодиодов	120°
Размеры корпуса (длина x ширина x толщина или диаметр плафона x толщина)	280 x 218 x 25 мм
Наличие откидной крышки плафона	Да
Фиксация лампы относительно держателя	Барашковый винт
Держатель лампы-лупы	
Конструкция держателя	Двухсекционный, двухрычажный, с внутренней пружиной, с фиксацией в промежуточных положениях
Материал держателя	Сталь с высококачественным полимерным покрытием
Длина секций держателя (по осям шарниров)	40-41,3 мм (в зависимости от положения)
Тип фиксации промежуточных положений/ количество промежуточных положений	Встроенный пружинный механизм с автофиксацией в выбранном положении/ бесступенчато
Металлический кронштейн со штативом	

Основание штатива	Сборно-разборная 4-лучевая крестовина из стальных труб прямоугольного профиля с высококачественным полимерным покрытием, с вставками-утяжелителями и пластиковыми заглушками
Сечение трубы колесной консоли	50 x 30 мм
Стойка штатива	Стальная круглая труба с высококачественным полимерным покрытием
Сечение трубы стойки штатива	Ø 22 мм
Консоли крестовины снабжены роликами для удобства перемещения стойки. Колёса самоориентирующиеся, двойные с возможностью поворота на 360°	Соответствие
Диаметр круга вращения (по осям крепления роликов)	Ø 62 мм
Тип роликов	Двойные, закрытые, съемные, для твердых напольных покрытий,
Материал роликов	Пластик
Диаметр роликов	40 мм
Тормозная система	Индивидуальный тормоз на одном из роликов
Усилие, необходимое для включения тормозной системы роликов	49 Н
Переключатель	
Размер	20,6 x 14,7 мм
Тип переключателя	Кнопочный, прямоугольный
Блок питания	
Входное напряжение	110-220 В
Выходное напряжение	24-25 В
Размер	60 x 35 мм
Набор линз	
Количество шт в наборе	4 шт
Светодиодный набор	
Количество шт в наборе	60 шт
Общие параметры:	
Отклонение лампы от точки крепления держателя (расстояние по горизонтали от оси крепления к штативу (струбцине) до центра лампы-лупы)	30 – 108 см
Угол вращения лампы в горизонтальной плоскости вокруг точки крепления к держателю	+180°/ -180°, бесступенчато
Угол поворота лампы вокруг горизонтальной оси (от себя/ на себя)	+115°/ -115°, бесступенчато
Угол наклона лампы относительно точки крепления к держателю (вверх/ вниз)	Вниз – 90°, вверх - 135°
Угол вращения держателя относительно оси крепления к штативу (струбцине)	360°
Диапазон изменения угла между секциями держателя	От 0 до 230°

Угол наклона нижней секции держателя относительно горизонтальной плоскости	От 0 до 115°
Источник питания	Сеть переменного тока 220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	12 Вт
Длина сетевого шнура	1,6 м
Цвет изделия	Белый/ светло-серый
Масса изделия нетто (в сборе)	8,7 кг
Масса изделия брутто (в упаковке)	9,9 кг
Количество в упаковке	1 комплект
Размеры упаковки	71 x 29,5 x 24 см
Гарантия	12 месяцев
Степень защиты корпуса от проникания воды и твердых частиц в соответствии с МЭК 60529	IPX0

Лампа бестеневая, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, вариант исполнения 9001LED-7-FS:

Наименование характеристики	Значение
Внешний вид	
Тип крепления	Металлический кронштейн со штативом
Линза	
Количество линз в комплекте	1
Материал линз	Стекло
Диаметр линз	Ø 127 мм (полезный - Ø 122 мм)
Увеличение линз	3/5/8 диоптрий(набор линз 10/12/15 диоптрий)
Лампа	
Тип лампы	Кольцевая, светодиодная
Исполнение (с затемнением/без затемнения)	Без затемнения
Режимы яркости свечения (в % от максимальной яркости)	100%
Материал плафона	Пластик
Количество светодиодов	60
Цветовая температура светодиодов	5600K~6000K
Яркость светодиодов	1200 lm
Угол рассеивания светодиодов	120°
Размеры корпуса (длина x ширина x толщина или диаметр плафона x толщина)	280 x 218 x 25 мм
Наличие откидной крышки плафона	Да

Фиксация лампы относительно держателя	Барашковый винт
Держатель лампы-лупы	
Конструкция держателя	Двухсекционный, двухрычажный, с внешней пружиной, с фиксацией в промежуточных положениях
Материал держателя	Сталь с высококачественным полимерным покрытием
Длина секций держателя (по осям шарниров)	40-41,3 мм (в зависимости от положения)
Тип фиксации промежуточных положений/ количество промежуточных положений	Встроенный пружинный механизм с автофиксацией в выбранном положении/ бесступенчато
Металлический кронштейн со штативом	
Основание штатива	Сборно-разборная 4-лучевая крестовина из стальных труб прямоугольного профиля с высококачественным полимерным покрытием, с вставками-утяжелителями и пластиковыми заглушками
Сечение трубы колесной консоли	50 x 30 мм
Стойка штатива	Стальная круглая труба с высококачественным полимерным покрытием
Сечение трубы стойки штатива	Ø 22 мм
Консоли крестовины снабжены роликами для удобства перемещения стойки. Колёса самоориентирующиеся, двойные с возможностью поворота на 360°	Соответствие
Диаметр круга вращения (по осям крепления роликов)	Ø 62 мм
Тип роликов	Двойные, закрытые, съемные, для твердых напольных покрытий,
Материал роликов	Пластик
Диаметр роликов	40 мм
Тормозная система	Индивидуальный тормоз на одном из роликов
Усилие, необходимое для включения тормозной системы роликов	49 Н
Переключатель	
Размер	20,6 x 14,7 мм
Тип переключателя	Кнопочный, прямоугольный
Блок питания	
Входное напряжение	110-220 В
Выходное напряжение	24-25 В
Размер	60 x 35 мм
Набор линз	
Количество шт в наборе	3 шт
Светодиодный набор	
Количество шт в наборе	60 шт
Общие параметры:	
Отклонение лампы от точки крепления держателя (расстояние по горизонтали от	30 – 108 см

оси крепления к штативу (струбцине) до центра лампы-лупы)	
Угол вращения лампы в горизонтальной плоскости вокруг точки крепления к держателю	+180°/-180°, бесступенчато
Угол поворота лампы вокруг горизонтальной оси (от себя/ на себя)	+115°/-115°, бесступенчато
Угол наклона лампы относительно точки крепления к держателю (вверх/ вниз)	Вниз – 90°, вверх - 135°
Угол вращения держателя относительно оси крепления к штативу (струбцине)	360°
Диапазон изменения угла между секциями держателя	От 0 до 230°
Угол наклона нижней секции держателя относительно горизонтальной плоскости	От 0 до 115°
Источник питания	Сеть переменного тока 220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	12 Вт
Длина сетевого шнура	1,6 м
Цвет изделия	Белый/ светло-серый
Масса изделия нетто (в сборе)	8,7 кг
Масса изделия брутто (в упаковке)	9,9 кг
Количество в упаковке	1 комплект
Размеры упаковки	71 x 29,5 x 24 см
Гарантия	12 месяцев
Степень защиты корпуса от проникания воды и твердых частиц в соответствии с МЭК 60529	IPX0

Лампа бестеневая, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, вариант исполнения 9002LED-FS:

Наименование характеристики	Значение
Внешний вид	
Тип крепления	Металлический кронштейн со штативом
Линза	
Количество линз в комплекте	1
Материал линз	Стекло
Размеры линз	189x157 мм (полезные – 185x155 мм)

Увеличение линз	3/5 (набор линз 8/10/12/15 диоптрий)
Лампа	
Тип лампы	Светодиодная, двухполосная
Исполнение (с затемнением/без затемнения)	с затемнением
Режимы яркости свечения (в % от максимальной яркости)	100% - 75% - 50% - 25%
Материал плафона	Пластик
Количество светодиодов	60
Цветовая температура светодиодов	5600K~6000K
Яркость светодиодов	1200 lm
Угол рассеивания светодиодов	120°
Размеры корпуса (длина x ширина x толщина или диаметр x толщина)	298 x 215 x 39 мм
Наличие откидной крышки плафона	нет
Фиксация лампы относительно держателя	Барашковый винт
Держатель лампы-лупы	
Конструкция держателя	Двухсекционный, двухрычажный, с внутренней пружиной, с фиксацией в промежуточных положениях
Материал держателя	Сталь с высококачественным полимерным покрытием
Длина секций держателя (по осям шарниров)	40 - 41,3 мм (в зависимости от положения)
Тип фиксации промежуточных положений/ количество промежуточных положений	Встроенный пружинный механизм с автофиксацией в выбранном положении/ бесступенчато
Размеры при установке на металлическом кронштейне со штативом:	
Габаритная длина в сборе	49 – 148 см
Габаритная ширина в сборе	49 – 148 см
Габаритная высота в сборе	77 – 174 см
Высота расположения линзы относительно пола (по нижней плоскости лампы в горизонтальном положении)	15 – 140 см
Минимальная ширина прохода для проезда основания штатива	50 см
Габаритные размеры в компактном виде (держатель сложен, линза поднята вверх): длина x ширина x высота от опорной поверхности	49 x 49 x 120,5 см
Усилие, необходимое для включения тормозной системы роликов	49 Н
Переключатель	
Размер	18 x 12 мм
Тип переключателя	Кнопочный, прямоугольный
Блок питания	
Входное напряжение	110-220 В
Выходное напряжение	18,5 В
Размер	72,8x41 мм
Набор линз	
Количество шт в наборе	4 шт
Светодиодный набор	
Количество шт в наборе	60 шт

Общие параметры:	
Отклонение лампы от точки крепления держателя (расстояние по горизонтали от оси крепления к штативу (струбцине) до центра лампы-лупы)	28,5 – 106 см
Угол вращения лампы в горизонтальной плоскости вокруг точки крепления к держателю	+180°/ -180°, бесступенчато
Угол поворота лампы вокруг горизонтальной оси (от себя/ на себя)	+115°/ -115°, бесступенчато
Угол наклона лампы относительно точки крепления к держателю (вверх/ вниз)	Вниз – 90°, вверх - 135°
Угол вращения держателя относительно оси крепления к штативу (струбцине)	360°
Диапазон изменения угла между секциями держателя	От 0 до 230°
Угол наклона нижней секции держателя относительно горизонтальной плоскости	От 0 до 115°
Источник питания	Сеть переменного тока 220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	14 Вт
Длина сетевого шнура	1,6 м
Цвет изделия	Белый/ светло-серый
Масса изделия нетто (в сборе)	13 кг
Масса изделия брутто (в упаковке)	14,4 кг
Количество в упаковке	1 комплект
Размеры упаковки	71 x 42 x 15 см
Гарантия	12 месяцев
Степень защиты корпуса от проникания воды и твердых частиц в соответствии с МЭК 60529	IPX0

Лампа бестеневая, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, вариант исполнения 9003LED-FS:


Наименование характеристики	Значение
Внешний вид	
Тип крепления	Металлический кронштейн со штативом

Линза	
Количество линз в комплекте	1
Материал линз	Стекло
Размеры линз	Ø 127 мм (полезный - Ø 125 мм)
Увеличение линз	3/5/8 диоптрий(набор линз 10/12/15 диоптрий)
Лампа	
Тип лампы	Кольцевая, светодиодная
Исполнение (с затемнением/без затемнения)	С затемнением
Режимы яркости свечения (в % от максимальной яркости)	100% - 75% - 50% - 25%
Материал плафона	Пластик
Количество светодиодов	60
Цветовая температура светодиодов	5600K~6000K
Яркость светодиодов	1200 lm
Угол рассеивания светодиодов	120°
Размеры корпуса (длина x ширина x толщина или диаметр плафона x толщина)	286 x 225 x 73 мм
Наличие откидной крышки плафона	да
Фиксация лампы относительно держателя	Барашковый винт
Держатель лампы-лупы	
Конструкция держателя	Двухсекционный, двухрычажный, с внутренней пружиной, с фиксацией в промежуточных положениях
Материал держателя	Сталь с высококачественным полимерным покрытием
Длина секций держателя (по осям шарниров)	40 - 41,3 мм (в зависимости от положения)
Тип фиксации промежуточных положений/ количество промежуточных положений	Встроенный пружинный механизм с автофиксацией в выбранном положении/ бесступенчато
Металлический кронштейн со штативом	
Основание штатива	Сборно-разборная 4-лучевая крестовина из стальных труб прямоугольного профиля с высококачественным полимерным покрытием, с вставками-утяжелителями и пластиковыми заглушками
Сечение трубы колесной консоли	50 x 30 мм
Стойка штатива	Стальная круглая труба с высококачественным полимерным покрытием
Сечение трубы стойки штатива	Ø 22 мм
Консоли крестовины снабжены роликами для удобства перемещения стойки. Колёса самоориентирующиеся, двойные с возможностью поворота на 360°	Соответствие
Диаметр круга вращения (по осям крепления роликов)	Ø 62 мм
Тип роликов	Двойные, закрытые, съемные, для твердых напольных покрытий,
Материал роликов	Пластик
Диаметр роликов	40 мм

Тормозная система	Индивидуальный тормоз на одном из роликов
Усилие, необходимое для включения тормозной системы роликов	49 Н
Размеры при установке на металлическом кронштейне со штативом:	
Габаритная длина в сборе	49 – 156 см
Габаритная ширина в сборе	49 – 156 см
Габаритная высота в сборе	77 – 184 см
Высота расположения линзы относительно пола (по нижней плоскости лампы в горизонтальном положении)	15 – 143 см
Минимальная ширина прохода для проезда основания штатива	50 см
Габаритные размеры в компактном виде (держатель сложен, линза поднята вверх): длина x ширина x высота от опорной поверхности	49 x 49 x 120,5 см
Переключатель	
Размер	18 x 12 мм
Тип переключателя	Кнопочный, прямоугольный
Блок питания	
Входное напряжение	100-240 В
Выходное напряжение	18,5 В
Размер	72,8x41 мм
Набор линз	
Количество шт в наборе	3 шт
Светодиодный набор	
Количество шт в наборе	60 шт
Общие параметры:	
Отклонение лампы от точки крепления держателя (расстояние по горизонтали от оси крепления к штативу (струбцине) до центра лампы-лупы)	33,5 – 111 см
Угол вращения лампы в горизонтальной плоскости вокруг точки крепления к держателю	+180°/-180°, бесступенчато
Угол поворота лампы вокруг горизонтальной оси (от себя/ на себя)	+115°/-115°, бесступенчато
Угол наклона лампы относительно точки крепления к держателю (вверх/ вниз)	Вниз – 90°, вверх - 135°
Угол вращения держателя относительно оси крепления к штативу (струбцине)	360°
Диапазон изменения угла между секциями держателя	От 0 до 230°
Угол наклона нижней секции держателя относительно горизонтальной плоскости	От 0 до 115°
Источник питания	Сеть переменного тока 220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	14 Вт
Длина сетевого шнура	1,6 м
Цвет изделия	Белый/ светло-серый
Масса изделия нетто (в сборе)	8,8 кг
Масса изделия брутто (в упаковке)	9,9 кг

Количество в упаковке	1 комплект
Размеры упаковки	71 x 29,5 x 24 см
Гарантия	12месяцев
Степень защиты корпуса от проникания воды и твердых частиц в соответствии с МЭК 60529	IPX0

Лампа бестеневая, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, вариант исполнения 9003LED-7-FS:

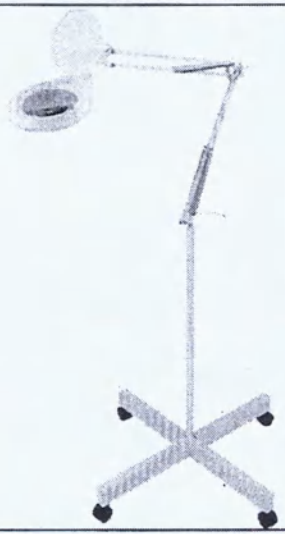Наименование характеристики	Значение
Внешний вид	
Тип крепления	Металлический кронштейн со штативом
Линза	
Количество линз в комплекте	1
Материал линз	Стекло
Диаметр линз	Ø 127 мм (полезный - Ø 122 мм)
Увеличение линз	3/5/8 диоптрий(набор линз 10/12/15 диоптрий)
Лампа	
Тип лампы	Кольцевая, светодиодная
Исполнение (с затемнением/без затемнения)	С затемнением
Режимы яркости свечения (в % от максимальной яркости)	100% - 75% - 50% - 25%
Материал плафона	Пластик
Количество светодиодов	60
Цветовая температура светодиодов	5600K~6000K
Яркость светодиодов	1200 lm

Угол рассеивания светодиодов	120°
Размеры корпуса (длина x ширина x толщина или диаметр плафона x толщина)	280 x 218 x 25 мм
Наличие откидной крышки плафона	Да
Фиксация лампы относительно держателя	Барашковый винт
Держатель лампы-лупы	
Конструкция держателя	Двухсекционный, двухрычажный, с внешней пружиной, с фиксацией в промежуточных положениях
Материал держателя	Сталь с высококачественным полимерным покрытием
Длина секций держателя (по осям шарниров)	40-41,3 мм (в зависимости от положения)
Тип фиксации промежуточных положений/ количество промежуточных положений	Встроенный пружинный механизм с автофиксацией в выбранном положении/ бесступенчато
Металлический кронштейн со штативом	
Основание штатива	Сборно-разборная 4-лучевая крестовина из стальных труб прямоугольного профиля с высококачественным полимерным покрытием, с вставками-утяжелителями и пластиковыми заглушками
Сечение трубы колесной консоли	50 x 30 мм
Стойка штатива	Стальная круглая труба с высококачественным полимерным покрытием
Сечение трубы стойки штатива	Ø 22 мм
Консоли крестовины снабжены роликами для удобства перемещения стойки. Колёса самоориентирующиеся, двойные с возможностью поворота на 360°	Соответствие
Диаметр круга вращения (по осям крепления роликов)	Ø 62 мм
Тип роликов	Двойные, закрытые, съемные, для твердых напольных покрытий,
Материал роликов	Пластик
Диаметр роликов	40 мм
Тормозная система	Индивидуальный тормоз на одном из роликов
Усилие, необходимое для включения тормозной системы роликов	49 Н
Переключатель	
Размер	18 x 12 мм
Тип переключателя	Кнопочный, прямоугольный
Блок питания	
Входное напряжение	100-240 В
Выходное напряжение	18,5 В
Размер	72,8x41 мм
Набор линз	
Количество шт в наборе	3 шт
Светодиодный набор	
Количество шт в наборе	60 шт

Общие параметры:	
Отклонение лампы от точки крепления держателя (расстояние по горизонтали от оси крепления к штативу (струбцине) до центра лампы-лупы)	30 – 108 см
Угол вращения лампы в горизонтальной плоскости вокруг точки крепления к держателю	+180°/ -180°, бесступенчато
Угол поворота лампы вокруг горизонтальной оси (от себя/ на себя)	+115°/ -115°, бесступенчато
Угол наклона лампы относительно точки крепления к держателю (вверх/ вниз)	Вниз – 90°, вверх - 135°
Угол вращения держателя относительно оси крепления к штативу (струбцине)	360°
Диапазон изменения угла между секциями держателя	От 0 до 230°
Угол наклона нижней секции держателя относительно горизонтальной плоскости	От 0 до 115°
Источник питания	Сеть переменного тока 220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	14 Вт
Длина сетевого шнура	1,6 м
Цвет изделия	Белый/ светло-серый
Масса изделия нетто (в сборе)	8,7 кг
Масса изделия брутто (в упаковке)	9,9 кг
Количество в упаковке	1 комплект
Размеры упаковки	71 x 29,5 x 24 см
Гарантия	12 месяцев
Степень защиты корпуса от проникания воды и твердых частиц в соответствии с МЭК 60529	IPX0

Лампа бестеневая, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, вариант исполнения 9005LED-7-FS:

Наименование характеристики	Значение
Внешний вид	
Тип крепления	Металлический кронштейн со штативом

Линза	
Количество линз в комплекте	1
Материал линз	Стекло
Диаметр линз	Ø 127 мм (полезный - Ø 122 мм)
Увеличение линз	3/5/8 диоптрий(набор линз 10/12/15 диоптрий)
Лампа	
Тип лампы	Кольцевая, светодиодная
Исполнение (с затемнением/без затемнения)	Без затемнения
Режимы яркости свечения (в % от максимальной яркости)	100%
Материал плафона	Пластик
Количество светодиодов	60
Цветовая температура светодиодов	5600K~6000K
Яркость светодиодов	1200 lm
Угол рассеивания светодиодов	120°
Размеры корпуса (длина x ширина x толщина или диаметр плафона x толщина)	280 x 218 x 25 мм
Наличие откидной крышки плафона	Да
Фиксация лампы относительно держателя	Барашковый винт
Держатель лампы-лупы	
Конструкция держателя	Двухсекционный, двухрычажный, с внешней пружиной, с фиксацией в промежуточных положениях
Материал держателя	Сталь с высококачественным полимерным покрытием
Длина секций держателя (по осям шарниров)	40-41,3 мм (в зависимости от положения)
Тип фиксации промежуточных положений/ количество промежуточных положений	Встроенный пружинный механизм с автофиксацией в выбранном положении/ бесступенчато
Металлический кронштейн со штативом	
Основание штатива	Сборно-разборная 4-лучевая крестовина из стальных труб прямоугольного профиля с высококачественным полимерным покрытием, с вставками-утяжелителями и пластиковыми заглушками
Сечение трубы колесной консоли	50 x 30 мм
Стойка штатива	Стальная круглая труба с высококачественным полимерным покрытием
Сечение трубы стойки штатива	Ø 22 мм
Консоли крестовины снабжены роликами для удобства перемещения стойки. Колёса самоориентирующиеся, двойные с возможностью поворота на 360°	Соответствие
Диаметр круга вращения (по осям крепления роликов)	Ø 62 мм
Тип роликов	Двойные, закрытые, съемные, для твердых напольных покрытий,
Материал роликов	Пластик
Диаметр роликов	40 мм

Тормозная система	Индивидуальный тормоз на одном из роликов
Усилие, необходимое для включения тормозной системы роликов	49 Н
Переключатель	
Размер	16,3 мм
Тип переключателя	Кнопочный, круглый
Блок питания	
Входное напряжение	110-220 В
Выходное напряжение	24-25 В
Размер	60 * 35 мм
Набор линз	
Количество шт в наборе	5 шт
Светодиодный набор	
Количество шт в наборе	60 шт
Общие параметры:	
Отклонение лампы от точки крепления держателя (расстояние по горизонтали от оси крепления к штативу (струбцине) до центра лампы-лупы)	30 – 108 см
Угол вращения лампы в горизонтальной плоскости вокруг точки крепления к держателю	+180°/ -180°, бесступенчато
Угол поворота лампы вокруг горизонтальной оси (от себя/ на себя)	+115°/ -115°, бесступенчато
Угол наклона лампы относительно точки крепления к держателю (вверх/ вниз)	Вниз – 90°, вверх - 135°
Угол вращения держателя относительно оси крепления к штативу (струбцине)	360°
Диапазон изменения угла между секциями держателя	От 0 до 230°
Угол наклона нижней секции держателя относительно горизонтальной плоскости	От 0 до 115°
Источник питания	Сеть переменного тока 220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	12 Вт
Длина сетевого шнура	1,6 м
Цвет изделия	Белый/ светло-серый
Масса изделия нетто (в сборе)	8,7 кг
Масса изделия брутто (в упаковке)	9,9 кг
Количество в упаковке	1 комплект
Размеры упаковки	71 x 29,5 x 24 см
Гарантия	12 месяцев
Степень защиты корпуса от проникания воды и твердых частиц в соответствии с МЭК 60529	IPX0

Лампа бестеневая, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, вариант исполнения 9005LED-FS:


Наименование характеристики	Значение
-----------------------------	----------

Внешний вид	
Тип крепления	Металлический кронштейн со штативом
Линза	
Количество линз в комплекте	1
Материал линз	Стекло
Размеры линз	Ø 127 мм (полезный - Ø 125 мм)
Увеличение линз	3/5/8 диоптрий(набор линз 10/12/15 диоптрий)
Лампа	
Тип лампы	Кольцевая, светодиодная
Исполнение (с затемнением/без затемнения)	Без затемнения
Режимы яркости свечения (в % от максимальной яркости)	100%
Материал плафона	Пластик
Количество светодиодов	60
Цветовая температура светодиодов	5600K~6000K
Яркость светодиодов	1200 lm
Угол рассеивания светодиодов	120°
Размеры корпуса (длина x ширина x толщина или диаметр плафона x толщина)	286 x 225 x 73 мм
Наличие откидной крышки плафона	да
Фиксация лампы относительно держателя	Барашковый винт
Держатель лампы-лупы	
Конструкция держателя	Двухсекционный, двухрычажный, с внутренней пружиной, с фиксацией в промежуточных положениях
Материал держателя	Сталь с высококачественным полимерным покрытием
Длина секций держателя (по осям шарниров)	40 - 41,3 мм (в зависимости от положения)
Тип фиксации промежуточных положений/ количество промежуточных положений	Встроенный пружинный механизм с автофиксацией в выбранном положении/ бесступенчато
Металлический кронштейн со штативом	
Основание штатива	Сборно-разборная 4-лучевая крестовина из стальных труб прямоугольного профиля с высококачественным полимерным покрытием, с вставками-утяжелителями и пластиковыми заглушками

Сечение трубы колесной консоли	50 x 30 мм
Стойка штатива	Стальная круглая труба с высококачественным полимерным покрытием
Сечение трубы стойки штатива	Ø 22 мм
Консоли крестовины снабжены роликами для удобства перемещения стойки. Колёса самоориентирующиеся, двойные с возможностью поворота на 360°	Соответствие
Диаметр круга вращения (по осям крепления роликов)	Ø 62 мм
Тип роликов	Двойные, закрытые, съемные, для твердых напольных покрытий,
Материал роликов	Пластик
Диаметр роликов	40 мм
Тормозная система	Индивидуальный тормоз на одном из роликов
Усилие, необходимое для включения тормозной системы роликов	49 Н
Размеры при установке на штативе:	
Габаритная длина в сборе	49 – 156 см
Габаритная ширина в сборе	49 – 156 см
Габаритная высота в сборе	77 – 184 см
Высота расположения линзы относительно пола (по нижней плоскости лампы в горизонтальном положении)	15 – 143 см
Минимальная ширина прохода для проезда основания штатива	50 см
Габаритные размеры в компактном виде (держатель сложен, линза поднята вверх): длина x ширина x высота от опорной поверхности	49 x 49 x 120,5 см
Переключатель	
Размер	16,3 мм
Тип переключателя	Кнопочный, круглый
Блок питания	
Входное напряжение	110-220 В
Выходное напряжение	24-25 В
Размер	60 * 35 мм
Набор линз	
Количество шт в наборе	3 шт
Светодиодный набор	
Количество шт в наборе	60 шт
Общие параметры:	
Отклонение лампы от точки крепления держателя (расстояние по горизонтали от оси крепления к штативу (струбцине) до центра лампы-лупы)	33,5 – 111 см
Угол вращения лампы в горизонтальной плоскости вокруг точки крепления к держателю	+180°/-180°, бесступенчато

Угол поворота лампы вокруг горизонтальной оси (от себя/ на себя)	+115°/ -115°, бесступенчато
Угол наклона лампы относительно точки крепления к держателю (вверх/ вниз)	Вниз – 90°, вверх - 135°
Угол вращения держателя относительно оси крепления к штативу (струбцине)	360°
Диапазон изменения угла между секциями держателя	От 0 до 230°
Угол наклона нижней секции держателя относительно горизонтальной плоскости	От 0 до 115°
Источник питания	Сеть переменного тока 220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	12 Вт
Длина сетевого шнура	1,6 м
Цвет изделия	Белый/ светло-серый
Масса изделия нетто (в сборе)	8,8 кг
Масса изделия брутто (в упаковке)	9,9 кг
Количество в упаковке	1 комплект
Размеры упаковки	71 x 29,5 x 24 см
Гарантия	12 месяцев
Степень защиты корпуса от проникания воды и твердых частиц в соответствии с МЭК 60529	IPX0

Лампа бестеневая, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, вариант исполнения 9001LED:

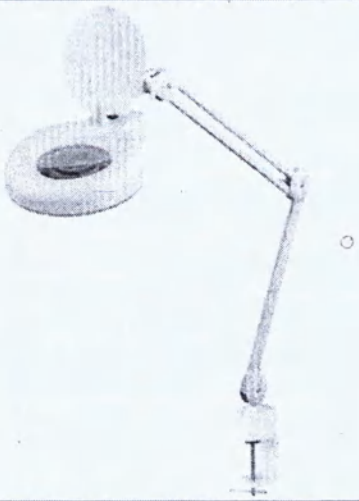Наименование характеристики	Значение
Внешний вид	
Тип крепления	На струбцине
Линза	
Количество линз в комплекте	1
Материал линз	Стекло
Размеры линз	Ø 127 мм (полезный Ø 123 мм)

Увеличение линз	3/5/8 диоптрий(набор линз 10/12/15 диоптрий)
Лампа	
Тип лампы	Кольцевая, светодиодная
Исполнение (с затемнением/без затемнения)	Без затемнения
Режимы яркости свечения (в % от максимальной яркости)	100%
Материал плафона	Пластик
Количество светодиодов	60
Цветовая температура светодиодов	5600K~6000K
Яркость светодиодов	1200 lm
Угол рассеивания светодиодов	120°
Размеры корпуса (длина x ширина x толщина или диаметр x толщина)	265 x 200 x 30 мм
Наличие откидной крышки плафона	да
Фиксация лампы относительно держателя	Барашковый винт
Держатель лампы-лупы	
Конструкция держателя	Двухсекционный, двухрычажный, с внутренней пружиной, с фиксацией в промежуточных положениях
Материал держателя	Сталь с высококачественным полимерным покрытием
Длина секций держателя (по осям шарниров)	40 - 41,3 мм (в зависимости от положения)
Тип фиксации промежуточных положений/ количество промежуточных положений	Встроенный пружинный механизм с автофиксацией в выбранном положении/ бесступенчато
Струбцина (кронштейн крепления к столу)	
Материал струбцины	Сталь с высококачественным полимерным покрытием
Максимальная толщина столешницы	71 мм
Расстояние от оси до ближней вертикальной стенки струбцины	25 мм
Диаметр прижимной шайбы	Ø 26 мм
Требуемое расстояние от края стола для установки струбцины	Сверху столешницы - не менее 60 мм, снизу столешницы - не менее 40 мм
Размеры при установке на струбцине:	
Габаритная длина в сборе	20 – 121 см
Габаритная ширина в сборе	7 – 20 см
Габаритная высота в сборе	12 – 116 см
Высота расположения линзы относительно поверхности стола (по нижней плоскости лампы в горизонтальном положении)	От -50 до 82 см
Габаритные размеры в компактном виде (держатель сложен, линза поднята вверх): длина x ширина x высота от опорной поверхности	30 x 20 x 50,5 см
Переключатель	
Размер	20,6 x 14,7 мм
Тип переключателя	Кнопочный, прямоугольный
Блок питания	
Входное напряжение	110-220 В

Выходное напряжение	24-25 В
Размер	60 * 35 мм
Набор линз	
Количество шт в наборе	3 шт
Светодиодный набор	
Количество шт в наборе	60 шт
Общие параметры:	
Отклонение лампы от точки крепления держателя (расстояние по горизонтали от оси крепления к штативу (струбцине) до центра лампы-лупы)	31 – 108 см
Угол вращения лампы в горизонтальной плоскости вокруг точки крепления к держателю	+180°/ -180°, бесступенчато
Угол поворота лампы вокруг горизонтальной оси (от себя/ на себя)	+115°/ -115°, бесступенчато
Угол наклона лампы относительно точки крепления к держателю (вверх/ вниз)	Вниз – 90°, вверх - 135°
Угол вращения держателя относительно оси крепления к штативу (струбцине)	360°
Диапазон изменения угла между секциями держателя	От 0 до 230°
Угол наклона нижней секции держателя относительно горизонтальной плоскости	От 0 до 115°
Источник питания	Сеть переменного тока 220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	12 Вт
Длина сетевого шнура	1,6 м
Цвет изделия	Белый/ светло-серый
Масса изделия нетто (в сборе)	3,0 кг
Масса изделия брутто (в упаковке)	3,5 кг
Количество в упаковке	1 комплект
Размеры упаковки	54 x 29,5 x 12 см
Гарантия	12 месяцев
Степень защиты корпуса от проникания воды и твердых частиц в соответствии с МЭК 60529	IPX0

Лампа бестеневая, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, вариант исполнения 9001LED-7:

Наименование характеристики	Значение
-----------------------------	----------

Внешний вид	
Тип крепления	На струбцине
Линза	
Количество линз в комплекте	1
Материал линз	Стекло
Размеры линз	Ø 127 мм (полезный - Ø 125 мм)
Увеличение линз	3/5/8 диоптрий(набор линз 10/12/15 диоптрий)
Лампа	
Тип лампы	Кольцевая, светодиодная
Исполнение (с затемнением/без затемнения)	Без затемнения
Режимы яркости свечения (в % от максимальной яркости)	100%
Материал плафона	Пластик
Количество светодиодов	60
Цветовая температура светодиодов	5600K~6000K
Яркость светодиодов	1200 lm
Угол рассеивания светодиодов	120°
Размеры корпуса (длина x ширина x толщина или диаметр плафона x толщина)	286 x 225 x 73 мм
Наличие откидной крышки плафона	Да
Фиксация лампы относительно держателя	Барашковый винт
Держатель лампы-лупы	
Конструкция держателя	Двухсекционный, двухрычажный, с внешней пружиной, с фиксацией в промежуточных положениях
Материал держателя	Сталь с высококачественным полимерным покрытием
Длина секций держателя (по осям шарниров)	40 - 41,3 мм (в зависимости от положения)
Тип фиксации промежуточных положений/ количество промежуточных положений	Встроенный пружинный механизм с автофиксацией в выбранном положении/ бесступенчато
Струбцина (кронштейн крепления к столу)	
Материал струбцины	Сталь с высококачественным полимерным покрытием
Максимальная толщина столешницы	71 мм
Расстояние от оси прижима до ближней вертикальной стенки струбцины	25 мм

Диаметр прижимной шайбы	Ø 26 мм
Требуемое расстояние от края стола для установки струбины	Сверху столешницы - не менее 60 мм, снизу столешницы - не менее 40 мм
Размеры при установке на струбине:	
Габаритная длина в сборе	20 - 126 см
Габаритная ширина в сборе	10,5 - 28,6 см
Габаритная высота в сборе	12 - 119 см
Высота расположения линзы относительно поверхности стола (по нижней плоскости лампы в горизонтальном положении)	От -50 см до 78 см
Габаритные размеры в компактном виде (держатель сложен, линза поднята вверх): длина x ширина x высота от опорной поверхности	30 x 28,6 x 50,5 см
Переключатель	
Размер	20,6 x 14,7 мм
Тип переключателя	Кнопочный, прямоугольный
Блок питания	
Входное напряжение	110-220 В
Выходное напряжение	24-25 В
Размер	60 * 35 мм
Набор линз	
Количество шт в наборе	3 шт
Светодиодный набор	
Количество шт в наборе	60 шт
Общие параметры:	
Отклонение лампы от точки крепления держателя (расстояние по горизонтали от оси крепления к штативу (струбине) до центра лампы-лупы)	33,5 - 111 см
Угол вращения лампы в горизонтальной плоскости вокруг точки крепления к держателю	+180°/-180°, бесступенчато
Угол поворота лампы вокруг горизонтальной оси (от себя/ на себя)	+115°/-115°, бесступенчато
Угол наклона лампы относительно точки крепления к держателю (вверх/ вниз)	Вниз - 90°, вверх - 135°
Угол вращения держателя относительно оси крепления к штативу (струбине)	360°
Диапазон изменения угла между секциями держателя	От 0 до 230°
Угол наклона нижней секции держателя относительно горизонтальной плоскости	От 0 до 115°
Источник питания	Сеть переменного тока 220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	12 Вт
Длина сетевого шнура	1,6 м
Цвет изделия	Белый/ светло-серый
Масса изделия нетто (в сборе)	3,1 кг
Масса изделия брутто (в упаковке)	3,5 кг
Количество в упаковке	1 комплект
Размеры упаковки	58 x 29 x 11 см
Гарантия	12 месяцев

Степень защиты корпуса от проникания воды и твердых частиц в соответствии с МЭК 60529	IPX0
---	------


Лампа бестеневая, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, вариант исполнения 9002LED:

Наименование характеристики	Значение
Внешний вид	
Тип крепления	На трубине
Линза	
Количество линз в комплекте	1
Материал линз	Стекло
Размеры линз	189x157 мм (полезные – 185x155 мм)
Увеличение линз	3/5 (набор линз 8/10/12/15 диоптрий)
Лампа	
Тип лампы	Светодиодная, двухполосная
Исполнение (с затемнением/без затемнения)	С затемнением
Режимы яркости свечения (в % от максимальной яркости)	100% - 75% - 50% - 25%
Материал плафона	Пластик
Количество светодиодов	60
Цветовая температура светодиодов	5600K~6000K
Яркость светодиодов	1200 lm
Угол рассеивания светодиодов	120°
Размеры корпуса (длина x ширина x толщина или диаметр x толщина)	298 x 215 x 39 мм
Наличие откидной крышки плафона	нет
Фиксация лампы относительно держателя	Барашковый винт
Держатель лампы-лупы	
Конструкция держателя	Двухсекционный, двухрычажный, с внутренней пружиной, с фиксацией в промежуточных положениях

Материал держателя	Сталь с высококачественным полимерным покрытием
Длина секций держателя (по осям шарниров)	40 - 41,3 мм (в зависимости от положения)
Тип фиксации промежуточных положений/ количество промежуточных положений	Встроенный пружинный механизм с автофиксацией в выбранном положении/ бесступенчато
Струбцина (кронштейн крепления к столу)	
Материал струбцины	Сталь с высококачественным полимерным покрытием
Максимальная толщина столешницы	71 мм
Расстояние от оси до ближней вертикальной стенки струбцины	25 мм
Диаметр прижимной шайбы	Ø 26 мм
Требуемое расстояние от края стола для установки струбцины	Сверху столешницы - не менее 60 мм, снизу столешницы - не менее 40 мм
Размеры при установке на струбцине:	
Габаритная длина в сборе	20 - 118 см
Габаритная ширина в сборе	9,5 - 29,8 см
Габаритная высота в сборе	12 - 109 см
Высота расположения линзы относительно поверхности стола (по нижней плоскости лампы в горизонтальном положении)	От -50 до 75 см
Габаритные размеры в компактном виде (держатель сложен, линза поднята вверх): длина x ширина x высота от опорной поверхности	30 x 29,8 x 50,5 см
Переключатель	
Размер	18 x 12 мм
Тип переключателя	Кнопочный, прямоугольный
Блок питания	
Входное напряжение	100-240 В
Выходное напряжение	18,5 В
Размер	60 * 35 мм
Набор линз	
Количество шт в наборе	4 шт
Светодиодный набор	
Количество шт в наборе	60 шт
Общие параметры:	
Отклонение лампы от точки крепления держателя (расстояние по горизонтали от оси крепления к штативу (струбцине) до центра лампы-лупы)	28,5 - 106 см
Угол вращения лампы в горизонтальной плоскости вокруг точки крепления к держателю	+180°/-180°, бесступенчато
Угол поворота лампы вокруг горизонтальной оси (от себя/ на себя)	+115°/-115°, бесступенчато
Угол наклона лампы относительно точки крепления к держателю (вверх/ вниз)	Вниз - 90°, вверх - 135°
Угол вращения держателя относительно оси крепления к штативу (струбцине)	360°

Диапазон изменения угла между секциями держателя	От 0 до 230°
Угол наклона нижней секции держателя относительно горизонтальной плоскости	От 0 до 115°
Источник питания	Сеть переменного тока 220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	12 Вт
Длина сетевого шнура	1,6 м
Цвет изделия	Белый/ светло-серый
Масса изделия нетто (в сборе)	4,2 кг
Масса изделия брутто (в упаковке)	5 кг
Количество в упаковке	1 комплект
Размеры упаковки	59 x 26,5 x 14 см
Гарантия	12 месяцев
Степень защиты корпуса от проникания воды и твердых частиц в соответствии с МЭК 60529	IPX0


Лампа бестеневая, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, вариант исполнения 9003LED:

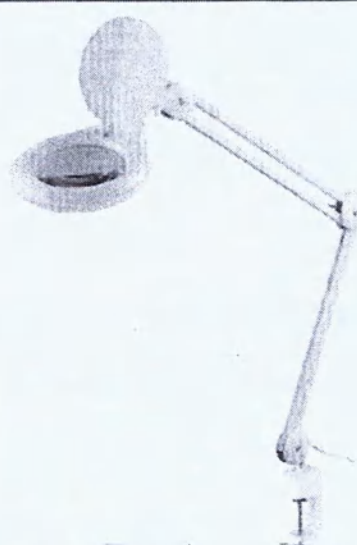Наименование характеристики	Значение
Внешний вид	
Тип крепления	На струбцине
Линза	
Количество линз в комплекте	1
Материал линз	Стекло
Размеры линз	Ø 127 мм (полезный Ø 123 мм)
Увеличение линз	3/5/8 диоптрий(набор линз 10/12/15 диоптрий)
Лампа	
Тип лампы	Кольцевая, светодиодная
Исполнение (с затемнением/без затемнения)	С затемнением
Режимы яркости свечения (в % от максимальной яркости)	100% - 75% - 50% - 25%
Материал плафона	Пластик
Количество светодиодов	60

Цветовая температура светодиодов	5600K~6000K
Яркость светодиодов	1200 lm
Угол рассеивания светодиодов	120°
Размеры корпуса (длина x ширина x толщина или диаметр x толщина)	265 x 200 x 30 мм
Наличие откидной крышки плафона	да
Фиксация лампы относительно держателя	Барашковый винт
Держатель лампы-лупы	
Конструкция держателя	Двухсекционный, двухрычажный, с внутренней пружиной, с фиксацией в промежуточных положениях
Материал держателя	Сталь с высококачественным полимерным покрытием
Длина секций держателя (по осям шарниров)	40 - 41,3 мм (в зависимости от положения)
Тип фиксации промежуточных положений/ количество промежуточных положений	Встроенный пружинный механизм с автофиксацией в выбранном положении/ бесступенчато
Струбцина (кронштейн крепления к столу)	
Материал струбцины	Сталь с высококачественным полимерным покрытием
Максимальная толщина столешницы	71 мм
Расстояние от оси до ближней вертикальной стенки струбцины	25 мм
Диаметр прижимной шайбы	Ø 26 мм
Требуемое расстояние от края стола для установки струбцины	Сверху столешницы - не менее 60 мм, снизу столешницы - не менее 40 мм
Размеры при установке на струбцине:	
Габаритная длина в сборе	20 - 121 см
Габаритная ширина в сборе	7 - 20 см
Габаритная высота в сборе	12 - 116 см
Высота расположения линзы относительно поверхности стола (по нижней плоскости лампы в горизонтальном положении)	От -50 до 82 см
Габаритные размеры в компактном виде (держатель сложен, линза поднята вверх): длина x ширина x высота от опорной поверхности	30 x 20 x 50,5 см
Переключатель	
Размер	18 x 12 мм
Тип переключателя	Кнопочный, прямоугольный
Блок питания	
Входное напряжение	100-240 В
Выходное напряжение	18,5 В
Размер	72,8x41 мм
Набор линз	
Количество шт в наборе	3 шт
Светодиодный набор	
Количество шт в наборе	60 шт
Общие параметры:	
Отклонение лампы от точки крепления держателя (расстояние по горизонтали от	31 - 108 см

оси крепления к штативу (струбцине) до центра лампы-лупы)	
Угол вращения лампы в горизонтальной плоскости вокруг точки крепления к держателю	+180°/ -180°, бесступенчато
Угол поворота лампы вокруг горизонтальной оси (от себя/ на себя)	+115°/ -115°, бесступенчато
Угол наклона лампы относительно точки крепления к держателю (вверх/ вниз)	Вниз – 90°, вверх - 135°
Угол вращения держателя относительно оси крепления к штативу (струбцине)	360°
Диапазон изменения угла между секциями держателя	От 0 до 230°
Угол наклона нижней секции держателя относительно горизонтальной плоскости	От 0 до 115°
Источник питания	Сеть переменного тока 220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	14 Вт
Длина сетевого шнура	1,6 м
Цвет изделия	Белый/ светло-серый
Масса изделия нетто (в сборе)	3,0 кг
Масса изделия брутто (в упаковке)	3,5 кг
Количество в упаковке	1 комплект
Размеры упаковки	54 x 29,5 x 12 см
Гарантия	12 месяцев
Степень защиты корпуса от проникания воды и твердых частиц в соответствии с МЭК 60529	IPX0

Лампа бестеневая, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, вариант исполнения 9003LED -7:

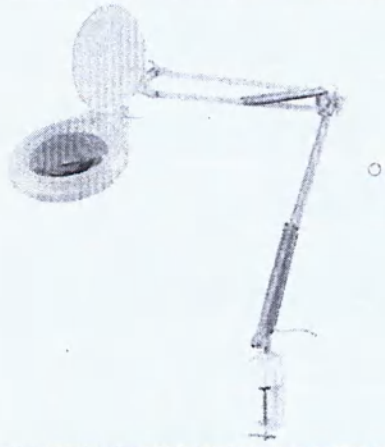Наименование характеристики	Значение
Внешний вид	
Тип крепления	На струбцине
Линза	
Количество линз в комплекте	1
Материал линз	Стекло
Размеры линз	Ø 127 мм (полезный - Ø 125 мм)

Увеличение линз	3/5/8 диоптрий(набор линз 10/12/15 диоптрий)
Лампа	
Тип лампы	Кольцевая, светодиодная
Исполнение (с затемнением/без затемнения)	С затемнением
Режимы яркости свечения (в % от максимальной яркости)	100% - 75% - 50% - 25%
Материал плафона	Пластик
Количество светодиодов	60
Цветовая температура светодиодов	5600K~6000K
Яркость светодиодов	1200 lm
Угол рассеивания светодиодов	120°
Размеры корпуса (длина x ширина x толщина или диаметр плафона x толщина)	286 x 225 x 73 мм
Наличие откидной крышки плафона	Да
Фиксация лампы относительно держателя	Барашковый винт
Держатель лампы-лупы	
Конструкция держателя	Двухсекционный, двухрычажный, с внешней пружиной, с фиксацией в промежуточных положениях
Материал держателя	Сталь с высококачественным полимерным покрытием
Длина секций держателя (по осям шарниров)	40 - 41,3 мм (в зависимости от положения)
Тип фиксации промежуточных положений/ количество промежуточных положений	Встроенный пружинный механизм с автофиксацией в выбранном положении/ бесступенчато
Струбцина (кронштейн крепления к столу)	
Материал струбцины	Сталь с высококачественным полимерным покрытием
Максимальная толщина столешницы	71 мм
Расстояние от оси прижима до ближней вертикальной стенки струбцины	25 мм
Диаметр прижимной шайбы	Ø 26 мм
Требуемое расстояние от края стола для установки струбцины	Сверху столешницы - не менее 60 мм, снизу столешницы - не менее 40 мм
Размеры при установке на струбцине:	
Габаритная длина в сборе	20 - 126 см
Габаритная ширина в сборе	10,5 - 28,6 см
Габаритная высота в сборе	12 - 119 см
Высота расположения линзы относительно поверхности стола (по нижней плоскости лампы в горизонтальном положении)	От -50 см до 78 см
Габаритные размеры в компактном виде (держатель сложен, линза поднята вверх): длина x ширина x высота от опорной поверхности	30 x 28,6 x 50,5 см
Переключатель	
Размер	18 x 12 мм
Тип переключателя	Кнопочный, прямоугольный
Блок питания	
Входное напряжение	100-240 В

Выходное напряжение	18,5 В
Размер	72,8x41 мм
Набор линз	
Количество шт в наборе	3 шт
Светодиодный набор	
Количество шт в наборе	60 шт
Общие параметры:	
Отклонение лампы от точки крепления держателя (расстояние по горизонтали от оси крепления к штативу (струбцине) до центра лампы-лупы)	33,5 – 111 см
Угол вращения лампы в горизонтальной плоскости вокруг точки крепления к держателю	+180°/ -180°, бесступенчато
Угол поворота лампы вокруг горизонтальной оси (от себя/ на себя)	+115°/ -115°, бесступенчато
Угол наклона лампы относительно точки крепления к держателю (вверх/ вниз)	Вниз – 90°, вверх - 135°
Угол вращения держателя относительно оси крепления к штативу (струбцине)	360°
Диапазон изменения угла между секциями держателя	От 0 до 230°
Угол наклона нижней секции держателя относительно горизонтальной плоскости	От 0 до 115°
Источник питания	Сеть переменного тока 220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	14 Вт
Длина сетевого шнура	1,6 м
Цвет изделия	Белый/ светло-серый
Масса изделия нетто (в сборе)	3,1 кг
Масса изделия брутто (в упаковке)	3,5 кг
Количество в упаковке	1 комплект
Размеры упаковки	58 x 29 x 11 см
Гарантия	12 месяцев
Степень защиты корпуса от проникания воды и твердых частиц в соответствии с МЭК 60529	IPX0

Лампа бестеневая, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, вариант исполнения 9005LED:

Наименование характеристики	Значение
Внешний вид	
Тип крепления	На трубине
Линза	
Количество линз в комплекте	1
Материал линз	Стекло
Размеры линз	Ø 127 мм (полезный - Ø 122 мм)
Увеличение линз	3/5/8 диоптрий(набор линз 10/12/15 диоптрий)
Лампа	
Тип лампы	Кольцевая, светодиодная
Исполнение (с затемнением/без затемнения)	Без затемнения
Режимы яркости свечения (в % от максимальной яркости)	100%
Материал плафона	Пластик
Количество светодиодов	60
Цветовая температура светодиодов	5600K~6000K
Яркость светодиодов	1200 lm
Угол рассеивания светодиодов	120°
Размеры корпуса (длина x ширина x толщина или диаметр плафона x толщина)	250 x 190 x 35 мм
Наличие откидной крышки плафона	Да
Фиксация лампы относительно держателя	Барашковый винт
Держатель лампы-лупы	
Конструкция держателя	Двухсекционный, двухрычажный, с внутренней пружиной, с фиксацией в промежуточных положениях
Материал держателя	Сталь с высококачественным полимерным покрытием
Длина секций держателя (по осям шарниров)	40 - 41,3 мм (в зависимости от положения)
Тип фиксации промежуточных положений/ количество промежуточных положений	Встроенный пружинный механизм с автофиксацией в выбранном положении/ бесступенчато
Струбина (кронштейн крепления к столу)	

Материал трубки	Сталь с высококачественным полимерным покрытием
Максимальная толщина столешницы	71 мм
Расстояние от оси прижима до ближней вертикальной стенки трубки	25 мм
Диаметр прижимной шайбы	Ø 26 мм
Требуемое расстояние от края стола для установки трубки	Сверху столешницы - не менее 60 мм, снизу столешницы - не менее 40 мм
Размеры при установке на трубку:	
Габаритная длина в сборе	20 - 120 см
Габаритная ширина в сборе	7 - 19 см
Габаритная высота в сборе	12 - 116 см
Высота расположения линзы относительно поверхности стола (по нижней плоскости лампы в горизонтальном положении)	От -50 см до 83 см
Габаритные размеры в компактном виде (держатель сложен, линза поднята вверх): длина x ширина x высота от опорной поверхности	30 x 19 x 50,5 см
Переключатель	
Размер	16,3 мм
Тип переключателя	Кнопочный, круглый
Блок питания	
Входное напряжение	110-220 В
Выходное напряжение	24-25 В
Размер	60 * 35 мм
Набор линз	
Количество шт в наборе	3 шт
Светодиодный набор	
Количество шт в наборе	60 шт
Общие параметры:	
Отклонение лампы от точки крепления держателя (расстояние по горизонтали от оси крепления к штативу (трубке) до центра лампы-лупы)	30 - 108 см
Угол вращения лампы в горизонтальной плоскости вокруг точки крепления к держателю	+180°/-180°, бесступенчато
Угол поворота лампы вокруг горизонтальной оси (от себя/ на себя)	+115°/-115°, бесступенчато
Угол наклона лампы относительно точки крепления к держателю (вверх/ вниз)	Вниз - 90°, вверх - 135°
Угол вращения держателя относительно оси крепления к штативу (трубке)	360°
Диапазон изменения угла между секциями держателя	От 0 до 230°
Угол наклона нижней секции держателя относительно горизонтальной плоскости	От 0 до 115°
Источник питания	Сеть переменного тока 220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	12 Вт
Длина сетевого шнура	1,5 м
Цвет изделия	Белый/ светло-серый

Масса изделия нетто (в сборе)	2,7 кг
Масса изделия брутто (в упаковке)	3,1 кг
Количество в упаковке	1 комплект
Размеры упаковки	54,5 x 29,5 x 12 см
Гарантия	12 месяцев
Степень защиты корпуса от проникания воды и твердых частиц в соответствии с МЭК 60529	IPX0


Лампа бестеневая, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, вариант исполнения 9005LED-7:

Наименование характеристики	Значение
Внешний вид	
Тип крепления	На струбине
Линза	
Количество линз в комплекте	1
Материал линз	Стекло
Размеры линз	Ø 127 мм (полезный - Ø 122 мм)
Увеличение линз	3/5/8 диоптрий(набор линз 10/12/15 диоптрий)
Лампа	
Тип лампы	Кольцевая, светодиодная
Исполнение (с затемнением/без затемнения)	Без затемнения
Режимы яркости свечения (в % от максимальной яркости)	100%
Материал плафона	Пластик
Количество светодиодов	60
Цветовая температура светодиодов	5600K~6000K
Яркость светодиодов	1200 lm

Угол рассеивания светодиодов	120°
Размеры корпуса (длина х ширина х толщина или диаметр плафона х толщина)	250 х 190 х 35 мм
Наличие откидной крышки плафона	Да
Фиксация лампы относительно держателя	Барашковый винт
Держатель лампы-лупы	
Конструкция держателя	Двухсекционный, двухрычажный, с внешней пружиной, с фиксацией в промежуточных положениях
Материал держателя	Сталь с высококачественным полимерным покрытием
Длина секций держателя (по осям шарниров)	40 - 41,3 мм (в зависимости от положения)
Тип фиксации промежуточных положений/ количество промежуточных положений	Встроенный пружинный механизм с автофиксацией в выбранном положении/ бесступенчато
Струбцина (кронштейн крепления к столу)	
Материал струбцины	Сталь с высококачественным полимерным покрытием
Максимальная толщина столешницы	71 мм
Расстояние от оси прижима до ближней вертикальной стенки струбцины	25 мм
Диаметр прижимной шайбы	Ø 26 мм
Требуемое расстояние от края стола для установки струбцины	Сверху столешницы - не менее 60 мм, снизу столешницы - не менее 40 мм
Размеры при установке на струбцине:	
Габаритная длина в сборе	20 - 120 см
Габаритная ширина в сборе	7 - 19 см
Габаритная высота в сборе	12 - 116 см
Высота расположения линзы относительно поверхности стола (по нижней плоскости лампы в горизонтальном положении)	От -50 см до 83 см
Габаритные размеры в компактном виде (держатель сложен, линза поднята вверх): длина х ширина х высота от опорной поверхности	30 х 19 х 50,5 см
Переключатель	
Размер	16,3 мм
Тип переключателя	Кнопочный, круглый
Блок питания	
Входное напряжение	110-220 В
Выходное напряжение	24-25 В
Размер	60 * 35 мм
Набор линз	
Количество шт в наборе	3 шт
Светодиодный набор	
Количество шт в наборе	60 шт
Общие параметры:	
Отклонение лампы от точки крепления держателя (расстояние по горизонтали от оси крепления к штативу (струбцине) до центра лампы-лупы)	30 - 108 см

Угол вращения лампы в горизонтальной плоскости вокруг точки крепления к держателю	+180°/ -180°, бесступенчато
Угол поворота лампы вокруг горизонтальной оси (от себя/ на себя)	+115°/ -115°, бесступенчато
Угол наклона лампы относительно точки крепления к держателю (вверх/ вниз)	Вниз – 90°, вверх - 135°
Угол вращения держателя относительно оси крепления к штативу (струбцине)	360°
Диапазон изменения угла между секциями держателя	От 0 до 230°
Угол наклона нижней секции держателя относительно горизонтальной плоскости	От 0 до 115°
Источник питания	Сеть переменного тока 220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	12 Вт
Длина сетевого шнура	1,5 м
Цвет изделия	Белый/ светло-серый
Масса изделия нетто (в сборе)	2,7 кг
Масса изделия брутто (в упаковке)	3,1 кг
Количество в упаковке	1 комплект
Размеры упаковки	54,5 x 29,5 x 12 см
Гарантия	12 месяцев
Степень защиты корпуса от проникания воды и твердых частиц в соответствии с МЭК 60529	IPX0

Лампа бестеневая, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, вариант исполнения 9006LED, 9006LED-FS, 9006LED-TS:

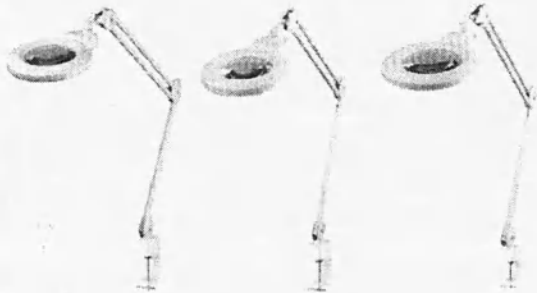Наименование характеристики	Значение
Внешний вид	

Тип крепления	На струбцине
Линза	
Количество линз в комплекте	1
Материал линз	Стекло
Диаметр линз	Ø 127 мм (полезный - Ø 122 мм) Ø 150 мм (полезный - Ø 145 мм) Ø 178 мм (полезный - Ø 173 мм)
Увеличение линз	3/5/8 диоптрий(набор линз 10/12/15 диоптрий)
Лампа	
Тип лампы	Кольцевая, светодиодная
Исполнение (с затемнением/без затемнения)	
Для 9006LED-TS	Без затемнения
Для 9006LED, 9006LED-FS	С затемнением
Режимы яркости свечения (в % от максимальной яркости)	
Для 9006LED-TS	100%
Для 9006LED, 9006LED-FS	100% - 75% - 50% - 25%
Материал плафона	Пластик
Количество светодиодов	60
Цветовая температура светодиодов	5600K~6000K
Яркость светодиодов	1200 lm/1200 lm/1600 lm
Угол рассеивания светодиодов	120°
Размеры корпуса (длина x ширина x толщина или диаметр плафона x толщина)	280 x 218 x 25 мм
Наличие откидной крышки плафона	-
Фиксация лампы относительно держателя	Барашковый винт
Держатель лампы-лупы	
Конструкция держателя	Двухсекционный, двухрычажный, с внутренней пружиной, с фиксацией в промежуточных положениях
Материал держателя	Сталь с высококачественным полимерным покрытием
Длина секций держателя (по осям шарниров)	40-41,3 мм (в зависимости от положения)
Тип фиксации промежуточных положений/ количество промежуточных положений	Встроенный пружинный механизм с автофиксацией в выбранном положении/ бесступенчато
Струбцина (кронштейн крепления к столу)	
Материал струбцины	Сталь с высококачественным полимерным покрытием
Максимальная толщина столешницы	71 мм
Расстояние от оси прижима до ближней вертикальной стенки струбцины	25 мм
Диаметр прижимной шайбы	Ø 26 мм

Требуемое расстояние от края стола для установки струбины	Сверху столешницы - не менее 60 мм, снизу столешницы - не менее 40 мм
Размеры при установке на струбине:	
Габаритная длина в сборе	20 - 123 см
Габаритная ширина в сборе	6 - 21,8 см
Габаритная высота в сборе	12 - 110 см
Высота расположения линзы относительно поверхности стола (по нижней плоскости лампы в горизонтальном положении)	От -50 см до 82 см
Габаритные размеры в компактном виде (держатель сложен, линза поднята вверх): длина x ширина x высота от опорной поверхности	25 x 21,8 x 50,5 см
Переключатель	
Размер	20,6 x 14,7 мм (9006 LED, 9006LED-TS) 11,3 мм (9006LED-FS, 9006 LED)
Тип переключателя	Кнопочный, прямоугольный (9006LED-TS) Кнопочный, круглый (9006LED-FS, 9006 LED)
Блок питания(9006LED-TS)	
Входное напряжение	100-240 В
Выходное напряжение	18,5 В
Размер	60 * 35 мм
Блок питания(9006LED-FS, 9006 LED)	
Входное напряжение	110-220 В
Выходное напряжение	24,5 В
Размер	72,8x41 мм
Набор линз	
Количество шт в наборе	5 шт
Светодиодный набор	
Количество шт в наборе	60/60/84 шт
Общие параметры:	
Отклонение лампы от точки крепления держателя (расстояние по горизонтали от оси крепления к штативу (струбине) до центра лампы-лупы)	30 - 108 см
Угол вращения лампы в горизонтальной плоскости вокруг точки крепления к держателю	+180°/-180°, бесступенчато
Угол поворота лампы вокруг горизонтальной оси (от себя/ на себя)	+115°/-115°, бесступенчато
Угол наклона лампы относительно точки крепления к держателю (вверх/ вниз)	Вниз - 90°, вверх - 135°
Угол вращения держателя относительно оси крепления к штативу (струбине)	360°
Диапазон изменения угла между секциями держателя	От 0 до 230°
Угол наклона нижней секции держателя относительно горизонтальной плоскости	От 0 до 115°
Источник питания	Сеть переменного тока 220-240 В, 50 Гц

Потребляемая мощность	14/14/16 Вт
Длина сетевого шнура	1,6 м
Цвет изделия	Белый/ светло-серый
Масса изделия нетто (в сборе)	3,0 кг
Масса изделия брутто (в упаковке)	3,4 кг
Количество в упаковке	1 комплект
Размеры упаковки	58 x 29 x 11 см
Гарантия	12месяцев
Степень защиты корпуса от проникания воды и твердых частиц в соответствии с МЭК 60529	IPX0

5. МАТЕРИАЛЫ

Компонент изделия	Материал	Марка материала	Производитель материала
линза	Стекло	D-5	Nanyang Jingliang Photoelectric Technology Co., Ltd
плафон	Поликарбонат	PC-110	CHIMEI, Тайвань
ролики	Ацетилбутилстирол (ABS)	PA-757	CHIMEI, Тайвань
Держатель, подставка, кронштейн, трубка	Сталь с высококачественным полимерным покрытием	Сталь: BM-1151	Krell Precision (Yangzhou) Co., Ltd., Китай
		Полимерное покрытие: ABS-пластик STAREX SD-0150	SAMSUNG CHEIL INDUSTRIES INC., Корея

Материал упаковки: потребительская упаковка: Картон марки: NINGBO FOLD C1S , производитель : Asia Pulp Paper (APP).

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ЖИВОТНОГО И (ИЛИ) ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.

Медицинское изделие не содержит материалов животного и (или) человеческого происхождения.

ДАННЫЕ О СОДЕРЖАЩИХСЯ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТАХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЯХ.

Медицинское изделие не содержит лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭМС

Медицинское изделие протестировано, установлено, что его показатели электромагнитной совместимости (ЭМС) находятся в пределах, установленных для изделий медицинского назначения стандартами IEC 60598-2-4, IEC 60601-1:2005.

Руководство и Декларация производителя - электромагнитные излучения

Лампа бестеневая, зарегистрированный товарный знак MED-MOS предназначена для использования в электромагнитной среде, указанной ниже. Покупатель или пользователь лампы должен убедиться, что он использует ее в такой среде.

Радиоизлучение	Соответствие	Руководство по уровню ЭМИ
Радиочастотные излучения CISPR 11	Группа 1, Класс В (Б)	В лампах используется радиочастотная энергия только для внутренних функций. Поэтому ее радиочастотные излучения очень малы и вряд ли вызовут какие-либо помехи в расположенном рядом электронном оборудовании.
Проводимость Радиочастотные излучения CISPR 11	Группа 1, Класс В (Б)	Лампа бестеневая, зарегистрированный товарный знак MED-MOS подходит для использования во всех учреждениях, включая бытовое использование, а также непосредственно подключенных к общественной низковольтной сети электроснабжения, питающей здания, используемые в бытовых целях.
Гармоники по IEC 61000-3-2	Класс А	
Мерцание по IEC 61000-3-3	Соответствует	

Руководство и Декларация производителя - помехозащищенность

Лампа бестеневая, зарегистрированный товарный знак MED-MOS предназначена для использования в электромагнитной среде, указанной ниже. Покупатель или пользователь лампы должен убедиться, что он использует ее в такой среде.

Испытание помехозащищенности	Испытания уровня по IEC 60601	Уровень соответствует требованиям	Электромагнитная среда - Наведение.
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ РАЗРЯД по IEC 61000-4-2	Контакт $\pm 6\text{кВ}$ Воздух $\pm 8\text{кВ}$	Контакт $\pm 6\text{кВ}$ Воздух $\pm 8\text{кВ}$	Полы должны быть деревянными, бетонными или керамическими. Если полы синтетические, то относительная влажность должна быть не менее 30%.
Быстрые электрические переходные процессы или всплески по IEC 61000-4-4	$\pm 2\text{кВ}$ для линий электропитания $\pm 1\text{кВ}$ для линий ввода-вывода	$\pm 2\text{кВ}$ для линий электропитания	Лампа подходит для использования во всех учреждениях, включая бытовое использование, а также непосредственно подключенных к общественной низковольтной сети электроснабжения, питающей здания, используемые в бытовых целях.

Выброс тока по IEC 61000-4-5	Линия к линии ± 1 кВ Линия к земле ± 2 кВ	Линия к линии ± 1 кВ Линия к земле ± 2 кВ	Лампа подходит для использования во всех учреждениях, включая бытовое использование, а также непосредственно подключенных к общественной низковольтной сети электроснабжения, питающей здания, используемые в бытовых целях.
Провалы напряжения, короткие перерывы и изменения напряжения на входных линиях электропитания по IEC 61000-4-11	0% в течение 1 цикла (50/60 Гц) падение напряжения 40% в течение 10 циклов (50 Гц) / 12 циклов (60 Гц) падение напряжения 70% в течение 25 циклов (50 Гц) / 30 циклов (60 Гц) падение напряжения 0% в течение 250 циклов (50 Гц) / 300 циклов (60 Гц) прерывание напряжения	0% в течение 1 цикла (50/60 Гц) падение напряжения 40% в течение 10 циклов (50 Гц) / 12 циклов (60 Гц) падение напряжения 70% в течение 25 циклов (50 Гц) / 30 циклов (60 Гц) падение напряжения 0% в течение 250 циклов (50 Гц) / 300 циклов (60 Гц) прерывание напряжения	Лампа подходит для использования во всех учреждениях, включая бытовое использование, а также непосредственно подключенных к общественной низковольтной сети электроснабжения, питающей здания, используемые в бытовых целях.
Частота 50/60 Гц Магнитное поле по IEC 61000-4-8	3А/м	3А/м	Магнитные поля частоты сети должны быть на уровне характеристика типичного местоположения в типичной коммерческой или больничной среде

Руководство и Декларация производителя - электромагнитная помехозащищенность

Лампа бестеневая, зарегистрированный товарный знак MED-MOS предназначена для использования в электромагнитной среде, указанной ниже. Покупатель или лампы должен убедиться, что он использует ее в такой среде.

Испытание помехозащищенности	Испытания уровня по IEC 60601	Соответствие Уровень	Электромагнитная Среда - Руководство
Проводимость ВЧ по IEC 61000-4-6	от 150 кГц до 80 МГц	от 150 кГц до 80 МГц	Портативное и мобильное оборудование радиочастотной связи должно использоваться не ближе к

Излучаемая ВЧ по IEC 61000-4-3	Зср.кв. напряжение от 80 МГц до 2,5 ГГц 3 В/м	Зср.кв. напряжение от 80 МГц до 2,5 ГГц 3 В/м	любой части лампы, включая кабели, чем рекомендуемое расстояние разделения, рассчитанное из уравнения, примененного к частоте передатчика. Неприменимо $d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$ От 80 МГц до 800 МГц $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$ От 800 МГц до 2,5 ГГц где P - максимальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) в соответствии с производителем передатчика, а d - рекомендуемое расстояние разделения в метрах (м). Напряженность поля от фиксированных радиочастотных передатчиков, как определено электромагнитной съемкой участка,^a должна быть меньше уровня соответствия в каждом диапазоне частот^b Помехи могут возникать вблизи оборудования, отмеченного следующим символом: 
--------------------------------	--	--	---

Примечание 1 при 80 МГц и 800 МГц применяется более высокий диапазон частот.

Примечание 2 настоящие руководящие принципы могут применяться не во всех ситуациях. На распространение электромагнитного излучения влияют поглощение и отражение от структур, объектов и людей.

^a Напряженность поля от фиксированных передатчиков, таких как базовые станции для радиотелефонов (сотовых/беспроводных) и наземных мобильных радиостанций, любительского радио, АМ и FM-радио и телевизионного вещания не может быть теоретически предсказана с необходимой точностью. Для оценки электромагнитной обстановки, создаваемой стационарными радиопередатчиками, следует рассмотреть возможность проведения электромагнитной съемки местности. Если измеренная напряженность поля в месте, в котором используется лампа, превышает соответствующий уровень радиочастотного соответствия выше, следует наблюдать за лампой для проверки ее нормальной работы. При обнаружении аномальных характеристик могут потребоваться дополнительные меры, такие как переориентация или перемещение лампы.

^b в диапазоне частот от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля должна быть меньше (не применимо).

Рекомендуемые расстояния разделения между портативным и мобильным оборудованием радиочастотной связи и лампы при Зср.кв. напряжении

Лампа бестеневая, зарегистрированный товарный знак MED-MOS предназначена для использования в электромагнитной среде, в которой контролируются излучаемые радиочастотные помехи. Покупатель или пользователь лампы может избежать электромагнитных помех, соблюдая минимальное расстояние между портативным и мобильным оборудованием радиочастотной связи (передатчиками) и лампы, как рекомендовано ниже, в соответствии с максимальной выходной мощностью оборудования связи.

Номинальная максимальная выходная мощность передатчика (Вт)	Расстояние разведения согласно частоте передатчика		
	м		
	От 150 кГц до 80 МГц $d = [\frac{3,5}{V_1}] \sqrt{P}$	От 80 МГц до 800 МГц $d = [\frac{3,5}{E_1}] \sqrt{P}$	От 800 МГц до 2,5 ГГц $d = [\frac{7}{E_1}] \sqrt{P}$
0,01	Неприменимо	0,12	0,20
0,1	Неприменимо	0,37	0,63
1	Неприменимо	1,17	2,00
10	Неприменимо	3,69	6,32
100	Неприменимо	11,67	20,00

Для передатчиков, рассчитанных на максимальную выходную мощность, не указанную выше, рекомендуемое расстояние разделения d в метрах (м) может быть оценено с помощью уравнения, примененного к частоте передатчика, где P - максимальная выходная мощность передатчика в ваттах (Вт) по данным производителя передатчика.

Примечание 1: При 80 МГц и 800 МГц применяется расстояние разделения для более высокого частотного диапазона.

Примечание 2: Эти рекомендации могут применяться не во всех ситуациях. На распространение электромагнитного излучения влияют поглощение и отражение от структур, объектов и людей.

6. ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И УХОДЕ.

Уход

Производите ежедневную очистку внешней поверхности прибора.

Перед чисткой убедитесь, что оборудование отключено от сети (вилка вынута из розетки). Не включайте прибор сразу после чистки. Осуществляйте периодическую чистку оборудования. Отключайте оборудование от электрической сети. Допускается чистка только внешней поверхности прибора. При очистке прибора не используйте растворители, легковоспламеняющиеся и спиртосодержащие жидкости, чистящие порошки, которые могут поцарапать поверхность прибора. Используйте исключительно мягкие моющие средства, растворенные в воде. В качестве материала воспользуйтесь влажной мягкой тканью, не оставляющей при чистке волокон (не используйте ватные и аналогичные ватным тампоны). По завершении процедуры очистки протрите поверхности сухой тканью, чтобы убрать остатки влаги. Убедитесь, что следы моющего средства также не остались на поверхности прибора.

Ремонт и замена деталей должны производиться исключительно специалистами. В случае ремонта прибора всегда используйте детали, соответствующие техническим характеристикам данного изделия.

Устранение неисправностей

Неисправность	Возможные причины	Решение
Лампа не светит	Перегорела лампочка, вышел из строя светодиодный источник света.	Для устранения необходимо воспользоваться услугами мастерской
При включении в сеть появляется запах гари, возможно искрение, мигание	Нарушение изоляции проводников, пайки, неисправность клемм внутри корпуса, выход из строя элементов блока управления.	Ремонт производится только в мастерской

Требования к техническому обслуживанию и ремонту медицинского изделия

Техническое и сервисное обслуживание должно производиться только производителем или уполномоченным представителем производителя. Не допускается самостоятельный ремонт или обслуживание медицинского изделия. Ненадлежащее обслуживание медицинского изделия может привести к неправильной работе прибора.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Данное медицинское изделие при использовании, хранении и транспортировке безопасно для окружающей среды.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Медицинское изделие поставляется не стерильным и не требует стерилизации.

ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Следует проводить ежедневную очистку внешней поверхности изделия.

Чистка и дезинфекция линзы

Очищайте линзы мягкой, не оставляющей ворсинок тканью. Не используйте никаких мыльных растворов, содержащих смягчители, спиртосодержащие растворители или абразивные чистящие средства. Это может повредить линзы

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы изделия составляет 5 лет с даты производства.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ/СТАНДАРТОВ, КОТОРЫМ СООТВЕТСТВУЕТ ДАННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ:

ISO 9001
ISO 13485
IEC 60598-2-4
IEC 60601-1:2005
EN 60598-2-4:2018
EN 62493:2010
IEC 60598-2-4:2012
IEC 61549-2012
Low Voltage Directive LVD

КРИТЕРИИ НЕПРИГОДНОСТИ, ВОЗВРАТ ПОВРЕЖДЕННОГО ПРОДУКТА

Для возврата поврежденного продукта: верните изделие в оригинальной упаковке с номером партии (лота), ссылкой на покупку и причиной возврата.

УТИЛИЗАЦИЯ

После прихода в негодность этот продукт следует утилизировать с помощью соответствующих органов, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды.



Данный продукт не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы.

Для предотвращения возможного ущерба для окружающей среды или здоровья человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите этот прибор от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим

образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.

Данный продукт не содержит никаких вредных веществ.

По окончании срока службы все части медицинского изделия подлежат утилизации только в специализированных пунктах утилизации в соответствии с требованиями к отходам класса А (СанПин 2.1.7.2790-10). Не утилизируйте изделие вместе с неотсортированными отходами.

УПАКОВКА

Транспортировка осуществляется в транспортных картонных коробах из плотного гофрированного картона. Транспортные короба дополнительно содержат информацию о количестве единиц в коробе, а также символы с указаниями условий транспортировки и хранения.

7. ГАРАНТИЯ

Если качество приобретенного продукта вызывает сомнения, пожалуйста, свяжитесь с уполномоченным представителем как можно скорее.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи при выполнении требований настоящего «Руководства пользователя»; за исключением быстроизнашивающихся деталей и повреждений, причинённых вследствие ненадлежащего обращения.

Для Вашей безопасности и из условий взаимозаменяемости деталей, ремонт и обслуживание продукции могут быть произведены в компании ООО «Медтехника-Р» с применением только оригинальных запчастей и деталей.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев. При обращении потребителя по гарантии, срок эксплуатации замененных частей не обновляется.

При обращении в ООО «Медтехника-Р» в случае неисправности, для более оперативного решения проблемы, сообщайте номер партии изделия, указанный на коробке и/или на самом изделии.

Срок службы: 5 лет, изготовлено из перерабатываемых материалов, не загрязняющих окружающую среду.

Адрес для направлений претензий и рекламаций:

Общество с ограниченной ответственностью «Медтехника РЕБОТЕК»

Адрес: 125222, Москва г, ул. Генерала Белобородова, дом № 35/2, этаж 1, пом. X

Тел.: +7 (495) 504-26-51

+7 (495) 504-26-53

E-mail: info@rebotec.net

МАРКИРОВКА


Маркировка потребительской и транспортной упаковки медицинских изделий, которые предназначены для реализации на территории Российской Федерации дополняется следующей информацией:

- наименование медицинского изделия согласно Регистрационному удостоверению России;
- наименование, адрес и контактные данные уполномоченного представителя производителя на территории России;
- информация о номинальном напряжении источника питания;
- информация о номинальной потребляемой мощности;

Транспортная маркировка дополнительно содержит количество потребительских упаковок внутри.

Допускается нанесение дополнительной информации, необходимой для идентификации товара, в том числе знаков соответствия национальным стандартам, а также знаков соответствия Регламенту (-ам) Евразийского экономического союза после прохождения обязательных процедур оценки соответствия.

РАСШИФРОВКА СИМВОЛОВ

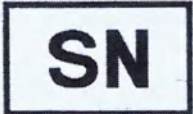Символ	Обозначение	Символ	Обозначение
	Вверх		Дата производства
	Включение электропитания		Код партии
	Выключение электропитания		Обратиться к руководству пользователя
	Подлежит утилизации в специальном месте		Примечание
	Производитель		Серийный номер
	Хранить в сухом месте		Хрупкое, обращаться осторожно

РЕКЛАМАЦИИ

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации: ООО "Медтехника-Р"

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

NINGBO INTBRIGHT TECHNOLOGY CO., LTD

No.21, Zhoujialupeng, Zhushan Village, Lizhou Street, Yuyao City, Zhejiang Province, China (Китай)

Место производства:

NINGBO INTBRIGHT TECHNOLOGY CO., LTD

No.21, Zhoujialupeng, Zhushan Village, Lizhou Street, Yuyao City, Zhejiang Province, China (Китай)

Заявление в ОТК (заполняется клиентом):

1. Наименование/ФИО покупателя.
2. Контактные данные уполномоченного лица покупателя.
3. Номер и дата документа, по которому покупатель получил товар.
4. Краткое описание проблемы (с любыми касающимися дела подробностями).
5. Приложения и фотодетализация:
 - копия гарантийного талона с отметкой продавца, накладной и чеком, если товар куплен не напрямую в ООО "Медтехника-Р";
 - фото товара, проблемных деталей и/или участков;
 - фото маркировки (наклейка/стикер, нанесённый на изделие на производстве);
 - фото ненарушенной упаковки (обязательно при выбраковке в процессе приемки товара от транспортной компании);
6. Дата обращения и подпись.

СЕРТИФИКАТ

[Эмблема: Китайский комитет по содействию развития
международной торговли]

Китайский комитет содействия развитию международной торговли является Китайской
международной торговой палатой

**Китайский Комитет по содействию международной торговле (ССРІТ)
Китайская палата международной торговли**

СЕРТИФИКАТ

№ 203302A0/018120

НАСТОЯЩИМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТСЯ, что печать компании НИНГБО ИНТБРАЙТ
ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД (NINGBO INTBRIGHT TECHNOLOGY CO., LTD.) на
прилагаемом ДОКУМЕНТЕ является подлинной.

Китайский Комитет по содействию международной торговле (ССРІТ)
(подпись)

Уполномоченный подписант: Ян Цзиньцзинь

Подпись:

Дата: 27 апреля 2020 г.

Гербовая печать:

Китайский Комитет по содействию
международной торговле *
для удостоверения торговых сделок

Тисненая печать:

Китайский Комитет по содействию
международной торговле *
для удостоверения торговых сделок

/Текст Руководства по эксплуатации составлен на русском языке/

/подпись/

Печать:

НИНГБО ИНТБРАЙТ ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД

Перевод данного текста выполнен переводчиком Краплиным Денисом Александровичем

Российская Федерация

Город Москва.

Двадцать четвертого августа две тысячи двадцатого года.

Я, Дейнеко Людмила Валериевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Прокошенковой Елены Евгеньевны, свидетельствую подлинность подписи переводчика Краплина Дениса Александровича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена

Зарегистрировано в реестре: № 21/86-н/77-2020- 26-214

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 300 руб. 00 коп.

Л.В. Дейнеко

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 71 лист(-а,-ов).

Л.В. Дейнеко