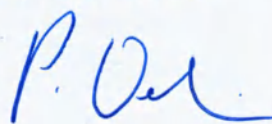


Инструкция по применению медицинского изделия

«Зубы искусственные SR Vivodent S, SR Orthotyp S, SR
Ortholingual S, SR Orthosit S, SR Phonares II с
принадлежностями»

This technical documentation reflects the current knowledge about the corresponding device		
Released выпущенный	P. Oehri	Date, 24.01.2020
Function функция	Director Corporate Quality Management Директор по корпоративному управлению качеством	Signature 
Legalization легализация	Die Echtheit der vor mir vollzogenen Unterschrift(en) von Herr Oehri Patrik, geb. 09.10.1963, Adresse nach eigenen Angaben FL-9494 Schaan, Bendererstrasse 2 Identität ausgewiesen durch: Nr. Unterschrift hinterlegt    Andrea Albrecht-Schädler Urkundsperson 27. Jan. 2020 wird beglaubigt. Vaduz, den 27.01.2020 Fürstliches Landgericht, Albrecht-Schädler Andrea	

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Зубы искусственные SR Vivodent S, SR Orthotyp S, SR Ortholingual S, SR Orthosit S, SR Phonares II с принадлежностями

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

2.1. Разработчик

«Ивоклар Вивадент АГ» (Ivoclar Vivadent AG), Bendererstrasse 2, 9494 Schaan, Liechtenstein

2.2. Производитель

«Ивоклар Вивадент АГ» (Ivoclar Vivadent AG), Bendererstrasse 2, 9494 Schaan, Liechtenstein

2.3. Место производства:

1. Ivoclar Vivadent Manufacturing GmbH, Via-Gustav-Flora 32, 39025 Naturno (BZ), Italy
2. Ivoclar Vivadent, Inc., 10 Ampere Street, Special Economic Zone (SEZ) Light Industry & Science Park, 4025 Diezmo, Cabuyao City, Laguna, Philippines

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Изделие поставляется только в потребительской упаковке (картонной коробке). Индивидуальная упаковка (планка) содержит один набор фронтальных или боковых зубов. Потребительская упаковка вмещает до 36 индивидуальных упаковок наборов фронтальных зубов или до 24 индивидуальных упаковок наборов боковых зубов.

Варианты исполнения:

1. Набор фронтальных верхних зубов SR Vivodent S DCL форма A11, цвета: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
2. Набор фронтальных верхних зубов SR Vivodent S DCL форма A12, цвета: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
3. Набор фронтальных верхних зубов SR Vivodent S DCL форма A13, цвета: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
4. Набор фронтальных верхних зубов SR Vivodent S DCL форма A14, цвета: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
5. Набор фронтальных верхних зубов SR Vivodent S DCL форма A15, цвета: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
6. Набор фронтальных верхних зубов SR Vivodent S DCL форма A17, цвета: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
7. Набор фронтальных верхних зубов SR Vivodent S DCL форма A22, цвета: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
8. Набор фронтальных верхних зубов SR Vivodent S DCL форма A24B, цвета: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
9. Набор фронтальных верхних зубов SR Vivodent S DCL форма A25, цвета: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
10. Набор фронтальных верхних зубов SR Vivodent S DCL форма A26, цвета: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
11. Набор фронтальных верхних зубов SR Vivodent S DCL форма A27, цвета: A1, A2,

Содержание:

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
2. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
3. КОМПЛЕКТАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
4. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
5. ПОКАЗАНИЯ
6. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
7. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
8. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
10. ПРИМЕНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
11. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
12. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И СРОК ГОДНОСТИ
13. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ
14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Приложение 1. Форм-карта фронтальных зубов SR Vivodent S DCL / SR Vivodent S PE

Приложение 2. Форм-карта боковых зубов SR Orthotyp S DCL / SR Orthotyp S PE

Приложение 3. Форм-карта боковых зубов SR Ortholingual S DCL

Приложение 4. Форм-карта боковых зубов SR Orthosit S PE

Приложение 5. Форм-карта фронтальных зубов SR Phonares II

Приложение 6. Форм-карта боковых зубов SR Phonares II Typ

Приложение 7. Форм-карта SR Phonares II Lingual

- A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
12. Набор фронтальных верхних зубов SR Vivodent S DCL форма A42, цвета: A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
13. Набор фронтальных верхних зубов SR Vivodent S DCL форма A44, цвета: A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
14. Набор фронтальных верхних зубов SR Vivodent S DCL форма A54, цвета: A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
15. Набор фронтальных верхних зубов SR Vivodent S DCL форма A66, цвета: A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
16. Набор фронтальных верхних зубов SR Vivodent S DCL форма A68, цвета: A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
17. Набор фронтальных нижних зубов SR Vivodent S DCL форма A3, цвета: A1, A2, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
18. Набор фронтальных нижних зубов SR Vivodent S DCL форма A4, цвета: A1, A2, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
19. Набор фронтальных нижних зубов SR Vivodent S DCL форма A5, цвета: A1, A2, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
20. Набор фронтальных нижних зубов SR Vivodent S DCL форма A6, цвета: A1, A2, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
21. Набор фронтальных нижних зубов SR Vivodent S DCL форма A7, цвета: A1, A2, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
22. Набор фронтальных нижних зубов SR Vivodent S DCL форма A8, цвета: A1, A2, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
23. Набор фронтальных нижних зубов SR Vivodent S DCL форма A9, цвета: A1, A2, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
24. Набор фронтальных нижних зубов SR Vivodent S DCL форма A10, цвета: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
25. Набор фронтальных верхних зубов SR Vivodent S PE форма A11, цвета: 01, 1A, 2A, 1C, 2B, 1D, 1E, 2C, 3A, 5B, 2E, 3E, 4A, 6B, 4B, 6C, 6D, 4C, 3C, 4D
26. Набор фронтальных верхних зубов SR Vivodent S PE форма A12, цвета: 01, 1A, 2A, 1C, 2B, 1D, 1E, 2C, 3A, 5B, 2E, 3E, 4A, 6B, 4B, 6C, 6D, 4C, 3C, 4D
27. Набор фронтальных верхних зубов SR Vivodent S PE форма A13, цвета: 01, 1A, 2A, 1C, 2B, 1D, 1E, 2C, 3A, 5B, 2E, 3E, 4A, 6B, 4B, 6C, 6D, 4C, 3C, 4D
28. Набор фронтальных верхних зубов SR Vivodent S PE форма A14, цвета: 01, 1A, 2A, 1C, 2B, 1D, 1E, 2C, 3A, 5B, 2E, 3E, 4A, 6B, 4B, 6C, 6D, 4C, 3C, 4D
29. Набор фронтальных верхних зубов SR Vivodent S PE форма A15, цвета: 01, 1A, 2A, 1C, 2B, 1D, 1E, 2C, 3A, 5B, 2E, 3E, 4A, 6B, 4B, 6C, 6D, 4C, 3C, 4D
30. Набор фронтальных верхних зубов SR Vivodent S PE форма A17, цвета: 01, 1A, 2A, 1C, 2B, 1D, 1E, 2C, 3A, 5B, 2E, 3E, 4A, 6B, 4B, 6C, 6D, 4C, 3C, 4D
31. Набор фронтальных верхних зубов SR Vivodent S PE форма A22, цвета: 01, 1A, 2A, 1C, 2B, 1D, 1E, 2C, 3A, 5B, 2E, 3E, 4A, 6B, 4B, 6C, 6D, 4C, 3C, 4D
32. Набор фронтальных верхних зубов SR Vivodent S PE форма A24B, цвета: 01, 1A, 2A, 1C, 2B, 1D, 1E, 2C, 3A, 5B, 2E, 3E, 4A, 6B, 4B, 6C, 6D, 4C, 3C, 4D
33. Набор фронтальных верхних зубов SR Vivodent S PE форма A25, цвета: 01, 1A, 2A, 1C, 2B, 1D, 1E, 2C, 3A, 5B, 2E, 3E, 4A, 6B, 4B, 6C, 6D, 4C, 3C, 4D

34. Набор фронтальных верхних зубов SR Vivodent S PE форма A26, цвета: 01, 1A, 2A, 1C, 2B, 1D, 1E, 2C, 3A, 5B, 2E, 3E, 4A, 6B, 4B, 6C, 6D, 4C, 3C, 4D
35. Набор фронтальных верхних зубов SR Vivodent S PE форма A27, цвета: 01, 1A, 2A, 1C, 2B, 1D, 1E, 2C, 3A, 5B, 2E, 3E, 4A, 6B, 4B, 6C, 6D, 4C, 3C, 4D
36. Набор фронтальных верхних зубов SR Vivodent S PE форма A42, цвета: 01, 1A, 2A, 1C, 2B, 1D, 1E, 2C, 3A, 5B, 2E, 3E, 4A, 6B, 4B, 6C, 6D, 4C, 3C, 4D
37. Набор фронтальных верхних зубов SR Vivodent S PE форма A44, цвета: 01, 1A, 2A, 1C, 2B, 1D, 1E, 2C, 3A, 5B, 2E, 3E, 4A, 6B, 4B, 6C, 6D, 4C, 3C, 4D
38. Набор фронтальных верхних зубов SR Vivodent S PE форма A54, цвета: 01, 1A, 2A, 1C, 2B, 1D, 1E, 2C, 3A, 5B, 2E, 3E, 4A, 6B, 4B, 6C, 6D, 4C, 3C, 4D
39. Набор фронтальных верхних зубов SR Vivodent S PE форма A66, цвета: 01, 1A, 2A, 1C, 2B, 1D, 1E, 2C, 3A, 5B, 2E, 3E, 4A, 6B, 4B, 6C, 6D, 4C, 3C, 4D
40. Набор фронтальных верхних зубов SR Vivodent S PE форма A68, цвета: 01, 1A, 2A, 1C, 2B, 1D, 1E, 2C, 3A, 5B, 2E, 3E, 4A, 6B, 4B, 6C, 6D, 4C, 3C, 4D
41. Набор фронтальных нижних зубов SR Vivodent S PE форма A3, цвета: 01, 1A, 2A, 1C, 2B, 1D, 1E, 2C, 3A, 5B, 2E, 3E, 4A, 6B, 4B, 6C, 6D, 4C, 3C, 4D
42. Набор фронтальных нижних зубов SR Vivodent S PE форма A4, цвета: 01, 1A, 2A, 1C, 2B, 1D, 1E, 2C, 3A, 5B, 2E, 3E, 4A, 6B, 4B, 6C, 6D, 4C, 3C, 4D
43. Набор фронтальных нижних зубов SR Vivodent S PE форма A5, цвета: 01, 1A, 2A, 1C, 2B, 1D, 1E, 2C, 3A, 5B, 2E, 3E, 4A, 6B, 4B, 6C, 6D, 4C, 3C, 4D
44. Набор фронтальных нижних зубов SR Vivodent S PE форма A6, цвета: 01, 1A, 2A, 1C, 2B, 1D, 1E, 2C, 3A, 5B, 2E, 3E, 4A, 6B, 4B, 6C, 6D, 4C, 3C, 4D
45. Набор фронтальных нижних зубов SR Vivodent S PE форма A7, цвета: 01, 1A, 2A, 1C, 2B, 1D, 1E, 2C, 3A, 5B, 2E, 3E, 4A, 6B, 4B, 6C, 6D, 4C, 3C, 4D
46. Набор фронтальных нижних зубов SR Vivodent S PE форма A8, цвета: 01, 1A, 2A, 1C, 2B, 1D, 1E, 2C, 3A, 5B, 2E, 3E, 4A, 6B, 4B, 6C, 6D, 4C, 3C, 4D
47. Набор фронтальных нижних зубов SR Vivodent S PE форма A9, цвета: 01, 1A, 2A, 1C, 2B, 1D, 1E, 2C, 3A, 5B, 2E, 3E, 4A, 6B, 4B, 6C, 6D, 4C, 3C, 4D
48. Набор фронтальных нижних зубов SR Vivodent S PE форма A10, цвета: 01, 1A, 2A, 1C, 2B, 1D, 1E, 2C, 3A, 5B, 2E, 3E, 4A, 6B, 4B, 6C, 6D, 4C, 3C, 4D
49. Набор боковых верхних зубов SR Orthotyp S DCL форма N3U, цвета: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
50. Набор боковых верхних зубов SR Orthotyp S DCL форма N4U, цвета: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
51. Набор боковых верхних зубов SR Orthotyp S DCL форма N5U, цвета: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
52. Набор боковых верхних зубов SR Orthotyp S DCL форма N6U, цвета: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
53. Набор боковых нижних зубов SR Orthotyp S DCL форма N3L, цвета: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
54. Набор боковых нижних зубов SR Orthotyp S DCL форма N4L, цвета: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
55. Набор боковых нижних зубов SR Orthotyp S DCL форма N5L, цвета: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
56. Набор боковых нижних зубов SR Orthotyp S DCL форма N6L, цвета: A1, A2, A3,

- A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
57. Набор боковых верхних зубов SR Orthotyp S PE форма N3U, цвета: 01, 1A, 2A, 2B, 1D, 1E, 2C, 3A, 5B, 2E, 3E, 4A, 6B, 4B, 6C, 6D, 4C, 3C, 4D
- 58. Набор боковых верхних зубов SR Orthotyp S PE форма N4U, цвета: 01, 1A, 2A, 2B, 1D, 1E, 2C, 3A, 5B, 2E, 3E, 4A, 6B, 4B, 6C, 6D, 4C, 3C, 4D**
59. Набор боковых верхних зубов SR Orthotyp S PE форма N5U, цвета: 01, 1A, 2A, 2B, 1D, 1E, 2C, 3A, 5B, 2E, 3E, 4A, 6B, 4B, 6C, 6D, 4C, 3C, 4D
60. Набор боковых верхних зубов SR Orthotyp S PE форма N6U, цвета: 01, 1A, 2A, 2B, 1D, 1E, 2C, 3A, 5B, 2E, 3E, 4A, 6B, 4B, 6C, 6D, 4C, 3C, 4D
61. Набор боковых нижних зубов SR Orthotyp S PE форма N3L, цвета: 01, 1A, 2A, 2B, 1D, 1E, 2C, 3A, 5B, 2E, 3E, 4A, 6B, 4B, 6C, 6D, 4C, 3C, 4D
62. Набор боковых нижних зубов SR Orthotyp S PE форма N4L, цвета: 01, 1A, 2A, 2B, 1D, 1E, 2C, 3A, 5B, 2E, 3E, 4A, 6B, 4B, 6C, 6D, 4C, 3C, 4D
63. Набор боковых нижних зубов SR Orthotyp S PE форма N5L, цвета: 01, 1A, 2A, 2B, 1D, 1E, 2C, 3A, 5B, 2E, 3E, 4A, 6B, 4B, 6C, 6D, 4C, 3C, 4D
64. Набор боковых нижних зубов SR Orthotyp S PE форма N6L, цвета: 01, 1A, 2A, 2B, 1D, 1E, 2C, 3A, 5B, 2E, 3E, 4A, 6B, 4B, 6C, 6D, 4C, 3C, 4D
65. Набор боковых верхних зубов SR Ortholingual S DCL форма LU3, цвета: A1, A2, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
66. Набор боковых верхних зубов SR Ortholingual S DCL форма LU5, цвета: A1, A2, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
67. Набор боковых верхних зубов SR Ortholingual S DCL форма LU6, цвета: A1, A2, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
68. Набор боковых нижних зубов SR Ortholingual S DCL форма LL3, цвета: A1, A2, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
69. Набор боковых нижних зубов SR Ortholingual S DCL форма LL4, цвета: A1, A2, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
70. Набор боковых нижних зубов SR Ortholingual S DCL форма LL5, цвета: A1, A2, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
71. Набор боковых верхних зубов SR Orthosit S PE форма N3U, цвета: 01, 1A, 2A, 1C, 2B, 1D, 1E, 3A, 4A, 4B
72. Набор боковых верхних зубов SR Orthosit S PE форма N4U, цвета: 01, 1A, 2A, 1C, 2B, 1D, 1E, 3A, 4A, 4B
73. Набор боковых верхних зубов SR Orthosit S PE форма N5U, цвета: 01, 1A, 2A, 1C, 2B, 1D, 1E, 3A, 4A, 4B
74. Набор боковых верхних зубов SR Orthosit S PE форма N6U, цвета: 01, 1A, 2A, 1C, 2B, 1D, 1E, 3A, 4A, 4B
75. Набор боковых нижних зубов SR Orthosit S PE форма N3L, цвета: 01, 1A, 2A, 1C, 2B, 1D, 1E, 3A, 4A, 4B
76. Набор боковых нижних зубов SR Orthosit S PE форма N4L, цвета: 01, 1A, 2A, 1C, 2B, 1D, 1E, 3A, 4A, 4B
77. Набор боковых нижних зубов SR Orthosit S PE форма N5L, цвета: 01, 1A, 2A, 1C, 2B, 1D, 1E, 3A, 4A, 4B
78. Набор боковых нижних зубов SR Orthosit S PE форма N6L, цвета: 01, 1A, 2A, 1C, 2B, 1D, 1E, 3A, 4A, 4B

- A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
102. Набор фронтальных нижних зубов SR Phonares II форма L55, цвета: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
103. Набор боковых верхних зубов SR Phonares II Тип форма NU3, цвета: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
104. Набор боковых верхних зубов SR Phonares II Тип форма NU5, цвета: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
105. Набор боковых верхних зубов SR Phonares II Тип форма NU6, цвета: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
106. Набор боковых нижних зубов SR Phonares II Тип форма NL3, цвета: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
107. Набор боковых нижних зубов SR Phonares II Тип форма NL5, цвета: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
108. Набор боковых нижних зубов SR Phonares II Тип форма NL6, цвета: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
109. Набор боковых верхних зубов SR Phonares II Lingual форма LU3, цвета: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
110. Набор боковых верхних зубов SR Phonares II Lingual форма LU5, цвета: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
111. Набор боковых верхних зубов SR Phonares II Lingual форма LU6, цвета: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
112. Набор боковых нижних зубов SR Phonares II Lingual форма LL3, цвета: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
113. Набор боковых нижних зубов SR Phonares II Lingual форма LL5, цвета: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4
114. Набор боковых нижних зубов SR Phonares II Lingual форма LL6, цвета: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4

Принадлежности:

1. Расцветка SR Vivodent S DCL Shade Guide
2. Расцветка SR Vivodent S PE Shade Guide
3. Расцветка SR Phonares II Shade Guide

4. НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Изделие предназначено для изготовления съемных стоматологических протезов.

5. ПОКАЗАНИЯ

Виды съемного протезирования пациентов с полным или частичным отсутствием зубов:

- Частичное протезирование;
- Комбинированное протезирование;
- Полное протезирование;
- Покрывное протезирование (гибридное, с опорой на импланты).

6. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Если известно, что у пациента есть аллергия на какой-либо из компонентов изделия.

7. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Возможна аллергическая реакция при наличии у пациента аллергии к любому из компонентов изделия.

8. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Медицинское изделие относится к группе изделий для профессионального использования в зуботехнических лабораториях.

Потребители медицинского изделия – квалифицированный персонал зуботехнических лабораторий. Перед применением изделия персонал должен ознакомиться с инструкцией по применению.

Условия применения:

Температура окружающей среды: 20-42 °C

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Наборы фронтальных верхних и нижних зубов всех вариантов исполнения состоят из 6 зубов.

Наборы боковых верхних и нижних зубов всех вариантов исполнения состоят из 8 зубов.

Наборы зубов SR Vivodent S DCL, SR Orthotyp S DCL, SR Ortholingual S DCL, SR Vivodent S PE, SR Orthotyp S PE

Фронтальные верхние зубы SR Vivodent S DCL, SR Vivodent S PE

Фронтальные верхние зубы SR Vivodent S по их анатомическому строению подразделяются на три группы: треугольные, овальные, квадратные. По размерам зубы подразделяются на маленькие, средние, крупные.

Треугольная форма зубов

Эта группа отличается узкими зубами, с сужающейся в цервикальной области формой коронковой части. Вертикальный лабиальный изгиб выражен средне. Центральный резец имеет треугольную форму. Альвеолярный гребень также имеет треугольную форму и указывает на вероятность перекрестного прикуса.

Круглая форма зубов

Эта группа характеризуется сильными изгибами, которые проявляются, прежде всего, в выраженном лабиальном изгибе. Овальная форма альвеолярного гребня чаще всего встречается в случаях с глубоким прикусом.

Квадратная форма зубов

Такие зубы имеют скорее квадратную форму. Центральный резец доминирует. Вертикальный лабиальный изгиб выражен средне. Альвеолярный гребень имеет выраженную прямоугольную форму и указывает на ортогнатический прикус.

Боковые зубы SR Orthotyp S DCL и SR Orthotyp S PE рекомендуется использовать при нормальной ситуации с прикусом (функциональная окклюзия).

Боковые зубы SR Ortholingual S DCL рекомендуется использовать при лингвализированной постановке (окклюзии) зубов.

Физические характеристики материала зубов SR Vivodent S DCL, SR Orthotyp S DCL, SR Ortholingual S DCL, SR Vivodent S PE, SR Orthotyp S PE:

Характеристика	Значение
Прочность при изгибе, МПа	120±10%
Отличие размеров зубов от карты фасонов	≤ 5%
Водопоглощение (за 7 суток), мкг/мм ³	25,5±10%
Водорастворимость (за 7 суток), мкг/мм ³	0,7±10%
Соединение зубов с базисным материалов соответствует ГОСТ ISO 22112-2011	

Цвета зубов SR Vivodent S DCL, SR Orthotyp S DCL, SR Ortholingual S DCL согласно системе цветового кодирования A-D: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4

Цвета зубов SR Vivodent S PE, SR Orthotyp S PE согласно системе цветового кодирования PE: 01, 1A, 2A, 1C, 2B, 1D, 1E, 2C, 3A, 5B, 2E, 3E, 4A, 6B, 4B, 6C, 6D, 4C, 4D

Химический состав зубов:

Компонент	CAS#	Содержание в % по весу
Полиметилметакрилат	9011-14-7	73,1
Этилен гликоль диметакрилат	97-90-5	1,8
Алифатический уретан диметакрилат	1219495-43-8	15,9
1,10-Декандиолдиметакрилат	6701-13-9	5,2
Трициклодекан диметанол диметакрилат	43048-08-4	3,3
Дибензоилпероксид	94-36-0	0,59
Меквинол	150-76-5	0,01
Пигменты	Диоксид титана, 13463-67-7	0,1
	CI Pigment Yellow 53, 8007-18-9	
	CI Pigment red 144, 5280-78-4	
	Оксид железа (черный) E172, 1317-61-9	

В процессе производства все вещества, компоненты химического состава изделия теряют свои исходные свойства. Непосредственно зубы изготавливаются из материала, обладающего структурной однородностью и требуемыми физическими характеристиками.

Наборы боковых зубов SR Orthosit S PE

Боковые зубы SR Orthosit S PE рекомендуется использовать при нормальной ситуации с прикусом (функциональная окклюзия).

Цвета зубов SR Orthosit S PE согласно системе цветового кодирования PE: 01, 1A, 2A, 1C, 2B, 1D, 1E, 3A, 4A, 4B

Физические характеристики материала зубов SR Orthosit S PE:

Характеристика	Значение
Прочность при изгибе, МПа	120±10%
Отличие размеров зубов от карты фасонов	≤ 5%
Водопоглощение (за 7 суток), мкг/мм ³	23,0±10%
Водорастворимость (за 7 суток), мкг/мм ³	0,1±10%
Соединение зубов SR Orthosit S PE с базисным материалов соответствует ГОСТ ISO 22112-2011	

Химический состав материала зубов SR Orthosit S PE:

Компонент	CAS#	Содержание в % по весу
Полиметилметакрилат	9011-14-7	49,0
Этилен гликоль диметакрилат	97-90-5	1,1
Уретан диметакрилат	72869-86-4	27,0
Диоксид кремния	7631-86-9	22,5
Дибензоилпероксид	94-36-0	0,29
Меквинол	150-76-5	0,01
Пигменты	Диоксид титана, 13463-67-7	0,1
	CI Pigment Yellow 53, 8007-18-9	
	CI Pigment red 144, 5280-78-4	
	Оксид железа (черный) E172, 1317-61-9	
	Lumilux синий LZ 5870-38-2	

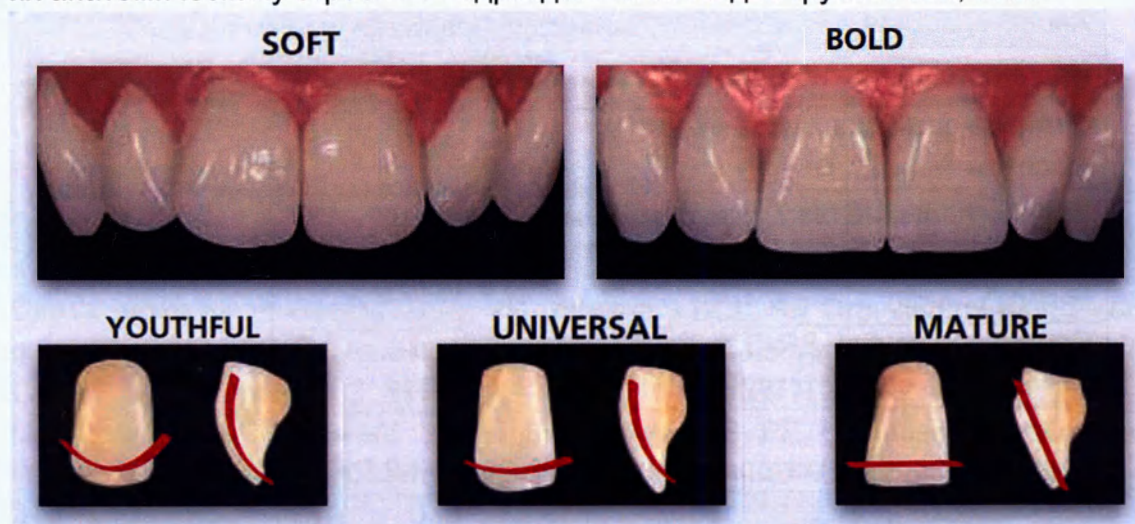
В процессе производства все вещества, компоненты химического состава изделия, теряют свои исходные свойства. Непосредственно зубы изготавливаются из материала, обладающего структурной однородностью и требуемыми физическими характеристиками.

Наборы зубов SR Phonares II

SR Phonares II – фронтальные зубы

SR Phonares II Typ, SR Phonares II Lingual – боковые зубы.

Фронтальные верхние зубы SR Phonares II по возрастным особенностям подразделяются на три группы: youthful, universal, mature. Также данные зубы по их анатомическому строению подразделяются на две группы: soft, bold.



По размерам зубы подразделяются на маленькие, средние, крупные.

Цвета зубов SR Phonares II, SR Phonares II Typ, SR Phonares II Lingual согласно системе цветового кодирования A-D: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4

Боковые зубы SR Phonares II Typ рекомендуется использовать при нормальной ситуации с прикусом (функциональная окклюзия).

Боковые зубы SR Phonares II Lingual рекомендуется использовать при лингвализированной постановке (окклюзии) зубов.

Химический состав материала зубов SR Phonares II:

Компонент	CAS#	Содержание в по весу
Полиметилметакрилат	9011-14-7	61,6
Этилен гликоль диметакрилат	97-90-5	1,8
Уретан диметакрилат	72869-86-4	29,2
Диоксид кремния	7631-86-9	7,0
Дибензоилпероксид	94-36-0	0,29
Меквинол	150-76-5	0,01
Пигмент	Диоксид титана, 13463-67-7	0,1
	CI Pigment Yellow 53, 8007-18-9	
	Оксид железа красный, 1309-37-1	
	CI Pigment red 144, 5280-78-4	
	Оксид железа (черный) E172, 1317-61-9	

В процессе производства все вещества, компоненты химического состава изделия теряют свои исходные свойства. Непосредственно зубы изготавливаются из

материала, обладающего структурной однородностью и требуемыми физическими характеристиками.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Расцветка SR Vivodent S DCL Shade Guide

Расцветка SR Vivodent S DCL Shade Guide предназначена для выбора цвета зубов SR Vivodent S DCL согласно системе цветового кодирования A-D.

Расцветка содержит образцы 20 цветов: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4.

Размеры расцветки (мм): 220*70*14

Масса расцветки – 91 г.

Расцветка SR Vivodent S PE Shade Guide

Расцветка SR Vivodent S PE Shade Guide предназначена для выбора цвета зубов SR Vivodent S PE согласно системе цветового кодирования PE.

Расцветка содержит образцы 20 цветов: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4.

Размеры расцветки (мм): 220*70*14

Масса расцветки – 91 г.

Расцветка SR Phonares II Shade Guide

Расцветка SR Phonares II Shade Guide предназначена для выбора цвета зубов SR Phonares II согласно системе цветового кодирования A-D.

Расцветка содержит образцы 20 цветов: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, BL1, BL2, BL3, BL4.

Размеры расцветки (мм): 220*70*14

Масса расцветки – 91 г.

10. ПРИМЕНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Необходимо учитывать следующие правила при применении изделия:

- Планирование и изготовление протезов должно происходить в тесном сотрудничестве с врачом-стоматологом. Врач-стоматолог и зубной техник должны обеспечить адекватную окклюзию и артикуляцию.
- Искусственные зубы не должны быть чрезмерно ослаблены в результате шлифовки. Необходимо соблюдать минимальные толщины стенок зуба в случае необходимости удаления части материала зуба. Необходимо отполировать поверхности зуба, затронутые шлифовкой.
- В процессе шлифовки с помощью вращающегося инструмента следует избегать перегрева зубов в результате сильного давления.
- Не рекомендуется нанесение глянцевого лака и спреев для чистки протезов. Не допускать контакта зубов с растворителями.
- При использовании материалов для облицовки следует соблюдать инструкции производителя данных материалов.

Необходимо учитывать следующие требования безопасности при применении изделия:

- Зубы не должны непосредственно контактировать с горячими предметами пламенем (напр., спиртовой горелкой).
- При проведении пришлифовки необходимо использовать защитные маску и вытяжку для защиты от пыли. Необходимо использовать очки для защиты от стружки.

В некоторых случаях возникает необходимость в доработке зубов и удалении части материала зуба. Для сохранения функциональности и цветового эффекта необходимо соблюдать минимальные толщины стенок зуба.

Фронтальные зубы. Минимальная толщина стенок зуба, мм.

Вариант исполнения	Минимальная толщина стенок зуба
SR Vivodent S DCL, SR Vivodent S PE	2,5 мм.
SR Phonares II	1,5 мм.

Боковые зубы. Минимальная толщина стенок зуба, мм.

Вариант исполнения	Центральная фиссура	Верхушки зубов	Пришеечная область
SR Orthotyp S DCL, SR Orthotyp S PE, SR Ortholingual S DCL, SR Orthosit S PE	2,0 мм.	2,5 мм.	2,5 мм.
SR Phonares II	2,0 мм.	2,5 мм.	1,5 мм.

Выбор цвета зубов

Выбор цвета зубов согласно системе цветового кодирования A-D производится с помощью расцветок SR Vivodent S DCL Shade Guide, Расцветка SR Phonares II Shade Guide.

Выбор цвета зубов согласно системе цветового кодирования PE производится с помощью расцветки SR Vivodent S PE Shade Guide.

Рекомендуется проводить подбор цвета зубов с пациентом при дневном свете при цветовой температуре 5500 K.

Выбор формы фронтальных зубов

Рекомендуется производить выбор формы зубов непосредственно с пациентом исходя из его анатомических и мимических характеристик. При выборе зубов следует пользоваться форм-картами зубов и учитывать особенности форм, приведенные в п. 4.1. Техническое описание.

Выбор размера передних зубов

Измерьте ширину носа пациента в районе ноздрей с помощью лицевого измерителя и выберите подходящий размер зубов согласно таблице:

Ширина носа	Рекомендуемый размер
Менее 29 мм.	Маленькие
От 29 мм. до 37 мм.	Средние
Более 37 мм.	Крупные

При выборе размера зубов рекомендуется принимать во внимание длину верхней губы.

Выбор формы боковых зубов

Выберите форму боковых зубов, используя рекомендуемые варианты комбинирования. В некоторых случаях врач-стоматолог может выбрать один из нескольких вариантов, исходя из функциональных и эстетических потребностей пациента. Также необходимо выбрать концепцию окклюзии, которая будет применяться в конкретном случае.

Функциональная (классическая) окклюзия применяется в нормальной ситуации при отсутствии проблем с прикусом. В данном случае контактируют бугорки и ямки верхних и нижних боковых зубов.

Лингвализированная окклюзия – разновидность окклюзии, при которой небные бугорки боковых зубов верхней челюсти контактируют с ямками боковых зубов нижней челюсти в позиции ЦО и при боковых движениях нижней челюсти (рабочие/нерабочие контакты). Таким образом, получается, что между небными бугорками верхних боковых зубов и ямками боковых зубов нижней челюсти возникает единственный окклюзионный контакт, при этом щечные бугорки боковых зубов нижней челюсти и ямки соответствующих им зубов антагонистов на верхней челюсти остаются вне контакта.

Жевательные силы, действующие на окклюзионные поверхности боковых зубов, направляются в язычном направлении и частично переносятся на протез нижней челюсти, значительно повышая его стабильность. Кроме того, исключается действие дестабилизирующей силы, возникающей на противоположной стороне челюсти при контакте щечных бугорков. Данная концепция рекомендуется при протезировании с опорой на импланты.

Рекомендуемые варианты комбинирования фронтальных зубов SR Vivodent S DCL/S PE с боковыми зубами SR Orthotyp S DCL/S PE и боковыми зубами SR Ortholingual S DCL:

		Фронтальные SR Vivodent S PE S DCL		Боковые SR Orthotyp S PE S DCL SR Ortholingual S DCL	
		Верхние	Нижние	Верхние/Нижние	Верхние/Нижние
МАЛЕНЬКИЕ	▲	A22 A42	A3, A4, A5 A3, A4, A5	N3U/N3L, N4U/N4L N3U/N3L, N4U/N4L	LU3/LL3 LU3/LL3
	●	A44	A3, A4, A5	N3U/N3L, N4U/N4L	LU3/LL3
	■	A11 A13	A3, A4, A5 A3, A4, A5, A6	N3U/N3L, N4U/N4L N3U/N3L, N4U/N4L	LU3/LL3 LU3/LL3
СРЕДНИЕ	▲	A25 A26	A6, A7, A8 A7, A8	N4U/N4L, N5U/N5L N4U/N4L, N5U/N5L	LU5/LL5 LU5/LL5
	●	A54	A7, A8	N4U/N4L, N5U/N5L	LU5/LL5
	■	A12 A24B A66	A6, A7, A8 A6, A7, A8 A6, A7, A8	N4U/N4L, N5U/N5L N4U/N4L, N5U/N5L N4U/N4L, N5U/N5L	LU5/LL5 LU5/LL5 LU5/LL5
КРУПНЫЕ	▲	A27 A68	A9, A10 A9, A10	N5U/N5L, N6U/N6L N5U/N5L, N6U/N6L	LU6/LL6 LU6/LL6
	●	A14	A8, A9	N5U/N5L, N6U/N6L N5U/N5L, N6U/N6L	LU6/LL6 LU6/LL6
	■	A15 A17	A10 A9, A10	N5U/N5L, N6U/N6L N5U/N5L, N6U/N6L	LU6/LL6 LU6/LL6

Рекомендуемые варианты комбинирования фронтальных зубов SR Vivodent S PE боковыми зубами SR Orthosit S PE:

		SR Vivodent S PE		SR Orthosit S PE
		Фронтальные		Боковые
		Верхние	Нижние	Верхние/Нижние
МАЛЕНЬКИЕ	▲	A22 A42	A3, A4, A5 A3, A4, A5	N3U/N3L, N4U/N4L N3U/N3L, N4U/N4L
	●	A44	A3, A4, A5	N3U/N3L, N4U/N4L
	■	A11 A13	A3, A4, A5 A3, A4, A5, A6	N3U/N3L, N4U/N4L N3U/N3L, N4U/N4L
СРЕДНИЕ	▲	A25 A26	A6, A7, A8 A7, A8	N4U/N4L, N5U/N5L N4U/N4L, N5U/N5L
	●	A54	A7, A8	N4U/N4L, N5U/N5L
	■	A12 A24B A66	A6, A7, A8 A6, A7, A8 A6, A7, A8	N4U/N4L, N5U/N5L N4U/N4L, N5U/N5L N4U/N4L, N5U/N5L
КРУПНЫЕ	▲	A27 A68	A9, A10 A9, A10	N5U/N5L, N6U/N6L N5U/N5L, N6U/N6L
	●	A14	A8, A9	N5U/N5L, N6U/N6L N5U/N5L, N6U/N6L
	■	A15 A17	A10 A9, A10	N5U/N5L, N6U/N6L N5U/N5L, N6U/N6L

Рекомендуемые варианты комбинирования фронтальных зубов SR Phonares II с боковыми зубами SR Phonares II Тип и боковыми зубами SR Phonares II Lingual:

		SR Phonares II		SR Phonares II	SR Phonares II
		Фронтальные		Typ	Lingual
		Верхние	Нижние	Боковые	Боковые
МАЛЕНЬКИЕ	soft	S61	L50, L51	NU3 / NL3	LU3 / LL3
		S71	L50, L51	NU3 / NL3, NU5 / NL5	LU3 / LL3, LU5 / LL5
		S81	L50, L51	NU3 / NL3	LU3 / LL3, LU5 / LL5
	bold	B61	L50, L51	NU3 / NL3	LU3 / LL3
		B71	L50, L51	NU3 / NL3, NU5 / NL5	LU3 / LL3
		B81	L50, L51	NU3 / NL3	LU3 / LL3
СРЕДНИЕ	soft	S62	L52, L53	NU3 / NL3, NU5 / NL5	LU5 / LL5
		S72	L52, L53	NU5 / NL5	LU5 / LL5, LU6 / LL6
		S82	L52, L53	NU5 / NL5	LU5 / LL5, LU6 / LL6
	bold	B62	L52, L53	NU3 / NL3, NU5 / NL5	LU5 / LL5, LU6 / LL6
		B72	L52, L53	NU3 / NL3, NU5 / NL5	LU5 / LL5, LU6 / LL6
		B82	L52, L53	NU3 / NL3, NU5 / NL5	LU3 / LL3, LU5 / LL5
КРУПНЫЕ	soft	S63	L54, L55	NU5 / NL5	LU6 / LL6
		S73	L54, L55	NU5 / NL5, NU6 / NL6	LU6 / LL6
		S83	L54, L55	NU5 / NL5, NU6 / NL6	LU6 / LL6
	bold	B63	L54, L55	NU6 / NL6	LU6 / LL6
		B73	L54, L55	NU6 / NL6	LU6 / LL6
		B83	L54, L55	NU5 / NL5, NU6 / NL6	LU6 / LL6

Подготовка зубов к соединению с базисным материалом

Подготовка поверхности зуба к соединению имеет важнейшее значение для образования прочной связи между ним и базисным материалом.

Для очистки поверхности зуба от пыли и жира следует провести паровую очистку и высушить воздухом

Поверхностям зуба, предназначенным для соединения, следует придать шероховатость с помощью пескоструйной обработки абразивом Al_2O_3 (50-100 мкм) при давлении 1-1,5 бар (100-150 кПа) или с помощью бура из карбида вольфрама с крестообразной насечкой. При использовании холодной полимеризации рекомендуется дополнительная механическая ретенция с помощью сферического бура.

С помощью кисти нанесите на фиксируемые поверхности мономер.

Методы и средства дезинфекции и очистки

Изделие нестерильное, предназначено для одноразового использования.

Изделие не подлежит очистке и дезинфекции.

11. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

Индивидуальная упаковка набора зубов (планка) содержит следующую информацию:

- Название изделия
- Товарный знак производителя
- Название и адрес производителя
- Страна производства
- Символ соответствия директиве 93/42/ЕЕС
- Номер партии
- Каталожный номер
- Штрих-код
- Информация о том, что изделие предназначено для использования только в стоматологии

Потребительская упаковка – картонная коробка.

Потребительская упаковка содержит следующую информацию:

- Названия вариантов исполнения изделия и их количество в потребительской упаковке
- Товарный знак производителя
- Название и адрес производителя
- Символ соответствия директиве 93/42/ЕЕС
- Название и адрес представителя производителя на территории РФ
- Номер и дата регистрационного удостоверения
- Информация о том, что изделие предназначено для использования в только в стоматологии
- Срок годности
- Символ необходимости ознакомиться с инструкцией по применению

Символы, используемые на упаковке:

Символ	Значение символа
	Символ соответствия директиве 93/42/ЕЕС
	Номер партии
	Каталожный номер
	Информация о производителе
	Изделие предназначено для использования только в стоматологии
	Срок годности



Необходимости ознакомиться с инструкцией по применению

12. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И СРОК ГОДНОСТИ

Хранить изделие следует закрытым в оригинальной упаковке производителя.

Температура при транспортировке и хранении изделия: от -20 до 60 °С.

Транспортировка изделия осуществляется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами.

Срок годности изделия – 10 лет.

13. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Данное изделие относится к классу риска отходов Б и должно быть утилизировано согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к обращению с медицинскими отходами» 2.1.7.2790-10.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

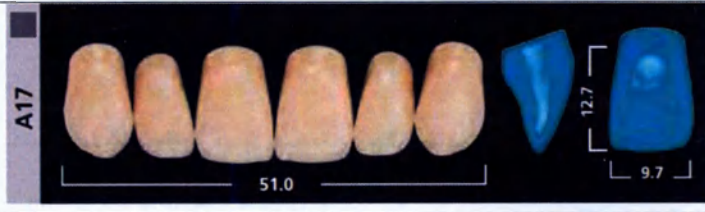
Применение изделия должно проводиться в строгом соответствии с «Инструкцией по применению». Производитель не несёт ответственности за повреждения, которые стали следствием несоблюдения инструкции или предписанной сферы применения.

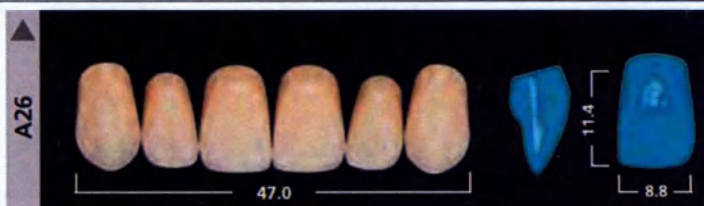
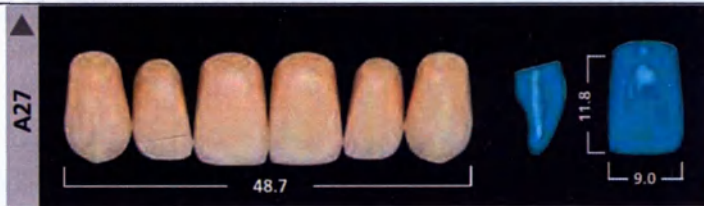
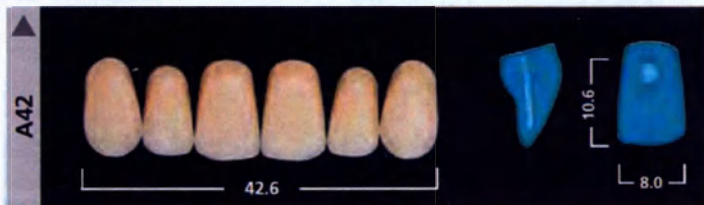
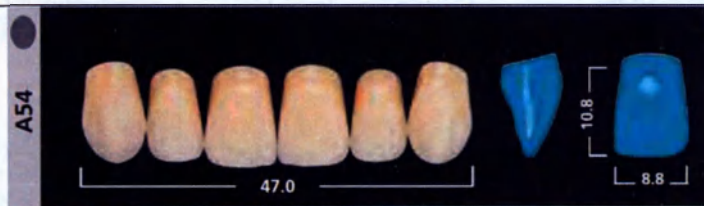
Сервисное и техническое обслуживание изделия не требуется.

На территории Российской Федерации претензии по гарантии и качеству продукции направляются: ООО «Ивоклар Вивадент» 115432 г. Москва, пр-т Андропова, д.18, стр.6, тел: +7(499) 418-03-01.

Приложение 1. Форм-карта фронтальных зубов SR Vivodent S DCL / SR Vivodent S PE

Варианты исполнения наборов фронтальных зубов SR Vivodent S DCL / SR Vivodent S PE:

Форма	Описание	Размеры согласно карте фасонов, мм.
A11	верхние, маленькие, квадратные	
A12	верхние, средние, квадратные	
A13	верхние, маленькие, квадратные	
A14	верхние, крупные, круглые	
A15:	верхние, крупные, квадратные	
A17	верхние, крупные, квадратные	
A22	верхние, маленькие, треугольные	

A24B	верхние, средние, квадратные	
A25	верхние, средние, треугольные	
A26	верхние, средние, треугольные	
A27	верхние, крупные, треугольные	
A42	верхние, маленькие, треугольные	
A44	верхние, маленькие, круглые	
A54	верхние, средние, круглые	
A66	верхние, средние, квадратные	

A68	верхние, крупные, треугольные	
A3	нижние, маленькие	
A4	нижние, маленькие	
A5	нижние, маленькие	
A6	нижние, маленькие-средние	
A7	нижние, средние	
A8	нижние, средние-крупные	
A9	нижние, крупные	

A10	нижние, крупные	
-----	-----------------	--

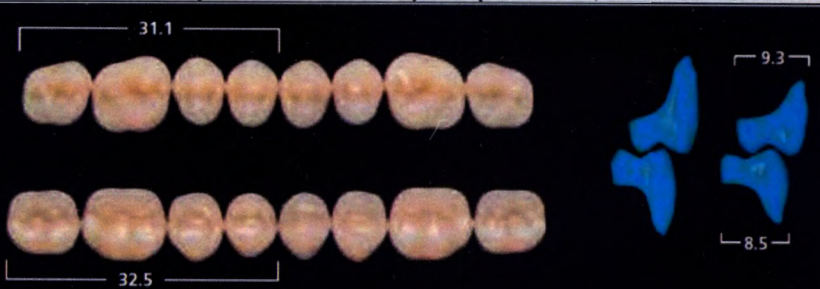
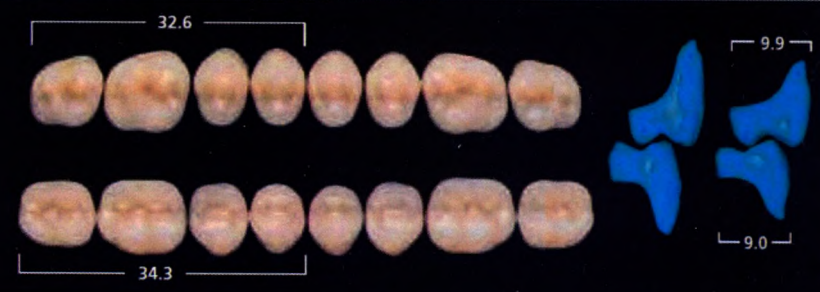
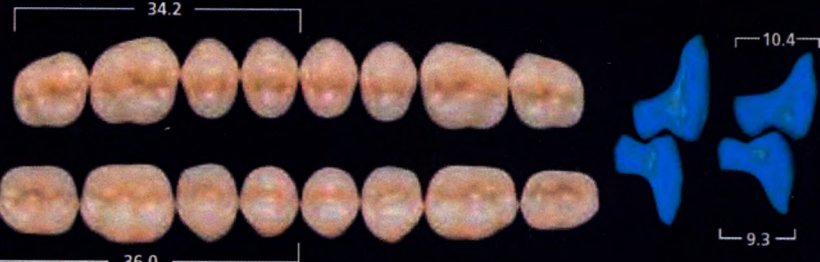
Приложение 2. Форм-карта боковых зубов SR Orthotyp S DCL / SR Orthotyp S PE

Варианты исполнения боковых зубов SR Orthotyp S DCL / SR Orthotyp S PE:

Форма	Описание	Размеры согласно карте фасонов, мм.	
N3U - верхние N3L - нижние	маленькие	N3U N3L	
N4U - верхние N4L - нижние	маленькие- средние	N4U N4L	
N5U - верхние N5L - нижние	средние- крупные	N5U N5L	
N6U - верхние N6L - нижние	крупные	N6U N6L	

Приложение 3. Форм-карта боковых зубов SR Ortholingual S DCL

Варианты исполнения боковых зубов SR Ortholingual S DCL:

Форма	Описание	Размеры согласно карте фасонов, мм.	
LU3 - верхние LL3 - нижние	маленькие	LU3 LL3	
LU5 - верхние LL5 - нижние	средние	LU5 LL5	
LU6 - верхние LL6 - нижние	крупные	LU6 LL6	

Приложение 4. Форм-карта боковых зубов SR Orthosit S PE

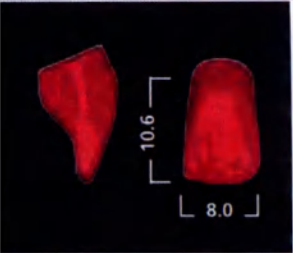
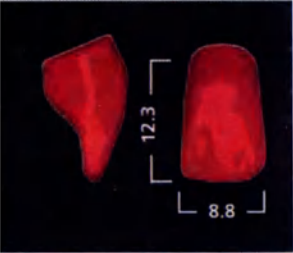
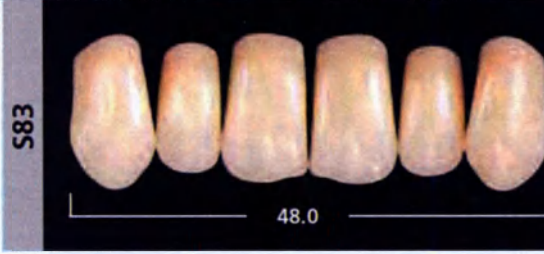
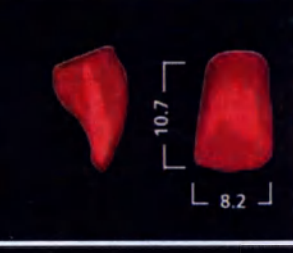
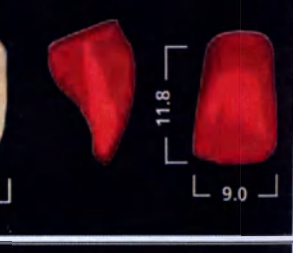
Варианты исполнения наборов боковых зубов SR Orthosit S PE:

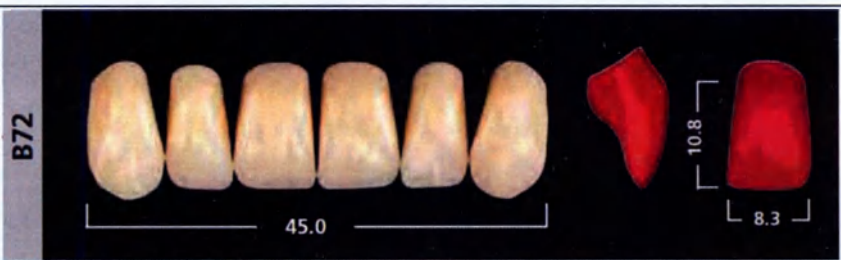
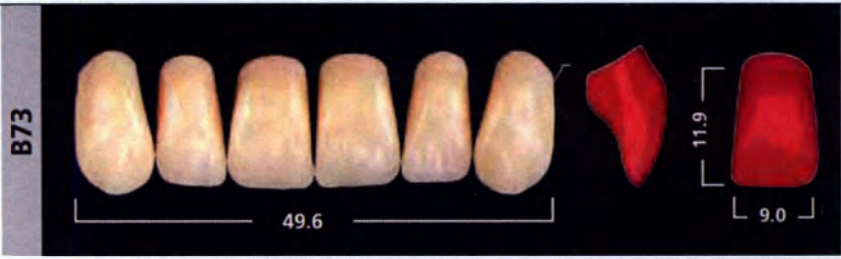
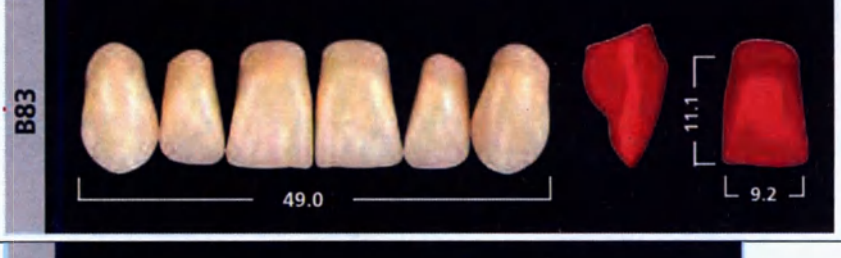
Форма	Описание	Размеры согласно карте фасонов, мм.
N3U - верхние N3L - нижние	маленькие	
N4U - верхние N4L - нижние	маленькие- средние	
N5U - верхние N5L - нижние	средние- крупные	
N6U - верхние N6L - нижние	крупные	

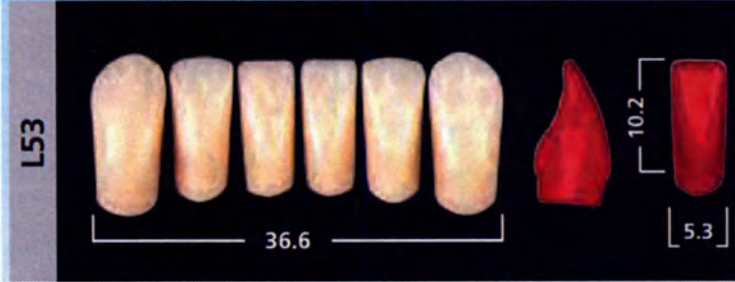
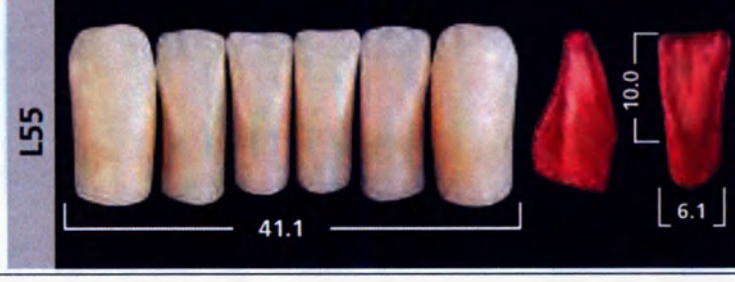
Приложение 5. Форм-карта фронтальных зубов SR Phonares II

Варианты исполнения наборов фронтальных зубов SR Phonares II:

Форма	Описание	Размеры согласно карте фасонов, мм.
S61	верхние, маленькие, Soft, Youthful	
S62	верхние, средние, Soft, Youthful	
S63	верхние, крупные, Soft, Youthful	
S71	верхние, маленькие, Soft, Universal	
S72	верхние, средние, Soft, Universal	
S73	верхние, крупные, Soft, Universal	

S81	верхние, маленькие, Soft, Mature	 
S82	верхние, средние, Soft, Mature	 
S83	верхние, крупные, Soft, Mature	 
B61	верхние, маленькие, Bold, Youthful	 
B62	верхние, средние, Bold, Youthful	 
B63	верхние, крупные, Bold, Youthful	 
B71	верхние, маленькие, Bold, Universal	 

B72	верхние, средние, Bold, Universal	
B73	верхние, крупные, Bold, Universal	
B81	верхние, маленькие, Bold, Mature	
B82	верхние, средние, Bold, Mature	
B83	верхние, крупные, Bold, Mature	
L50	нижние, маленькие	

L51	нижние, маленькие	
L52	нижние, средние	
L53	нижние, средние	
L54	нижние, крупные	
L55	нижние, крупные	

Приложение 6. Форм-карта боковых зубов SR Phonares II Тип

Варианты исполнения наборов боковых зубов SR Phonares II Тип:

Форма	Описание	Размеры согласно карте фасонов, мм.
NU3 - верхние NL3 - нижние	маленькие- средние	NU3: 29.7 NL3: 32.2 9.72 8.52
NU5 - верхние NL5 - нижние	маленькие- средние- крупные	NU5: 31.9 NL5: 34.6 10.46 9.36
NU6 - верхние NL6 - нижние	средние- крупные	NU6: 33.4 NL6: 36.2 11.06 9.7

Приложение 7. Форм-карта SR Phonares II Lingual

Варианты исполнения наборов боковых зубов SR Phonares II Lingual:

Форма	Описание	Размеры согласно карте фасонов, мм.
LU3 - верхние LL3 - нижние	маленькие- средние	
LU5 - верхние LL5 - нижние	маленькие- средние	
LU6 - верхние LL6 - нижние	средние- крупные	

**Инструкция по применению
медицинского изделия**
«Зубы искусственные SR Vivodent S, SR Orthotyp S, SR
Ortholingual S, SR Orthosit S, SR Phonares II
с принадлежностями»

Настоящая техническая документация отражает текущие знания о соответствующем изделии.

Выпущен: П. Ойри

Функция: Директор по корпоративному управлению качеством

Дата: 24.01.2020

/Подпись/

Перевод с немецкого языка на русский язык

Легализация

Настоящим подтверждается подлинность подписи представшего передо мной
Г-на Ойри Патрика, дата рождения: 09.10.1963,
Рабочий адрес:
FL-9494 Шан, Бендерерштрассе 2
Подтверждение: № подписи на хранении

Г. Вадуц, 27.01.2020

Княжеский окружной суд, Андреа Альбрехт-Шэдлер

/Подпись/

Штамп: Андреа Альбрехт-Шэдлер

Специалист отдела легализации

27 января 2020 г.

Печать: Княжеский окружной суд. Квитанция об оплате сбора 10.- шв. франков

Печать: Княжеский окружной суд

Перевод данного текста выполнен переводчиком Ясыбаш Андреем Афанасьевичем

Российская Федерация

Город Москва

Одиннадцатого февраля две тысячи двадцатого года

Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Ясыбаш Андрея Афанасьевича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/09-н/77-2020- 13-2419

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 200 руб.

Г.Б. АКИМОВ

Прошнуровано, прошнуровано и скреплено печатью 17 лист(-а, -ов).

Нотариус:

