



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ФармИнформ»
Макарова О.Е.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
изделия медицинского назначения:

Повязка фиксирующая Vesa-C,
производства «Бектон Дикинсон Инфьюжн Терапии АВ», Швеция

BD Vesa-C

Стерильные одноразовые повязки для фиксации наружной части внутривенных устройств

Поставляется в стерильной индивидуальной упаковке.

Описание

Приспособление BD Vesa-C™ представляет собой стерильные внутривенные повязки, обеспечивающие оптимальную фиксацию устройств для внутривенного доступа канюль BD Venflon и BD Neoflon BD Vesa-C защищает место венепункции и обеспечивает свободный доступ к нему воздуха. Специальная тканевая прослойка абсорбирует экссудат и поддерживает в сухом состоянии место венепункции.



Мягкая салфетка для размещения под крылышками ВВ катетера/канюли повышает степень комфорта пациента.

Для удобства повязка BD Vesa-C имеет дополнительное прозрачное окошко из полиуретана, которое облегчает проведение контроля за положением катетера в вене.

Краткое руководство по использованию:

После установки катетера убедиться, что место размещения повязки (расположения венозного катетера) антисептически обработано, обезжирено, чистое и сухое. Перед вскрытием индивидуальной упаковки тщательно вымыть руки, вытереть насухо, обработать антисептиком.

1. Вскрыть упаковку повязки, потянув в разные стороны за расщепленный край упаковки, помеченный стрелками.
2. Вынуть повязку и салфетку.
3. Снять защитное покрытие повязки, расположенное над прозрачной частью и приклеить повязку так, чтобы под пленкой было видно место стояния катетера в вене.
4. Подложить под «крылышки» наружной части катетера мягкую салфетку.
5. Полностью приклеить повязку так, чтобы разрез оставлял свободным канюлю катетера.
6. Смену повязки производить раз в 2-5 дней, чаще – по индивидуальным показаниям

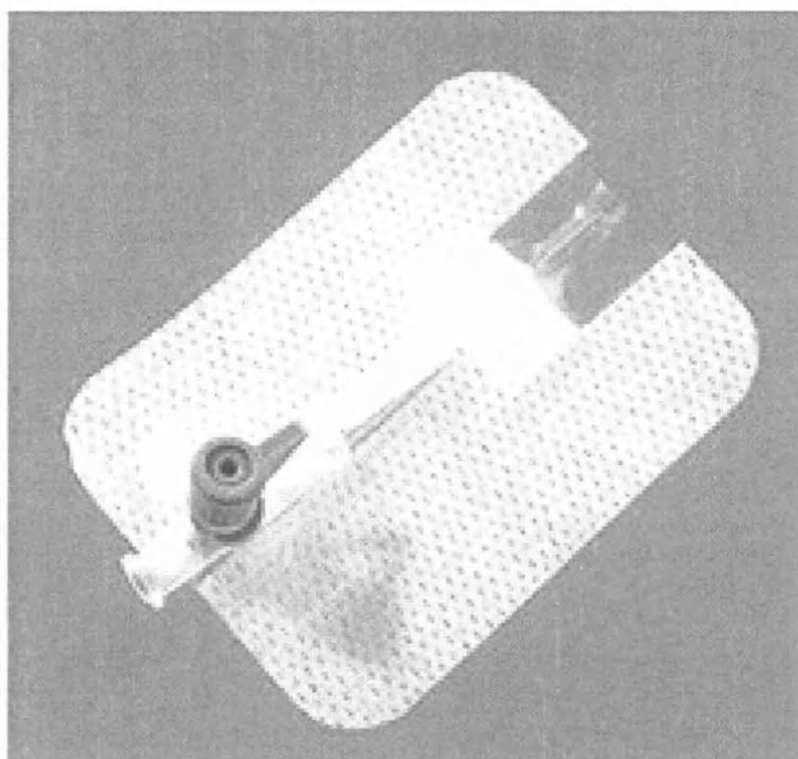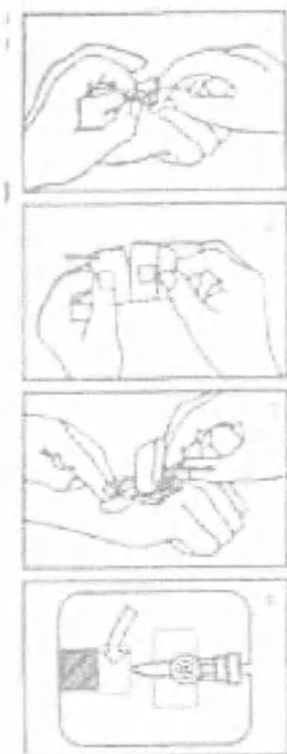

Упаковка: полиэтилен, бумага.

Способ стерилизации: оксидом этилена.

Срок годности: 5 лет.

**Класс I в соответствии с Европейскими директивами
по медицинской технике 93/42/ЕЭ**



BD Vesa-C . Стерильные одноразовые повязки для фиксации внутривенных устройств

BD Vesa-C

Стерильные одноразовые повязки для фиксации внутривенных устройств

Количество в упаковке: 50

Описание

Приспособление BD Vesa-C™ представляет собой стерильные внутривенные повязки, обеспечивающие оптимальную фиксацию устройств для внутривенного доступа канюль BD Venflon и BD Neoflon BD Vesa-C защищает место венепункции и обеспечивает свободный доступ к нему воздуха.

Специальная тканевая абсорбирует экссудат и поддерживает в сухом состоянии место венепункции.

Мягкая салфетка для размещения под крылышками ВВ катетера/канюли повышает степень комфорта пациента.

Для удобства повязка BD Vesa-C имеет дополнительное прозрачное окошко из полиуретана, которое облегчает проведение контроля за положением катетера в вене.

Способ стерилизации: оксидом этилена.

Срок годности: 5 лет.

Класс I в соответствии с Европейскими директивами по медицинской технике 93/42/ЕЭ