


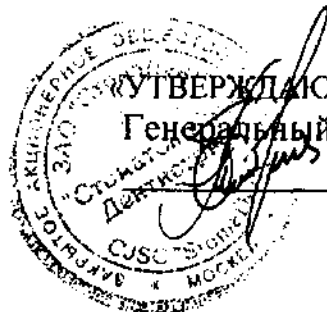

«УТВЕРЖДАЮ»:

Генеральный директор ЗАО «СтомаДент»

Добровольский П.В.

Инструкция по применению
цемента цинкосульфатного с модифицирующими добавками для временного
пломбирования зубов Ц – ЦСФ.

Флакон с материалом перед вскрытием встряхните.

Необходимое количество материала поместите на стеклянную пластину и
смешайте с дистиллированной водой в соотношении 2:1, до получения однородной
консистенции.

При температуре + 23°C: рабочее время не менее 45 секунд,
время твердения не более 6 минут.

Не рекомендуется использовать затвердевший материал для повторного
замешивания.

Прием пищи возможен через 2 часа.

Внимание! Материал боится сырости.

Копия верна:

ген. директор ЗАО «СтомаДент»
Добровольский П.В.

