



Инструкция
по применению одежды одноразовой медицинской
по ТУ 9398-001-65578626-2010

Назначение:

Одежда одноразовая медицинская из нетканого материала, нестерильная, предназначенная для минимизации распространения возбудителей инфекций в помещениях ЛПУ.

Ассортимент изделий:

Маски медицинские, шапочки медицинские, бахилы медицинские.

Применение маски медицинской:

1. Достаньте из упаковки.
2. Наденьте маску на лицо, таким образом, чтоб надпись (торговое наименование) на маске оказалась снаружи, в верхнем левом углу.
3. В случае отсутствия надписи (торгового наименования), маску необходимо надеть таким образом, чтобы внешняя складка, располагающиеся посередине маски, оказалась снаружи.
4. Верхний край маски необходимо зафиксировать на носу путем сдвигания пальцами гибкой проволоочной зоны (наносника).
5. Расправьте складки маски, так, чтоб она облегла ваш подбородок.
6. Необходимо добиться такого расположения (прилегания) маски, чтоб все края маски плотно прилегали к лицу, закрывая нос и рот.
7. Не используйте повторно одноразовую маску.
8. Использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.

Применение шапочки медицинской:

1. Достаньте из упаковки.
2. Раскройте, потянув края шапочки в противоположные стороны.
3. Наденьте шапочку на голову, таким образом, чтоб шапочка плотно и полностью закрыла волосной покров на голове.
4. Не используйте повторно одноразовую шапочку.
5. Использованную одноразовую шапочку следует немедленно выбросить в отходы.

Применение бахил медицинских:

1. Достаньте из упаковки.
2. Раскройте, потянув края бахилы в противоположные стороны.
3. Наденьте бахилу, таким образом, чтоб она плотно облегла обувь и полностью закрывала подошву.
4. Не используйте повторно одноразовые бахилы.
5. Использованные одноразовые бахилы следует немедленно выбросить в отходы.

Производитель:

ООО «КИТ», Россия, 600009, г. Владимир, ул. Полины Осипенко 69, телефон 8 (4922) 46-22-99. www.latio.ru.com,