

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «ХЕМА»



Ю.С. Лебедин

« 03 » августа 2020 г.

Фотографические изображения общего вида

медицинского изделия и его компонентов

«Набор реагентов для иммуноферментного определения хорионического
гонадотропина в сыворотке (плазме) крови «ХГч-ИФА»»

Кат. №	Сокращенное наименование	Серия	Годен до (год-мес)
K205	«ХГЧ-ИФА»	9042	2021-06
Набора реагентов для иммуноферментного определения хорионического гонадотропина в сыворотке (плазме) крови «ХГЧ-ИФА»			
Условия хранения и транспортировки: +2-8°C			
Набор соответствует требованиям			
Упаковка соответствует требованиям			
		ТУ № 21.20.23-205-18619450-2020	
		ТУ № 21.20.23-205-18619450-2020	



Instruction for use



НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХОРИОНИЧЕСКОГО ГОНАДОТРОПИНА В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ «ХГЧ-ИФА»

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ REF

ТУ 21.20.23-205-18619450

серия

Набор реагентов для иммуноферментного определения
хорионического гонадотропина в сыворотке (плазме) крови
«ХГЧ-ИФА»

REF K205 Серия 9042

Годен до 2021-06

ТУ 21.20.23-205-18619450-2020

ру от

«Антитела к вирусу гепатита С, антитела к ВМЧ 1, 2, антиген вируса гепатита В (HBsAg), отсутствуют». Сыворотка, входящая в состав компонентов Набора, инактивирована.
Для профессионального применения.

141012, МЗС, Трубчевск, ул. Трубочкина, д.20
Тел: (48439) 21-20, 21-20-23, 21-20-24, 21-20-25, 21-20-26, 21-20-27, 21-20-28, 21-20-29, 21-20-30, 21-20-31, 21-20-32, 21-20-33, 21-20-34, 21-20-35, 21-20-36, 21-20-37, 21-20-38, 21-20-39, 21-20-40, 21-20-41, 21-20-42, 21-20-43, 21-20-44, 21-20-45, 21-20-46, 21-20-47, 21-20-48, 21-20-49, 21-20-50, 21-20-51, 21-20-52, 21-20-53, 21-20-54, 21-20-55, 21-20-56, 21-20-57, 21-20-58, 21-20-59, 21-20-60, 21-20-61, 21-20-62, 21-20-63, 21-20-64, 21-20-65, 21-20-66, 21-20-67, 21-20-68, 21-20-69, 21-20-70, 21-20-71, 21-20-72, 21-20-73, 21-20-74, 21-20-75, 21-20-76, 21-20-77, 21-20-78, 21-20-79, 21-20-80, 21-20-81, 21-20-82, 21-20-83, 21-20-84, 21-20-85, 21-20-86, 21-20-87, 21-20-88, 21-20-89, 21-20-90, 21-20-91, 21-20-92, 21-20-93, 21-20-94, 21-20-95, 21-20-96, 21-20-97, 21-20-98, 21-20-99, 21-20-100, 21-20-101, 21-20-102, 21-20-103, 21-20-104, 21-20-105, 21-20-106, 21-20-107, 21-20-108, 21-20-109, 21-20-110, 21-20-111, 21-20-112, 21-20-113, 21-20-114, 21-20-115, 21-20-116, 21-20-117, 21-20-118, 21-20-119, 21-20-120, 21-20-121, 21-20-122, 21-20-123, 21-20-124, 21-20-125, 21-20-126, 21-20-127, 21-20-128, 21-20-129, 21-20-130, 21-20-131, 21-20-132, 21-20-133, 21-20-134, 21-20-135, 21-20-136, 21-20-137, 21-20-138, 21-20-139, 21-20-140, 21-20-141, 21-20-142, 21-20-143, 21-20-144, 21-20-145, 21-20-146, 21-20-147, 21-20-148, 21-20-149, 21-20-150, 21-20-151, 21-20-152, 21-20-153, 21-20-154, 21-20-155, 21-20-156, 21-20-157, 21-20-158, 21-20-159, 21-20-160, 21-20-161, 21-20-162, 21-20-163, 21-20-164, 21-20-165, 21-20-166, 21-20-167, 21-20-168, 21-20-169, 21-20-170, 21-20-171, 21-20-172, 21-20-173, 21-20-174, 21-20-175, 21-20-176, 21-20-177, 21-20-178, 21-20-179, 21-20-180, 21-20-181, 21-20-182, 21-20-183, 21-20-184, 21-20-185, 21-20-186, 21-20-187, 21-20-188, 21-20-189, 21-20-190, 21-20-191, 21-20-192, 21-20-193, 21-20-194, 21-20-195, 21-20-196, 21-20-197, 21-20-198, 21-20-199, 21-20-200, 21-20-201, 21-20-202, 21-20-203, 21-20-204, 21-20-205, 21-20-206, 21-20-207, 21-20-208, 21-20-209, 21-20-210, 21-20-211, 21-20-212, 21-20-213, 21-20-214, 21-20-215, 21-20-216, 21-20-217, 21-20-218, 21-20-219, 21-20-220, 21-20-221, 21-20-222, 21-20-223, 21-20-224, 21-20-225, 21-20-226, 21-20-227, 21-20-228, 21-20-229, 21-20-230, 21-20-231, 21-20-232, 21-20-233, 21-20-234, 21-20-235, 21-20-236, 21-20-237, 21-20-238, 21-20-239, 21-20-240, 21-20-241, 21-20-242, 21-20-243, 21-20-244, 21-20-245, 21-20-246, 21-20-247, 21-20-248, 21-20-249, 21-20-250, 21-20-251, 21-20-252, 21-20-253, 21-20-254, 21-20-255, 21-20-256, 21-20-257, 21-20-258, 21-20-259, 21-20-260, 21-20-261, 21-20-262, 21-20-263, 21-20-264, 21-20-265, 21-20-266, 21-20-267, 21-20-268, 21-20-269, 21-20-270, 21-20-271, 21-20-272, 21-20-273, 21-20-274, 21-20-275, 21-20-276, 21-20-277, 21-20-278, 21-20-279, 21-20-280, 21-20-281, 21-20-282, 21-20-283, 21-20-284, 21-20-285, 21-20-286, 21-20-287, 21-20-288, 21-20-289, 21-20-290, 21-20-291, 21-20-292, 21-20-293, 21-20-294, 21-20-295, 21-20-296, 21-20-297, 21-20-298, 21-20-299, 21-20-300, 21-20-301, 21-20-302, 21-20-303, 21-20-304, 21-20-305, 21-20-306, 21-20-307, 21-20-308, 21-20-309, 21-20-310, 21-20-311, 21-20-312, 21-20-313, 21-20-314, 21-20-315, 21-20-316, 21-20-317, 21-20-318, 21-20-319, 21-20-320, 21-20-321, 21-20-322, 21-20-323, 21-20-324, 21-20-325, 21-20-326, 21-20-327, 21-20-328, 21-20-329, 21-20-330, 21-20-331, 21-20-332, 21-20-333, 21-20-334, 21-20-335, 21-20-336, 21-20-337, 21-20-338, 21-20-339, 21-20-340, 21-20-341, 21-20-342, 21-20-343, 21-20-344, 21-20-345, 21-20-346, 21-20-347, 21-20-348, 21-20-349, 21-20-350, 21-20-351, 21-20-352, 21-20-353, 21-20-354, 21-20-355, 21-20-356, 21-20-357, 21-20-358, 21-20-359, 21-20-360, 21-20-361, 21-20-362, 21-20-363, 21-20-364, 21-20-365, 21-20-366, 21-20-367, 21-20-368, 21-20-369, 21-20-370, 21-20-371, 21-20-372, 21-20-373, 21-20-374, 21-20-375, 21-20-376, 21-20-377, 21-20-378, 21-20-379, 21-20-380, 21-20-381, 21-20-382, 21-20-383, 21-20-384, 21-20-385, 21-20-386, 21-20-387, 21-20-388, 21-20-389, 21-20-390, 21-20-391, 21-20-392, 21-20-393, 21-20-394, 21-20-395, 21-20-396, 21-20-397, 21-20-398, 21-20-399, 21-20-400, 21-20-401, 21-20-402, 21-20-403, 21-20-404, 21-20-405, 21-20-406, 21-20-407, 21-20-408, 21-20-409, 21-20-410, 21-20-411, 21-20-412, 21-20-413, 21-20-414, 21-20-415, 21-20-416, 21-20-417, 21-20-418, 21-20-419, 21-20-420, 21-20-421, 21-20-422, 21-20-423, 21-20-424, 21-20-425, 21-20-426, 21-20-427, 21-20-428, 21-20-429, 21-20-430, 21-20-431, 21-20-432, 21-20-433, 21-20-434, 21-20-435, 21-20-436, 21-20-437, 21-20-438, 21-20-439, 21-20-440, 21-20-441, 21-20-442, 21-20-443, 21-20-444, 21-20-445, 21-20-446, 21-20-447, 21-20-448, 21-20-449, 21-20-450, 21-20-451, 21-20-452, 21-20-453, 21-20-454, 21-20-455, 21-20-456, 21-20-457, 21-20-458, 21-20-459, 21-20-460, 21-20-461, 21-20-462, 21-20-463, 21-20-464, 21-20-465, 21-20-466, 21-20-467, 21-20-468, 21-20-469, 21-20-470, 21-20-471, 21-20-472, 21-20-473, 21-20-474, 21-20-475, 21-20-476, 21-20-477, 21-20-478, 21-20-479, 21-20-480, 21-20-481, 21-20-482, 21-20-483, 21-20-484, 21-20-485, 21-20-486, 21-20-487, 21-20-488, 21-20-489, 21-20-490, 21-20-491, 21-20-492, 21-20-493, 21-20-494, 21-20-495, 21-20-496, 21-20-497, 21-20-498, 21-20-499, 21-20-500, 21-20-501, 21-20-502, 21-20-503, 21-20-504, 21-20-505, 21-20-506, 21-20-507, 21-20-508, 21-20-509, 21-20-510, 21-20-511, 21-20-512, 21-20-513, 21-20-514, 21-20-515, 21-20-516, 21-20-517, 21-20-518, 21-20-519, 21-20-520, 21-20-521, 21-20-522, 21-20-523, 21-20-524, 21-20-525, 21-20-526, 21-20-527, 21-20-528, 21-20-529, 21-20-530, 21-20-531, 21-20-532, 21-20-533, 21-20-534, 21-20-535, 21-20-536, 21-20-537, 21-20-538, 21-20-539, 21-20-540, 21-20-541, 21-20-542, 21-20-543, 21-20-544, 21-20-545, 21-20-546, 21-20-547, 21-20-548, 21-20-549, 21-20-550, 21-20-551, 21-20-552, 21-20-553, 21-20-554, 21-20-555, 21-20-556, 21-20-557, 21-20-558, 21-20-559, 21-20-560, 21-20-561, 21-20-562, 21-20-563, 21-20-564, 21-20-565, 21-20-566, 21-20-567, 21-20-568, 21-20-569, 21-20-570, 21-20-571, 21-20-572, 21-20-573, 21-20-574, 21-20-575, 21-20-576, 21-20-577, 21-20-578, 21-20-579, 21-20-580, 21-20-581, 21-20-582, 21-20-583, 21-20-584, 21-20-585, 21-20-586, 21-20-587, 21-20-588, 21-20-589, 21-20-590, 21-20-591, 21-20-592, 21-20-593, 21-20-594, 21-20-595, 21-20-596, 21-20-597, 21-20-598, 21-20-599, 21-20-600, 21-20-601, 21-20-602, 21-20-603, 21-20-604, 21-20-605, 21-20-606, 21-20-607, 21-20-608, 21-20-609, 21-20-610, 21-20-611, 21-20-612, 21-20-613, 21-20-614, 21-20-615, 21-20-616, 21-20-617, 21-20-618, 21-20-619, 21-20-620, 21-20-621, 21-20-622, 21-20-623, 21-20-624, 21-20-625, 21-20-626, 21-20-627, 21-20-628, 21-20-629, 21-20-630, 21-20-631, 21-20-632, 21-20-633, 21-20-634, 21-20-635, 21-20-636, 21-20-637, 21-20-638, 21-20-639, 21-20-640, 21-20-641, 21-20-642, 21-20-643, 21-20-644, 21-20-645, 21-20-646, 21-20-647, 21-20-648, 21-20-649, 21-20-650, 21-20-651, 21-20-652, 21-20-653, 21-20-654, 21-20-655, 21-20-656, 21-20-657, 21-20-658, 21-20-659, 21-20-660, 21-20-661, 21-20-662, 21-20-663, 21-20-664, 21-20-665, 21-20-666, 21-20-667, 21-20-668, 21-20-669, 21-20-670, 21-20-671, 21-20-672, 21-20-673, 21-20-674, 21-20-675, 21-20-676, 21-20-677, 21-20-678, 21-20-679, 21-20-680, 21-20-681, 21-20-682, 21-20-683, 21-20-684, 21-20-685, 21-20-686, 21-20-687, 21-20-688, 21-20-689, 21-20-690, 21-20-691, 21-20-692, 21-20-693, 21-20-694, 21-20-695, 21-20-696, 21-20-697, 21-20-698, 21-20-699, 21-20-700, 21-20-701, 21-20-702, 21-20-703, 21-20-704, 21-20-705, 21-20-706, 21-20-707, 21-20-708, 21-20-709, 21-20-710, 21-20-711, 21-20-712, 21-20-713, 21-20-714, 21-20-715, 21-20-716, 21-20-717, 21-20-718, 21-20-719, 21-20-720, 21-20-721, 21-20-722, 21-20-723, 21-20-724, 21-20-725, 21-20-726, 21-20-727, 21-20-728, 21-20-729, 21-20-730, 21-20-731, 21-20-732, 21-20-733, 21-20-734, 21-20-735, 21-20-736, 21-20-737, 21-20-738, 21-20-739, 21-20-740, 21-20-741, 21-20-742, 21-20-743, 21-20-744, 21-20-745, 21-20-746, 21-20-747, 21-20-748, 21-20-749, 21-20-750, 21-20-751, 21-20-752, 21-20-753, 21-20-754, 21-20-755, 21-20-756, 21-20-757, 21-20-758, 21-20-759, 21-20-760, 21-20-761, 21-20-762, 21-20-763, 21-20-764, 21-20-765, 21-20-766, 21-20-767, 21-20-768, 21-20-769, 21-20-770, 21-20-771, 21-20-772, 21-20-773, 21-20-774, 21-20-775, 21-20-776, 21-20-777, 21-20-778, 21-20-779, 21-20-780, 21-20-781, 21-20-782, 21-20-783, 21-20-784, 21-20-785, 21-20-786, 21-20-787, 21-20-788, 21-20-789, 21-20-790, 21-20-791, 21-20-792, 21-20-793, 21-20-794, 21-20-795, 21-20-796, 21-20-797, 21-20-798, 21-20-799, 21-20-800, 21-20-801, 21-20-802, 21-20-803, 21-20-804, 21-20-805, 21-20-806, 21-20-807, 21-20-808, 21-20-809, 21-20-810, 21-20-811, 21-20-812, 21-20-813, 21-20-814, 21-20-815, 21-20-816, 21-20-817, 21-20-818, 21-20-819, 21-20-820, 21-20-821, 21-20-822, 21-20-823, 21-20-824, 21-20-825, 21-20-826, 21-20-827, 21-20-828, 21-20-829, 21-20-830, 21-20-831, 21-20-832, 21-20-833, 21-20-834, 21-20-835, 21-20-836, 21-20-837, 21-20-838, 21-20-839, 21-20-840, 21-20-841, 21-20-842, 21-20-843, 21-20-844, 21-20-845, 21-20-846, 21-20-847, 21-20-848, 21-20-849, 21-20-850, 21-20-851, 21-20-852, 21-20-853, 21-20-854, 21-20-855, 21-20-856, 21-20-857, 21-20-858, 21-20-859, 21-20-860, 21-20-861, 21-20-862, 21-20-863, 21-20-864, 21-20-865, 21-20-866, 21-20-867, 21-20-868, 21-20-869, 21-20-870, 21-20-871, 21-20-872, 21-20-873, 21-20-874, 21-20-875, 21-20-876, 21-20-877, 21-20-878, 21-20-879, 21-20-880, 21-20-881, 21-20-882, 21-20-883, 21-20-884, 21-20-885, 21-20-886, 21-20-887, 21-20-888, 21-20-889, 21-20-890, 21-20-891, 21-20-892, 21-20-893, 21-20-894, 21-20-895, 21-20-896, 21-20-897, 21-20-898, 21-20-899, 21-20-900, 21-20-901, 21-20-902, 21-20-903, 21-20-904, 21-20-905, 21-20-906, 21-20-907, 21-20-908, 21-20-909, 21-20-910, 21-20-911, 21-20-912, 21-20-913, 21-20-914, 21-20-915, 21-20-916, 21-20-917, 21-20-918, 21-20-919, 21-20-920, 21-20-921, 21-20-922, 21-20-923, 21-20-924, 21-20-925, 21-20-926, 21-20-927, 21-20-928, 21-20-929, 21-20-930, 21-20-931, 21-20-932, 21-20-933, 21-20-934, 21-20-935, 21-20-936, 21-20-937, 21-20-938, 21-20-939, 21-20-940, 21-20-941, 21-20-942, 21-20-943, 21-20-944, 21-20-945, 21-20-946, 21-20-947, 21-20-948, 21-20-949, 21-20-950, 21-20-951, 21-20-952, 21-20-953, 21-20-954, 21-20-955, 21-20-956, 21-20-957, 21-20-958, 21-20-959, 21-20-960, 21-20-961, 21-20-962, 21-20-963, 21-20-964, 21-20-965, 21-20-966, 21-20-967, 21-20-968, 21-20-969, 21-20-970, 21-20-971, 21-20-972, 21-20-973, 21-20-974, 21-20-975, 21-20-976, 21-20-977, 21-20-978, 21-20-979, 21-20-980, 21-20-981, 21-20-982, 21-20-983, 21-20-984, 21-20-985, 21-20-986, 21-20-987, 21-20-988, 21-20-989, 21-20-990, 21-20-991, 21-20-992, 21-20-993, 21-20-994, 21-20-995, 21-20-996, 21-20-997, 21-20-998, 21-20-999, 21-20-1000, 21-20-1001, 21-20-1002, 21-20-1003, 21-20-1004, 21-20-1005, 21-20-1006, 21-20-1007, 21-20-1008, 21-20-1009, 21-20-1010, 21-20-1011, 21-20-1012, 21-20-1013, 21-20-1014, 21-20-1015, 21



Instruction for use

НАБОР РЕАГЕНТОВ
ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ХОРИОНИЧЕСКОГО ГОНАДОТРОПИНА
В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ
«ХГЧ-ИФА»

HOMER NOVATAP
TY 21-20-23-205-10
702

[illegible]

XEMA
WWW.XEMA-MEDICA.COM

Набор реагентов для иммуноферментного определения
хронического гепатита А в сыворотке (плазме) крови
«ХИ-ИДА»
REF K205 Серия 9042
Годен до 2021-06

XENIA

XEMF
www.xema-medica.com

*XTC4-M0A ☐ K205 ☐ 101 0042 ☐ Σ 200

[illegible]


9 780590 420622


000-12345678
A.T. & T. - 812 541 24
MCA - 67890 123 456
Phone - 12345678901234567890 1000000000
4 12345678901234567890 1000000000
12345678901234567890 1000000000

4


000 «ХЕМА»

«ХГЧ-ИФА» REF P205Z
ПЛАНШЕТ SORB MTP
ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
2021-06 Серия LOT 9042
+2-8°C IWB

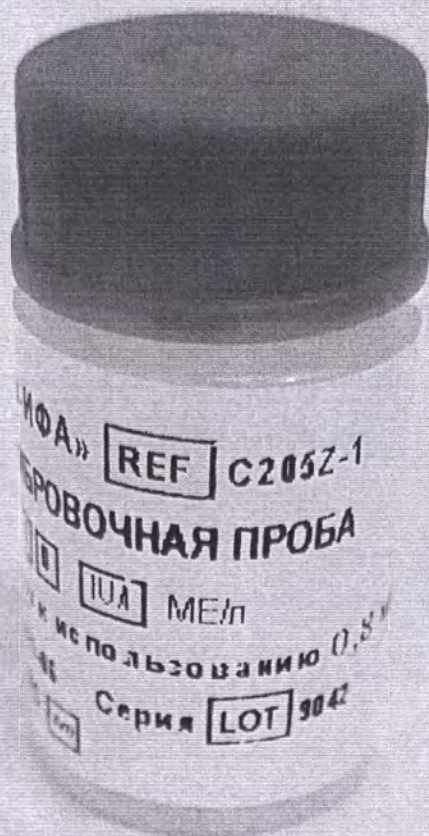


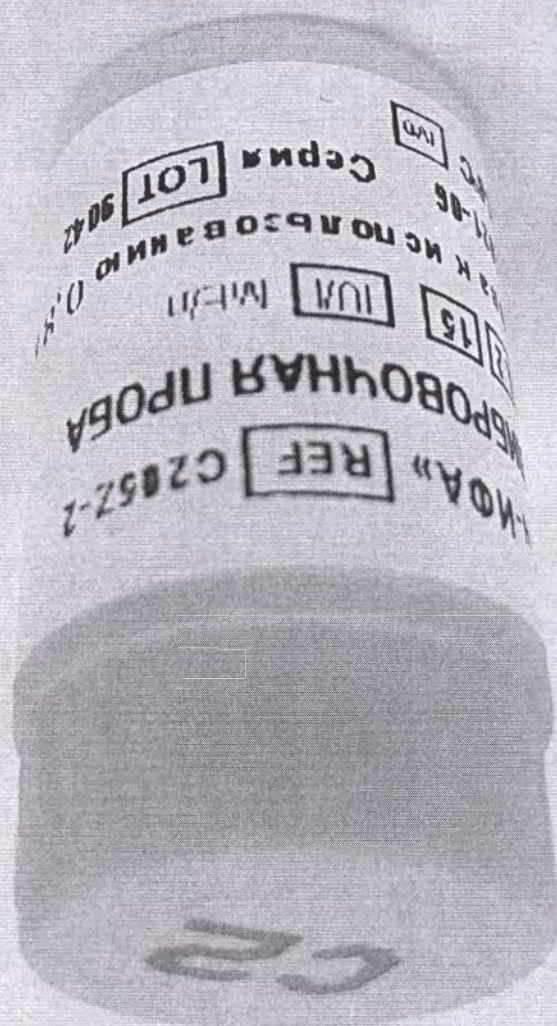


7

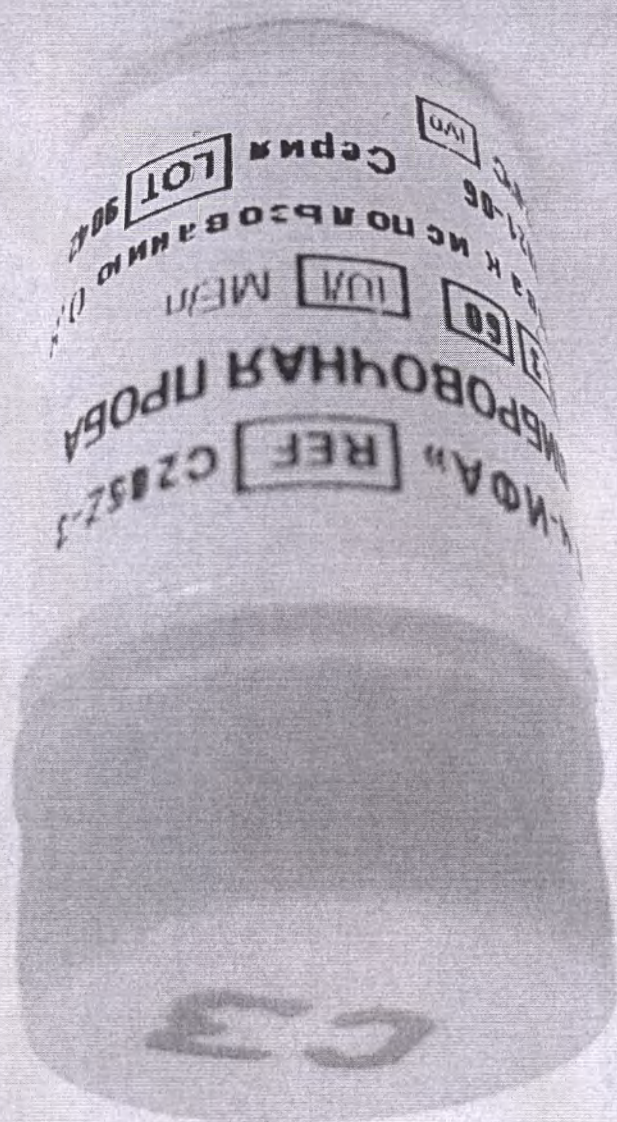


6

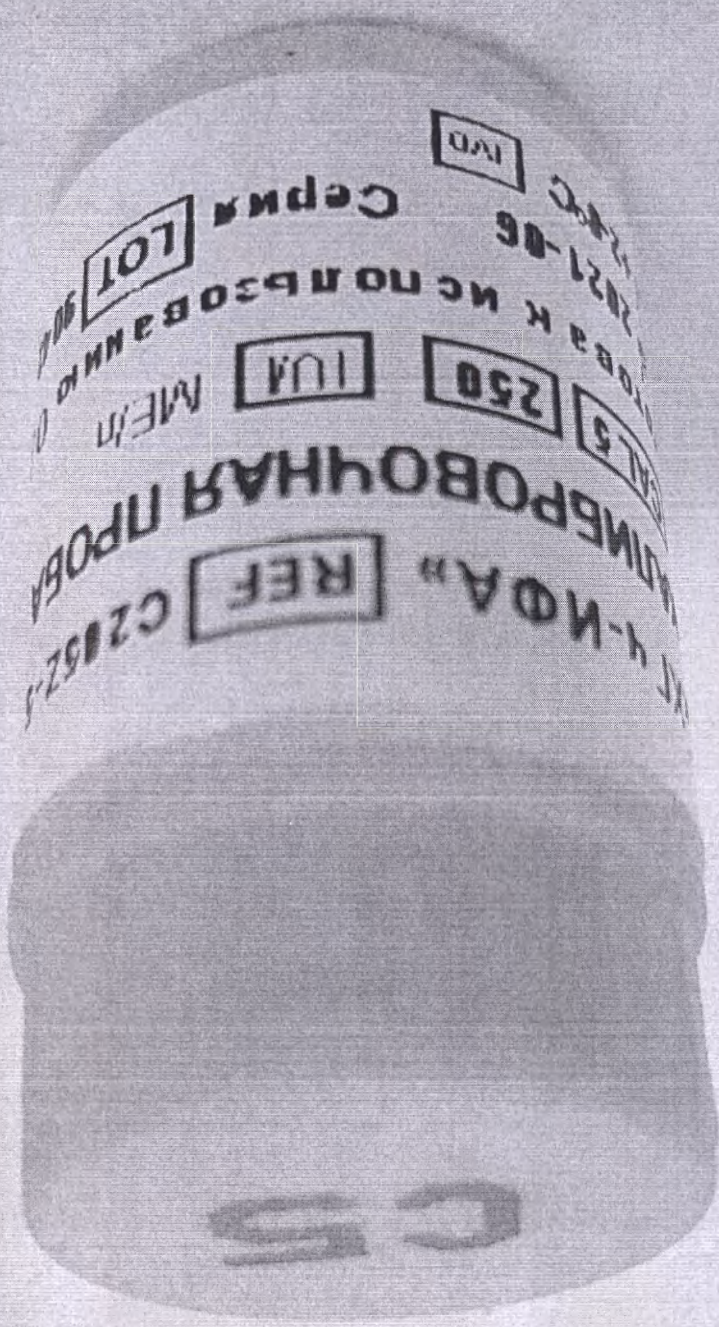

«ХТ Ч-НОА» REF
КАЛИБРОВОЧНАЯ ПРОБ
CAL 6 500 IUA
ГОТОВА К ИСПОЛЗОВАНИЮ
Серия LOT
2021-06
+24°C IVD

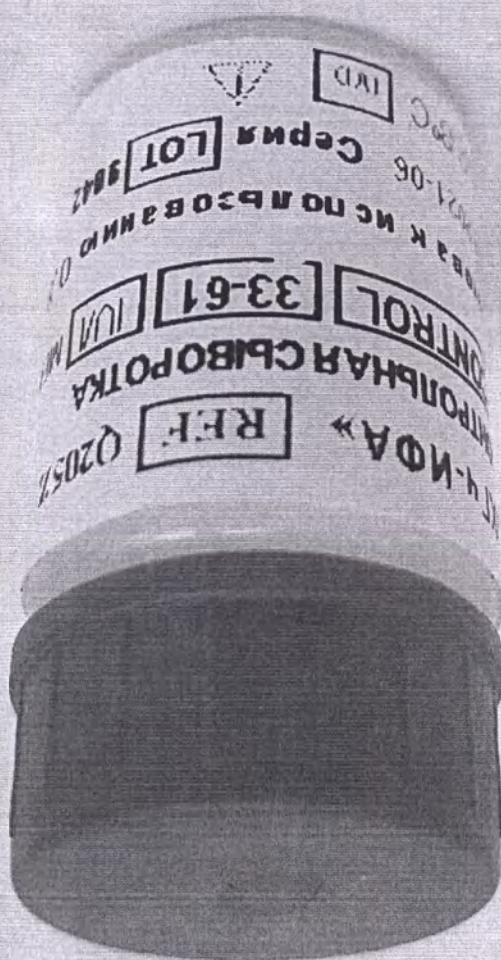



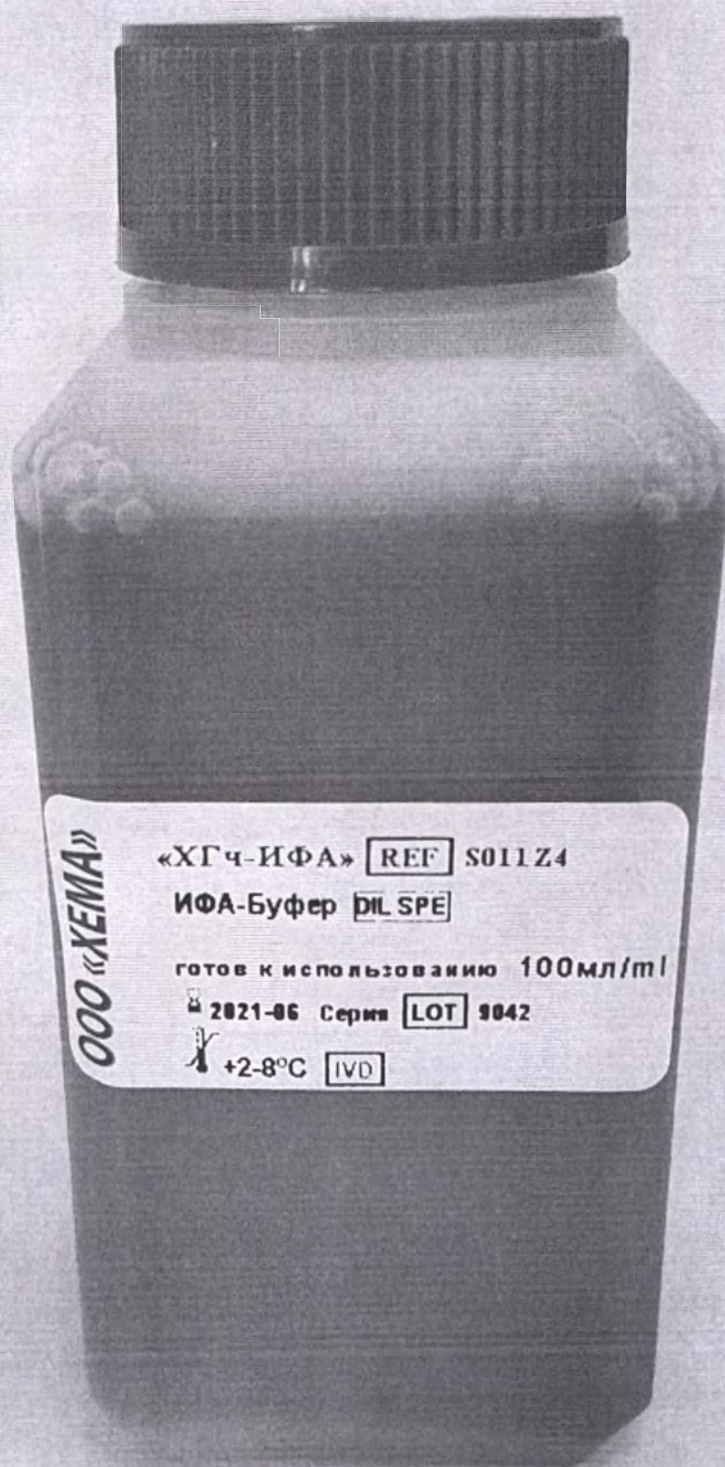

ООО «ХЕМА»


«ХГч-ИФА» REF S011Z4

ИФА-Буфер pH SPE

готов к использованию 100мл/мл

2021-06 Серия LOT 9042


+2-8°C IVD

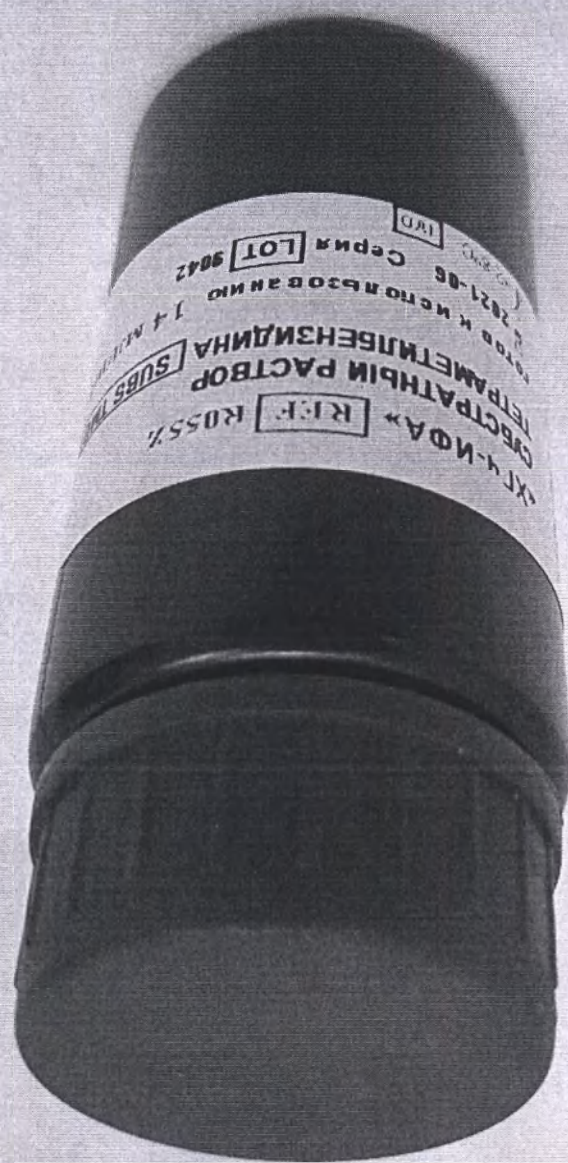



15

«ХЛЧ-НОА» КРЕМ 500г
КОНЦЕНТРАТ ОТМЫВОЧНОГО
РАСТВОРА BUF WASH 26X
Пазвести в 26 раз 22 минут
Серия LOT 9042
EXP 2021-06
12-89C IVD

СООБЩЕНИЕ

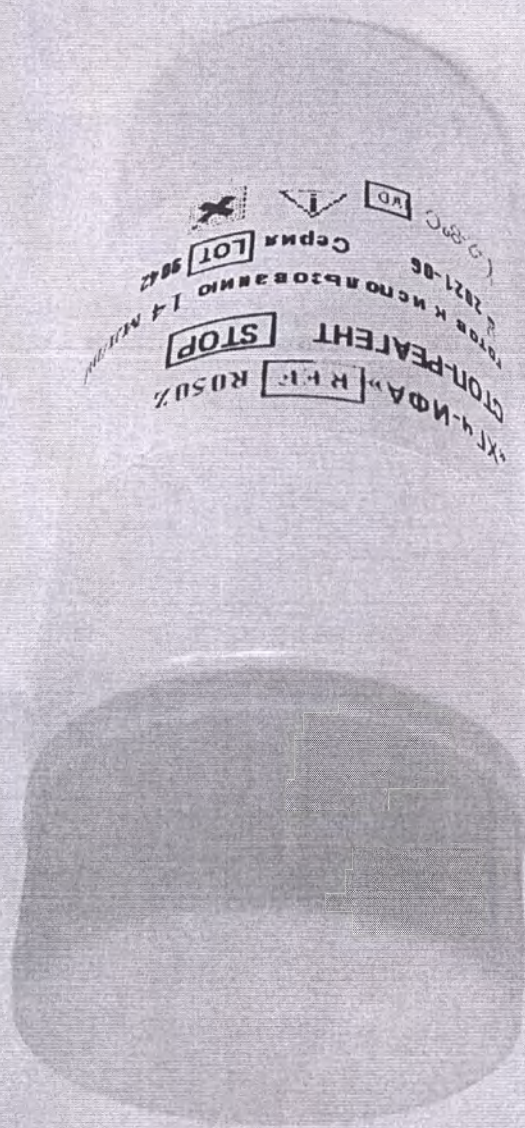

7/

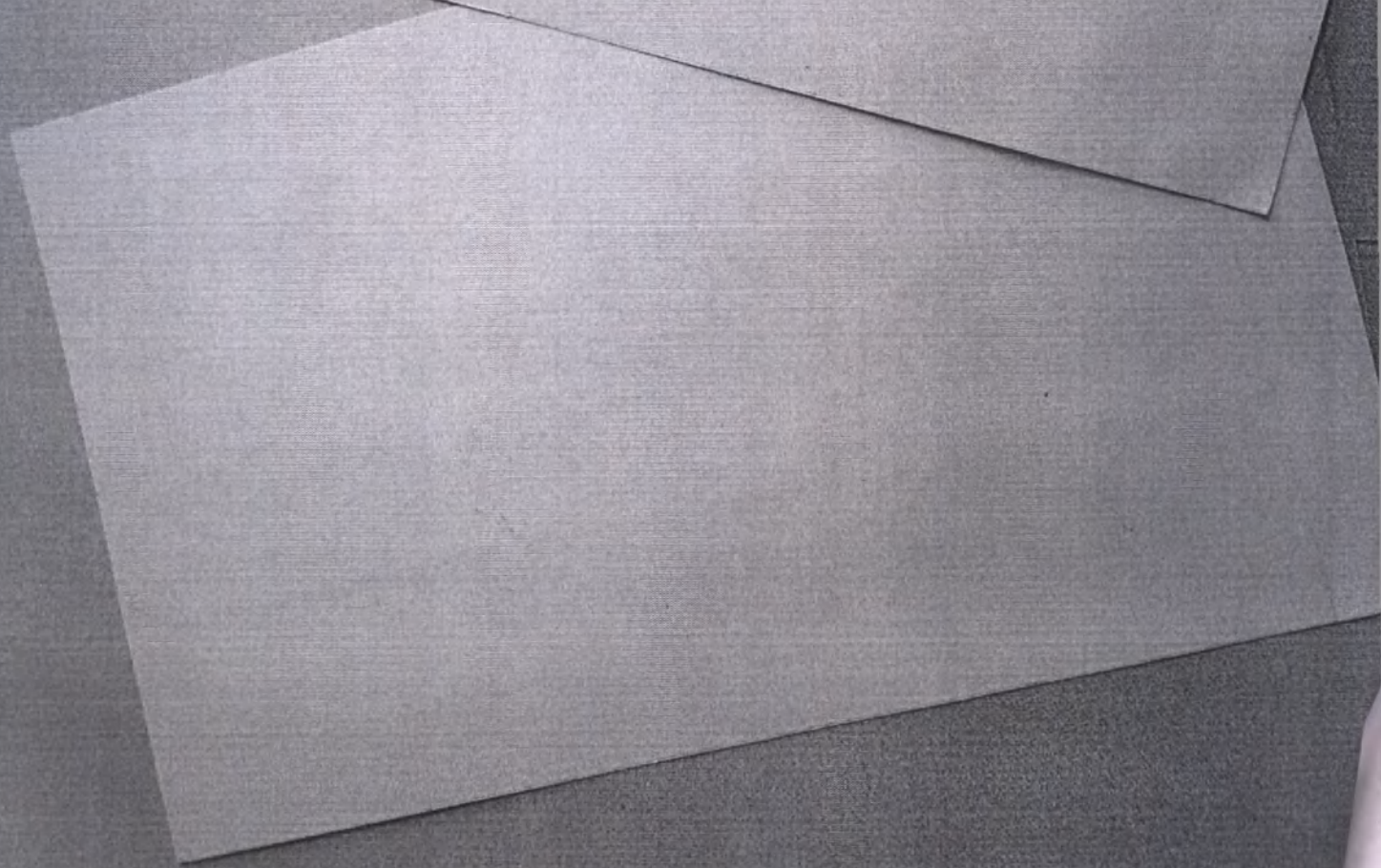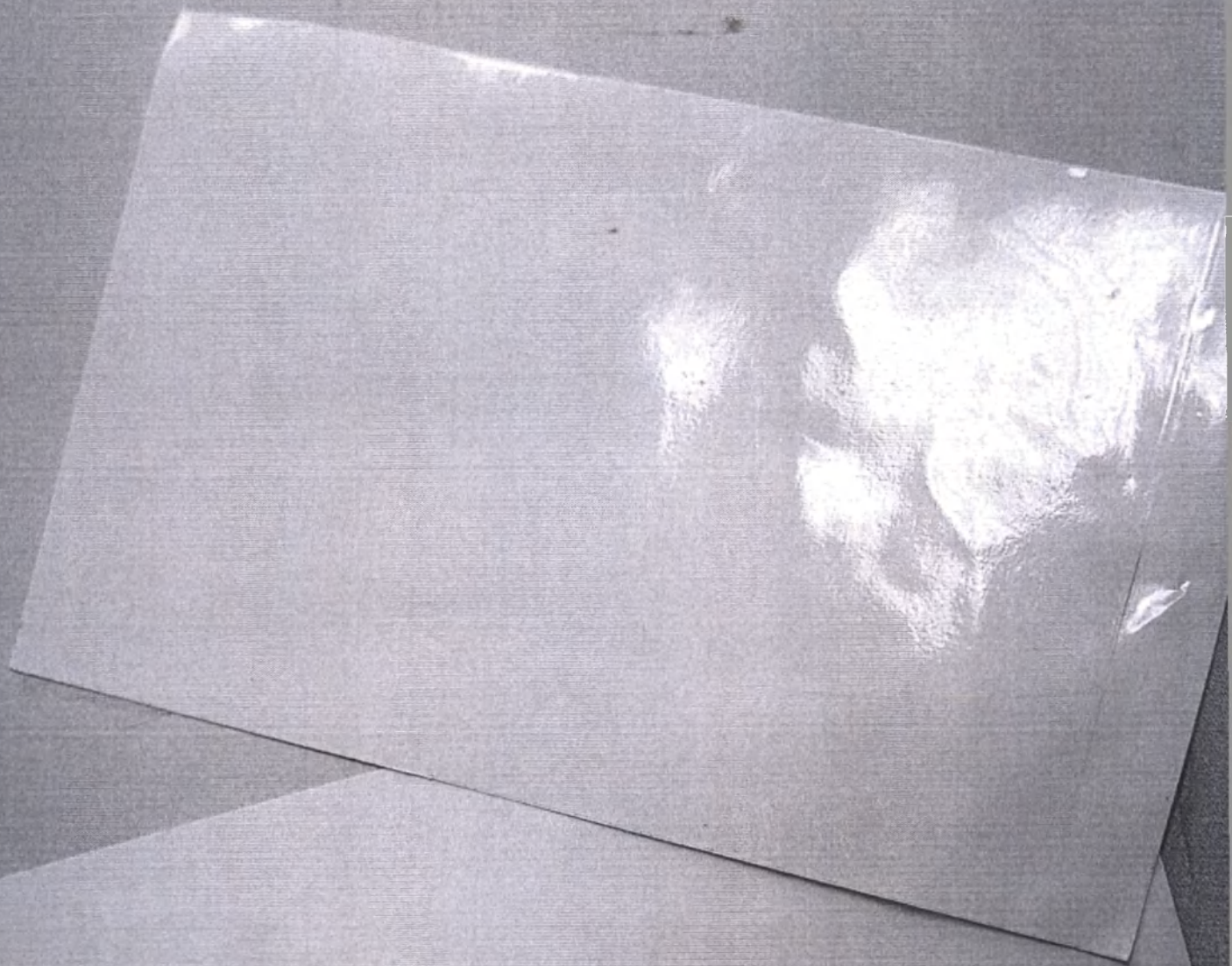

ПРОШУТО В КОЛИЧЕСТВЕ

14 листов

Генеральный директор

ООО «ХЕМА»

Ю.С. Лебедин



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ООО «ХЕМА»

М.П. Лебедин Ю.С.
« 02 » марта 2020 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ ГРУППОВОЙ УПАКОВКИ (ТРАНСПОРТНОЙ ТАРЫ)

Набора реагентов для иммуноферментного определения хорионического гонадотропина
в сыворотке (плазме) крови «ХГч-ИФА»



Набор реагентов для иммуноферментного определения хорионического гонадотропина в сыворотке (плазме) крови «ХГч-ИФА»

REF K205 **LOT** Серия: XXX



Количество _____

Изготовлен



ГГГГ/ММ

Годен до



ГГГГ/ММ

Масса нетто _____

Масса брутто _____

Масса нетто потребительской упаковки _____



+2-8°C



IVD

ПРОШУ В КОЛИЧЕСТВЕ

2 листов

Генеральный директор

ООО «ХЕМА»

Ю.С. Лебедин



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «ХЕМА»



Лебедин Ю.С.

« 31 » июля 2020 г.
М.П.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

Набора реагентов для иммуноферментного определения хорионического гонадотропина
в сыворотке (плазме) крови «ХГч-ИФА»

Набор реагентов для иммуноферментного определения хорионического гонадотропина в сыворотке (плазме) крови «ХГч-ИФА»

REF K205 LOT 9042

Годен до 2021-06

ТУ 21.20.23-205-18619450-2020

РУ _____ от _____

«Антитела к вирусу гепатита С, антитела к ВИЧ 1, 2, антиген вируса гепатита В (HBsAg), отсутствуют». Сыворотка, входящая в состав компонентов Набора, инактивирована.

Для профессионального применения.



МО, г. Балашиха, ул. Трубецкая, 2В

IVD



+2-8°C



«ХГч-ИФА» REF K205 LOT 9042 Σ96

Годен до  2021-06

Состав набора:

		CONT	Серия	LOT
Планшет	1 шт/pcs	SORB MTP	P205Z	9042
Калибровочные пробы	6 x 0,8 мл/ml	CAL 1-6	C205Z	9042
Контрольная сыворотка	1 x 0,8 мл/ml	CONTROL	Q205Z	9042
Конъюгат	1 x 14 мл/ml	CONJ HRP	T205Z	9042
ИФА-Буфер	1 x 100 мл/ml	DIL SPE	S011Z4	9042
Субстратный раствор тетраметилбензидина (ТМБ)	1 x 14 мл/ml	SUBS TMB	R055Z	9042
Концентрат отмывочного раствора	1 x 22 мл/ml	BUF WASH 26X	S008Z	9042
Стоп-реагент	1 x 14 мл/ml	STOP	R050Z	9042
Бумага для заклеивания планшета	2 шт/pcs		N003	
Инструкция по применению	1 шт/pcs		K205I	
Паспорт контроля качества (аналитический паспорт)	1 шт/pcs		K205Q	



МО, г. Балашиха, ул. Трубецкая, 2В

IVD



+2-8°C



ООО «ХЕМА»

«ХГч-ИФА» REF P205Z

ПЛАНШЕТ SORB МТР

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

🕒 2021-06 LOT 9042

🌡️ +2-8°C IVD

«ХГч-ИФА» REF C205Z-1

КАЛИБРОВочНАЯ ПРОБА

CAL 1 0 МЕ/л

ГОТОВА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 0,8 мл/ml

2021-06 LOT 9042

+2-8°C IVD

«ХГч-ИФА» **REF** C205Z-2

КАЛИБРОВОЧНАЯ ПРОБА

CAL 2 **15** МЕ/л

готова к использованию 0,8 мл/ml

 2021-06 **LOT** 9042

 +2-8°C **IVD**

«ХГч-ИФА» **REF** C205Z-3

КАЛИБРОВочная ПРОБА

CAL 3 **60** МЕ/л

готова к использованию 0,8 мл/ml

 2021-06 **LOT** 9042 +2-8°C **IVD**

«ХГч-ИФА» REF C205Z-4

КАЛИБРОВОЧНАЯ ПРОБА

CAL 4 125 МЕ/л

готова к использованию 0,8 мл/ml

2021-06 LOT 9042

+2-8°C IVD

«ХГч-ИФА» REF C205Z-5

КАЛИБРОВОЧНАЯ ПРОБА

CAL 5 250 МЕ/л

готова к использованию 0,8 мл/ml

2021-06 LOT 9042

+2-8°C IVD

«ХГч-ИФА» REF C205Z-6

КАЛИБРОВОЧНАЯ ПРОБА

CAL 6 500 МЕ/л

готова к использованию 0,8 мл/ml

2021-06 LOT 9042

+2-8°C IVD

«ХГч-ИФА» REF Q205Z

КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА

CONTROL 33-61 МЕ/л

готова к использованию 0,8 мл/ml

2021-06 LOT 9042

+2-8°C IVD Δ

«ХГч-ИФА» REF T205Z

КОНЬЮГАТ CONJ HRP

готов к использованию 14 мл/ml

 2021-06 LOT 9042

 +2-8°C IVD

«ХГч-ИФА» REF S011Z4

ИФА-Буфер DIL SPE

готов к использованию 100 мл/ml

 2021-06 LOT 9042

 +2-8°C IVD

«ХГч-ИФА» REF R055Z

СУБСТРАТНЫЙ РАСТВОР
ТЕТРАМЕТИЛБЕНЗИДИНА SUBS TMB

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 14 мл/ml

2021-06 LOT 9042

+2-8°C IVD

«ХГЧ-ИФА» REF S008Z

КОНЦЕНТРАТ ОТМЫВОЧНОГО
РАСТВОРА BUF WASH 26X

развести в 26 раз 22 мл/ml

📅 2021-06 LOT 9042

🌡️ +2-8°C IVD

«ХГч-ИФА» **REF** R050Z

СТОП-РЕАГЕНТ **STOP**

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 14 мл/ml

 2021-06 **LOT** 9042

 +2-8°C **IVD**  

ПРОШТО В КОЛИЧЕСТВЕ

16

ЛИСТОВ

Генеральный директор

ООО «ХЕМА»

Ю.С. Лебедин

