

Специалист по
сертификации/регистрации отдела
Здравоохранения
ЗАО «3М Россия»
Солодова М.А.

« 11 » августа 2012 г.



Инструкция по применению
ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

**Брекеты и приспособления для формирования ортодонтических
аппаратов**

1. Введение

Уже более 50 лет 3M Unitek работает в области ортодонтической индустрии и предлагает полную линейку высококачественной ортодонтической продукции, которая обеспечивает превосходную работу для предсказуемых результатов.

2. Описание изделия

Брекеты и приспособления для формирования ортодонтических аппаратов – это устройства, используемые в ортодонтии для нормализации расположения отдельных зубов и зубных рядов при нарушениях прикуса.

Брекеты представляют собой крошечные замочки, сконструированные отдельно для каждого зуба, по точно рассчитанной схеме приклеиваются каждый к своему зубу с помощью специального адгезива. Адгезив, с помощью которого крепятся замочки к поверхности зуба, не приносит вреда зубной эмали.

Брекеты используются вместе с другими важными ортодонтическими приспособлениями для расширения зубного ряда, создания пространств между зубами, или изменения формы зубов и челюстей, при лечении пародонтита и шинировании при травмах зубов и челюстей.

3. Использование по назначению

Подготовка зубов:

- Обработайте зубы не содержащей жира суспензией или пастой. Прополощите водой.
- Высушите насухо воздухом и поддерживайте рабочее поле сухим. Изолируйте зубы ватными жгутиками.
- Нанесите протравливающий гель в течение 15 секунд. Прополоскать водой. Высушить сухим воздухом.

Установка брекета:

Для брекетов без адгезива сначала необходимо подготовить адгезив и нанести на брекеты.

Для брекетов с адгезивом APC- адгезив замешивать не надо.

- Установите брекеты на зуб
- Отрегулируйте его положение в течение 20 секунд.
- Прижмите брекеты к поверхности зуба для обеспечения сцепления (бондинга).
- Снимите флэш не сдвигая брекета.
- Удерживайте в окончательном положении в течение 5-10 секунд

- Не сдвигайте.


Установка проволочной дуги:

После того, как все брекет-системы зафиксированы на свои места, через них пропускается проволочная дуга, которая крепится при помощи лигатур.

Перед установкой проволочной дуги адгезиву необходимо затвердеть в течение 4 минут.

Кончики дуги заправляются в специальные замочки на кольцах, надетых на последние зубы. Лигатуры могут быть металлическими или эластичными.

Прозрачные эластики, фиксируя дугу к брекету, практически не видны, а разноцветные эластичные лигатуры могут служить украшением улыбки.

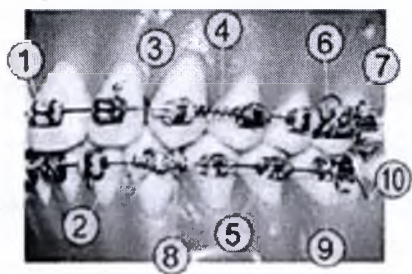

1. Брекеты;
2. Проволочная дуга;
3. Лигатурный крючок;
4. Пружина;
5. Металлическая и эластичная лигатуры;
6. Петля;
7. Кольцо;
8. Кончик лигатуры;
9. Замок;
10. Конец проволочной дуги.

4. Техническое обслуживание

Изделие не подлежит техническому обслуживанию.

5. Текущий ремонт

Изделие не подлежит ремонту

6. Хранение и срок годности

Изделия должны храниться в сухом помещении.

Хранить брекеты с нанесенным адгезивом APC при температуре 15-25°C. Избегать прямых солнечных лучей.

Срок годности брекетов и приспособлений без ограничения.

Срок годности брекетов APC -24 месяца.

7. Транспортирование

Изделия транспортируют всеми видами транспорта.

8. Утилизация

Утилизировать согласно правилам местного удаления отходов

9. Гарантийные обязательства производителя

Компания 3М гарантирует отсутствие в своей продукции дефектов, связанных с исходными материалами и производственным процессом.

количество
листов: 4

М. Соколов
11.08.2012

