

УТВЕРЖДЕНА

«УТВЕРЖДАЮ»

Приказом Росздравнадзора

от _____ 200__ г. № _____

Генеральный директор

ООО «Трансконтакт»

«22» сентября 2008 г.



**Инструкция
по применению канюли офтальмологической стерильной**

ТУ 9398-003-11480121-2008

Регистрационный номер:

Сертификат:

Производитель:

ООО «Трансконтакт», 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 5, стр. 3.

Тел./факс (495) 605-39-38

Описание:

Канюля офтальмологическая стерильная (далее канюля) предназначена для различных манипуляций в ходе офтальмологических операций, требующих орошения растворами, промывания полостей или аспирации жидкости.

Предупреждения:

1. Канюля предназначена строго для одноразового применения у одного больного.
2. Орошение тканей глаза, промывание полостей и внутриглазная ирригация должно осуществляться с применением соединения со шприцем или ирригационным устройством только типа Luer-Lock.
3. Все манипуляции с канюлей должны осуществляться под контролем операционного микроскопа.
4. Если Вы не уверены в герметичности упаковки или исправности канюли, то не используйте ее и немедленно обратитесь к производителю.
5. Канюля до применения не должна контактировать ни с какими загрязняющими поверхностями и субстанциями. Канюля должна быть использована непосредственно после вскрытия индивидуальной упаковки.
6. Повторная стерилизация канюли недопустима!

Способ применения:

Стерильный пакет вскрыть ножницами и аккуратно вытряхнуть канюлю в защитном футляре на стерильный стол.

Вытянуть канюлю из защитного футляра и плотно фиксировать ее на разъеме типа Luer-Lock шприца или ирригационной системы. Канюля готова к работе. Перед введением канюли в глаз или рабочую полость проверить ее проходимость легким нажатием на плунжер шприца или кратковременным включением ирригационной системы. При аспирации следить, чтобы подвижные ткани, например радужная оболочка, не окклюдировали отверстие канюли.

После окончания работы канюлю утилизировать также как инъекционную иглу.

Упаковка:

Канюля упакована по 1 шт. в защитный футляр, помещена в индивидуальный герметичный пакетик, в сухом виде, стерильна.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года с момента стерилизации.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Начальник производства



Муравьева В.А. Муравьева В.А.

УТВЕРЖДЕНА

«УТВЕРЖДАЮ»

Приказом Росздравнадзора
от _____ 200__ г. № _____

Генеральный директор
ООО «Трасконтакт»

«22» сентября 200__



Инструкция
по применению канюли офтальмологической стерильной

ТУ 9398-003-11480121-2008

Регистрационный номер:

Сертификат:

Производитель:

ООО «Трасконтакт», 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 5, стр. 3.
Тел./факс (495) 605-39-38

Описание:

Канюля офтальмологическая стерильная (далее канюля) предназначена для различных манипуляций в ходе офтальмологических операций, требующих орошения растворами, промывания полостей или аспирации жидкости.

Предупреждения:

1. Канюля предназначена строго для одноразового применения у одного больного.
2. Орошение тканей глаза, промывание полостей и внутриглазная ирригация должно осуществляться с применением соединения со шприцем или ирригационным устройством только типа Luer-Lock.
3. Все манипуляции с канюлей должны осуществляться под контролем операционного микроскопа.
4. Если Вы не уверены в герметичности упаковки или исправности канюли, то не используйте ее и немедленно обратитесь к производителю.
5. Канюля до применения не должна контактировать ни с какими загрязняющими поверхностями и субстанциями. Канюля должна быть использована непосредственно после вскрытия индивидуальной упаковки.
6. Повторная стерилизация канюли недопустима!

Способ применения:

Стерильный пакет вскрыть ножницами и аккуратно вытряхнуть канюлю в защитном футляре на стерильный столик.

Вытянуть канюлю из защитного футляра и плотно фиксировать ее на разъеме типа Luer-Lock шприца или ирригационной системы. Канюля готова к работе. Перед введением канюли в глаз или рабочую полость проверить ее проходимость легким нажатием на плунжер шприца или кратковременным включением ирригационной системы. При аспирации следить, чтобы подвижные ткани, например радужная оболочка, не окклюдируют отверстие канюли.

После окончания работы канюлю утилизировать так же, как инъекционную иглу.

Упаковка:

Канюля упакована по 1 шт. в защитный футляр, помещена в индивидуальный герметичный пакетик, в сухом виде, стерильна.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте.

Срок годности 2 года с момента стерилизации.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Начальник производства



 Муравьева В.А.