

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ООО «Медком-МП»
Козняев С.В.
«22» декабря 2008 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

**Перчатки медицинские смотровые (диагностические) нестерильные и
стерильные
производства Heliomed Handelsges.m.b.H, Австрия.**

Назначение и область применения:

Предназначены для защиты пациента и медицинского работника от взаимного заражения во время проведения медицинского обследования. Применяются при любых видах обследований.

Противопоказания к применению:

Использование изделий не рекомендуется при наличии индивидуальной аллергической реакции на натуральный латекс.

Предупреждение:

1. Продукт содержит натуральный латекс, который может вызывать аллергические реакции. Для людей с аллергическими реакциями рекомендуется использовать перчатки из альтернативных материалов.

Подготовка изделия к работе:

После извлечения из упаковки изделие готово к использованию.

Правила использования:

1. Предназначены только для одноразового применения.
2. Перед использованием перчаток убедиться в соответствии остаточного срока годности.
3. Извлечь перчатки из упаковки и надеть на руки.
4. После использования перчатки следует снять и утилизировать.
5. При хранении и использовании не допускать воздействия на перчатки активных веществ, разрушающих резину.

Правила хранения:

Хранить при температуре от 0 до 25 С, относительной влажности воздуха не более 85%. Беречь от прямых солнечных лучей, хранить вдалеке от источников озона и источников возгорания.

Генеральный директор ООО «Медком-МП»



Копеев С.В.