

« УТВЕРЖДАЮ»
ДИРЕКТОР
ООО «ПОРСА»
КУЛИК Ю.М.

22

Мебель для специализированных кабинетов

Руководство по эксплуатации

ПОСТАВЩИК: ООО «ПОРСА»
195030, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. Химиков, д. 26,
ИНН 7825009913
Тел/факс 8 (812) 600-1634, 600-1635, 600-1636

1. Общие указания

1.1. Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения правил эксплуатации мебели для специализированных кабинетов.

1.2. Перед началом эксплуатации мебели для специализированных кабинетов персонал обязан ознакомиться с содержанием разделов "Технические характеристики", "Устройство" и "Правила эксплуатации и требования по технике безопасности".

2. Назначение

Мебель для специализированных кабинетов предназначена для эксплуатации в медицинских учреждениях.

3. Технические характеристики

Мебель для специализированных кабинетов спроектирована и изготовлена согласно требованиям основных российских стандартов. Мебель для специализированных кабинетов полностью удовлетворяет требованиям ГОСТ 16371-93, ГН 2.1.6.695-98.

Основные характеристики мебели для специализированных кабинетов приведены в табл.1.

Таблица 1

Наименование	Код	Габаритные размеры, мм	Технология изготовления	Особенности комплектации
Зуботехнический стол	СЗ-1	1300*600*900	каркас	выдвижной ящик(4), фиагель(1), подлокотники(2), вытяжка
	СЗ-2	2280*600*900	каркас	выдвижной ящик(4), фиагель(2), подлокотники(4), вытяжка
Кушетка для физиотерапии	КМ-3	2000*600*500	натур. дерево	подъемный подголовник(1), покрытие иск. кожа
Рабочее место стоматолога	РМ-1	1800*600*800	каркас	тумба с ящиками(1), подкатная тумба с ящиками(1), выдвижная полка д/клавиатуры
	РМ-2	1800*600*800	каркас	тумба с полкой(1), подкатная тумба с ящиками(1), выдвижная полка д/клавиатуры
Стол анестезиолога	АА-1	600*600*800	нерж. сталь	выдвижной ящик(3)
	АА-2	900*600*900	нерж. сталь	выдвижной ящик(6)
Стол Боброва	АСБ	1500*600*900	нерж. сталь	на колесах
Стол из нержавеющей стали	АС-1	900*600*900	нерж. сталь	
	АС-2	1200*600*900	нерж. сталь	нижняя полка(1)
Стол операционной сестры	АГ-1	600*400*700	нерж. сталь	на колесах
Столик процедурный	АСИ-1	600*400*900	нерж. сталь	2 полки, на колесах
	АСИ-2	600*400*900	нерж. сталь	3 полки, на колесах
Стол с мойкой	АМд	1500*600*900	нерж. сталь	мойка н/с (2)
	АМм	600*600*900	нерж. сталь	мойка н/с (1)
	АМп(л)	1200*600*900	нерж. сталь	мойка н/с (1)
Умывальник хирургический	АХМ-1	750*600*1200	нерж. сталь	1 местный
	АХМ-2	1500*600*1200	нерж. сталь	2 местный
	АХМ-3	2250*600*1200	нерж. сталь	3 местный
Шкаф для стерильных материалов и инструментов	АШ-1	500*500*1800	нерж. сталь	дверь(1), полки(3)
	АШ-2	500*500*1800	нерж. сталь	дверь(2), полки(3)
	АШ-3	500*500*1800	нерж. сталь	½ стекло, дверь(2), полки(3)
	АШ-4	500*500*1800	нерж. сталь	2/2 стекло, дверь(2), полки(3)
	АШ-5	1000*500*1800	нерж. сталь	½ стекло, дверь(4), полки(3)
	АШ-6	1000*500*1800	нерж. сталь	2/2 стекло, дверь(4), полки(3)
	АШ-7	1000*500*1800	нерж. сталь	дверь(2), полки(3)
	АШ-8	1000*500*1800	нерж. сталь	дверь(4), полки(3)

4. Условия эксплуатации.

Таблица 2

4.1. Температура окружающей среды, °С	15 - 35
4.2. Относительная влажность воздуха, % не более	80

5. Правила эксплуатации и требования по технике безопасности

При попадании агрессивных химических веществ на поверхность медицинской мебели немедленно удалите их с поверхности и протрите место попадания влажной салфеткой для удаления остатков химических реагентов.

Допускается применение всех известных стандартных дезинфицирующих средств для влажной санитарной обработки медицинской мебели, за исключением абразивных паст.

Допустимая распределенная нагрузка на столешницы медицинской мебели не более 100кг, на полки не более 100 кг.

Не допускается длительный контакт мебели с предметами, нагретыми до температуры более 100° С, выдерживает кратковременный нагрев до 100° С.

Не допускается подключать к розеткам, установленным в медицинской мебели приборы с суммарной мощностью более 2200 Вт.

6. Правила хранения

До начала эксплуатации мебель для специализированных кабинетов должна храниться в закрытом помещении в упаковке при температуре от +5 до +30 °С и относительной влажности не более 80%.

7. Сроки эксплуатации

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Общий срок эксплуатации мебели 10 лет.

Прочитано и проинспектировано 3/1/14
Директор ООО "Порса"
Кулик В.В.

