



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

**Перчатки медицинские хирургические стерильные и нестерильные
производства Heliomed Handelsges.m.b.H., Австрия.**

Назначение и область применения:

Предназначены для защиты пациента и медицинского работника от взаимного заражения во время проведения хирургических операций. Применяются при любых видах хирургических операций и обследований.

Противопоказания к применению:

Использование изделий не рекомендуется при наличии индивидуальной аллергической реакции на натуральный латекс.

Предупреждение:

1. Стерильные хирургические перчатки стерильны при условии ненарушенной упаковки.
2. Продукт содержит натуральный латекс, который может вызывать аллергические реакции. Для людей с аллергическими реакциями рекомендуется использовать перчатки из альтернативных материалов.

Подготовка изделия к работе:

1. Нестерильные хирургические перчатки перед применением необходимо стерилизовать.
2. Перед использованием асептически удалить пудру с поверхности перчатки стерильной губкой, стерильным влажным полотенцем или другим эффективным методом.

Порядок работы изделия:

Изделие обеспечивает герметичную изоляцию кожи руки, будучи на нее надетым.

Правила использования:

1. Предназначены только для одноразового применения.
2. Перед использованием перчаток убедиться в целостности упаковки и соответствии остаточного срока годности.
3. Нестерильные хирургические перчатки перед применением необходимо стерилизовать.
4. Извлечь перчатки из упаковки и надеть на руки.
5. Перед использованием асептически удалить пудру с поверхности перчатки стерильной губкой.
6. После использования перчатки следует снять и утилизировать.
7. При хранении и использовании не допускать воздействия на перчатки активных веществ, разрушающих резину.

Правила хранения:

Хранить при температуре от 0 до 25 С, относительной влажности воздуха не более 85%. Беречь от прямых солнечных лучей, хранить вдалеке от источников озона и источников возгорания.

Генеральный директор

ООО «Медком-МТ»

Копеев С.В.



