

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО "ПО «ЗДРАВМЕДТЕХ-К»

Н.А. Меркушова



12 2018 г.

**НАБОР ОДЕЖДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ИЗ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ОДНОРАЗОВОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ**

по ТУ 32.50.50-001-06891655-2018

Инструкция по применению

Код документа: ИП18

Версия: 1

Дата: 21.12.2018 г.

Разработал: *Козлова* Козлова О. А.

Проверил: *Воронов* Воронов А. Н.

1 Наименование медицинского изделия

Набор одежды медицинской из нетканых материалов одноразового пользования по ТУ 32.50.50-001-06891655-2018 (далее одежда).

2 Наименование и адрес производителя

Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "ЗДРАВМЕДТЕХ-КАЛУГА" юридический адрес: Россия, 249832, обл. Калужская, район Дзержинский, город Кондрово, улица Рабочая, дом 2, офис 1.

3 Назначение и область применения медицинского изделия

Набор одежды предназначен для применения медицинским персоналом, посетителями и пациентами в медицинских учреждениях при проведении различных медицинских процедур взамен одежды из тканых материалов.

4 Комплектность

Комплектность поставки набора одежды должна соответствовать таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1. «Стандарт»		
1	Халат медицинский изолирующий «Стандарт» с завязками на горловине с длинным рукавом с вязаной трикотажной манжетой	Не более 10
2	Халат медицинский изолирующий «Стандарт» с завязками на горловине с длинным рукавом, собранным резинкой	Не более 10
3	Халат медицинский изолирующий «Стандарт» с завязками на горловине с длинным рукавом с двумя завязками	Не более 10
4	Халат медицинский изолирующий «Стандарт» с застежкой текстильной на горловине с длинным рукавом с вязаной трикотажной манжетой	Не более 10
5	Халат медицинский изолирующий «Стандарт» с застежкой текстильной на горловине с длинным рукавом, собранным резинкой	Не более 10
6	Халат медицинский изолирующий «Стандарт» с застежкой текстильной на горловине с длинным рукавом с двумя завязками	Не более 10
7	Куртка медицинская «Стандарт» с круглым вырезом с длинным рукавом с вязаной трикотажной манжетой	Не более 10
8	Куртка медицинская «Стандарт» с круглым вырезом с длинным рукавом, собранным резинкой	Не более 10
9	Куртка медицинская «Стандарт» с круглым вырезом с длинным прямым рукавом	Не более 10
10	Куртка медицинская «Стандарт» с V-образным вырезом с длинным рукавом с вязаной трикотажной манжетой	Не более 10
11	Куртка медицинская «Стандарт» с V-образным вырезом с длинным рукавом, собранным резинкой	Не более 10
12	Куртка медицинская «Стандарт» с V-образным вырезом с длинным прямым рукавом	Не более 10
13	Куртка медицинская «Стандарт» с круглым вырезом с коротким рукавом	Не более 10
14	Куртка медицинская «Стандарт» с V-образным вырезом с коротким рукавом	Не более 10
15	Брюки медицинские «Стандарт» с прямым низом	Не более 10
16	Брюки медицинские «Стандарт» с низом, собранным резинкой	Не более 10
17	Фартук медицинский гигиенический	Не более 10
18	Нарукавник медицинский с резинками на каждой стороне	Не более 20
19	Нарукавник медицинский с манжетой на одной стороне и резинкой на другой	Не более 20
20	Инструкция по применению	1
2. «Евростандарт»		
1.	Халат медицинский изолирующий «Евростандарт» с застежкой текстильной на горловине с длинным рукавом с вязаной трикотажной	Не более 10

	манжетой с нашитым карманом	
2.	Халат медицинский изолирующий «Евростандарт» с застежкой текстильной на горловине с длинным рукавом с вязаной трикотажной манжетой	Не более 10
3.	Куртка медицинская «Евростандарт» с круглым вырезом	Не более 10
4.	Куртка медицинская «Евростандарт» с V-образным вырезом	Не более 10
5.	Брюки медицинские «Евростандарт»	Не более 10
6.	Фартук медицинский гигиенический	Не более 10
7.	Нарукавник медицинский с резинками на каждой стороне	Не более 20
8.	Нарукавник медицинский с манжетой на одной стороне и резинкой на другой	Не более 20
9.	Инструкция по применению	1
3. «Комбинированный»		
1.	Халат медицинский изолирующий «Комбинированный» с завязками на горловине с длинным рукавом с вязаной трикотажной манжетой	Не более 10
2.	Халат медицинский изолирующий «Комбинированный» с завязками на горловине с длинным рукавом, собранным резинкой	Не более 10
3.	Халат медицинский изолирующий «Комбинированный» с завязками на горловине с длинным рукавом с двумя завязками	Не более 10
4.	Халат медицинский изолирующий «Комбинированный» с застежкой текстильной на горловине с длинным рукавом с вязаной трикотажной манжетой	Не более 10
5.	Халат медицинский изолирующий «Комбинированный» с застежкой текстильной на горловине с длинным рукавом, собранным резинкой	Не более 10
6.	Халат медицинский изолирующий «Комбинированный» с застежкой текстильной на горловине с длинным рукавом с двумя завязками	Не более 10
7.	Фартук медицинский гигиенический	Не более 10
8.	Нарукавник медицинский с резинками на каждой стороне	Не более 20
9.	Нарукавник медицинский с манжетой на одной стороне и резинкой на другой	Не более 20
10.	Инструкция по применению	1
4. С дополнительной защитой		
1.	Халат медицинский со стойкой и запахом с завязками на горловине с длинным рукавом, собранным резинкой	Не более 10
2.	Халат медицинский со стойкой и запахом с завязками на горловине с длинным рукавом с двумя завязками	Не более 10
3.	Халат медицинский со стойкой и запахом с застежкой текстильной на горловине с длинным рукавом, собранным резинкой	Не более 10
4.	Халат медицинский со стойкой и запахом с застежкой текстильной на горловине с длинным рукавом с двумя завязками	Не более 10
5.	Фартук медицинский гигиенический	Не более 10
6.	Нарукавник медицинский с резинками на каждой стороне	Не более 20
7.	Нарукавник медицинский с манжетой на одной стороне и резинкой на другой	Не более 20
8.	Инструкция по применению	1
5. «Процедурный»		
1.	Халат медицинский процедурный с круглым вырезом с одной застежкой текстильной спереди с длинным рукавом, собранным резинкой	Не более 10
2.	Халат медицинский процедурный с круглым вырезом с одной застежкой текстильной спереди с длинным прямым рукавом	Не более 10
3.	Халат медицинский процедурный с круглым вырезом с тремя застежками текстильными спереди с длинным рукавом, собранным резинкой	Не более 10
4.	Халат медицинский процедурный с круглым вырезом с тремя застежками текстильными спереди с длинным прямым рукавом	Не более 10

5.	Халат медицинский процедурный с V-образным вырезом с одной застежкой текстильной спереди с длинным рукавом, собранным резинкой	Не более 10
6.	Халат медицинский процедурный с V-образным вырезом с одной застежкой текстильной спереди с длинным прямым рукавом	Не более 10
7.	Халат медицинский процедурный с V-образным вырезом с тремя застежками текстильными спереди с длинным рукавом, собранным резинкой	Не более 10
8.	Халат медицинский процедурный с V-образным вырезом с тремя застежками текстильными спереди с длинным прямым рукавом	Не более 10
9.	Фартук медицинский гигиенический	Не более 10
10.	Нарукавник медицинский с резинками на каждой стороне	Не более 20
11.	Нарукавник медицинский с манжетой на одной стороне и резинкой на другой	Не более 20
12.	Инструкция по применению	1
6. Для пациента/посетителя		
1.	Халат медицинский для пациента/посетителя (накидка) с двумя завязками на горловине	Не более 10
2.	Халат медицинский для пациента/посетителя (накидка) с застежкой текстильной на горловине	Не более 10
3.	Сорочка (рубашка) медицинская для роженицы	Не более 10
4.	Сорочка медицинская для пациента с круглым вырезом	Не более 10
5.	Сорочка медицинская для пациента с V-образным вырезом	Не более 10
6.	Трусы-шорты медицинские гинекологические	Не более 10
7.	Трусы-шорты медицинские для колоноскопии (проктологические)	Не более 10
8.	Инструкция по применению	1
7. «Гигиенический»		
1.	Комбинезон медицинский гигиенический с капюшоном с застежкой-молнией с длинным рукавом с вязаной трикотажной манжетой	Не более 10
2.	Комбинезон медицинский гигиенический с капюшоном с тремя застежками текстильными спереди с длинным рукавом с вязаной трикотажной манжетой	Не более 10
3.	Комбинезон медицинский гигиенический с капюшоном с застежкой-молнией с длинным рукавом, собранным резинкой	Не более 10
4.	Комбинезон медицинский гигиенический с капюшоном с тремя застежками текстильными спереди с длинным рукавом, собранным резинкой	Не более 10
5.	Комбинезон медицинский гигиенический без капюшона (полукомбинезон) с застежкой-молнией с длинным рукавом с вязаной трикотажной манжетой	Не более 10
6.	Комбинезон медицинский гигиенический без капюшона (полукомбинезон) с тремя застежками текстильными спереди с длинным рукавом с вязаной трикотажной манжетой	Не более 10
7.	Комбинезон медицинский гигиенический без капюшона (полукомбинезон) с застежкой-молнией с длинным рукавом, собранным резинкой	Не более 10
8.	Комбинезон медицинский гигиенический без капюшона (полукомбинезон) с тремя застежками текстильными спереди с длинным рукавом, собранным резинкой	Не более 10
9.	Фартук медицинский гигиенический	Не более 10
10.	Нарукавник медицинский с резинками на каждой стороне	Не более 20
11.	Нарукавник медицинский с манжетой на одной стороне и резинкой на другой	Не более 20
12.	Инструкция по применению	1

5 Правила применения

Изделия необходимо применять в соответствии с современными требованиями к проведению медицинских процедур.

Меры предосторожности при обращении с одеждой:

- Запрещается применение изделий в случае их механического повреждения;
- Запрещается применение изделий по истечению срока годности;
- Запрещается повторное применение изделий;
- Запрещается стерилизация изделий.

6 Использование изделия

Взять пакет, аккуратно вскрыть упаковку набора одежды, чтобы не повредить содержимое упаковки, извлечь изделия. Каждое изделие использовать по его прямому назначению.

7 Противопоказания

Индивидуальная непереносимость материалов (см. п. 9.1).

8 Побочные действия

Побочных действий при применении изделий не выявлено.

9 Описание медицинского изделия и его основные технические характеристики

9.1 Описание

Одежда включает изделия, имеющие различные размеры, форму и цвета (белый, голубой), изготавливаются из нетканых материалов плотностью не менее 15 г/м^2 , но не более 70 г/м^2 .

При изготовлении одежды используются следующие материалы – спанбонд, спанлейс, ламинированный спанбонд, СМС, СММС, манжета трикотажная, нити швейные, резинка вязаная, застежка текстильная, застежка-молния.

9.2 Технические характеристики

Основные параметры и размеры одежды должны соответствовать требованиям, представленным в таблицах 2 - 58.

Таблица 2. Габаритные размеры халата медицинского изолирующего «Стандарт» с завязками на горловине с длинным рукавом с вязаной трикотажной манжетой

Размер	1	2	3	4	5
Длина переда от высшей точки плеча до низа изделия, Н, см	110	140	160	110	140
Длина горловины, см	60	60	60	60	60
Ширина на уровне глубины проймы, С1, см	70	70	70	75	75
Ширина халата внизу, С2, см	70	70	70	75	75
Ширина манжеты, С3, см	7	7	7	7	7
Длина рукава от высокой точки оката до низа, L1, см	60	60	60	60	60
Длина манжеты, L3, см	7	7	7	7	7
Количество завязок на поясе, шт.	2	2	2	2	2
Завязки на спине	Длина завязок, L2, см	60	60	60	60
	Ширина завязок, см	2,75	2,75	2,75	2,75
Завязки на горловине	Длина завязок, см	22	22	22	22
	Ширина завязок, см	2	2	2	2
Длина обтачки на горловине, см	90	90	90	90	90
Ширина обтачки на горловине, см	2	2	2	2	2
Масса изделия при плотности нетканого материала 17 г/м^2 , г	49,7	56,8	61,6	51,6	59,2
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м^2 , г	69,3	79,8	86,8	72,1	83,3
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м^2 , г	110,9	128,5	140,3	115,5	136,9
Масса изделия при плотности нетканого материала 60 г/м^2 , г	155	180,2	197	161,6	188,6

Допустимые отклонения, %	±6	±6	±6	±6	±6
--------------------------	----	----	----	----	----

Таблица 3. Габаритные размеры халата медицинского изолирующего «Стандарт» с завязками на горловине с длинным рукавом, собранным резинкой

Размер	1	2	3	4	5
Длина переда от высшей точки плеча до низа изделия, Н, см	110	140	160	110	140
Длина горловины, см	60	60	60	60	60
Ширина на уровне глубины проймы, С1, см	70	70	70	75	75
Ширина халата внизу, С2, см	70	70	70	75	75
Длина рукава от высокой точки оката до низа, L1, см	60	60	60	60	60
Количество завязок на поясе, шт.	2	2	2	2	2
Завязки на спине	Длина завязок, L2, см	60	60	60	60
	Ширина завязок, см	2,75	2,75	2,75	2,75
Завязки на горловине	Длина завязок, см	22	22	22	22
	Ширина завязок, см	2	2	2	2
Резинка на рукавах	Длина резинки, см	18	18	18	18
	Ширина резинки, см	0,4	0,4	0,4	0,4
Длина обтачки на горловине, см	90	90	90	90	90
Ширина обтачки на горловине, см	2	2	2	2	2
Масса изделия при плотности нетканого материала 17 г/м ² , г	42,9	50	54,8	44,8	52,4
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г	62,5	73	80	65,3	76,5
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г	104,1	121,7	133,5	108,7	130,1
Масса изделия при плотности нетканого материала 60 г/м ² , г	148,2	173,4	190,2	154,8	181,8
Допустимые отклонения, %	±6	±6	±6	±6	±6

Таблица 4. Габаритные размеры халата медицинского изолирующего «Стандарт» с завязками на горловине с длинным рукавом с двумя завязками

Размер	1	2	3	4	5
Длина переда от высшей точки плеча до низа изделия, Н, см	110	140	160	110	140
Длина горловины, см	60	60	60	60	60
Ширина на уровне глубины проймы, С1, см	70	70	70	75	75
Ширина халата внизу, С2, см	70	70	70	75	75
Длина рукава от высокой точки оката до низа, L1, см	60	60	60	60	60
Количество завязок на поясе, шт.	2	2	2	2	2
Завязки на спине	Длина завязок, L2, см	60	60	60	60
	Ширина завязок, см	2,75	2,75	2,75	2,75
Завязки на горловине	Длина завязок, см	22	22	22	22
	Ширина завязок, см	2	2	2	2
Завязки на рукавах	Длина завязок, см	22	22	22	22
	Ширина завязок, см	2	2	2	2
Длина обтачки на горловине, см	90	90	90	90	90
Ширина обтачки на горловине, см	2	2	2	2	2
Масса изделия при плотности нетканого материала 17 г/м ² , г	42	49,1	53,9	43,9	51,5
Масса изделия при плотности нетканого материала	61,6	72,1	79,1	64,4	75,6

25 г/м ² , г					
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г	103,2	120,8	132,6	107,8	129,2
Масса изделия при плотности нетканого материала 60 г/м ² , г	147,3	172,5	189,3	153,9	180,9
Допустимые отклонения, %	±6	±6	±6	±6	±6

Таблица 5. Габаритные размеры халата медицинского изолирующего «Стандарт» с застежкой текстильной на горловине с длинным рукавом с вязаной трикотажной манжетой

Размер	1	2	3	4	5
Длина переда от высшей точки плеча до низа изделия, Н, см	110	140	160	110	140
Длина горловины, см	60	60	60	60	60
Ширина на уровне глубины проймы, С1, см	70	70	70	75	75
Ширина халата внизу, С2, см	70	70	70	75	75
Ширина манжеты, С3, см	7	7	7	7	7
Длина рукава от высокой точки оката до низа, L1, см	60	60	60	60	60
Длина манжеты, L3, см	7	7	7	7	7
Количество текстильных застежек на горловине, шт.	1	1	1	1	1
Текстильная застежка	Длина застежки, см	6	6	6	6
	Ширина застежки, см	2	2	2	2
Количество завязок на поясе, шт.	2	2	2	2	2
Завязки на спине	Длина завязок, L2, см	60	60	60	60
	Ширина завязок, см	2,75	2,75	2,75	2,75
Завязки на горловине	Длина завязок, см	22	22	22	22
	Ширина завязок, см	2	2	2	2
Длина обтачки на горловине, см	90	90	90	90	90
Ширина обтачки на горловине, см	2	2	2	2	2
Масса изделия при плотности нетканого материала 17 г/м ² , г	49,7	56,8	61,6	51,6	59,2
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г	69,3	79,8	86,8	72,1	83,3
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г	110,9	128,5	140,3	117,6	136,9
Масса изделия при плотности нетканого материала 60 г/м ² , г	155	180,2	197	161,6	188,6
Допустимые отклонения, %	±6	±6	±6	±6	±6

Таблица 6. Габаритные размеры халата медицинского изолирующего «Стандарт» с застежкой текстильной на горловине с длинным рукавом, собранным резинкой

Размер	1	2	3	4	5
Длина переда от высшей точки плеча до низа изделия, Н, см	110	140	160	110	140
Длина горловины, см	60	60	60	60	60
Ширина на уровне глубины проймы, С1, см	70	70	70	75	75
Ширина халата внизу, С2, см	70	70	70	75	75
Длина рукава от высокой точки оката до низа, L1, см	60	60	60	60	60
Количество текстильных застежек на горловине, шт.	1	1	1	1	1
Текстильная застежка	Длина застежки, см	6	6	6	6
	Ширина застежки, см	2	2	2	2
Количество завязок на поясе, шт.	2	2	2	2	2
Завязки на спине	Длина завязок, L2, см	60	60	60	60
	Ширина завязок, см	2,75	2,75	2,75	2,75

Завязки на горловине	Длина завязок, см	22	22	22	22	22
	Ширина завязок, см	2	2	2	2	2
Резинка на рукавах	Длина резинки, см	18	18	18	18	18
	Ширина резинки, см	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Длина обтачки на горловине, см		90	90	90	90	90
Ширина обтачки на горловине, см		2	2	2	2	2
Масса изделия при плотности нетканого материала 17 г/м ² , г		42,8	49,9	54,7	44,7	52,3
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г		62,4	72,9	79,9	65,2	76,4
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г		104	121,6	133,4	108,6	130
Масса изделия при плотности нетканого материала 60 г/м ² , г		148,1	173,3	190,1	154,7	181,7
Допустимые отклонения, %		±6	±6	±6	±6	±6

Таблица 7. Габаритные размеры халата медицинского изолирующего «Стандарт» с застежкой текстильной на горловине с длинным рукавом с двумя завязками

Размер		1	2	3	4	5
Длина переда от высшей точки плеча до низа изделия, Н, см		110	140	160	110	140
Длина горловины, см		60	60	60	60	60
Ширина на уровне глубины проймы, С1, см		70	70	70	75	75
Ширина халата внизу, С2, см		70	70	70	75	75
Длина рукава от высокой точки оката до низа, L1, см		60	60	60	60	60
Количество текстильных застёжек на горловине, шт.		1	1	1	1	1
Текстильная застежка	Длина застежки, см	6	6	6	6	6
	Ширина застежки, см	2	2	2	2	2
Количество завязок на поясе, шт.		2	2	2	2	2
Завязки на спине	Длина завязок, L2, см	60	60	60	60	60
	Ширина завязок, см	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Завязки на рукавах	Длина завязок, см	22	22	22	22	22
	Ширина завязок, см	2	2	2	2	2
Длина обтачки на горловине, см		90	90	90	90	90
Ширина обтачки на горловине, см		2	2	2	2	2
Масса изделия при плотности нетканого материала 17 г/м ² , г		41,9	49	53,8	43,8	51,4
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г		61,5	72	79	64,3	75,5
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г		103,1	120,7	132,5	107,7	129,1
Масса изделия при плотности нетканого материала 60 г/м ² , г		147,2	172,4	189,2	153,8	180,8
Допустимые отклонения, %		±6	±6	±6	±6	±6

Таблица 8. Габаритные размеры куртки медицинской «Стандарт» с круглым вырезом с длинным рукавом с вязаной трикотажной манжетой

Размер	1	2
Длина изделия, Н1, см	70	80
Длина горловины, см	60	60
Длина от выреза до низа, Н2, см	55	65
Ширина на уровне проймы С1, см	65	70

Ширина изделия внизу, C2, см	70	80
Ширина манжеты C3, см	7	7
Длина рукава от высшей точки оката до низа, L1, см	60	60
Длина манжеты, L2, см	7	7
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г	62,3	62,7
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г	99,2	99,9
Масса изделия при плотности нетканого материала 60 г/м ² , г	138,3	139,3
Допустимые отклонения, %	±6	±6

Таблица 9. Габаритные размеры куртки медицинской «Стандарт» с круглым вырезом с длинным рукавом, собранным резинкой

Размер	1	2
Длина изделия, H1, см	70	80
Длина горловины, см	60	60
Длина от выреза до низа, H2, см	55	65
Ширина на уровне проймы C1, см	65	70
Ширина изделия внизу, C2, см	70	80
Ширина внизу рукава C3, см	9	9
Длина рукава от высшей точки оката до низа, L1, см	60	60
Длина резинки, см	18	18
Ширина резинки, см	0,4	0,4
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г	55,5	55,9
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г	92,4	93,1
Масса изделия при плотности нетканого материала 60 г/м ² , г	131,5	132,5
Допустимые отклонения, %	±6	±6

Таблица 10. Габаритные размеры куртки медицинской «Стандарт» с круглым вырезом с длинным прямым рукавом

Размер	1	2
Длина изделия, H1, см	70	80
Длина горловины, см	60	60
Длина от выреза до низа, H2, см	55	65
Ширина на уровне проймы C1, см	65	70
Ширина изделия внизу, C2, см	70	80
Ширина внизу рукава C3, см	18	18
Длина рукава от высшей точки оката до низа, L1, см	60	60
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г	54,3	54,7
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г	91,2	91,9
Масса изделия при плотности нетканого материала 60 г/м ² , г	130,3	131,3
Допустимые отклонения, %	±6	±6

Таблица 11. Габаритные размеры куртки медицинской «Стандарт» с V-образным вырезом с длинным рукавом с вязаной трикотажной манжетой

Размер	1	2
Длина изделия, H1, см	70	80
Длина горловины, см	60	60
Длина от выреза до низа, H2, см	55	65
Ширина на уровне проймы C1, см	65	70
Ширина изделия внизу, C2, см	70	80
Ширина манжеты C3, см	7	7
Длина рукава от высшей точки оката до низа, L1, см	60	60
Длина манжеты, L2, см	7	7
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г	62,3	62,7

Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г	99,2	99,9
Масса изделия при плотности нетканого материала 60 г/м ² , г	138,3	139,3
Допустимые отклонения, %	±6	±6

Таблица 12. Габаритные размеры куртки медицинской «Стандарт» с V-образным вырезом с длинным рукавом, собранным резинкой

Размер	1	2
Длина изделия, Н1, см	70	80
Длина горловины, см	60	60
Длина от выреза до низа, Н2, см	55	65
Ширина на уровне проймы С1, см	65	70
Ширина изделия внизу, С2, см	70	80
Ширина внизу рукава С3, см	9	9
Длина рукава от высшей точки оката до низа, L1, см	60	60
Длина резинки, см	18	18
Ширина резинки, см	0,4	0,4
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г	55,5	55,9
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г	92,4	93,1
Масса изделия при плотности нетканого материала 60 г/м ² , г	131,5	132,5
Допустимые отклонения, %	±6	±6

Таблица 13. Габаритные размеры куртки медицинской «Стандарт» с V-образным вырезом с длинным прямым рукавом

Размер	1	2
Длина изделия, Н1, см	70	80
Длина горловины, см	60	60
Длина от выреза до низа, Н2, см	55	65
Ширина на уровне проймы С1, см	65	70
Ширина изделия внизу, С2, см	70	80
Ширина внизу рукава С3, см	18	18
Длина рукава от высшей точки оката до низа, L1, см	60	60
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г	54,3	54,7
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г	91,2	91,9
Масса изделия при плотности нетканого материала 60 г/м ² , г	130,3	131,3
Допустимые отклонения, %	±6	±6

Таблица 14. Габаритные размеры куртки медицинской «Стандарт» с круглым вырезом с коротким рукавом

Размер	1	2
Длина изделия, Н1, см	70	80
Длина горловины, см	60	60
Длина от выреза до низа, Н2, см	55	65
Ширина на уровне проймы С1, см	65	70
Ширина изделия внизу, С2, см	70	80
Ширина внизу рукава С3, см	18	18
Длина рукава от высшей точки оката до низа, L1, см	28	28
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г	51,4	51,8
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г	86,4	87,1
Масса изделия при плотности нетканого материала 60 г/м ² , г	123,4	124,4
Допустимые отклонения, %	±6	±6

Таблица 15. Габаритные размеры куртки медицинской «Стандарт» с V-образным вырезом с коротким рукавом

Размер	1	2
Длина изделия, Н1, см	70	80
Длина горловины, см	60	60
Длина от выреза до низа, Н2, см	55	65
Ширина на уровне проймы С1, см	65	70
Ширина изделия внизу, С2, см	70	80
Ширина внизу рукава С3, см	18	18
Длина рукава от высшей точки оката до низа, L1, см	28	28
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г	51,4	51,8
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г	86,4	87,1
Масса изделия при плотности нетканого материала 60 г/м ² , г	123,4	124,4
Допустимые отклонения, %	±6	±6

Таблица 16. Габаритные размеры брюк медицинских «Стандарт» с прямым низом

Размер	1	2
Длина штанины по внешнему краю, Н1, см	110	120
Длина штанины по внутреннему краю, Н2, см	76	87
Ширина брюк в поясе С1, см	60	60
Ширина штанины внизу, С2, см	24	24
Длина резинки на уровне пояса, см	100	100
Ширина резинки, см	0,4	0,4
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г	62,2	64,6
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г	103,3	107,3
Масса изделия при плотности нетканого материала 60 г/м ² , г	146,2	152
Допустимые отклонения, %	±6	±6

Таблица 17. Габаритные размеры брюк медицинских «Стандарт» с низом, собранным резинкой

Размер	1	2
Длина штанины по внешнему краю, Н1, см	110	120
Длина штанины по внутреннему краю, Н2, см	76	87
Ширина брюк в поясе С1, см	60	60
Ширина штанины внизу, С2, см	12,5	12,5
Длина резинки на уровне пояса, см	100	100
Длина резинки внизу, см	25	25
Ширина резинки, см	0,4	0,4
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г	63,9	66,3
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г	105	109
Масса изделия при плотности нетканого материала 60 г/м ² , г	147,9	153,7
Допустимые отклонения, %	±6	±6

Таблица 18. Габаритные размеры фартука медицинского гигиенического

Размер	1	2	3	4
Длина фартука с лямкой, Н1, см	120	140	160	180
Длина фартука, Н2, см	100	120	140	160
Ширина изделия сверху, С1, см	32	32	32	32
Ширина изделия внизу, С2, см	80	90	90	90
Длина завязок, L, см	56	56	56	56
Длина лямки, см	40	40	40	40
Ширина завязок, см	2,75	2,75	2,75	2,75
Ширина лямки, см	2,75	2,75	2,75	2,75
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г	30	36,3	40,8	45,3

Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г	50,5	60,9	68,4	76
Масса изделия при плотности нетканого материала 65 г/м ² , г	78,5	94,1	105,8	117,5
Допустимые отклонения, %	±6	±6	±6	±6

Таблица 19. Габаритные размеры нарукавника медицинского с резинками на каждой стороне

Длина нарукавника, L1, см		40
Ширина нарукавника сверху C1, см		20
Ширина нарукавника внизу, C2, см		18
Резинка сверху нарукавника	Длина, см	30
	Ширина, см	0,4
Резинка внизу нарукавника	Длина, см	25
	Ширина, см	0,4
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г		13,5
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г		21,5
Масса изделия при плотности нетканого материала 65 г/м ² , г		31,5
Допустимые отклонения, %		±6

Таблица 20. Габаритные размеры нарукавника медицинского с манжетой на одной стороне и резинкой на другой

Длина нарукавника, L1, см		40
Ширина нарукавника сверху C1, см		20
Резинка сверху нарукавника	Длина, см	30
	Ширина, см	0,4
Манжета внизу нарукавника	Длина L2, см	7
	Ширина C2, см	7
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г		21
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г		28,5
Масса изделия при плотности нетканого материала 65 г/м ² , г		39
Допустимые отклонения, %		±6

Таблица 21. Габаритные размеры халата медицинского изолирующего «Евростандарт» с застежкой текстильной на горловине с длинным рукавом с вязаной трикотажной манжетой, с нашитым карманом

Размер		1	2
Длина переда от высшей точки плеча до низа изделия, Н, см		110	140
Длина горловины, см		60	60
Ширина на уровне глубины проймы, C1, см		78	78
Ширина халата внизу, C2, см		80	80
Ширина манжеты, C3, см		7	7
Длина рукава от высокой точки оката до низа, L1, см		60	60
Длина манжеты, L3, см		7	7
Количество текстильных застежек на горловине, шт.		1	1
Текстильная застежка	Длина застежки, см	6	6
	Ширина застежки, см	2	2
Количество завязок на поясе, шт.		4	4
Завязки на поясе	Длина завязок, L2, см	60	60
	Ширина завязок, см	2,75	2,75
Длина кармана, см		14	14
Ширина кармана, см		12	12
Длина обтачки на горловине, см		90	90
Ширина обтачки на горловине, см		2	2
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г		87	93

Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г	139,5	149
Масса изделия при плотности нетканого материала 60 г/м ² , г	195	208
Допустимые отклонения, %	±6	±6

Таблица 22. Габаритные размеры халата медицинского изолирующего «Евростандарт» с застежкой текстильной на горловине с длинным рукавом с вязаной трикотажной манжетой

Размер		1	2
Длина переда от высшей точки плеча до низа изделия, Н, см		110	140
Длина горловины, см		60	60
Ширина на уровне глубины проймы, С1, см		78	78
Ширина халата внизу, С2, см		80	80
Ширина манжеты, С3, см		7	7
Длина рукава от высокой точки оката до низа, L1, см		60	60
Длина манжеты, L3, см		7	7
Количество текстильных застежек на горловине, шт.		1	1
Текстильная застежка	Длина застежки, см	6	6
	Ширина застежки, см	2	2
Количество завязок на поясе, шт.		4	4
Завязки на поясе	Длина завязок, L2, см	60	60
	Ширина завязок, см	2,75	2,75
Длина обтачки на горловине, см		90	90
Ширина обтачки на горловине, см		2	2
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г		87	93
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г		139,5	149
Масса изделия при плотности нетканого материала 60 г/м ² , г		195	208
Допустимые отклонения, %		±6	±6

Таблица 23. Габаритные размеры куртки медицинской «Евростандарт» с круглым вырезом

Размер		1	2
Длина изделия, Н1, см		70	80
Длина горловины, см		60	60
Длина от выреза до низа, Н2, см		55	65
Длина нижнего кармана, Н3, см		16	16
Длина верхнего кармана, Н4, см		12	12
Ширина на уровне проймы С1, см		56	56
Ширина изделия внизу, С2, см		66	74
Ширина внизу рукава С3, см		25	25
Ширина нижнего кармана, С4, см		17	17
Ширина верхнего кармана, С5, см		14	14
Длина рукава от высшей точки оката до низа, L1, см		28	28
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г		52,5	52,9
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г		88,2	88,9
Масса изделия при плотности нетканого материала 60 г/м ² , г		126	127
Допустимые отклонения, %		±6	±6

Таблица 24. Габаритные размеры куртки медицинской «Евростандарт» с V-образным вырезом

Размер		1	2
Длина изделия, Н1, см		70	80
Длина горловины, см		60	60
Длина от выреза до низа, Н2, см		55	65
Длина нижнего кармана, Н3, см		16	16
Длина верхнего кармана, Н4, см		12	12
Ширина на уровне проймы С1, см		56	56

Ширина изделия внизу, С2, см	66	74
Ширина внизу рукава С3, см	25	25
Ширина нижнего кармана, С4, см	17	17
Ширина верхнего кармана, С5, см	14	14
Длина рукава от высшей точки оката до низа, L1, см	28	28
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г	52,5	52,9
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г	88,2	88,9
Масса изделия при плотности нетканого материала 60 г/м ² , г	126	127
Допустимые отклонения, %	±6	±6

Таблица 25. Габаритные размеры брюк медицинских «Евростандарт»

Размер	1	2
Длина штанины по внешнему краю, Н1, см	110	120
Длина штанины по внутреннему краю, Н2, см	76	87
Длина внутреннего кармана, Н3, см	16	16
Ширина брюк в поясе С1, см	60	60
Ширина штанины внизу, С2, см	24	24
Ширина внутреннего кармана, С3, см	17	17
Длина завязки на уровне пояса, см	150	150
Ширина завязки, см	2	2
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г	60,3	62,8
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г	102,4	106,4
Масса изделия при плотности нетканого материала 60 г/м ² , г	146,3	151,8
Допустимые отклонения, %	±6	±6

Таблица 26. Габаритные размеры халата медицинского изолирующего «Комбинированный» с завязками на горловине с длинным рукавом с вязаной трикотажной манжетой

Размер	1	2
Длина переда от высшей точки плеча до низа изделия, Н, см	110	140
Длина горловины, см	60	60
Ширина на уровне глубины проймы, С1, см	62	70
Ширина халата внизу, С2, см	65	70
Длина манжеты, С3, см	7	7
Длина рукава от высокой точки оката до низа, L1, см	60	60
Ширина манжеты, L3, см	7	7
Количество завязок на поясе, шт.	2	2
Завязки на поясе	Длина завязок, L2, см	60
	Ширина завязок, см	2,75
Завязки на горловине	Длина завязок, см	22
	Ширина завязок, см	2
Длина обтачки на горловине, см	90	90
Ширина обтачки на горловине, см	2	2
Масса изделия при плотности нетканого материала: спинка 25 г/м ² , перед и рукава 40 г/м ² ламинированные, г	99	112
Масса изделия при плотности нетканого материала: спинка 42 г/м ² , перед и рукава 40 г/м ² ламинированные, г	116	132
Масса изделия при плотности нетканого материала: спинка 42 г/м ² , перед и рукава 65 г/м ² ламинированные, г	156	177
Допустимые отклонения, %	±6	±6

Таблица 27. Габаритные размеры халата медицинского изолирующего «Комбинированный» с завязками на горловине с длинным рукавом, собранным резинкой

Размер	1	2
Длина переда от высшей точки плеча до низа изделия, Н, см	110	140

Длина горловины, см		60	60
Ширина на уровне глубины проймы, С1, см		62	70
Ширина халата внизу, С2, см		65	70
Длина рукава от высокой точки оката до низа, L1, см		60	60
Количество завязок на поясе, шт.		2	2
Завязки на поясе	Длина завязок, L2, см	60	60
	Ширина завязок, см	2,75	2,75
Завязки на горловине	Длина завязок, см	22	22
	Ширина завязок, см	2	2
Резинки на рукавах	Длина резинки, см	18	18
	Ширина резинки, см	0,4	0,4
Длина обтачки на горловине, см		90	90
Ширина обтачки на горловине, см		2	2
Масса изделия при плотности нетканого материала: спинка 25 г/м ² , перед и рукава 40 г/м ² ламинированные, г		91,5	104,5
Масса изделия при плотности нетканого материала: спинка 42 г/м ² , перед и рукава 40 г/м ² ламинированные, г		108,5	125
Масса изделия при плотности нетканого материала: спинка 42 г/м ² , перед и рукава 65 г/м ² ламинированные, г		148,5	170
Допустимые отклонения, %		±6	±6

Таблица 28. Габаритные размеры халата медицинского изолирующего «Комбинированный» с завязками на горловине с длинным рукавом с двумя завязками

Размер		1	2
Длина переда от высшей точки плеча до низа изделия, Н, см		110	140
Длина горловины, см		60	60
Ширина на уровне глубины проймы, С1, см		62	70
Ширина халата внизу, С2, см		65	70
Длина рукава от высокой точки оката до низа, L1, см		60	60
Количество завязок на поясе, шт.		2	2
Завязки на поясе	Длина завязок, L2, см	60	60
	Ширина завязок, см	2,75	2,75
Завязки на горловине	Длина завязок, см	22	22
	Ширина завязок, см	2	2
Завязки на рукавах	Длина завязок, см	22	22
	Ширина завязок, см	2	2
Длина обтачки на горловине, см		90	90
Ширина обтачки на горловине, см		2	2
Масса изделия при плотности нетканого материала: спинка 25 г/м ² , перед и рукава 40 г/м ² ламинированные, г		90,5	103,5
Масса изделия при плотности нетканого материала: спинка 42 г/м ² , перед и рукава 40 г/м ² ламинированные, г		107,5	124
Масса изделия при плотности нетканого материала: спинка 42 г/м ² , перед и рукава 65 г/м ² ламинированные, г		147,5	169
Допустимые отклонения, %		±6	±6

Таблица 29. Габаритные размеры халата медицинского изолирующего «Комбинированный» с застежкой текстильной на горловине с длинным рукавом с вязаной трикотажной манжетой

Размер		1	2
Длина переда от высшей точки плеча до низа изделия, Н, см		110	140
Длина горловины, см		60	60
Ширина на уровне глубины проймы, С1, см		62	70
Ширина халата внизу, С2, см		65	70

Длина рукава от высокой точки оката до низа, L1, см		60	60
Длина манжеты, СЗ, см		7	7
Ширина манжеты, L3, см		7	7
Количество завязок на поясе, шт.		2	2
Количество текстильных застёжек на горловине, шт.		1	1
Текстильная застёжка	Длина застёжки, см	6	6
	Ширина застёжки, см	2	2
Завязки на поясе	Длина завязок, L2, см	60	60
	Ширина завязок, см	2,75	2,75
Длина обтачки на горловине, см		90	90
Ширина обтачки на горловине, см		2	2
Масса изделия при плотности нетканого материала: спинка 25 г/м ² , перед и рукава 40 г/м ² ламинированные, г		99,5	112,5
Масса изделия при плотности нетканого материала: спинка 42 г/м ² , перед и рукава 40 г/м ² ламинированные, г		116,5	133
Масса изделия при плотности нетканого материала: спинка 42 г/м ² , перед и рукава 65 г/м ² ламинированные, г		156,5	178
Допустимые отклонения, %		±6	±6

Таблица 30. Габаритные размеры халата медицинского изолирующего «Комбинированный» с застёжкой текстильной на горловине с длинным рукавом, собранным резинкой

Размер		1	2
Длина переда от высшей точки плеча до низа изделия, Н, см		110	140
Длина горловины, см		60	60
Ширина на уровне глубины проймы, С1, см		62	70
Ширина халата внизу, С2, см		65	70
Длина рукава от высокой точки оката до низа, L1, см		60	60
Количество завязок на поясе, шт.		2	2
Количество текстильных застёжек на горловине, шт.		1	1
Текстильная застёжка	Длина застёжки, см	6	6
	Ширина застёжки, см	2	2
Завязки на поясе	Длина завязок, L2, см	60	60
	Ширина завязок, см	2,75	2,75
Резинки на рукавах	Длина резинки, см	18	18
	Ширина резинки, см	0,4	0,4
Длина обтачки на горловине, см		90	90
Ширина обтачки на горловине, см		2	2
Масса изделия при плотности нетканого материала: спинка 25 г/м ² , перед и рукава 40 г/м ² ламинированные, г		92	105
Масса изделия при плотности нетканого материала: спинка 42 г/м ² , перед и рукава 40 г/м ² ламинированные, г		109	125,5
Масса изделия при плотности нетканого материала: спинка 42 г/м ² , перед и рукава 65 г/м ² ламинированные, г		149	170,5
Допустимые отклонения, %		±6	±6

Таблица 31. Габаритные размеры халата медицинского изолирующего «Комбинированный» с застёжкой текстильной на горловине с длинным рукавом с двумя завязками

Размер		1	2
Длина переда от высшей точки плеча до низа изделия, Н, см		110	140
Длина горловины, см		60	60
Ширина на уровне глубины проймы, С1, см		62	70
Ширина халата внизу, С2, см		65	70
Длина рукава от высокой точки оката до низа, L1, см		60	60

Количество текстильных застёжек на горловине, шт.		1	1
Текстильная застёжка	Длина застёжки, см	6	6
	Ширина застёжки, см	2	2
Количество завязок на поясе, шт.		2	2
Завязки на поясе	Длина завязок, L2, см	60	60
	Ширина завязок, см	2,75	2,75
Завязки на рукавах	Длина завязок, см	22	22
	Ширина завязок, см	2	2
Длина обтачки на горловине, см		90	90
Ширина обтачки на горловине, см		2	2
Масса изделия при плотности нетканого материала: спинка 25 г/м ² , перед и рукава 40 г/м ² ламинированные, г		91	104
Масса изделия при плотности нетканого материала: спинка 42 г/м ² , перед и рукава 40 г/м ² ламинированные, г		108	124,5
Масса изделия при плотности нетканого материала: спинка 42 г/м ² , перед и рукава 65 г/м ² ламинированные, г		148	169,5
Допустимые отклонения, %		±6	±6

Таблица 32. Габаритные размеры халата медицинского со стойкой и запахом с завязками на горловине, с длинным рукавом, собранным резинкой

Размер		б/р
Длина переда от высшей точки плеча до низа изделия, Н, см		140
Длина горловины, см		60
Ширина на уровне глубины проймы, С1, см		65
Ширина халата внизу, С2, см		80
Длина рукава от высокой точки оката до низа, L1, см		60
Ширина рукава внизу, С3, см		9
Количество завязок на поясе, шт.		2
Завязки на поясе	Длина завязок, L2, см	70
	Ширина завязок, см	2,75
Завязки на горловине	Длина завязок, см	15
	Ширина завязок, см	2
Резинки на рукавах	Длина резинки, см	18
	Ширина резинки, см	0,4
Длина воротника, см		60
Ширина воротника, см		4
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г		128,5
Масса изделия при плотности нетканого материала 60 г/м ² , г		182,5
Допустимые отклонения, %		±6

Таблица 33. Габаритные размеры халата медицинского со стойкой и запахом с завязками на горловине, с длинным рукавом с двумя завязками

Размер		б/р
Длина переда от высшей точки плеча до низа изделия, Н, см		140
Длина горловины, см		60
Ширина на уровне глубины проймы, С1, см		65
Ширина халата внизу, С2, см		80
Длина рукава от высокой точки оката до низа, L1, см		60
Ширина рукава внизу, С3, см		18
Количество завязок на поясе, шт.		2
Завязки на поясе	Длина завязок, L2, см	70
	Ширина завязок, см	2,75
Завязки на	Длина завязок, см	15

горловине	Ширина завязок, см	2
Завязки на рукавах	Длина завязок, см	22
	Ширина завязок, см	2
Длина воротника, см		60
Ширина воротника, см		4
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г		127,5
Масса изделия при плотности нетканого материала 60 г/м ² , г		181,5
Допустимые отклонения, %		±6

Таблица 34. Габаритные размеры халата медицинского со стойкой и запахом с застежкой текстильной на горловине, с длинным рукавом, собранным резинкой

Размер		б/р
Длина переда от высшей точки плеча до низа изделия, Н, см		140
Длина горловины, см		60
Ширина на уровне глубины проймы, С1, см		65
Ширина халата внизу, С2, см		80
Длина рукава от высокой точки оката до низа, L1, см		60
Ширина рукава внизу, С3, см		9
Количество текстильных застёжек, шт.		1
Текстильная застежка	Длина застежки, см	6
	Ширина застежки, см	2
Количество завязок на поясе, шт.		2
Завязки на поясе	Длина завязок, L2, см	70
	Ширина завязок, см	2,75
Резинки на рукавах	Длина резинки, см	18
	Ширина резинки, см	0,4
Длина воротника, см		60
Ширина воротника, см		4
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г		129
Масса изделия при плотности нетканого материала 60 г/м ² , г		183
Допустимые отклонения, %		±6

Таблица 35. Габаритные размеры халата медицинского со стойкой и запахом с застежкой текстильной на горловине с длинным рукавом с двумя завязками

Размер		б/р
Длина переда от высшей точки плеча до низа изделия, Н, см		140
Длина горловины, см		60
Ширина на уровне глубины проймы, С1, см		65
Ширина халата внизу, С2, см		80
Длина рукава от высокой точки оката до низа, L1, см		60
Ширина рукава внизу, С3, см		18
Количество текстильных застёжек, шт.		1
Текстильная застежка	Длина застежки, см	6
	Ширина застежки, см	2
Количество завязок на поясе, шт.		2
Завязки на поясе	Длина завязок, L2, см	70
	Ширина завязок, см	2,75
Завязки на рукавах	Длина завязок, см	22
	Ширина завязок, см	2
Длина воротника, см		60
Ширина воротника, см		4
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г		128

Масса изделия при плотности нетканого материала 60 г/м ² , г	182
Допустимые отклонения, %	±6

Таблица 36. Габаритные размеры халата медицинского процедурного с круглым вырезом, с одной застежкой текстильной спереди, с длинным рукавом, собранным резинкой

Размер		б/р
Длина переда от высшей точки плеча до низа изделия, Н, см		140
Длина горловины, см		60
Ширина на уровне глубины проймы, С1, см		60
Ширина халата внизу, С2, см		70
Длина рукава от высокой точки оката до низа, L1, см		53
Ширина рукава внизу, С3, см		9
Количество текстильных застёжек, шт.		1
Текстильная застежка	Длина застежки, см	6
	Ширина застежки, см	2
Резинки на рукавах	Длина резинки, см	18
	Ширина резинки, см	0,4
Длина обтачки на горловине, см		90
Ширина обтачки на горловине, см		2
Масса изделия при плотности нетканого материала 17 г/м ² , г		44,5
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г		64,5
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г		106,5
Допустимые отклонения, %		±6

Таблица 37. Габаритные размеры халата медицинского процедурного с круглым вырезом с одной застежкой текстильной спереди с длинным прямым рукавом

Размер		б/р
Длина переда от высшей точки плеча до низа изделия, Н, см		140
Длина горловины, см		60
Ширина на уровне глубины проймы, С1, см		60
Ширина халата внизу, С2, см		70
Длина рукава от высокой точки оката до низа, L1, см		53
Ширина рукава внизу, С3, см		22
Количество текстильных застёжек, шт.		1
Текстильная застёжка	Длина застёжки, см	6
	Ширина застёжки, см	2
Длина обтачки на горловине, см		90
Ширина обтачки на горловине, см		2
Масса изделия при плотности нетканого материала 17 г/м ² , г		44
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г		64
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г		106
Допустимые отклонения, %		±6

Таблица 38. Габаритные размеры халата медицинского процедурного с круглым вырезом с тремя застежками текстильными спереди с длинным рукавом, собранным резинкой

Вырезом с тремя застежками (клеточными) спереди с длинным рукавом, боковыми резинками		
Размер		б/р
Длина переда от высшей точки плеча до низа изделия, Н, см		140
Длина горловины, см		60
Ширина на уровне глубины проймы, С1, см		60
Ширина халата внизу, С2, см		70
Длина рукава от высокой точки оката до низа, L1, см		53
Ширина рукава внизу, С3, см		9
Резинки на рукавах	Длина резинки, см	18

	Ширина резинки, см	0,4
Количество текстильных застёжек, шт.		3
Текстильная застежка	Длина застежки, см	6
	Ширина застежки, см	2
Расстояние между текстильными застежками, см		22
Длина обтачки на горловине, см		90
Ширина обтачки на горловине, см		2
Масса изделия при плотности нетканого материала 17 г/м ² , г		46
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г		66
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г		108
Допустимые отклонения, %		±6

Таблица 39. Габаритные размеры халата медицинского процедурного с круглым вырезом с тремя застежками текстильными спереди с длинным прямым рукавом

Размер		б/р
Длина переда от высшей точки плеча до низа изделия, Н, см		140
Длина горловины, см		60
Ширина на уровне глубины проймы, С1, см		60
Ширина халата внизу, С2, см		70
Длина рукава от высокой точки оката до низа, L1, см		53
Ширина рукава внизу, С3, см		22
Количество текстильных застёжек, шт.		3
Текстильная застежка	Длина застежки, см	6
	Ширина застежки, см	2
Расстояние между текстильными застежками, см		22
Длина обтачки на горловине, см		90
Ширина обтачки на горловине, см		2
Масса изделия при плотности нетканого материала 17 г/м ² , г		45
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г		65
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г		107
Допустимые отклонения, %		±6

Таблица 40. Габаритные размеры халата медицинского процедурного с V-образным вырезом с одной застежкой текстильной спереди с длинным рукавом, собранным резинкой

Размер		б/р
Длина переда от высшей точки плеча до низа изделия, Н, см		140
Длина горловины, см		60
Ширина на уровне глубины проймы, С1, см		60
Ширина халата внизу, С2, см		70
Длина рукава от высокой точки оката до низа, L1, см		53
Ширина рукава внизу, С3, см		9
Резинки на рукавах	Длина резинки, см	18
	Ширина резинки, см	0,4
Количество текстильных застёжек, шт.		1
Текстильная застежка	Длина застежки, см	6
	Ширина застежки, см	2
Масса изделия при плотности нетканого материала 17 г/м ² , г		44,5
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г		64,5
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г		106,5
Допустимые отклонения, %		±6

Таблица 41. Габаритные размеры халата медицинского процедурного с V-образным вырезом с одной застежкой текстильной спереди с длинным прямым рукавом

Размер		б/р
Длина переда от высшей точки плеча до низа изделия, Н, см		140
Длина горловины, см		60
Ширина на уровне глубины проймы, С1, см		60
Ширина халата внизу, С2, см		70
Длина рукава от высокой точки оката до низа, L1, см		53
Ширина рукава внизу, С3, см		22
Количество текстильных застёжек, шт.		1
Текстильная застежка	Длина застежки, см	6
	Ширина застежки, см	2
Масса изделия при плотности нетканого материала 17 г/м ² , г		44
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г		63,5
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г		106
Допустимые отклонения, %		±6

Таблица 42. Габаритные размеры халата медицинского процедурного с V-образным вырезом с тремя застежками текстильными спереди с длинным рукавом, собранным резинкой

Размер		б/р
Длина переда от высшей точки плеча до низа изделия, Н, см		140
Длина горловины, см		60
Ширина на уровне глубины проймы, С1, см		60
Ширина халата внизу, С2, см		70
Длина рукава от высокой точки оката до низа, L1, см		53
Ширина рукава внизу, С3, см		9
Резинки на рукавах	Длина резинки, см	18
	Ширина резинки, см	0,4
Количество текстильных застёжек, шт.		3
Текстильная застёжка	Длина застёжки, см	6
	Ширина застёжки, см	2
Расстояние между текстильными застёжками, см		22
Масса изделия при плотности нетканого материала 17 г/м ² , г		46
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г		66
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г		108
Допустимые отклонения, %		±6

Таблица 43. Габаритные размеры халата медицинского процедурного с V-образным вырезом с тремя застежками текстильными спереди с длинным прямым рукавом

Размер		б/р
Длина переда от высшей точки плеча до низа изделия, Н, см		140
Длина горловины, см		60
Ширина на уровне глубины проймы, С1, см		60
Ширина халата внизу, С2, см		70
Длина рукава от высокой точки оката до низа, L1, см		53
Ширина рукава внизу, С3, см		22
Количество текстильных застёжек, шт.		3
Текстильная застежка	Длина застежки, см	6
	Ширина застежки, см	2
Расстояние между текстильными застежками, см		22
Масса изделия при плотности нетканого материала 17 г/м ² , г		45
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г		65
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г		107
Допустимые отклонения, %		±6

Таблица 44. Габаритные размеры халата для пациента/посетителя (накидка) с двумя завязками на горловине

Размер	1	2
Длина переда от середины горловины до низа, Н, см	60	100
Длина горловины, см	60	60
Ширина по центру изделия, С1, см	32	32
Ширина изделия внизу, С2, см	70	70
Количество завязок на горловине, шт.	2	2
Завязки на горловине	Длина завязок, см	22
	Ширина завязок, см	2
Длина обтачки на горловине, см	90	90
Ширина обтачки на горловине, см	2	2
Масса изделия при плотности нетканого материала 17 г/м ² , г	18,5	32,5
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г	27	47,5
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г	45	79,5
Допустимые отклонения, %	±6	±6

Таблица 45. Габаритные размеры халата для пациента/посетителя (накидка) с застежкой текстильной на горловине

Размер	1	2
Длина переда от середины горловины до низа, Н, см	60	100
Длина горловины, см	60	60
Ширина по центру изделия, С1, см	32	32
Ширина халата внизу, С2, см	70	70
Количество текстильных застёжек, шт.	1	1
Текстильная застежка	Длина застежки, см	6
	Ширина застежки, см	2
Длина обтачки на горловине, см	90	90
Ширина обтачки на горловине, см	2	2
Масса изделия при плотности нетканого материала 17 г/м ² , г	19	33
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г	27	48
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г	45	80
Допустимые отклонения, %	±6	±6

Таблица 46. Габаритные размеры сорочки (рубашки) медицинской для роженицы

Размер	б/р
Длина изделия, Н1, см	110
Длина горловины, см	60
Длина от выреза до низа изделия Н2, см	93
Длина от проймы до низа изделия, Н3, см	80
Длина разреза вниз от горловины, Н4, см	13
Ширина изделия в плечах, С1, см	92
Ширина изделия внизу, С2, см	72
Ширина плеча С3, см	26
Масса изделия при плотности нетканого материала 17 г/м ² , г	30,5
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г	44,5
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г	74
Допустимые отклонения, %	±6

Таблица 47. Габаритные размеры сорочки медицинской для пациента с круглым вырезом

Размер	б/р
Длина изделия, Н1, см	80
Длина горловины, см	60

Длина от выреза до низа изделия Н2, см	63
Длина от проймы до низа изделия, Н3, см	50
Ширина изделия в плечах, С1, см	92
Ширина изделия внизу, С2, см	72
Ширина плеча С3, см	26
Масса изделия при плотности нетканого материала 17 г/м ² , г	30,5
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г	44,5
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г	74
Допустимые отклонения, %	±6

Таблица 48. Габаритные размеры сорочки медицинской для пациента с V-образным вырезом

Размер	б/р
Длина изделия, Н1, см	80
Длина горловины, см	60
Длина от выреза до низа изделия Н2, см	63
Длина от проймы до низа изделия, Н3, см	50
Ширина изделия в плечах, С1, см	92
Ширина изделия внизу, С2, см	72
Ширина плеча С3, см	26
Масса изделия при плотности нетканого материала 17 г/м ² , г	30,5
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г	44,5
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г	74
Допустимые отклонения, %	±6

Таблица 49. Габаритные размеры трусов-шорт медицинских гинекологических

Размер	1	2
Длина изделия, Н1, см	35	40
Ширина изделия в поясе С1, см	54	58
Ширина отверстий для ног, С2, см	35	40
Длина резинки на уровне пояса, см	100	108
Длина резинки для отверстий для ног, см	65	75
Ширина резинки, см	0,4	0,4
Масса изделия при плотности нетканого материала 17 г/м ² , г	11,6	13,1
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г	13,4	15,2
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г	17,3	19,7
Допустимые отклонения, %	±6	±6

Таблица 50. Габаритные размеры трусов-шорт медицинских для колоноскопии (проктологические)

Размер	1	2
Длина короткой штанины по внешнему краю, Н1, см	40	50
Длина короткой штанины по внутреннему краю, Н2, см	10	20
Длина разреза, Н3, см	17	17
Ширина изделия в поясе С1, см	56	60
Ширина штанины внизу, С2, см	34	34
Длина резинки на уровне пояса, см	104	112
Ширина резинки, см	0,4	0,4
Масса изделия при плотности нетканого материала 17 г/м ² , г	20,7	21
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г	28,8	29,2
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г	45,9	46,5
Допустимые отклонения, %	±6	±6

Таблица 51. Габаритные размеры комбинезона медицинского гигиенического с капюшоном с застежкой-молнией с длинным рукавом с вязаной трикотажной манжетой

Размер	1	2
Длина изделия, Н1, см	180	200
Высота капюшона, Н2, см	30	30
Длина штанины по внутреннему краю, Н3, см	65	82
Длина штанины по наружному краю, Н4, см	105	126
Длина манжеты Н5, см	7	7
Ширина на уровне проймы С1, см	70	80
Ширина штанины внизу, С2, см	12	12
Ширина манжеты С3, см	7	7
Ширина капюшона внизу, С4, см	20	22
Длина рукава от высшей точки оката до низа, L1, см	60	60
Длина застежки-молнии, см	60	60
Резинки на штанинах	Длина резинки, см	24
	Ширина резинки, см	0,4
Резинка по линии талии	Длина резинки, см	40
	Ширина резинки, см	0,4
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г	146,3	155,3
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г	231,3	246,3
Допустимые отклонения, %	±6	±6

Таблица 52. Габаритные размеры комбинезона медицинского гигиенического с капюшоном с тремя застежками текстильными спереди с длинным рукавом с вязаной трикотажной манжетой

Размер	1	2
Длина изделия, Н1, см	180	200
Высота капюшона, Н2, см	30	30
Длина штанины по внутреннему краю, Н3, см	65	82
Длина штанины по наружному краю, Н4, см	105	126
Длина манжеты Н5, см	7	7
Ширина на уровне проймы С1, см	70	80
Ширина штанины внизу, С2, см	12	12
Ширина манжеты С3, см	7	7
Ширина капюшона внизу, С4, см	20	22
Длина рукава от высшей точки оката до низа, L1, см	60	60
Количество текстильных застежек, шт.	3	3
Расстояние между текстильными застежками, см	22	22
Текстильная застежка	Длина застежки, см	6
	Ширина застежки, см	2
Резинки на штанинах	Длина резинки, см	24
	Ширина резинки, см	0,4
Резинка по линии талии	Длина резинки, см	40
	Ширина резинки, см	0,4
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г	135,8	144,8
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г	220,8	235,8
Допустимые отклонения, %	±6	±6

Таблица 53. Габаритные размеры комбинезона медицинского гигиенического с капюшоном с застежкой-молнией с длинным рукавом, собранным резинкой

Размер	1	2
Длина изделия, Н1, см	180	200

Высота капюшона, Н2, см	30	30
Длина штанины по внутреннему краю, Н3, см	65	82
Длина штанины по наружному краю, Н4, см	105	126
Ширина на уровне проймы С1, см	70	80
Ширина штанины внизу, С2, см	12	12
Ширина рукава внизу, С3, см	9	9
Ширина капюшона внизу, С4, см	20	22
Длина рукава от высшей точки оката до низа, L1, см	60	60
Длина застежки-молнии, см	60	60
Резинки на рукавах	Длина резинки, см	18
	Ширина резинки, см	0,4
Резинки на штанинах	Длина резинки, см	24
	Ширина резинки, см	0,4
Резинка по линии талии	Длина резинки, см	40
	Ширина резинки, см	0,4
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г	143,5	152,5
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г	228,5	243,5
Допустимые отклонения, %	±6	±6

Таблица 54. Габаритные размеры комбинезона медицинского гигиенического с капюшоном с тремя застежками текстильными спереди с длинным рукавом, собранным резинкой

Размер	1	2
Длина изделия, Н1, см	180	200
Высота капюшона, Н2, см	30	30
Длина штанины по внутреннему краю, Н3, см	65	82
Длина штанины по наружному краю, Н4, см	105	126
Ширина на уровне проймы С1, см	70	80
Ширина штанины внизу, С2, см	12	12
Ширина рукава внизу С3, см	9	9
Ширина капюшона внизу, С4, см	20	22
Длина рукава от высшей точки оката до низа, L1, см	60	60
Количество текстильных застежек, шт.	3	3
Расстояние между текстильными застежками, см	22	22
Текстильная застежка	Длина застежки, см	6
	Ширина застежки, см	2
Резинки на рукавах	Длина резинки, см	18
	Ширина резинки, см	0,4
Резинки на штанинах	Длина резинки, см	24
	Ширина резинки, см	0,4
Резинка по линии талии	Длина резинки, см	40
	Ширина резинки, см	0,4
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г	133	142
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г	218	233
Допустимые отклонения, %	±6	±6

Таблица 55. Габаритные размеры комбинезона медицинского гигиенического без капюшона (полукомбинезон) с застежкой-молнией с длинным рукавом с вязаной трикотажной манжетой

Размер	1	2
Длина изделия, Н1, см	150	170
Длина горловины, см	60	60
Длина штанины по внутреннему краю, Н3, см	65	82
Длина штанины по наружному краю, Н2, см	105	126

Длина манжеты Н4, см	7	7
Ширина на уровне проймы С1, см	70	80
Ширина штанины внизу, С2, см	12	12
Ширина манжеты С3, см	7	7
Длина рукава от высшей точки оката до низа, L1, см	60	60
Длина застежки-молнии, см	60	60
Резинки на штанинах	Длина резинки, см	24
	Ширина резинки, см	0,4
Резинка по линии талии	Длина резинки, см	40
	Ширина резинки, см	0,4
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г	143,3	152,3
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г	228,3	243,3
Допустимые отклонения, %	±6	±6

Таблица 56. Габаритные размеры комбинезона медицинского гигиенического без капюшона (полукомбинезон) с тремя застежками текстильными спереди с длинным рукавом с вязаной трикотажной манжетой

Размер	1	2
Длина изделия, Н1, см	150	170
Длина горловины, см	60	60
Длина штанины по внутреннему краю, Н2, см	65	82
Длина штанины по наружному краю, Н3, см	105	126
Длина манжеты Н4, см	7	7
Ширина на уровне проймы С1, см	70	80
Ширина штанины внизу, С2, см	12	12
Ширина манжеты С3, см	7	7
Длина рукава от высшей точки оката до низа, L1, см	60	60
Количество текстильных застежек, шт.	3	3
Расстояние между текстильными застежками, см	22	22
Текстильная застежка	Длина застежки, см	6
	Ширина застежки, см	2
Резинки на штанинах	Длина резинки, см	24
	Ширина резинки, см	0,4
Резинка по линии талии	Длина резинки, см	40
	Ширина резинки, см	0,4
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г	138,5	147,8
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г	223,5	238,5
Допустимые отклонения, %	±6	±6

Таблица 57. Габаритные размеры комбинезона медицинского гигиенического без капюшона (полукомбинезон) с застежкой-молнией с длинным рукавом, собранным резинкой

Размер	1	2
Длина изделия, Н1, см	150	170
Длина горловины, см	60	60
Длина штанины по внутреннему краю, Н2, см	65	82
Длина штанины по наружному краю, Н3, см	105	126
Ширина на уровне проймы С1, см	70	80
Ширина штанины внизу, С2, см	12	12
Ширина рукава внизу С3, см	9	9
Длина рукава от высшей точки оката до низа, L1, см	60	60
Длина застежки-молнии, см	60	60
Резинки на рукавах	Длина резинки, см	18

	Ширина резинки, см	0,4	0,4
Резинки на штанинах	Длина резинки, см	24	24
	Ширина резинки, см	0,4	0,4
Резинка по линии талии	Длина резинки, см	40	40
	Ширина резинки, см	0,4	0,4
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г		144	153,4
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г		229	244
Допустимые отклонения, %		±6	±6

Таблица 58. Габаритные размеры комбинезона медицинского гигиенического без капюшона (полукомбинезон) с тремя застежками текстильными спереди с длинным рукавом, собранным резинкой

Размер		1	2
Длина изделия, Н1, см		150	170
Длина горловины, см		60	60
Длина штанины по внутреннему краю, Н2, см		65	82
Длина штанины по наружному краю, Н3, см		105	126
Ширина на уровне проймы С1, см		70	80
Ширина штанины внизу, С2, см		12	12
Ширина рукава внизу С3, см		9	9
Длина рукава от высшей точки оката до низа, L1, см		60	60
Количество текстильных застежек, шт.		3	3
Расстояние между текстильными застежками, см		22	22
Текстильная застежка	Длина застежки, см	6	6
	Ширина застежки, см	2	2
Резинки на рукавах	Длина резинки, см	18	18
	Ширина резинки, см	0,4	0,4
Резинки на штанинах	Длина резинки, см	24	24
	Ширина резинки, см	0,4	0,4
Резинка по линии талии	Длина резинки, см	40	40
	Ширина резинки, см	0,4	0,4
Масса изделия при плотности нетканого материала 25 г/м ² , г		131	140
Масса изделия при плотности нетканого материала 42 г/м ² , г		216	231
Допустимые отклонения, %		±6	±6

10 Условия транспортирования и хранения

10.1 Транспортировка

Транспортировать изделия следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида, в соответствии с группой условий хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150 (температура воздуха: от минус 50 до плюс 50°C; значение относительной влажности воздуха: верхнее – 100% при плюс 25°C, среднегодовое – 75% при плюс 15°C; воздействие солнечного излучения – не значительное). При транспортировании коробки с упакованными изделиями должны быть защищены от атмосферных осадков и механических повреждений.

10.2 Хранение

Изделия следует хранить в транспортной таре в части воздействия климатических факторов, кроме складов железнодорожных станций, в соответствии с группой условий хранения 1(Л) по ГОСТ 15150 (температура воздуха: от плюс 5 до плюс 40°C; значение относительной влажности воздуха: верхнее – 80% при плюс 25 °C, среднегодовое – 60% при плюс 20 °C; воздействие солнечного излучения – отсутствует).

11 Порядок осуществления утилизации и уничтожения изделия

Изделия, загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями утилизируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790, относящимися к

медицинским отходам класса Б.

Упаковка и изделия с истекшим сроком годности, не загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями, утилизируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790, относящимися к медицинским отходам класса А.

12 Срок годности

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие одежды требованиям технических условий ТУ 32.50.50-001-06891655-2018 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок годности составляет 5 лет с даты изготовления.

13 Упаковка

Набор одежды поставляется в групповой упаковке – пакете из многослойных полимерных пленок. Групповые упаковки в количестве не более 18 штук помещаются в транспортную тару – ящик из гофрированного картона.

В транспортную тару вкладывается инструкция по применению.

14 Правила представления рекламаций

При выявлении побочных действий, не указанных в инструкции по применению, нежелательных реакций при его применении, особенностей взаимодействия медицинских изделий между собой, фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации, необходимо направлять сообщение, содержащее указанные сведения, в уполномоченный орган/ организацию в сфере здравоохранения, а также в адрес производителя: Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "ЗДРАВМЕДТЕХ-КАЛУГА" (ООО "ПО"ЗДРАВМЕДТЕХ-К") юридический адрес: Россия, 249832, обл. Калужская, район Дзержинский, город Кондрово, улица Рабочая, дом 2, офис 1, тел. 8(48434) 32534, e-mail: zmt-k@yandex.ru

Дата утверждения оригинала	24.12.2018 г.
----------------------------	---------------

Пронумеровано и прошнуровано
28 листов

Генеральный директор:
ООО «ПО «Здравмедтех-К»

 Меркушова Н.А.
«24» декабря 2018 года.

