

Руководство по эксплуатации

Экзопротезы молочной железы Anita

Экзопротезы молочной железы Anita предназначены для индивидуального использования с целью косметической коррекции формы и веса женской груди после операции по поводу рака молочной железы. Экзопротезы молочной железы производятся компаниями «Anita» на протяжении более 30 лет. За этот период накоплен уникальный опыт по технической разработке, выбору материалов, технологии и исполнению выпускаемой продукции. Современные материалы, правильность анатомической формы и совершенство технологической обработки обеспечивают абсолютную естественность, комфорт, хорошее самочувствие и уверенность женщины в послеоперационный период жизни. Эти качества выделяют экзопротезы Anita от продукции других производителей.

В процессе применения экзопротезы размещаются в карманах специальных бюстгалтеров или купальников.

Рекомендации по использованию:

1. Промывать вручную с мылом можно при приёме душа.
2. При мытье следует использовать нейтральное жидкое мыло.
3. У протезов с тыльной стороной из микроволокна нельзя допускать скручивания, вытягивания или разрыва ткани при мытье протеза.
4. Сушить влажную ткань следует промоканием бумажным или обычным полотенцем. Срок высыхания составляет около одного часа. Если нужно сократить время, то допускается сушка протеза с помощью фена с расстояния не менее 30 см. Не сушите протезы на горячих батареях отопления и других нагретых приборах, а также близко от них.
5. Хлорированная или солёная вода, кремы т.п. протезу не повредят, однако агрессивные моющие средства и растворители могут испортить протез.
6. Острые предметы (ножницы, ножи, иглы брошей, когти животных и пр.) могут повредить тонкую внешнюю оболочку протеза. Такие повреждения исправить нельзя.
7. Хранить протезы следует чистыми и сухими в индивидуальных футлярах при комнатной температуре.

Гарантийный срок 1 год с момента приобретения.

Генеральный директор
ООО «МАЙЛС ГРУПП»



Бакин А.Б.