

10. Осторожно разместите линзу, вращая ее, если это необходимо, с помощью подходящего крючка для центрирования линзы.

11. Тщательно удалите вязкоэластик из глаза и смойте его с линзы, используя стандартные методики аспирации и ирригации.

Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4а



Рис. 4б



Рис. 5а

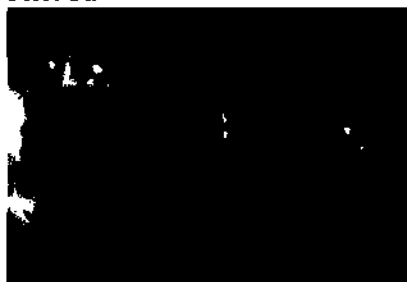


Рис. 5б



Меры предосторожности:

- нельзя использовать изделие, если упаковка повреждена, т.к. в этом случае его стерильность не гарантируется;
- не использовать изделие по истечению срока хранения;
- хранить изделие согласно требованиям, указанным на упаковке.

Транспортировка.

Транспортировка изделия «Инструмент хирургический офтальмологический для имплантации интраокулярных линз АССUJЕСТ (АККУДЖЕКТ)» осуществляется транспортом всех видов в крытых транспортных средствах с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида согласно ГОСТ 15150-69.

В процессе транспортирования не допускается нарушение упаковки.

В транспортную тару должен быть вложен упаковочный лист по ГОСТ Р 50444-92.

Комплектность, упаковка

Изделие медицинского назначения «Инструмент хирургический офтальмологический для имплантации интраокулярных линз АССUJЕСТ (АККУДЖЕКТ)» поставляется в стерильной блистерной упаковке. Блистерные упаковки, содержащие «Инструмент хирургический офтальмологический для имплантации интраокулярных линз АССUJЕСТ (АККУДЖЕКТ)», в количестве от 1 до 20 помещают в коробки картонные.

На упаковке указывают торговое наименование изделия, название производителя, предупредительные знаки и надписи, условия хранения, номер серии, дату окончания срока годности, а также диаметр наконечника инструмента.

Хранение

Хранить при температуре от + 5 до + 40 °С.