

BOVATE

Инструкция по эксплуатации



Название изделия: Медицинский защитный экран для лица

Модель: MZ-2

Дата изготовления: 01.02.2020

Номер партии: 20200201

Срок годности: 5 лет.

Настоящая инструкция по эксплуатации предназначена для ознакомления потребителя с основными техническими характеристиками и правилами использования медицинского изделия.

Вид медицинского изделия: 107700

Класс потенциального риска применения - 1

Область применения изделия: Применяется в медицинских учреждениях при проведении исследований и лечении как защитное средство, как преграда от капель жидкостей, жидкой крови или их брызг. Маски используют в качестве барьерного средства, в том числе при возникновении угрозы распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Структура изделия и его составные части: изготовлено путем обработки полиэтилентерефталата, поставляется в нестерильном виде, одноразового применения. Вид крепления: на резинках.

Характеристики изделия:

Размер экрана: 33 ± 5 см x 22 ± 5 см;

Размер резинки в нерастянутом состоянии: 33 ± 5 см;

Масса изделия (без упаковки): 32 ± 5

Внешний вид:

- изоляционная губка должна быть прочно приклеена по периметру;
- эластичные крепежные ремни прочно установлены к экрану, в меру подтянуты;
- пленка маски должна быть чистой, без масла, царапин и складок и равномерно прозрачной.

Методы контроля:

Проверка внешнего вида, комплектности, маркировки и упаковки должна осуществляться визуально.

Для проверки линейных размеров применяется линейка 500 мм по ГОСТ 427.

Массу изделия без индивидуальной упаковки определяют на лабораторных весах высокой точности по ГОСТ 24104 с ценой деления не более 0,5 г.

Инструкция по применению:

1. Открыть упаковку;
2. Достать одноразовую медицинскую защитную маску (если на пленке маски есть прикрепленный защитный слой или нетканый защитный слой, сначала удалите его);
3. Надеть маску на голову;
4. После использования снять грязную маску и положить ее в контейнер для медицинских отходов. Маска относится к отходам класса А согласно СанПин 2.1.7.2790.

Противопоказания к применению:

Данное изделие используется только для предотвращения попадания на них брызг с загрязнениями во время медицинских манипуляций и лечения, поэтому категорически запрещается использовать данное изделие вместо защитного оборудования, которое применяется для защиты от ударного воздействия.

Возможные побочные действия:

Индивидуальная непереносимость компонентов изделия.

Особые указания:

1. Доставая маски, старайтесь не трогать слишком сильно центр предохранительной пластины, чтобы руками отпечатки пальцев не мешали полю зрения.
2. Данное изделие нестерильно и предназначено для одноразового использования. Повторное его использование строго запрещено.
3. Запрещено использовать данное изделие при его повреждении и деформации.
4. Запрещено использовать данное изделие при повреждении его упаковки.

5. При хранении избегайте сдавливания изделия снаружи и его повреждения.
6. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

Условия хранения:

Диапазон температур хранения данного изделия от - 25°C до + 50°C, относительная влажность 0% - 80% мм рт. ст., в темном, сухом, хорошо проветриваемом помещении, рядом не должно быть вредных и загрязняющих веществ и продуктов.

Условия транспортировки:

При транспортировке необходимо следить за тем, чтобы на изделия не попадали прямые солнечные лучи, они были защищены от дождя и снега, нельзя сдавливать их, их нельзя переводить вместе с вредными и загрязняющими веществами.

Упаковка:

Для упаковки данного изделия используется пакет из полиэтилена, на каждый экран по одному пакету, а снаружи экраны упакованы в картонную коробку в количестве 40 шт.

Маркировка транспортной упаковки должна содержать:

- наименование изделия;
- модель;
- наименование и адрес производителя;
- наименование и адрес импортера в РФ;
- номер партии;
- дата изготовления;
- срок годности;
- размер изделия с допусками;
- количество изделий в коробке;
- номер регистрационного удостоверения;
- слова «не допускается применение экрана, имеющего механические повреждения»;
- условия хранения.

На маркировку транспортной упаковки должны быть нанесены следующие символы:

	Не стерильно
	Полиэтилентерефталат
	Беречь от солнечных лучей
	Запрет на повторное использование

Производитель:

Bazhou jinsheng Medical Instrument Co., Ltd.

«Бачжоу цзиньшэн Медикал Инструмент Ко., Лтд.»

Адрес производителя:

Quizhuangzi industrial zone Dongyangzhuang township Bazhou city Hebei province China

Индастриал зона Цючжуанцзы, Дуньянчжуан, город Бачжоу, провинция Хэбэй, Китай

Телефон: 400-000-2013

Web: www.bovate.com

Импортер в РФ:

АО "Вионта"

123242, Москва, Волков переулок, д. 7-9, стр. 1, подвал, пом. II, ком. 4

E-mail: vionta2019@yandex.ru

Handwritten signature in blue ink.