

ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия медицинского назначения

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ «МУЛЬТИПЛАСТ»®

Регистрационный номер:

Лекарственная форма: пластырь

Описание

Комбинированное изделие представляет собой фиксирующую часть (с перфорацией или без нее) на основе ткани хлопчатобумажной прямоугольной или фигурной формы с липким клеевым слоем, с подушечкой, пропитанной раствором антисептиков (хлоргексидина биглюконатом или составом из бриллиантового зеленого, фурацилина и синтомицина) и защитным слоем из бумаги силиконизированной антиадгезионной или пленки.

Лейкопластырь бактерицидный «Мультипласт» выпускают следующих размеров:

Форма изделия	Линейные размеры	
	Ширина, см	Длина, см
Фиксирующая часть прямоугольной формы (с перфорацией или без перфорации) с подушечкой и с защитным слоем	0,95±0,2	3,8±0,2
	1,6±0,2	5,7±0,2
	1,9±0,2	7,2±0,2
	2,3±0,2	7,2±0,2
	2,5±0,2	7,2±0,2
	3,8±0,2	3,8±0,2
	4,0±0,2	10,0±0,2
	6,0±0,2	10,0±0,2
	6,0±0,2	50,0±0,5
Фиксирующая часть фигурной формы (с перфорацией или без перфорации) с подушечкой и с защитным слоем	3,8±0,2	5,6 ±0,2
	3,8±0,2	7,0±0,2
	5,1±0,2	7,6±0,2
	Ø 2,3 ±0,1	-

Содержание антисептиков:

Вид антисептика	Показатель содержания антисептиков в 1 г подушечки, не менее, мг
Хлоргексидин (Хлоргексидина биглюконат)	15,0
Бриллиантовый зеленый	0,1
Нитрофурал (Фурацилин)	0,6
D, L-Хлорамфеникол (Синтомицин)	2,4

Фармакологическая группа: Антисептическое средство.

Показания к применению

Небольшие порезы, ссадины, царапины и другие мелкие повреждения кожи.