

Лейкопластырь кровоостанавливающий «Мультипласт»®

Руководство по эксплуатации

Содержание

- 1 Общие указания
- 2 Размеры лейкопластыря
- 3 Комплект поставки
- 4 Требования по технике безопасности
- 5 Устройство изделия
- 6 Способ применения
- 7 Условия хранения
- 8 Гарантийные обязательства

1 Общие указания

Лейкопластырь кровоостанавливающий «Мультипласт»® (далее лейкопластырь) предназначен для использования в качестве наружного антисептического перевязочного средства, а также в качестве гемостатического средства при мелких повреждениях кожи.

2 Размеры лейкопластыря

Форма изделия	Линейные размеры, см	
	ширина	длина
Фиксирующая часть (с перфорацией или без нее) прямоугольной формы (с закруглениями или без них) с подушечкой и с защитным покрытием	1,9 ± 0,2	7,2 ± 0,2
	2,5 ± 0,2	7,2 ± 0,2
	3,8 ± 0,2	3,8 ± 0,2
	4,0 ± 0,2	10,0 ± 0,2
	6,0 ± 0,2	10,0 ± 0,2
Фиксирующая часть (с перфорацией или без нее) фигурной формы с подушечкой и с защитным покрытием	Ø 2,3 ± 0,1	

3 Комплект поставки

В комплект поставки лейкопластыря входит:

- лейкопластырь одного типоразмера, формы и исполнения в индивидуальной упаковке –

1 шт. или в виде ленты от 2 до 200 штук.

В комплект поставки набора входит:

- лейкопластыри одного размера, формы и исполнения в пачке складной с европодвесом (или без) из картона или в пакете с клапаном с маркировкой – от 2 до 100 шт;

или

- лейкопластыри различных размеров, форм и исполнения в пачке складной с европодвесом (или без) из картона или в пакете с клапаном с маркировкой – от 2 до 100 шт;

или

- индивидуальная комплектация набора по согласованию с заказчиком.

В зависимости от типа подложки различают несколько исполнений лейкопластыря:

- на основе нетканого полотна;

- на основе эластичного трикотажного полотна;

- на основе полиэтиленовой пленки;
- на основе хлопчатобумажной ткани.

4 Требования по технике безопасности


4.1 Лейкопластырь при использовании и хранении не выделяет вредных веществ в концентрациях, опасных для организма человека.

4.2 Лейкопластырь относится к горючим веществам, не взрывоопасен.

4.3 В случае возникновения пожара для тушения используются огнетушащие вещества: вода, песок, пена, двуокись углерода, асбестовое полотно.

5 Устройство изделия

Лейкопластырь представляет собой комбинированное изделие прямоугольной или фигурной формы, включающее фиксирующую часть (1) в виде подложки (с перфорацией или без неё) с липким клеевым слоем; подушечку (2), пропитанную раствором активных веществ; защитное покрытие (3) из бумаги силиконизированной антиадгезионной или пленки.

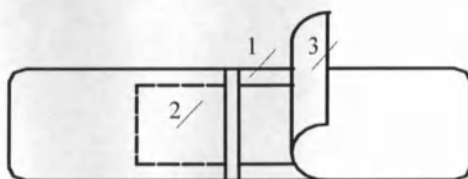

6 Способ применения

Открыть упаковку, вынуть лейкопластырь. Снять защитный слой, не прикасаясь пальцами к подушечке лейкопластыря, приложить ее на рану, а липкую часть лейкопластыря приклеить к сухой чистой коже, слегка прижав пальцем. Лейкопластырь можно не снимать в течение двух суток.

7 Условия хранения

Хранить лейкопластырь необходимо в защищенном от влаги месте.

8 Гарантийные обязательства

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие лейкопластырей требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2 Гарантийный срок годности - 2 года со дня стерилизации.