

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НОВОСИБХИМФАРМ

Россия, 630028, г. Новосибирск-28, ул. Декабристов, 275

тел. (383) 363-32-44, тел/факс (383) 363-32-55

E-mail: mail@nskpharm.ru

Лейкопластырь амортизирующий «Мультипласт»®

Руководство по применению изделия медицинского назначения

Содержание

- 1 Общие указания
- 2 Размеры лейкопластыря
- 3 Комплект поставки
- 4 Требования по технике безопасности
- 5 Устройство изделия
- 6 Способ применения
- 7 Условия хранения
- 8 Гарантийные обязательства

1. Общие указания

Лейкопластырь предназначен для использования в качестве наружного антисептического перевязочного средства, для защиты кожи от механического воздействия или давления за счет амортизирующего эффекта подушечки, уменьшающего болевые ощущения.

Лейкопластырь может применяться в медицинских учреждениях, в полевых условиях и в быту.

2. Размеры лейкопластыря

Форма изделия	Линейные размеры	
	Ширина, см	Длина, см
Фиксирующая часть прямоугольной формы (с перфорацией или без перфорации) с подушечкой и с защитным слоем	0,95±0,2	3,8±0,2
	1,6±0,2	5,7±0,2
	1,9±0,2	7,2±0,2
	2,5±0,2	7,2±0,2
	3,8±0,2	3,8±0,2
	4,0±0,2	10,0±0,2
	6,0±0,2	10,0±0,2
Фиксирующая часть фигурной формы (с перфорацией или без перфорации) с подушечкой и с защитным слоем	6,0±0,2	50,0±0,5
	3,5±0,2	7,2±0,2
	3,8±0,2	5,6±0,2
	3,8±0,2	7,0±0,2
	5,1±0,2	7,6±0,2

3. Комплект поставки

В комплект поставки пластыря входит:

- Лейкопластырь одного типоразмера, формы и исполнения в индивидуальной упаковке по 1 штуке с маркировкой.
- Наборы лейкопластырей от 2 до 100 штук одного типоразмера, формы и исполнения или различных типоразмеров, форм и исполнения в пачке складной с европодвесом из картона или в пачке складной из картона, или в пенале из пластмассы, или в пакете с клапаном с маркировкой.

4. Требования по технике безопасности

- 4.1. Лейкопластырь при использовании и хранении не выделяет вредных веществ в концентрациях, опасных для организма человека.
- 4.2. Лейкопластырь относится к горючим веществам, не взрывоопасен.
- 4.3. В случае возникновения пожара для тушения используются огнетушащие вещества: вода, песок, пена, двуокись углерода, асбестовое полотно.

5. Устройство изделия

Лейкопластырь представляет собой комбинированное изделие, состоящее из фиксирующей части (с перфорацией или без нее) с липким клеевым слоем, подушечки, пропитанной раствором антисептика; защитного слоя из бумаги силиконизированной антиадгезионной или пленки, прямоугольной или фигурной формы

6. Способ применения

Лейкопластырь предназначен для использования в качестве наружного антисептического перевязочного средства.

Открыть упаковку, вынуть лейкопластырь амортизирующий. Снять защитный слой, не прикасаясь пальцами к антисептической подушечке лейкопластыря, наклеить на чистую сухую кожу, слегка прижав пальцами, менять каждые 3-4 часа для достижения оптимального эффекта, в том числе и заживляющего.

7. Условия хранения

Лейкопластырь хранить необходимо в сухом месте. Лейкопластырь без индивидуальной упаковки хранить в сухом, защищенном от света месте.

8. Гарантийные обязательства

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие пластырей требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2 Гарантийный срок годности – 3 года со дня изготовления.

Начальник отдела регистрации в РФ
ОАО «Новосибхимфарм»



С.В.Гудим

прощито 4
сирецено

пешавью
2 меша



ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия медицинского назначения

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ АМОРТИЗИРУЮЩИЙ «МУЛЬТИПЛАСТ»[®]

Регистрационный номер:

Лекарственная форма: пластырь

Описание

Комбинированное изделие представляет собой фиксирующую часть (с перфорацией или без нее) на основе хлопчатобумажной ткани или эластичном полотне прямоугольной или фигурной формы с липким клеевым слоем, с подушечкой, пропитанной раствором антисептика (фурацилина) и защитным слоем из бумаги силиконизированной антиадгезионной или пленки.

Лейкопластырь амортизирующий «Мультипласт»[®] выпускают следующих размеров:

Форма изделия	Линейные размеры	
	Ширина, см	Длина, см
Фиксирующая часть прямоугольной формы (с перфорацией или без перфорации) с подушечкой и с защитным слоем	0,95±0,2	3,8±0,2
	1,6±0,2	5,7±0,2
	1,9±0,2	7,2±0,2
	2,5±0,2	7,2±0,2
	3,8±0,2	3,8±0,2
	4,0±0,2	10,0±0,2
	6,0±0,2	10,0±0,2
	6,0±0,2	50,0±0,5
Фиксирующая часть фигурной формы (с перфорацией или без перфорации) с подушечкой и с защитным слоем	3,5±0,2	7,2±0,2
	3,8±0,2	5,6 ±0,2
	3,8±0,2	7,0±0,2
	5,1±0,2	7,6±0,2

Содержание антисептика:

Вид антисептика	Показатель содержания антисептиков в 1 г подушечки, не менее, мг
Нитрофурал (Фурацилин)	0,2

Фармакологическая группа: Антисептическое средство.

Показания к применению

Небольшие порезы, мелкие повреждения кожи. Смягчает давление и облегчает болезненные ощущения при ходьбе, вызванные натиранием обуви. Помогает предотвратить появление мозолей.

Способ применения

Открыть упаковку, вынуть лейкопластырь амортизирующий. Снять защитный слой, не прикасаясь пальцами к антисептической подушечке лейкопластыря, наклеить на чистую сухую кожу, слегка прижав пальцами, менять каждые 3-4 часа для достижения оптимального эффекта, в том числе и заживляющего.

Побочное действие

Аллергические реакции.

Противопоказания

Гиперчувствительность.

Форма выпуска

Лейкопластырь амортизирующий «Мультипласт» по 1 шт. упаковывают в индивидуальную упаковку.

Лейкопластырь амортизирующий «Мультипласт» в индивидуальной упаковке по одной штуке или в виде ленты (от 2 до 200 штук) одного типоразмера, формы, и исполнения помещают по 50-400 штук в групповую упаковку – пачки складные из картона (шоу-боксы) или пеналы из пластмассы, или пакеты с клапаном; или в виде наборов одного типоразмера, формы и исполнения или различных типоразмеров, форм, и исполнения помещают в групповую упаковку – пачки складные с европодвесом (или без него) из картона, или пеналы из пластмассы или пакеты с клапаном.

Допускается для контроля первого вскрытия заклеивать верхние и нижние клапаны пачки складной с европодвесом самоклеющимися этикетками.

Условия хранения

В сухом месте. Лейкопластырь без индивидуальной упаковки хранить в сухом, защищенном от света месте.

Гарантийный срок годности

3 года. Не использовать позднее срока, указанного на упаковке.

Производитель/организация, принимающая претензии:

ОАО «Новосибхимфарм»

630028, Россия, г. Новосибирск,

ул. Декабристов, 275

тел. (383) 363-32-44,

факс (383) 363-32-55.

прошито &
скреплено
печатью
2 шнела

С.В.И.
Гууиис.В.

