

Общество с ограниченной ответственностью «Матрамакс»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Матрамакс»



Зароян К.Р.

2017 г.

МАТРАЦ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ МАТРАМАХ

следующих вариантов исполнения

Инструкция по применению

МТМС.942519 ИП

г. Подольск

2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА	4
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.....	12
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	21
4. УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ	22
5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.....	23
6. ТРЕБОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	23
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	24
8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.....	25
9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	26
10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	27
ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА.....	28
Приложение А.....	29

Настоящая инструкция распространяется на матрац ортопедический (далее – матрац), предназначенный для создания удобной поверхности, на которой пациент может лежать и отдыхать/спать; изделие способствует равномерному распределению массы тела пациентов, а также тому, чтобы пациенты с заболеваниями спины (например, с компрессией позвоночника, болью в спине) занимали правильные для лечения позы.

 Информация, важная для безопасного применения матраца отмечена предупредительным треугольником с восклицательным знаком. Этим указаниям следует уделять особое внимание.

 **ВНИМАНИЕ!** Модификация изделия не допускается!

По всем вопросам, касающимся использования матраца, необходимо обращаться к изготовителю:

Юридический (фактический) адрес: Россия, 142111 Московская область г. Подольск ул. Окружная д. 2А

8 (499) 614-88-22, m1208669@yandex.ru

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1. Назначение и условия применения

Матрац ортопедический MATRAMAX (далее – матрац), предназначенный для создания удобной поверхности, на которой пациент может лежать и отдыхать/спать; изделие способствует равномерному распределению массы тела пациентов, а также тому, чтобы пациенты с заболеваниями спины (например, с компрессией позвоночника, болью в спине) занимали правильные для лечения позы.

Сфера применения –домашние условия.

Матрац состоит из большого износостойкого чехла из текстильного материала, наполненного комбинацией упругих эластичных материалов и блока пружинного, разработанный для помещения на опорную платформу кровати.

Матрац изготавливается в нескольких исполнениях, согласно таблице 7.

В зависимости от потенциального риска применения матрац относится к классу 1 (согласно приказа Министерства Здравоохранения Российской Федерации № 4н от 6 июня 2012)

Вид матраца в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий 245290 (согласно приказа министерства здравоохранения Российской Федерации №4н от 06.06.2012).

Вид климатического исполнения матраца – УХЛ4.2 по ГОСТ Р 15150.

В зависимости от воспринимаемых механических воздействий при эксплуатации матрац относится к группе 2 по ГОСТ Р 50444.

В зависимости от возможных последствий отказа в процессе эксплуатации матрац относится к классу Г по ГОСТ Р 50444.

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящей инструкции по применению, приведен в приложении А.

1.2. Показания

При наличии у человека заболеваний позвоночника необходимо предварительно проконсультироваться с лечащим врачом. В каждом случае подбор матраса должен осуществляться индивидуально. Но есть и общие рекомендации:

- Профилактика искривления позвоночника (для детей и взрослых) – матрас со средней степенью жесткости;
- Профилактика появления болей на разных участках спины:
 - Грудной и шейный отделы – матрас со средней степенью жесткости;
 - Поясничный отдел – мягкий матрас.
- Перенапряжение суставов, позвоночника, мышц – матрас со средней степенью жесткости;
- Онемение мышц по ночам – матрас со средней степенью жесткости;
- Профилактика остеохондроза, сколиоза – жесткий матрас;
- Нарушение нормальной циркуляции крови в мышцах – матрас со средней степенью жесткости.

1.3. Противопоказания

- индивидуальная непереносимость материала;
- воспалительные заболевания кожи.

1.4. Побочные эффекты

Побочные эффекты не наблюдаются при соблюдении требований настоящей инструкции, показаний.

1.5. Меры предосторожности



Внимание!

- Используйте матрас только в соответствии с данной инструкцией.
- Уход за матрасом осуществлять в соответствии с данной инструкцией.
- Не использовать матрас при нарушении целостности внешнего слоя.

1.6. Общий вид матраца

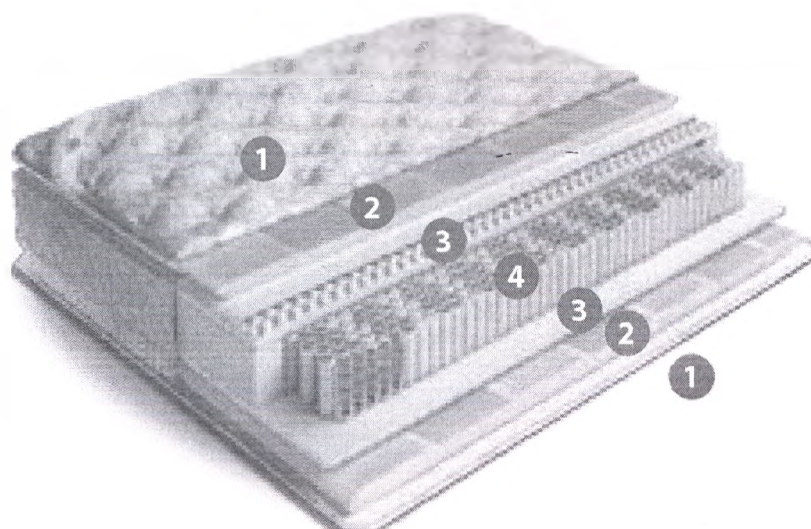


Рисунок 1 Матрац исполнение «Президент»

Номера и наименования слоев:

1. Флекспакет – комфортный верхний слой с глубокой стежкой (ткань «Голд Премиум», полое гиппоаллергенное волокно)
2. Монолитный блок латекса Innergetic
3. Слой «Airfoam»
4. Блок независимых пружин «Waber»

Таблица 1 Параметры

Наименование (Артикул)	Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Максимальная допустимая нагрузка, кг
Президент 80x195	800	1950	390	26	165
Президент 80x200	800	2000		27	
Президент 90x190	900	1900		29	
Президент 90x195	900	1950		30	
Президент 90x200	900	2000		30	
Президент 120x190	1200	1900		38	
Президент 120x195	1200	1950		39	
Президент 120x200	1200	2000		41	
Президент 140x190	1400	1900		45	330
Президент 140x195	1400	1950		46	
Президент 140x200	1400	2000		47	
Президент 160x190	1600	1900		51	
Президент 160x195	1600	1950		53	
Президент 160x200	1600	2000		54	
Президент 180x190	1800	1900		58	
Президент 180x195	1800	1950		59	
Президент 180x200	1800	2000		61	
Президент 200x190	2000	1900		64	
Президент 200x195	2000	1950		66	
Президент 200x200	2000	2000		68	

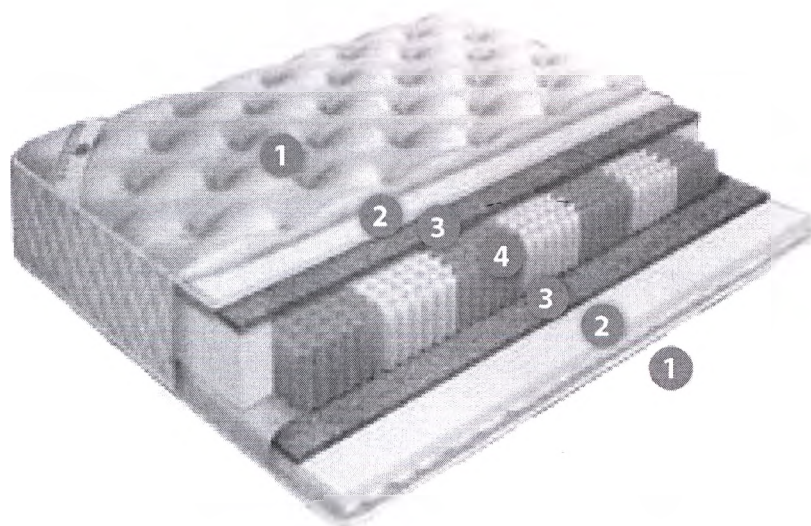


Рисунок 2 Матрац исполнение «Флоренти»

Номера и наименования слоев:

1. Флекспакет – комфортный верхний слой с глубокой стежкой (ткань «Флора Премиум»,
полное гипоаллергенное волокно)
2. Латекс (Бельгия)
3. Латексированная кокосовая койра
4. Блок независимых пружин «MultiPocket»

Таблица 2 Параметры

Наименование (Артикул)	Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Максимальная допустимая нагрузка, кг
Флоренти 80х195	800	1950	210	14	165
Флоренти 80х200	800	2000		14	
Флоренти 90х190	900	1900		15	
Флоренти 90х195	900	1950		16	
Флоренти 90х200	900	2000		16	
Флоренти 120х190	1200	1900		20	
Флоренти 120х195	1200	1950		21	
Флоренти 120х200	1200	2000		22	
Флоренти 140х190	1400	1900		24	330
Флоренти 140х195	1400	1950		25	
Флоренти 140х200	1400	2000		25	
Флоренти 160х190	1600	1900		27	
Флоренти 160х195	1600	1950		28	
Флоренти 160х200	1600	2000		29	
Флоренти 180х190	1800	1900		31	
Флоренти 180х195	1800	1950		31	
Флоренти 180х200	1800	2000		32	
Флоренти 200х190	2000	1900		34	
Флоренти 200х195	2000	1950		35	
Флоренти 200х200	2000	2000		36	

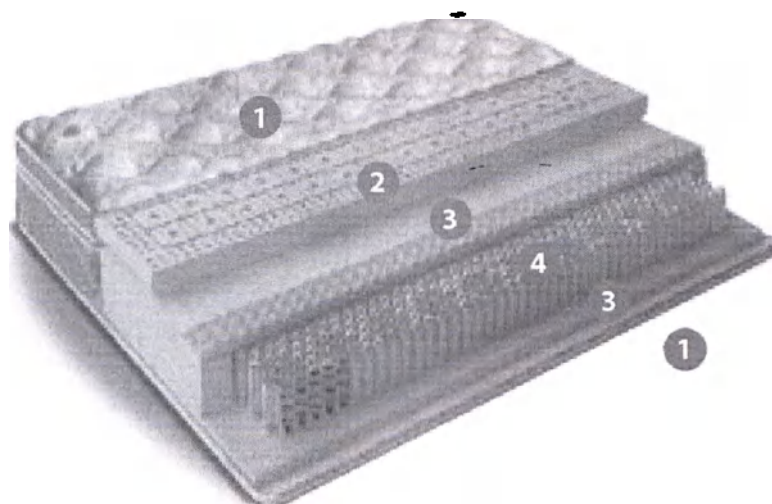


Рисунок 3 Матрац исполнение «Струммер»

Номера и наименования слоев:

1. Флекспакет – комфортный верхний слой с глубокой стежкой (ткань «Голд Премиум», полое гиппоаллергенное волокно)
2. Монолитный блок латекса Innergetic
3. Слой «Airfoam»
4. Блок независимых пружин «Waber»

Таблица 3 Параметры

Наименование (Артикул)	Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Максимальная допустимая нагрузка, кг
Струммер 80x195	800	1950	370	24	165
Струммер 80x200	800	2000		25	
Струммер 90x190	900	1900		27	
Струммер 90x195	900	1950		27	
Струммер 90x200	900	2000		28	
Струммер 120x190	1200	1900		36	
Струммер 120x195	1200	1950		37	
Струммер 120x200	1200	2000		38	
Струммер 140x190	1400	1900		42	330
Струммер 140x195	1400	1950		43	
Струммер 140x200	1400	2000		44	
Струммер 160x190	1600	1900		48	
Струммер 160x195	1600	1950		49	
Струммер 160x200	1600	2000		50	
Струммер 180x190	1800	1900		53	
Струммер 180x195	1800	1950		55	
Струммер 180x200	1800	2000		56	
Струммер 200x190	2000	1900		59	
Струммер 200x195	2000	1950		61	
Струммер 200x200	2000	2000		63	

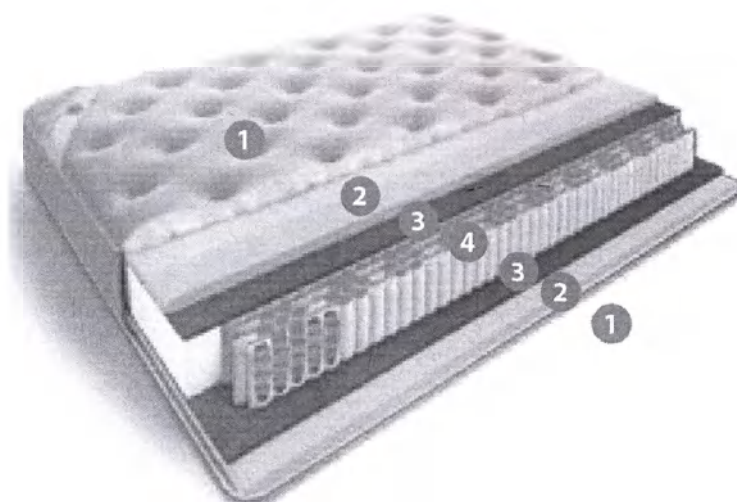


Рисунок 4 Матрац исполнение «Гловер»

Номера и наименования слоев:

1. Флекспакет – комфортный верхний слой с глубокой стежкой (ткань «Велюр-Антистресс», полое гипоаллергенное волокно)
2. Латекс (Бельгия)
3. Латексированная кокосовая койра
4. Блок независимых пружин «Waber»

Таблица 4 Параметры

Наименование (Артикул)	Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Максимальная допустимая нагрузка, кг
Гловер 80x195	800	1950	280	22	165
Гловер 80x200	800	2000		23	
Гловер 90x190	900	1900		25	
Гловер 90x195	900	1950		25	
Гловер 90x200	900	2000		26	
Гловер 120x190	1200	1900		33	
Гловер 120x195	1200	1950		34	330
Гловер 120x200	1200	2000		35	
Гловер 140x190	1400	1900		38	
Гловер 140x195	1400	1950		39	
Гловер 140x200	1400	2000		40	
Гловер 160x190	1600	1900		44	
Гловер 160x195	1600	1950		45	
Гловер 160x200	1600	2000		46	
Гловер 180x190	1800	1900		46	
Гловер 180x195	1800	1950		50	
Гловер 180x200	1800	2000		52	
Гловер 200x190	2000	1900		55	
Гловер 200x195	2000	1950		56	
Гловер 200x200	2000	2000		58	

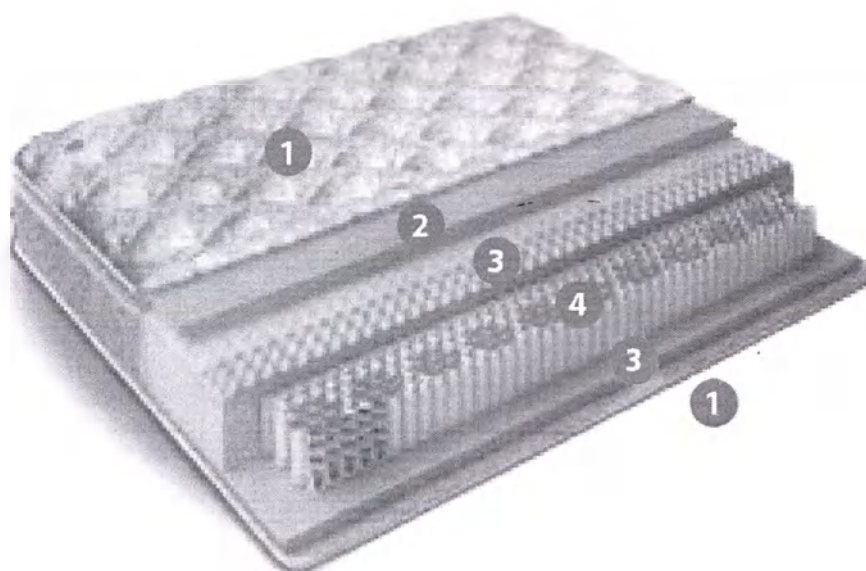


Рисунок 5 Матрац исполнение «Элиостор»

Номера и наименования слоев:

1. Флекспакет – комфортный верхний слой с глубокой стежкой (ткань «Голд Премиум»,
полное гипоаллергенное волокно)
2. «Viscolatex» с эффектом памяти
3. Слой «Airfoam»
4. Блок независимых пружин «Waber»

Таблица 5 Параметры

Наименование (Артикул)	Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Максимальная допустимая нагрузка, кг
Элиостор 80x195	800	1950	340	21	165
Элиостор 80x200	800	2000		22	
Элиостор 90x190	900	1900		24	
Элиостор 90x195	900	1950		24	
Элиостор 90x200	900	2000		25	
Элиостор 120x190	1200	1900		31	
Элиостор 120x195	1200	1950		32	
Элиостор 120x200	1200	2000		33	
Элиостор 140x190	1400	1900		37	330
Элиостор 140x195	1400	1950		38	
Элиостор 140x200	1400	2000		39	
Элиостор 160x190	1600	1900		42	
Элиостор 160x195	1600	1950		43	
Элиостор 160x200	1600	2000		44	
Элиостор 180x190	1800	1900		47	
Элиостор 180x195	1800	1950		48	
Элиостор 180x200	1800	2000		50	
Элиостор 200x190	2000	1900		52	
Элиостор 200x195	2000	1950		54	
Элиостор 200x200	2000	2000		55	

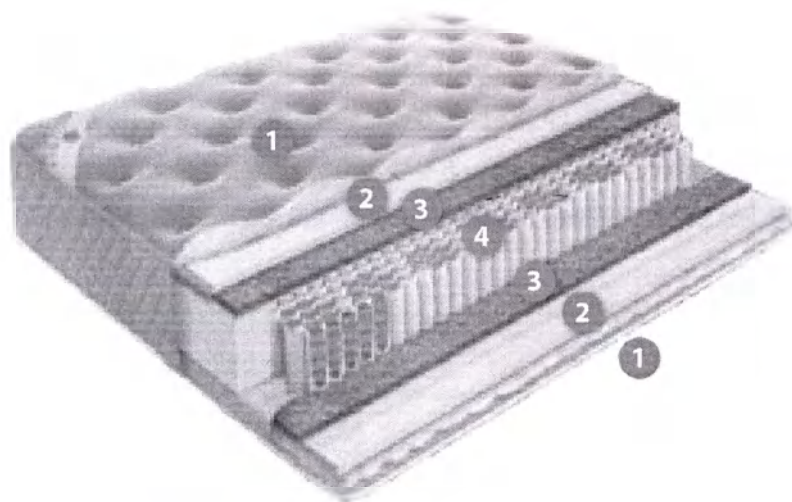


Рисунок 6 Матрац исполнение «Хоффманн»

Номера и наименования слоев:

1. Флекспакет – комфортный верхний слой с глубокой стежкой (ткань «Велюр-Антистресс», полое гипоаллергенное волокно)
2. Латекс (Бельгия)
3. Латексированная кокосовая койра
4. Блок независимых пружин «Waber»

Таблица 6 Параметры

Наименование (Артикул)	Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Максимальная допустимая нагрузка, кг
Хоффманн 80x195	800	1950	270	16	165
Хоффманн 80x200	800	2000		17	
Хоффманн 90x190	900	1900		18	
Хоффманн 90x195	900	1950		18	
Хоффманн 90x200	900	2000		19	
Хоффманн 120x190	1200	1900		24	
Хоффманн 120x195	1200	1950		24	
Хоффманн 120x200	1200	2000		25	
Хоффманн 140x190	1400	1900		27	330
Хоффманн 140x195	1400	1950		28	
Хоффманн 140x200	1400	2000		29	
Хоффманн 160x190	1600	1900		31	
Хоффманн 160x195	1600	1950		32	
Хоффманн 160x200	1600	2000		33	
Хоффманн 180x190	1800	1900		35	
Хоффманн 180x195	1800	1950		36	
Хоффманн 180x200	1800	2000		37	
Хоффманн 200x190	2000	1900		39	
Хоффманн 200x195	2000	1950		40	
Хоффманн 200x200	2000	2000		41	

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Основные параметры и характеристики

2.1.1. Матрац соответствует ГОСТ Р 50444, ГОСТ 19917 и изготавливается в соответствии с требованиями ТУ 31.03.12-001-68158741-2017, образца-эталона и технического описания ТО 5600-001-1105074009006-2012, утверждённого в установленном порядке. Полный номенклатурный перечень изделий приведен в таблице 7.

Таблица 7. Полный (номенклатурный) перечень изделий

№	Наименование	№ рисунка
1.	Матрац ортопедический MATRAMAX исполнение «Президент»	Рис. 1
2.	Матрац ортопедический MATRAMAX исполнение «Флоренти»	Рис. 2
3.	Матрац ортопедический MATRAMAX исполнение «Струмер»	Рис. 3
4.	Матрац ортопедический MATRAMAX исполнение «Гловер»	Рис. 4
5.	Матрац ортопедический MATRAMAX исполнение «Элиостор»	Рис. 5
6.	Матрац ортопедический MATRAMAX исполнение «Хоффманн»	Рис. 6

2.1.2. Основные массогабаритные параметры матрацев соответствуют требованиям Рисунков 1-6 и Таблиц 1-6. Допускаемое отклонение размеров ± 10 мм. Допускаемое отклонение массы $\pm 10\%$.

2.1.3. Максимальная допустимая нагрузка на матрац соответствует значениям, указанным в Таблицах 1-6.

2.1.4. Категории мягкости (жесткости) исполнений матрацев соответствуют Таблице 8.

Таблица 8. Степени жесткости исполнений матрацев

№	Наименование (Артикул)	Степень жесткости	
		Верх	Низ
1.	Исполнение «Президент»	Средняя жесткость	Средняя жесткость
2.	Исполнение «Флоренти»	Средняя жесткость	Средняя жесткость
3.	Исполнение «Струмер»	Средняя жесткость	Жёсткий
4.	Исполнение «Гловер»	Средняя жесткость	Средняя жесткость
5.	Исполнение «Элиостор»	Мягкий	Жёсткий
6.	Исполнение «Хоффманн»	Средняя жесткость	Средняя жесткость

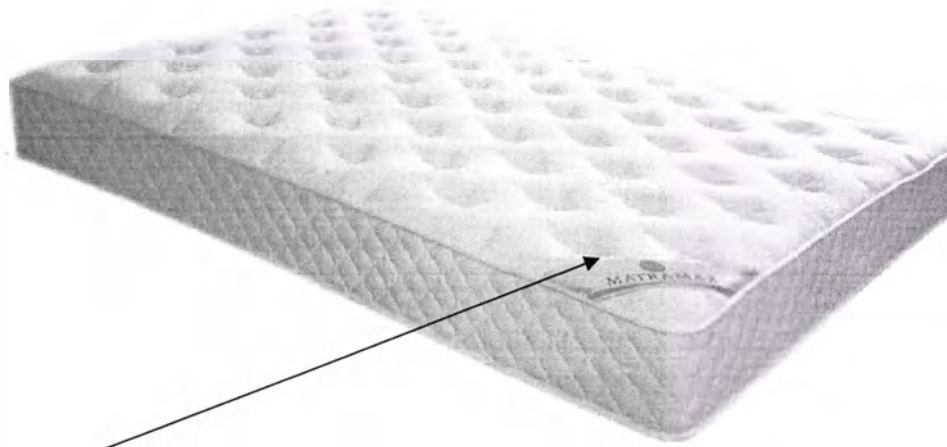


Рисунок 7. Товарный знак MATRAMAX. Служит для определения верхней стороны матраца.

- 2.1.5. Количество стежков на внешнем слое (флекспакете) на 5 см машинной строчки при пошиве не менее 13, при выстегивании изделий (8 ± 1).
- 2.1.6. Не допускаются смещение и перекося отдельных конструктивных слоёв между собой.
- 2.1.7. Строчка на матрацах на внешнем слое (флекспакете) без искривлений, влияющих на внешний вид и прочность изделий, нить строчки хорошо натянута.
- 2.1.8. Нитки для стачивания и настрачивания на внешнем слое (флекспакете) в цвет или тон ткани.
- 2.1.9. Концы ниток в строчках закреплены и отрезаны.
- 2.1.10. Внешний слой (флекспакет) матраца без складок и сборок глубиной более 10 мм.
- 2.1.11. Мягкие элементы матраца на основе пружинных блоков при эксплуатации не создают шум в виде скрежета, стука, треска. Допускаются кратковременные щелчки и поскрипывания.
- 2.1.12. На поверхностях матраца отсутствуют инородные включения, надрывы, порезы, вздутия, дыры, проколы, прорубание машинной иглой, обрывы нитей в отделочных строчках и другие пороки.
- 2.1.13. Усадка матраца двусторонней мягкости не более 30 мм. Неравномерность усадки матраца не превышает 15 мм.
- 2.1.14. Наружные поверхности матраца устойчивы к очистке средствами для чистки мягкой мебели и мыльными растворами.
- 2.1.15. Матрац при эксплуатации устойчив к воздействию климатических факторов внешней среды в соответствии с требованиями для изделий исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.
- 2.1.16. Матрац обладает устойчивостью к механическим воздействиям при эксплуатации, соответствующим требованиям к изделиям группы 2 по ГОСТ Р 50444.
- 2.1.17. Матрац в транспортной упаковке обладает устойчивостью к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150: при транспортировании для условий хранения 5; при хранении для условий хранения 2.
- 2.1.18. Матрац в транспортной упаковке обладает устойчивостью к механическим воздействиям при транспортировании соответствующим ГОСТ Р 50444.
- 2.1.19. Долговечность пружинных мягких элементов не менее 29 000 циклов.
- 2.1.20. Средний срок службы матраца не менее 10 лет.
- 2.1.21. Толщина различных слоёв используемых материалов соответствует данным Таблицы 2. Допускаемое отклонение ± 1 мм.
- 2.1.22. На 1 м^2 пружинного блока приходится пружин:
- Для блока независимых пружин «Waber» 720 ± 2 штук;
 - Для блока независимых пружин «MultiPocket» 625 ± 2 штук.

2.2. Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

2.2.1. При изготовлении матраца допускается применение сырья, материалов и покупных изделий отечественного и иностранного производства соответствующих нормативно-технической документации, предусмотренной действующим законодательством и иметь сопроводительные документы о качестве предприятия-поставщика.

2.2.2. Входной контроль сырья, материалов и покупных изделий, применяемых при производстве матраца, проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 24297.

2.2.3. Для изготовления основных элементов матрацев используется сырье и материалы согласно таблице 8.

2.2.4. Наполнитель чистый, без постороннего запаха.

Таблица 8. Сырье и материалы

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	№ СЛОЯ Рис. В.1-В.6	ТОЛЩИНА СЛОЯ, мм	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА	МАРКА, СОСТАВ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ МАТЕРИАЛА	ТИП КОНТАКТА
Исполнение «Президент»	1	50	Флекспакет – комфортный верхний слой с глубокой стежкой (ткань «Голд Премиум», полое гиппоаллергенное волокно)	Трикотажная ткань «Голд Премиум» Арт W 806-09066-006-50399-235 Состав: 100% полиэстер	Innofa, Нидерланды	Длительный с неповрежденной кожей
				Нетканое полотно Hollcon DMK 150. Состав: 100% Полиэстер	ООО Компания «Нафта-Хим», Россия	Длительный с неповрежденной кожей
	2	50	Монолитный блок латекса Innergetic	Латекс перфорированный, рулонный Состав: 80% искусственный латекс, 20% натуральный	Innergetic, Бельгия	Отсутствует
	3	30	Слой «Airfoam»	Блочный эластичный пенополиуретан "Airfoam" EL 4050 GPL 40 Состав: пенополиуретан.	ООО "ЕВРОПЛАСТ", Россия	Отсутствует
	4	130	Блок независимых пружин «Waber»	Проволока по ТУ 14-4-1566 Состав: сталь марки Ст50	Северсталь-метиз, Россия	Отсутствует
				Чехол для пружин нетканый материал марки НЕТПОЛ Состав: стрейчбонд	ООО "НЕТПОЛ", Россия	Отсутствует

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	№ СЛОЯ Рис. В.1-В.6	ТОЛЩИНА СЛОЯ, мм	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА	МАРКА, СОСТАВ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ МАТЕРИАЛА	ТИП КОНТАКТА
Исполнение «Флоренти»	1	40	Флекспакет – комфортный верхний слой с глубокой стежкой (ткань «Флора Премиум», полое гиппоаллергенное волокно)	Трикотажная ткань «Флора Премиум» Х009-1 – Состав: 100% полиэстер	Фортекс&Ко, Россия	Длительный с неповрежденной кожей
				Нетканое полотно Hollcon DMK 150. Состав: 100% Полиэстер	ООО Компания «Нафта-Хим», Россия	Длительный с неповрежденной кожей
	2	10	Латекс (Бельгия)	ЛПР Состав: 80% искусственный латекс, 20% натуральный	ARTILAT, Бельгия и Фортекс&Ко, Россия	Отсутствует
	3	10	Латексированная кокосовая койра	ЛКК Состав: 85% кокос, 15% латекс	Фортекс&Ко, Россия	Отсутствует
	4	90	Блок независимых пружин «MultiPocket»	Проволока по ТУ 14-4-1566 Состав: сталь марки Ст50	Северсталь-метиз, Россия	Отсутствует
				Чехол для пружин нетканый материал марки НЕТПОЛ Состав: стрейчбонд	ООО "НЕТПОЛ", Россия	Отсутствует
Исполнение «Струммер»	1	50	Флекспакет – комфортный верхний слой с глубокой стежкой (ткань «Голд Премиум», полое гиппоаллергенное волокно)	Трикотажная ткань «Голд Премиум» Арт. W 806-09066-006-50399-235 Состав: 100% полиэстер	Innofa, Нидерланды	Длительный с неповрежденной кожей
				Нетканое полотно Hollcon DMK 150. Состав: 100% Полиэстер	ООО Компания «Нафта-Хим», Россия	Длительный с неповрежденной кожей
	2	80	Монолитный блок латекса Innergetic	Латекс перфорированный, рулонный Состав: 80% искусственный латекс, 20% натуральный	Innergetic, Бельгия	Отсутствует
	3	30	Слой «Airfoam»	Блочный эластичный пенополиуретан "Airfoam" EL 4050 GPL 40 Состав: пенополиуретан.	ООО "ЕВРОПЛАСТ", Россия	Отсутствует
	4	130	Блок независимых пружин «Waber»	Проволока по ТУ 14-4-1566 Состав: сталь марки Ст50	Северсталь-метиз, Россия	Отсутствует
				Чехол для пружин нетканый материал марки НЕТПОЛ Состав: стрейчбонд	ООО "НЕТПОЛ", Россия	Отсутствует

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	№ СЛОЯ Рис. В.1-В.6	ТОЛЩИНА СЛОЯ, мм	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА	МАРКА, СОСТАВ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ МАТЕРИАЛА	ТИП КОНТАКТА
Исполнение «Гловер»	1	35	Флекспакет – комфортный верхний слой с глубокой стежкой (ткань «Велюр-Антистресс», полое гиппоаллергенное волокно)	Трикотажная ткань «Велюр-Антистресс» Арт PCV02-10511-027-50399-235 Состав: 100% полиэстер	Innofa, Нидерланды	Длительный с неповрежденной кожей
				Нетканое полотно Hollcon DMK 150. Состав: 100% Полиэстер	ООО Компания «Нафта-Хим», Россия	Длительный с неповрежденной кожей
	2	30	Латекс (Бельгия)	ЛПР Состав: 80% искусственный латекс, 20% натуральный	ARTILAT, Бельгия и Фортекс&Ко, Россия	Отсутствует
	3	10	Латексированная кокосовая койра	ЛКК Состав: 85% кокос, 15% латекс	Фортекс&Ко, Россия	Отсутствует
	4	130	Блок независимых пружин «Waber»	Проволока по ТУ 14-4-1566 Состав: сталь марки Ст50	Северсталь-метиз, Россия	Отсутствует
				Чехол для пружин нетканый материал марки НЕТПОЛ Состав: стрейчбонд	ООО "НЕТПОЛ", Россия	Отсутствует
Исполнение «Элиостор»	1	50	Флекспакет – комфортный верхний слой с глубокой стежкой (ткань «Голд Премиум», полое гиппоаллергенное волокно)	Трикотажная ткань «Голд Премиум» Арт W 806-09066-006-50399-235 Состав: 100% полиэстер	Innofa, Нидерланды	Длительный с неповрежденной кожей
				Нетканое полотно Hollcon DMK 150. Состав: 100% Полиэстер	ООО Компания «Нафта-Хим», Россия	Длительный с неповрежденной кожей
	2	50	«Viscolatex» с эффектом памяти	TS-VISCO-8 Состав: Висколатекс 100%	ARTILAT, Бельгия	Отсутствует
	3	30	Слой «Airfoam»	Блочный эластичный пенополиуретан "Airfoam" EL 4050 GPL 40 Состав: пенополиуретан.	ООО "ЕВРОПЛАСТ", Россия	Отсутствует
	4	130	Блок независимых пружин «Waber»	Проволока по ТУ 14-4-1566 Состав: сталь марки Ст50	Северсталь-метиз, Россия	Отсутствует
				Чехол для пружин нетканый материал марки НЕТПОЛ Состав: стрейчбонд	ООО "НЕТПОЛ", Россия	Отсутствует

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	№ СЛОЯ Рис. В.1-В.6	ТОЛЩИНА СЛОЯ, мм	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА	МАРКА, СОСТАВ	ИЗГОТОВИТЕЛЬ МАТЕРИАЛА	ТИП КОНТАКТА
Исполнение «Хоффманн»	1	25	Флекспакет – комфортный верхний слой с глубокой стежкой (ткань «Велюр-Антистресс», полое гиппоаллергенное волокно)	Трикотажная ткань «Велюр-Антистресс» Арт PCV02-10511-027-50399-235 Состав: 100% полиэстер	Innofa, Нидерланды	Длительный с неповрежденной кожей
				Нетканое полотно Hollcon DMK 150. Состав: 100% Полиэстер	ООО Компания «Нафта-Хим», Россия	Длительный с неповрежденной кожей
	2	10	Латекс (Бельгия)	ЛПР Состав: 80% искусственный латекс, 20% натуральный	ARTILAT, Бельгия и Фортекс&Ко, Россия	Отсутствует
	3	10	Латексированная кокосовая койра	ЛКК Состав: 85% кокос, 15% латекс	Фортекс&Ко, Россия	Отсутствует
	4	180	Блок независимых пружин «Waber»	Проволока по ТУ 14-4-1566 Состав: сталь марки Ст50	Северсталь-метиз, Россия	Отсутствует
				Чехол для пружин нетканый материал марки НЕТПОЛ Состав: стрейчбонд	ООО "НЕТПОЛ", Россия	Отсутствует

2.3. Комплектность

2.3.1. Комплект поставки матраца соответствует таблице 9.

Таблица 9. Комплектность

№	Наименование	Обозначение документа	Кол-во, шт.
1.	Матрац ортопедический MATRAMAX (одного из исполнений, определённого типоразмера)	ТО 5600-001-1105074009006-2012	1*
	Эксплуатационная документация		
2.	Инструкция по применению	МТМС.942519 ИП	1

*Примечания: Исполнение и типоразмер матраца определяется при заказе по согласованию с заказчиком.

2.4. Маркировка

2.4.1. Маркировка по ГОСТ Р 50444, с учетом ГОСТ 10581 и ГОСТ 19917.

2.4.2. Для маркировки изделия применяют товарный ярлык или ленту с нанесением символов по уходу.

2.4.3. Товарный ярлык (лента) пришит, навешен на изделие или прикреплен к нему способом, обеспечивающим сохранность ярлыка (ленты).

2.4.4. На товарном ярлыке (ленте) указаны следующие данные:

- наименование и местонахождение предприятия-изготовителя и (или) товарный знак предприятия;
- наименование изделия, его исполнение;
- размер изделия;
- состав;
- дату изготовления;
- гарантийный срок эксплуатации;
- срок службы;
- серийный номер;
- обозначение настоящих технических условий, ГОСТ 19917.

2.4.5. Данные четко выполнены типографским способом и размещены на лицевой стороне ярлыка.

2.4.6. На ярлыке указаны так же символы по уходу за матрацем:



Стирка запрещена;



Запрещено отжимать и сушить в стиральной машине;



Изделие не должно подвергаться глажению;



Сушить без отжима в вертикальном состоянии;



Не отбеливать.

- 2.4.7. Допускается нанесение других сведений, в том числе информационного и рекламного характера.
- 2.4.8. Транспортная маркировка по ГОСТ 14192, с нанесением дополнительных информационных надписей и манипуляционных знаков: «Беречь от влаги».
- 2.4.9. На верхней стороне матраца расположен товарный знак, служащий для определения верхней стороны матраца (Рисунок 7).
- 2.4.10. Пример маркировки:



МАТРАЦ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ
MATRAMAX
ТУ 31.03.12-001-68158741-2017
www.matramax.ru

ООО «Матрамакс»
Россия, 142111,
Московская область г.
Подольск ул. Окружная
д. 2А



Рекомендуется переворачивать
каждые 3 месяца (вне
зависимости от степени жесткости)
Дата изготовления: ххххх
Гарантийный срок 24 месяца
Средний срок службы 10 лет
ГОСТ 19917-2014

2.5. Упаковка

- 2.5.1. Упаковка соответствует требованиям конструкторской документации, ГОСТ Р 50444, ГОСТ 10581 и ГОСТ 19917.
- 2.5.2. Каждый матрац упакован в индивидуальную упаковку - пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354.
- 2.5.3. Эксплуатационная документация (инструкция по применению) уложена вместе с матрацем.
- 2.5.4. Применяемые упаковочные материалы обеспечивают сохранность качества изделий.
- 2.5.5. Упаковывание изделий, отправляемых в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы - по ГОСТ 15846. Допускаются иные способы упаковки, обеспечивающие защиту матраца от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1. Эксплуатационные ограничения

 Каждый матрац проходит перед продажей специальную проверку изготовителем. Тем не менее, при транспортировке могут произойти непредвиденные повреждения, не связанные с производством изделия.

Пожалуйста, проведите визуальную оценку упаковки, состояния матраца, чтобы убедиться в отсутствии различных порезов и повреждений. Если вы обнаружите повреждения, обратитесь в сервисную службу изготовителя.

 Запрещается размещать матрац рядом с огнеопасными приборами и источниками открытого огня.

 Запрещается сгибать, сворачивать или складывать матрац.

3.2. Подготовка к эксплуатации.

При использовании матраца впервые после его приобретения проверьте соответствие его комплектности по разделу 2.3 настоящей инструкции.

 Матрац поставляется готовым к применению, однако рекомендуется перед первым использованием осуществить очистку в соответствии с требованиями пункта 4.1 и маркировки.

После снятия упаковки, перед эксплуатацией, матрац необходимо проветрить, чтобы удалить производственный запах. Для ускорения этого процесса матрац рекомендуется пропылесосить. Интенсивность запаха снизится, и он полностью исчезнет через 14 дней.

Матрац следует эксплуатировать в сухом, проветриваемом помещении.

 Берегите матрац от попадания химикатов и жидкостей.

3.3. Описание изделий, порядок работы с матрацем

Матрац используется на сплошной ровной горизонтальной поверхности или ортопедической решетке, рейки которой выгнуты вверх (ширина реек не менее 50 мм и расстояние между ними не более 85 мм).

Для матраца шириной более 1400 мм рекомендуется использовать основание, которое укомплектовано дополнительной пятой ножкой.

Следует учитывать информацию по рекомендуемой нагрузке (Таблица 1-6).

 Запрещается эксплуатировать матрац на кровати, размер спального места которой меньше размера матраца.

4. УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Необходимо регулярно контролировать отсутствие механических повреждений.

Переворачивайте матрац не реже, чем 4 раза в год (каждые 3 месяца эксплуатации). Это необходимое условие восстановления пружинного блока и мягких слоев настила. Вне зависимости от степени жесткости сторон матраца.

Так же необходимо обеспечивать очистку матраца согласно разделу 4.1 настоящей инструкции.

4.1. Уход и очистка

- 1) Освободить матрац от постельного белья.
- 2) Удалить крупные частицы загрязнения.

3) Очистка

Проводите сухую чистку матраца с помощью пылесоса. Водорастворимые пятна можно удалить средством для чистки мягкой мебели или мыльным раствором.

 Не допускается применение абразивных материалов, едких веществ и жидкостей.

- 4) Сушите матрац на воздухе, без отжима в вертикальном состоянии.

 **Внимание!** Изделия запрещено стирать!

 **Внимание!** Изделия запрещено отжимать и сушить в стиральной машине!

 **Внимание!** Изделие запрещено гладить!

 **Внимание!** Изделия запрещено отбеливать!

 **Внимание!** Сушить вдали от нагревательных приборов. Не подвергать воздействию солнечных лучей.

В случае нарушения целостности матраца: разрывов, проколов, порезов изделие необходимо утилизировать согласно Разделу 6.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Матрац, упакованный в транспортную тару, транспортируют всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида.

5.2. Условия транспортирования матраца соответствуют условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 (при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 100%)

5.3. Условия хранения матраца в транспортной упаковке на складах изготовителя (потребителя) соответствуют условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 (при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С и относительной влажности до 98%)

6. ТРЕБОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

6.1. Матрац должен утилизироваться как твердые бытовые отходы.

6.2. Матрац подлежит утилизации в случае:

- окончания срока эксплуатации;

- повреждения, свидетельствующие о невыполнении предусмотренного назначения.

6.3. Утилизации должна подлежать вся упаковка, в том числе и транспортная. Утилизации должны подвергаться отдельно бумага, полиэтилен и пластмасса.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Матрац ортопедический производства ООО "Матрамакс"

Исполнение матраца _____ Размер _____ серийный номер _____,

принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

Представитель ОТК

(личная подпись) (расшифровка подписи) (Дата)

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Матрац ортопедический,

Исполнение матраца _____ Размер _____ серийный номер _____,

упакована на предприятии-изготовителе ООО «Матрамакс» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковывание произвел _____

(личная подпись) (расшифровка подписи)

(Дата)

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Претензии в адрес изготовителя представляют в случае невозможности ремонта матраца на ремонтном предприятии, обслуживающем изделие.

Все предъявленные рекламации должны регистрироваться заводом-изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в десятидневный срок.

О принятых мерах письменно сообщается потребителю.

Для определения причин повреждений необходимо составить акт, в котором должны быть указаны:

- наименование и серийный номер изделия;
- дата получения изделия с завода-изготовителя и номер документа, по которому он получен;
- детальное описание повреждения;
- предполагаемая причина повреждения.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие матраца требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

10.2. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяцев со дня продажи предприятием-изготовителем.

10.3. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

Уважаемые покупатели!

При покупке убедитесь в том, что продавец полностью заполнил гарантийный талон и поставил печать.

Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

В случае, если изделие вышло из строя в гарантийный период, обратитесь к продавцу или в сервисный центр.

Гарантийный срок изделия указан в инструкции и исчисляется с даты продажи. При обнаружении производственных дефектов покупателю гарантируется бесплатный ремонт в течение всего гарантийного срока.

Производитель оставляет за собой право отказа по гарантийному обязательству в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии:

- Гарантия действует только при правильном и четком заполнении гарантийного талона с указанием, даты продажи, четкой печатью фирмы-продавца.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

- Если гарантийный талон не предоставлен или информация в нем не полная, неразборчивая или содержит исправления.
- Несовпадения номера изделия с гарантийным талоном
- Наличия механических повреждений
- Несоблюдения правил эксплуатации изделия и т.д.

ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
на замену в течение гарантийного срока

Матрац ортопедический,

Исполнение матраца _____ Размер _____ серийный номер _____,

Приобретен _____
(дата, подпись и штамп покупателя)

Продавец _____
(подпись, печать)

Приложение А

(Обязательное)

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящей инструкции по применению

Таблица А.1

Обозначение документа	Наименование документа
-	Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации №4н от 06.06.2012 г. «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий»
ГОСТ 10581-91	Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 15846-2002	Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 24297-2013	Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля
ГОСТ Р 50444-92	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия
ГОСТ 19917-2014	Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия
СанПиН 2.1.7.2790-10	Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходам
серия ГОСТ ISO 10993	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий.
ТУ 14-4-1566-89	Проволока углеродистая для сеток

прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 29 лист(ов)

(двадцать девять)

Генеральный директор
ООО «МАТРАМАКС»

[Signature] Зароян К.Р.

«21» *август* 2017г

