



Verification code:
90740274

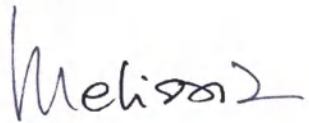
This **Authentication Certificate** only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who signed the Notarial Certificate.

This **Authentication Certificate** is not valid if the seal of the Singapore Academy of Law is removed or altered in any way whatsoever. This Certificate does not authenticate or confirm the content of the Document attached to the annexed Notarial Certificate.

Authentication

1. Country:	Singapore
2. This public document has been signed by:	Aw Wee Chong Nicholas
3. Acting in the capacity of:	Notary Public
4. Bears the seal/stamp:	Notary Public

Certified

5. Authentication Cert No.:	ACOK1S0EBH
6. At:	Singapore Academy of Law
7. The:	4th March 2020
8. By:	Melissa Goh, Deputy Director, SAL
9. SAL Certification Seal:	10. Signature: 



Approved by

Quality Management Representative

Date: 19 Feb 2020



Name of Responsible Person: Carol Li

Instruction for use:

Soft corrective contact lenses for daily wear

clearday BEYOND

Manufactured by:

Clearlab SG Pte. Ltd., Singapore

**Инструкция по применению
Линзы контактные мягкие корригирующие
дневного ношения clearday BEYOND**



Линзы контактные мягкие корректирующие дневного ношения clearday BEYOND:

1. Линзы контактные мягкие корректирующие дневного ношения clearday BEYOND (Сферические), варианты исполнения: радиус кривизны задней центральной оптической зоны (базовая кривизна) 7,80 – 10,00 мм; общий диаметр (диаметр хорды) 12,00 – 15,00 мм; задняя вершинная рефракция (оптическая сила) -12,00 – +6,00 D с шагом 0,5D (в диапазоне от -12,00 до -6,50) и с шагом 0,25D (в диапазоне от -6,00 до +6,00D).

2. Линзы контактные мягкие корректирующие дневного ношения clearday BEYOND Торические, варианты исполнения: радиус кривизны задней центральной оптической зоны (базовая кривизна) 7,80 – 10,00 мм; общий диаметр (диаметр хорды) 12,00 – 15,00 мм; задняя вершинная рефракция (оптическая сила) -8,00 – +4,00 D с шагом 0,50D (в диапазоне от -8,00 до -6,50D) и с шагом 0,25D (в диапазоне от -6,00 до +4,00D); цилиндр -0,75 – -2,25 D; ось от 10° до 180° с шагом 10°.

Информация о разработчике/производителе:

Clearlab SG Pte. Ltd. («Клиалаб СГ. Пте. Лтд.»)

139 Joo Seng Road Singapore 368362

тел.: +65 6749 1090

факс: +65 6282 0926

enquiry@clearlab.com

Информация об Уполномоченном представителе производителя:

Общество с ограниченной ответственностью «ОФТАДЕРМ-ЛОГИСТИК»

(ООО «ОФТАДЕРМ-ЛОГИСТИК»)

117105, г. Москва, ул. Нагатинская, дом 1, стр. 2, цоколь, офис 1

тел.: 8 (499) 404-36-46 / info@oftaderm.ru

Место производства:

Clearlab SG Pte. Ltd., 139 Joo Seng Road Singapore 368362.

Назначение, описание устройства

Линзы контактные мягкие дневного ношения clearday BEYOND производятся из материала, содержащего 60% воды и 40% Авефилкона А (Avefilcon A). Полимер содержит соединения УФ-фильтра, служащие для фильтрации ультрафиолетового излучения. Для придания линзам оттенка используется Активный синий № 19.

Линзы контактные мягкие из Авефилкона А разработаны для коррекции аметропии (миопии и гиперметропии). Эти контактные линзы располагаются на поверхности роговицы и прилегающей склере глаза. Линзы сконструированы таким образом, что они соответствуют радиусу закругления роговицы и располагается по центру вершины роговицы, обеспечивая исправляющую рефракцию для условий функционирования глаза. Каждая линза обладает корректирующей способностью, которая соответствует рефракционной способности глаза, получающего лечение.

Предусмотренное применение

При установке на роговицу контактные линзы служат рефракционной средой для фокусировки лучей света на сетчатке глаза, что способствует коррекции аметропии.

Показания к применению

- Коррекция аметропии (миопии и гиперметропии) у людей с афакическим и неафакическим зрением и без хронических заболеваний глаз, страдающих астигматизмом не более 0,75 D в случае, если он не влияет на остроту зрения.

Потенциальные пользователи: пациенты с афакическим и неафакическим зрением и без хронических заболеваний глаз, которым показана коррекция аметропии (миопии и гиперметропии). Линзы можно очищать и дезинфицировать при помощи химической (нетепловой) системы ухода за линзами.

Противопоказания

Не использовать Линзы контактные мягкие дневного ношения clearday BEYOND в следующих случаях:

- Острое и подострое воспаление или инфекция передней камеры глаза.
- Любые заболевания, травмы или патологии глаз, затрагивающие роговицу, конъюнктиву или веки.
- Тяжелая недостаточность слезной секреции (сухость глаз).
- Роговичная гипестезия (снижение чувствительности роговицы) при условии факичности.
- Любое общее заболевание, которое может затрагивать глаза или быть усугублено использованием контактных линз.
- Аллергические реакции глазных поверхностей или глазных придатков, которые могут быть вызваны или усугублены использованием контактных линз или использованием растворов для контактных линз.
- Аллергические реакции на какой-либо ингредиент раствора, используемого для ухода за линзами.
- Любая активная инфекция роговицы (бактериальная, грибковая или вирусная).
- Покраснение или раздражение глаз.
- Отсутствие у пациента возможности соблюдать режим ухода за линзами или получить помощь в таком уходе.
- Наличие в истории болезни пациента повторяющихся случаев инфекций глаз или век, случаев проявления побочных эффектов от использования линз, непереносимости или ненормальной глазной реакции на использование линз.

Меры предосторожности

- При возникновении дискомфорта в глазах, слезотечения, изменений зрения, покраснения глаз или других проблем следует немедленно извлечь линзы и как можно скорее обратиться к офтальмологу. Поэтому тем, кто носит контактные линзы, рекомендуется регулярно посещать офтальмолога.
- Не всегда можно использовать вместе разные растворы, и не все растворы подходят ко всем линзам. Следует использовать только рекомендуемые свежие стерильные растворы. Нельзя использовать растворы для обычных жестких контактных линз. Химические растворы для дезинфекции не следует использовать в сочетании с тепловой обработкой, если только на маркировке специально не указана возможность использования как тепловой, так и химической дезинфекции. Следует всегда использовать СВЕЖИЕ СТЕРИЛЬНЫЕ растворы С НЕИСТЕКШИМ СРОКОМ ГОДНОСТИ. При использовании растворов для контактных линз нужно всегда следовать инструкциям, приведенным в листке-вкладыше. При использовании не содержащих консерванты стерильных растворов следует выбрасывать их сразу по истечении срока годности, указанного в маркировке.
- Для смазывания и увлажнения линз нельзя пользоваться слюной или чем-либо, кроме рекомендуемых растворов. Во время перерыва в использовании (при хранении) необходимо всегда держать линзы полностью погруженными в рекомендуемый раствор для хранения. Если линзы долгое время остаются сухими, они могут испортиться. Если поверхность линзы высохла, следует выполнить указания по уходу за высохшими (обезвоженными) линзами.
- При прилипанию линзы к глазу (неподвижности) следовать указаниям по уходу за прилипшими линзами. Линза должна свободно перемещаться по поверхности глаз – это сохранит их здоровье.

Если линза остается неподвижной, пациент должен НЕМЕДЛЕННО проконсультироваться со своим офтальмологом.

- Перед манипуляциями с линзами следует всегда мыть руки. Нужно избегать попадания косметических средств, лосьонов, мыла, кремов, дезодорантов, спреев в глаза или на линзы. Лучше всего надевать линзы перед нанесением макияжа. Косметика на водной основе несет меньший риск повреждения линз, чем косметика на масляной основе.

- Нельзя прикасаться к контактным линзам грязными пальцами или руками – из-за этого на них могут образоваться микроскопические царапины, что приведет к искажениям зрения и/или травмированию глаз.

- Следует тщательно соблюдать предписания офтальмолога и инструкции по обращению с Линзами дневного ношения clear day BEYOND, их надеванию, извлечению, очистке, дезинфекции, хранению и использованию.

- Никогда не следует носить линзы дольше срока, рекомендованного офтальмологом.

- Если во время использования линз используются такие аэрозольные продукты, как лак для волос, то необходимо соблюдать осторожность и держать глаза закрытыми при нанесении лака.

- Всегда следует обращаться с линзами аккуратно и не ронять их.

- Во время использования линз избегать любых вредных или раздражающих испарений и дыма.

- Если планируется использовать линзы при занятиях спортом, следует обязательно проконсультироваться с офтальмологом.

- Следует обязательно информировать врачей об использовании контактных линз.

- Не следует извлекать линзы из контейнера при помощи пинцетов или других инструментов, за исключением инструментов, специально для этого предназначенных. Раствор с линзами нужно вылить в руку.

- Не прикасаться к линзам ногтями.

- Перед использованием каких-либо глазных лекарств или медикаментов следует обязательно проконсультироваться с офтальмологом.

- Следует обязательно проинформировать работодателя об использовании контактных линз. Некоторые виды работ могут требовать использования средств для защиты глаз или же не допускают использования контактных линз.

- Как и при использовании любых других контактных линз, необходимо регулярно посещать врача, чтобы сохранить здоровье глаз. Пациенту должно быть предоставлено рекомендуемое расписание визитов на прием.

- Пациент должен выбрасывать линзы однократного использования и линзы частой плановой замены по истечении рекомендованного периода использования, предписанного офтальмологом.

- Контейнеры для контактных линз могут являться источником роста бактерий. Для предотвращения загрязнения и во избежание серьезных травм глаз следует всегда опорожнять и промывать контейнер для линз свежим стерильным промывочным раствором, после чего оставить его сушиться.

- Контейнеры для линз следует заменять через равные промежутки времени в соответствии с рекомендациями производителя контейнеров или офтальмолога.

Предупреждения

- Проблемы с контактными линзами и средствами для ухода за ними могут привести к серьезному повреждению глаз. Очень важно, чтобы пациенты следовали указаниям своего офтальмолога и всем инструкциям на вкладыше, этикетке и упаковке, касающимся надлежащего применения линз и средств для ухода за ними, включая контейнер для линз. Проблемы с глазами, включая язвы роговицы, могут развиваться быстро и привести к потере зрения.

- Линзы дневного ношения не показаны для ношения в ночное время; необходимо проинструктировать пациентов, чтобы они не использовали линзы во время сна. Клинические



исследования показали, что в случае ношения данных линз в ночное время риск серьезных нежелательных реакций повышается.

- Согласно исследованиям, у курящих пользователей контактных линз нежелательные реакции возникают чаще, чем у некурящих.
- Необходимо проинструктировать пациентов о том, что в случае возникновения дискомфорта в глазах, повышенной слезоточивости, изменения зрения или покраснения глаз им следует немедленно снять линзы и срочно связаться со своим офтальмологом.

Побочные эффекты

Могут возникнуть следующие проблемы:

- Покалывание, жжение, зуд (раздражение) или другие болевые ощущения в глазах.
- Дискомфорт при первом надевании линз.
- Ощущение царапин или того, что в глаз попало какое-то инородное тело.
- Чрезмерное увлажнение (слезоточивость) глаз.
- Необычные выделения из глаз.
- Покраснение глаз.
- Снижение остроты зрения (низкая острота зрения).
- Затуманивание зрения, наблюдение радуг или ореолов вокруг предметов.
- Повышение чувствительности к свету (светобоязнь).
- Сухость глаз.

Если замечены какие-либо из вышеперечисленных реакций, следует **НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИЗВЛЕЧЬ ЛИНЗЫ**.

Если после этого дискомфорт и проблемы прекратились, нужно внимательно осмотреть линзы. Если на линзах присутствуют какие-либо повреждения, **НЕЛЬЗЯ СНОВА ИХ НАДЕВАТЬ**. Нужно поместить линзы в контейнер для хранения и проконсультироваться с офтальмологом. Если на линзах присутствует грязь, ресницы или другие инородные предметы, проблемы исчезли и линзы при этом выглядят неповрежденными, следует их тщательно очистить, промыть, дезинфицировать и снова надеть. Если после надевания проблема проявляется вновь, то следует **НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ИЗВЛЕЧЬ ЛИНЗЫ И ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ОФТАЛЬМОЛОГОМ**.

Возникновение какой-либо из перечисленных выше проблем может свидетельствовать о серьезном заболевании, например, инфекции, язве роговицы, неоваскуляризации или ирите. **СЛЕДУЕТ СОХРАНИТЬ ЛИНЗУ И НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ К ПРОФЕССИОНАЛУ** для определения проблемы и оперативного лечения во избежание серьезного повреждения глаз.

Основные правила использования

Прописать линзы дневного ношения, указать способы очистки и дезинфекции, а также составить расписание замены может офтальмолог. Если прописаны линзы частой плановой замены, то их необходимо очищать, промывать и дезинфицировать после каждого извлечения из глаз. Для этого следует использовать химическую (нетепловую) систему ухода за линзами. Линзы контактные мягкие корригирующие дневного ношения clearday BEYOND следует выбрасывать после окончания рекомендованного периода использования, предписанного офтальмологом.

СЛЕДУЕТ СНИМАТЬ Линзы контактные мягкие корригирующие дневного ношения clearday BEYOND **НА ВРЕМЯ СНА**. Не следует извлекать линзы из контейнера при помощи пинцетов или других инструментов, за исключением инструментов, специально для этого предназначенных. Вместо этого рекомендуется вылить упаковочной раствор с линзой в руку. **НЕ ПРИКАСАТЬСЯ** к линзам **НОГТЯМИ**.

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА И ОБРАЩЕНИЕ С ЛИНЗАМИ



Перед использованием линз:

Важным аспектом ухода за контактными линзами является соблюдение чистоты.

Всегда перед манипуляциями с линзами следует тщательно мыть руки и вытирать их безворсовым полотенцем. Нельзя использовать мыло, лосьоны, мази для смягчения кожи или парфюмерные изделия, остающиеся на руках. Перед прикосновением к линзам следует избегать использования медикаментов, кремов, дезодорантов, макияжа, лосьонов после бритья или аналогичных средств. При нанесении лака для волос следует держать глаза закрытыми. Нужно соблюдать осторожность при обращении с линзами. Нельзя прикасаться к линзам ногтями или другими острыми предметами. НИКОГДА НЕ РАБОТАТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО НАД РАКОВИНОЙ С ОТКРЫТЫМ СЛИВОМ, ТАК КАК ЛИНЗЫ МОГУТ ПОТЕРЯТЬСЯ.

Всегда использовать СТЕРИЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ при поврежденной или вскрытой блистерной упаковке. При обнаружении негерметичности или повреждения стерильной упаковки следует выбросить линзу. Не следует прикасаться к контактным линзам грязными пальцами или руками – из-за этого на них могут образоваться микроскопические царапины, что приведет к искажениям зрения и/или травмированию глаз.

Тщательно следовать инструкциям по обращению с линзами, их надеванию и извлечению.

Использование линзы и ее надевание на глаз

- 1) Во избежание возможной путаницы следует всегда начинать с одной и той же линзы.
- 2) Перед надеванием линзы тщательно промыть ее свежим стерильным промывочным раствором. Затем поместить линзу на кончик указательного пальца доминирующей руки.
- 3) После размещения линзы на указательном пальце проверить, не вывернулась ли она наизнанку. Для этого нужно осмотреть форму линзы на светлом фоне. Если линза выпуклая и куполообразная – все в порядке. Если кромка загнута наружу, значит, линза вывернута. Если линза вывернута, следует вернуть ее в правильное положение легким нажатием кончика пальца. Следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить линзу ногтями.
- 4) Смотря прямо вперед, поднять верхнее веко вторым указательным пальцем.
- 5) Затем посмотреть вниз и, удерживая оба глаза открытыми, поместить линзу на верхнюю часть белка глаза.
- 6) Медленно отпустить верхнее веко и аккуратно закрыть глаз.
- 7) Линза должна выровняться самостоятельно. Ее также можно сместить к центру глаза легким нажатием кончика пальца через веко.
- 8) Повторить описанную выше процедуру для второй линзы.
- 9) Если создается впечатление, что линза застряла в глазу, то следует закапать в глаза несколько капель рекомендуемого раствора для смазки и увлажнения и несколько раз моргнуть. Если линза не может свободно перемещаться по глазу, то следует обратиться к офтальмологу за дальнейшими инструкциями.

Не существует единого правильного способа надевания линз. Если описанный способ надевания линз затруднителен, то другой способ или дополнительную информацию может предоставить офтальмолог.

Извлечение линзы

Подготовка:

- 1) Тщательно вымыть руки.
- 2) Вытереть руки безворсовым полотенцем.
- 3) Перед извлечением линзы следует убедиться, что она расположена по центру роговицы. Далее нужно проверить зрение, закрыв один глаз. Если Вы видите все размытым, то линза сместилась от центра глаза. Перед тем как пытаться извлечь линзу, ее следует переместить обратно к центру глаза.

Извлечение:

- 1) Во избежание возможной путаницы следует всегда начинать с одной и той же линзы.
- 2) Посмотреть вверх, открыв оба глаза.
- 3) Средним пальцем доминирующей руки осторожно оттянуть вниз нижнее веко первого глаза. Кончиком указательного пальца той же руки прикоснуться к линзе и сдвинуть ее на белок глаза.
- 4) Осторожно зажать линзу между указательным и большим пальцами, после чего извлечь ее.
- 5) Повторить процедуру для второго глаза.
- 6) Если перемещение линзы затруднено, то следует закапать в глаз несколько капель раствора для смазки и увлажнения, несколько раз моргнуть и при восстановлении подвижности линзы извлечь ее по описанной выше процедуре. Если же линза по-прежнему неподвижна, то следует обратиться к офтальмологу за дальнейшими инструкциями.
- 7) После извлечения каждую линзу следует очистить очистителем для контактных линз по процедуре, описанной в разделе «УХОД ЗА ЛИНЗАМИ». Тщательно промыть линзы промывочным раствором и поместить их в контейнер для линз, заполненный свежим раствором для хранения.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. Не прикасаться к линзам ногтями. Работать только кончиками пальцев. Если описанный способ затруднителен, то другой способ или дополнительную информацию может предоставить офтальмолог.

Если на линзах присутствуют какие-либо надрезы или повреждения, нельзя снова их надевать. Нужно поместить линзы в контейнер для хранения, заполненный свежим раствором, и проконсультироваться с офтальмологом.

УХОД ЗА ЛИНЗАМИ

Основные инструкции

Для длительного безопасного и комфортного использования линз важно очистить, промыть и дезинфицировать линзы после каждого извлечения, придерживаясь режима ухода, рекомендованного офтальмологом. Очистка и промывка необходимы для удаления слизи, выделений, пленок и отложений, которые могут накапливаться на линзе. Дезинфицирование необходимо для уничтожения вредных микроорганизмов.

Следует придерживаться рекомендуемого режима ухода за линзами. Несоблюдение режима может привести к развитию серьезных осложнений, описанных выше в разделе предупреждений. Необходимо следовать инструкциям и соблюдать указания по длительности, рекомендованные производителем раствора.

Если Вам требуется лишь коррекция зрения, но Вы не готовы или не можете соблюдать рекомендуемый режим ухода за линзами или же не можете самостоятельно надевать и извлекать линзы и у Вас нет кого-нибудь, кто мог бы с этим помочь, то не следует начинать носить контактные линзы.

При первом получении линз следует еще в кабинете офтальмолога убедиться в том, что Вы способны самостоятельно надеть и извлечь их. Вас снабдят описанием рекомендуемого режима очистки и дезинфекции, инструкциями по уходу за линзами, обращению с ними, очистке и дезинфекции. Ваш офтальмолог должен рассказать Вам о правильных подходящих Вам процедурах и изделиях, а также предоставить копию руководства по использованию Линз контактных мягких корригирующих дневного ношения clearday™ BEYOND.

Никогда не следует носить линзы дольше срока, рекомендованного офтальмологом. Для безопасного использования контактных линз следует знать и придерживаться методов ухода за ними:

- Мыть и вытирать руки нужно перед каждым контактом с линзами.
- Для ухода за линзами следует всегда использовать свежие стерильные растворы с неистекшим сроком годности. При использовании стерильных не содержащих консерванты

растворов следует выбрасывать их сразу по истечении срока годности, указанного в маркировке.

- Следует использовать рекомендуемую систему ухода за линзами и тщательно следовать инструкциям, приведенным на этикетке раствора.
- Не всегда можно использовать вместе разные растворы, и не все растворы подходят ко всем линзам. **НЕЛЬЗЯ ЗАМЕНЯТЬ ИЛИ СМЕШИВАТЬ СИСТЕМЫ УХОДА ЗА ЛИНЗАМИ, ЕСЛИ ЭТО ПРЯМО НЕ УКАЗАНО НА МАРКИРОВКЕ РАСТВОРА.**
- Для смазывания и увлажнения линз нельзя пользоваться слюной или чем-либо, кроме рекомендуемых растворов. Не класть линзы в рот.
- Никогда не ополаскивать линзы водопроводной водой по двум причинам:
 - а. Водопроводная вода содержит много примесей, которые могут загрязнить или повредить линзу, что может привести к инфекции или травмированию глаз.
 - б. Линзы могут быть смыты в канализацию или потеряны.
- Систему ухода, подходящую для Линз контактных мягких корректирующих дневного ношения clearday™ BEYOND должен порекомендовать офтальмолог. Каждый продукт для ухода за линзами комплектуется конкретными указаниями по применению и важной информацией по безопасности, с которыми следует ознакомиться и тщательно их придерживаться.
- Следует избегать использования растворов для ухода за обычными жесткими контактными линзами, так как их не рекомендуется использовать для данных линз.
- Начать следует с очистки одной линзы (всегда одной и той же во избежание путаницы). Тщательно ее промыть рекомендуемым раствором для промывки или дезинфекции, чтобы удалить очищающий раствор, слизь и пленки с поверхности линзы. Далее поместить линзу в соответствующий отсек контейнера для хранения линз. Повторить процедуру для второй линзы.
- После очистки продезинфицировать линзы при помощи системы, рекомендованной производителем и/или офтальмологом.
- После дезинфекции хранить линзы в закрытом контейнере до следующего надевания. Если линзы не будут использоваться сразу после дезинфекции, следует ознакомиться с листком-вкладышем или получить у офтальмолога информацию о хранении линз.
- Во время перерыва в использовании необходимо всегда держать линзы полностью погруженными в рекомендуемый раствор для дезинфекции/обработки. Если линзы долгое время остаются сухими, они могут испортиться. Если Вы решили прекратить использование линз, но собираетесь снова их надеть через несколько недель, то следует проконсультироваться с офтальмологом для получения рекомендаций о способе сохранения линз.
- Линзы контактные мягкие корректирующие дневного ношения clearday™ BEYOND можно дезинфицировать при помощи химической (НЕТЕПЛОВОЙ) системы дезинфекции. Необходимо следовать инструкциям и соблюдать указания по длительности, рекомендованные производителем раствора.
- Ваш офтальмолог может порекомендовать подходящий смазывающий/увлажняющий раствор. Смазывающие/увлажняющие растворы могут использоваться для увлажнения (смазки) линз во время их использования, что сделает использование более комфортным.
- Линзы контактные мягкие корректирующие дневного ношения clearday™ BEYOND могут быть прописаны для программы использования с частой плановой заменой. Их необходимо выбрасывать по истечении срока использования, рекомендованного офтальмологом.

ХРАНЕНИЕ ЛИНЗ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕРМЕНТНОГО ОЧИСТИТЕЛЯ

Офтальмолог может порекомендовать использовать ферментную очистку. Ферментная очистка удаляет белки, осевшие на линзах. Эти отложения не могут быть удалены с помощью обычных очистителей. Удаление белковых отложений важно для поддержания хорошего состояния линз и глаз пациента. Если не удалять эти отложения, то они могут повредить линзы и вызвать раздражение глаз. Ферментная очистка НЕ заменяет обычную очистку и дезинфекцию. При проведении ферментной очистки пациент должен тщательно следовать инструкциям, приведенным на этикетках ферментных чистящих средств.

Очистка и обслуживание контейнера для линз

Контейнеры для контактных линз могут являться источником роста бактерий. На линзах могут формироваться колонии бактерий, грибков и других типов вредных микроорганизмов.

После извлечения линзы из контейнера его следует опорожнить и промыть раствором, рекомендованным производителем контейнера, и оставить сушиться. При следующем использовании контейнера снова наполнить его раствором для хранения. Контейнеры для линз следует заменять через равные промежутки времени в соответствии с рекомендациями производителя контейнеров или офтальмолога.

Уход за прилипшей (неподвижной) линзой

При прилипании (неподвижности) линзы следует закапать в глаз 3–4 капли рекомендованного смазывающего или увлажняющего раствора, подождать, пока линза не начнет свободно двигаться, после чего извлечь ее. Если по истечении 15 минут линза остается неподвижной, следует НАМЕДЛЕННО проконсультироваться с офтальмологом.

Уход за высохшей (обезвоженной) линзой

Если по какой-то причине линзы полностью высохли, очень важно обращаться с ними аккуратно, так как в обезвоженном состоянии они очень хрупкие. Аккуратно поместить их в раствор для промывки или хранения и выдержать не менее тридцати минут. После этого линзы снова станут мягкими и гибкими. Затем следует провести процедуры очистки, промывки и дезинфекции и вымочить линзы в растворе для промывки и дезинфекции не менее четырех часов перед тем, как надевать.

Химическая (НЕТЕПЛОВАЯ) дезинфекция

- 1) ПЕРЕД ЛЮБЫМИ МАНИПУЛЯЦИЯМИ С ЛИНЗАМИ следует тщательно вымыть руки.
- 2) После извлечения линзы ОЧИСТИТЬ ее, нанеся по три капли очистителя на каждую из поверхностей. Затем потереть линзу между пальцами в течение 20 секунд.
- 3) ПОСЛЕ ОЧИСТКИ тщательно промыть обе поверхности линзы под струей свежего стерильного промывочного раствора в течение примерно 10 секунд.
- 4) Заполнить контейнер для линз рекомендуемым раствором для дезинфекции и хранения и положить линзы в соответствующие отсеки не менее чем на 4 часа. Необходимо следовать инструкциям и соблюдать указания по длительности, рекомендованные производителем раствора.

Примечание: НЕЛЬЗЯ НАГРЕВАТЬ РАСТВОР ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И САМИ ЛИНЗЫ.

Внимание! Линзы, подвергающиеся химической дезинфекции, могут абсорбировать ингредиенты дезинфицирующего раствора, что может вызвать раздражение глаз. Перед надеванием линзы ее нужно тщательно прополоскать в свежем стерильном промывочном растворе, что снизит вероятность раздражения.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

При попадании в глаза каких-либо химических веществ любого рода (бытовая химия, растворы для садово-огородных работ, лабораторные химикаты и т.д.) необходимо **НЕМЕДЛЕННО ПРОМЫТЬ ГЛАЗА ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДОЙ И КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ ОБРАТИТЬСЯ К ОФТАЛЬМОЛОГУ ИЛИ В ОТДЕЛЕНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНИЦЫ.**

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ОБРАЩАТЬСЯ К ВРАЧУ

Некоторые симптомы могут быть ранними признаками возможных серьезных проблем. Может потребоваться тщательная проверка линз и профессиональное обследование глаз. Снять линзы, следуя инструкциям, приведенным в данном руководстве. Обращаться к офтальмологу

необходимо в следующих случаях:

- 1) Наблюдается покраснение глаз, ощущаются раздражение и шероховатость.
- 2) Отмечаются изменения зрения, видны радуги или ореолы вокруг объектов.
- 3) Чувствуется дискомфорт и/или возросла чувствительность к свету.

Всегда нужно следовать принципу:

«В СЛУЧАЕ СОМНЕНИЙ СНЯТЬ ЛИНЗЫ» и обратиться к офтальмологу.

Правила ухода за линзами:

- 1) Следовать инструкциям.
- 2) Правильно обращаться с линзами.
- 3) Выучить, как надевать и снимать линзы.
- 4) Поддерживать чистоту линз.
- 5) Дезинфекция обеспечивает безопасность.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО СПОСОБУ МОНОВИДЕНИЯ

- У способа моновидения, как у любого другого способа коррекции зрения с помощью линз, есть преимущества и недостатки. Преимущества четкого ближнего зрения, если смотреть прямо и вверх, могут сопровождаться ухудшением зрения – снижением его остроты и глубины восприятия на расстоянии и вблизи. Некоторым пациентам сложно адаптироваться к моновидению. Во время адаптации такие симптомы, как слегка затуманенное зрение, головокружение, головная боль и ощущение небольшого дисбаланса могут присутствовать от нескольких минут до нескольких недель. Чем дольше продолжаются эти симптомы, тем хуже прогноз на успешную адаптацию. На начальном этапе адаптации следует избегать сложных для зрения ситуаций. Рекомендуется в первый раз надевать такие контактные линзы в знакомой обстановке, где для зрения нет сложных задач. Например, в течение первых нескольких дней использования линз лучше быть пассажиром, а не водителем автомобиля. Рекомендуется водить автомобиль, используя моновидение, только после того, как Вы будете соответствовать государственным требованиям, предъявляемым к водителям, использующим моновидение.
- Некоторые пациенты никогда не будут абсолютно уверенно чувствовать себя при низком уровне освещенности, например, при вождении ночью. В таких случаях следует обратиться к офтальмологу, чтобы он прописал дополнительные контактные линзы, которые бы корректировали дальнее зрение обоих глаз тогда, когда Вам требуется острое дальнее бинокулярное зрение.
- Если Вам требуется очень острое ближнее зрение на длительные периоды работы, следует обратиться к офтальмологу, чтобы он прописал дополнительные контактные линзы, которые бы корректировали ближнее зрение обоих глаз тогда, когда Вам требуется острое ближнее бинокулярное зрение.
- Некоторым пациентам, использующим моновидение, требуются дополнительные очки, которые надеваются вместе с линзами для моновидения с целью обеспечения особенно четкого зрения при решении крайне важных задач. Следует обсудить такую возможность с офтальмологом.
- Важно соблюдать рекомендации офтальмолога по адаптации к контактным линзам с моновидением. Обязательно задайте врачу все вопросы, которые у Вас возникнут во время и по истечении периода адаптации.
- Решение о том, подходит ли Вам моновидение, лучше всего оставлять за офтальмологом, который рассмотрит и учтет все Ваши потребности.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ УХОДА ЗА ЛИНЗАМИ

Для удаления слизи, пленок и отложений на поверхности линз их нужно очищать. **Промывка** удаляет все остатки очистителя и мусора. **Дезинфицирование** необходимо для уничтожения вредных микроорганизмов.

Систему ухода, подходящую для Линз контактных мягких корригирующих дневного ношения clearday BEYOND должен порекомендовать офтальмолог. Каждый продукт для ухода за линзами комплектуется конкретными указаниями по применению и важной информацией по безопасности, с которыми следует ознакомиться и тщательно их придерживаться.

Тепловая дезинфекция НЕ ИСПЫТЫВАЛАСЬ и НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАСПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Для обеспечения безопасного и успешного использования контактных линз рекомендуется профессиональная поддержка. В случаях ощущения дискомфорта, снижения зрения, инъекций склеры или отека роговицы линзы следует снять и немедленно обратиться к офтальмологу. Проблема может быть решена корректировкой расписания использования или путем повторного подбора линз.

Пациентам, которые никогда не носили контактные линзы, рекомендуется предписывать расписание использования с постепенным увеличением количества часов использования в течение нескольких дней. Это обеспечит более плавную адаптацию тканей глаза к использованию контактных линз. Важно не превышать рекомендованное время использования. Также очень важно регулярно проходить осмотры в соответствии с расписанием, установленным офтальмологом. Обычно рекомендуется ежедневно обходиться без линз минимум 6 часов (т.е. 6 часов из каждых 24 часов). Максимальное предполагаемое время использования Линз контактных мягких корригирующих дневного ношения clearday BEYOND указано ниже.

ДЕНЬ	1	2	3	4	5	6
ЧАСЫ	6	8	10	12	14	Все время бодрствования

ЧАСТАЯ / ПЛАНОВАЯ ЗАМЕНА

Рекомендуется выбрасывать и заменять Линзы контактные мягкие корригирующие дневного ношения clearday BEYOND каждые 30 дней.

Если линзы снимаются между периодами замены, перед повторным надеванием их необходимо очищать и дезинфицировать или же выбрасывать и использовать новые линзы.

Пациенты должны соблюдать расписание замены линз, составленное офтальмологом на основании их потребностей и психологического состояния.

Исследования на предмет того, безопасны ли Линзы контактные мягкие корригирующие дневного ношения clearday BEYOND при использовании во время сна, не проводились.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. Если Вы испытываете трудности при использовании линз или же не понимаете предоставленные Вам инструкции, НЕ ЖДИТЕ следующего визита. СВЯЖИТЕСЬ С ОФТАЛЬМОЛОГОМ НЕМЕДЛЕННО.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Краткая спецификация материала Авефилкон А и физических свойств мягких контактных линз из Авефилкона А

Наименование материала линз	Авефилкон А (Avefilcon A)
Длительность эксплуатации	Дневное ношение, ежемесячная замена
Технология изготовления	Литьевое формование

Конфигурация линзы	Сферическая, торическая	
Срок хранения	5 лет	
Свойства*		
Свойство	Номинальное значение	Предельное отклонение
Проницаемость для кислорода (Dk)) при 35 °C	88x10 ⁻¹¹ (см²/с)(млO₂/мл.мм рт. ст.)	±20%
Содержание воды	60%	±2%
Светопропускание	95%	±5%

Основные параметры: Линзы clearday BEYOND (Сферической)

Основные параметры линзы	Номинальное значение	Предельное отклонение	Интервал
Общий диаметр $D_{общ}$, мм (Диаметр хорды, мм)	12,00–15,00	± 0,20	0,4
Радиус кривизны задней центральной оптической зоны r_0 , мм (Базовая кривизна, мм)	7,80–10,00	± 0,20	0,4
Толщина в геометрическом центре t_c , мм	0,07 при -3,00 D		рассчитывается в зависимости от значения t_c
Задняя вершинная рефракция F_v , дптр (Оптическая сила, D)	от -12,00 до +6,00	± 0,20	0,25D (в диапазоне от -6,00D до +6,00D); 0,5D (в диапазоне от -6,50D до -12,00D)
Масса линзы (во влажном состоянии), г	От 0,04 г до 0,05 г (в зависимости от оптической силы)		
Масса блистера с линзой и раствором, г	5,5	± 0,02	

Основные параметры Линзы clearday BEYOND Торической

Основные параметры линзы	Номинальное значение	Предельное отклонение	Интервал
Общий диаметр $D_{общ}$, мм (Диаметр хорды, мм)	12,00 – 15,00	± 0,20	0,4
Радиус кривизны задней центральной оптической зоны r_0 , мм (Базовая кривизна, мм)	7,8 – 10,0	± 0,20	0,4
Толщина в геометрическом центре t_c , мм	0,099 при -3,00 D	если $t_c \leq 0,10$ мм - $\pm[0,010$ мм + $0,10t_c]$ если $t_c > 0,10$ мм - $\pm[0,015$ мм + $0,05t_c]$	рассчитывается в зависимости от значения t_c
Задняя вершинная рефракция		± 0,25 ≤ ±	0,25D (в диапазоне

F_v , дптр (Оптическая сила, D)	от -8,00 до +4,00	10,00 $\pm 0,50 > \pm 10,00$	от -6,00 D до +4,00 D); 0,5D (в диапазоне от -8,00D до -8,50D и от -8,00D до -8,50D)
Цилиндр, D	от -0,75 до -2,25	$\pm 0,25 \leq -2,00$ $\pm 0,37 \geq -2,00$	0,5D
Ось цилиндра, °	От 10° до 180° с шагом 10°	$\pm 5^\circ$	10°
Масса линзы (во влажном состоянии), г	От 0,04 г до 0,05 г (в зависимости от оптической силы)		
Масса блистера с линзой и раствором, г	5,5	$\pm 0,02$	

Состав материала Авефилкон А

Аббревиатура компонента	Материал	Соотношение* компонентов на 1 грамм (%)
GMMA	2,3-дигидроксипропил метакрилат	4,35
GMMA-Dimer	2-гидрокси-1,3-пропандиол диметакрилат-	0,18
EGDMA	этилен-диметакрилат	0,64
MAA	2-Метилпропионовая кислота	0,39
SIGMA	2-Пропионовая кислота, 2-метил-, 2-гидрокси-3-[3-[1,3,3,3-тетраметил-1-[(триметилсилил)окси]дисилоксанил]пропокси]пропилового эфира	16,44
MCR	монометакрилоксипропил терминьный полидиметилсилоксан	4,56
Me-PEG-MA	Полиэтиленгликоль метакрилат метилового эфира	6,21
NVP	Винилпирролидон	42,11
PVP	Поливинилпирролидон	9,29
PDMS	монометакрилоксипропил функциональный политрифлуоропропилметилсилоксанб симметричный	15,14
Pluronic F127	Поли(этиленоксид-со-Полипропиленоксид)	0,07
Luperox	1,1-Бис(терт-амилперокси)циклогексан	0,23
Daracur 1173/Irgacur 1173	2-Гидрокси-2-метилпропиофенон	0,20
Irgacur 819	Фенилбис (2,4,6-триметилбензоил) Фосфин оксид	0,15
RB19	Reactive Blue 19	0,02

Упаковка

Мягкие контактные линзы, выполненные из Авефилкона А, поставляются как стерильное изделие в барьерной системе стерильности (первичной упаковке), которая соответствует требованиям BS EN ISO 11607-01 «Упаковка медицинских изделий, подлежащих финишной стерилизации. Часть 1. Требования к материалам, барьерным системам для стерилизации и упаковочным системам»:

- Блистерная оболочка состоит из медицинского полипропилена.
- Фольга для этикетки представляет собой фольгу, ламинированную алюмином.

с. Упаковочный физиологический раствор: фосфатно-солевой буферный раствор, в котором отсутствуют механические примеси.

Состав упаковочного фосфатно-солевого буферного раствора:

Компонент	%
Натрия дигидроген фосфат моногидрат	0,035 – 0,055
Ди-натрия гидроген фосфат гептагидрат	0,40 – 0,65
Хлорид натрия	0,75 – 1,00
Плюроник F-127 (блок-сополимер полиоксизтилена и полиоксипропилена)	0,04 – 0,07
Поливинилпирролидон (PVP)	0,80 – 1,10
Очищенная вода	97,00 – 98,50

pH раствора 7.30 – 7.50.

Объем блистера – 3,0 мл; $\pm 0,015$ мл

Объем раствора в блистере – 2,20 мл $\pm 0,011$ мл

Габаритные размеры первичной упаковки (блистера) для линз, выполненных из Авефилкона А составляют:

(д х ш х в): 55,0 мм ($\pm 0,2$ мм) х 328,0 мм ($\pm 0,2$ мм) х 11,0 мм ($\pm 0,2$ мм)

Толщина фольги блистера 0,16 мм $\pm 0,01$ мм

Плотность Полипропилена 0,90 – 0,91 г/см³

Вторичная упаковка представляет собой картонную коробку.

После стерилизации линзы в блистерах помещаются во вторичные картонные упаковки в количестве 6 линз.

Габаритные размеры вторичной упаковки (картонной коробки) для мягких контактных линз, выполненных из материала Avefilcon A составляют:

(д х ш х в): 107,0 мм ($\pm 1,0$ мм) х 64,0 мм ($\pm 1,0$ мм) х 15,0 мм ($\pm 1,0$ мм).

Масса коробки с 6 линзами и Инструкцией по применению 37.96 г $\pm 0,19$ г

Комплект поставки

Линзы поставляются в картонных коробках, содержащих 6 блистеров. Каждая линза находится в фосфатно-солевом буферном растворе в первичной упаковке (блистере). Инструкция по применению (листок вкладыш) вложена в коробку.

МАРКИРОВКА

На первичной стерильной упаковке (на лейбле блистера) изделия указана следующая информация:

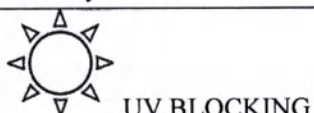
- Наименование изделия

- Материал линзы
- Задняя вершинная рефракция (PWR)
- Дата истечения срока годности
- Номер лота
- Защита от ультрафиолетового излучения
- Не для индивидуальной перепродажи

На вторичной картонной упаковке изделия указана следующая информация:

- Наименование изделия
- Материал линзы
- Задняя вершинная рефракция (PWR)
- Общий диаметр (DIA)
- Радиус кривизны задней центральной оптической зоны (BC)
- Количество линз в упаковке
- Дата истечения срока годности
- Номер лота
- Защита от ультрафиолетового излучения
- Левая/правая

На вторичной картонной упаковке дополнительно используются следующие символы:

Символ	Обозначение
	обозначает производителя медицинского изделия
	указывает, что изделие соответствует требованиям Европейской Директивы по Медицинским Изделиям 93/42/ЕЕС
	указывает дату, после которой медицинское изделие нельзя использовать
	указывает на стерилизацию медицинского изделия паром или сухим нагреванием
	указывает на необходимость изучения пользователем инструкций по применению
	указывает номер партии при производстве, позволяющий установить номер партии или серии
RXOnly	продажа только по рецепту
	УФ защита
	Апирогенно

**Проект маркировки на
Линзы контактные мягкие корректирующие дневного ношения
clearday BEYOND сферические**

Наименование: мягкие контактные линзы Clearday BEYOND.

Предназначение: для контактной коррекции зрения.

Режим ношения: дневное ношение, ежемесячная замена.

Состав: 6 линз (40% авефилкон А, 60% вода) в буферном соляном растворе. Подкрашены для простоты обращения.

Меры предосторожности/Предупреждения: хранить при комнатной температуре, хранить в недоступном для детей месте, не использовать при нарушении целостности блистера, не использовать при истечении срока годности, не использовать повторно, линзы отпускаются по рецепту врача офтальмолога.

Срок годности: 5 лет с даты изготовления. Ежедневная очистка и хранение в растворе для мягких контактных линз. Инструкция: спрашивайте у врача офтальмолога.

Значение символов на упаковке: BC-радиус базовой кривизны; DIA-диаметр; PWR +/- xx.xx – сила линз;

 - срок годности;  - стерильно (тепловая стерилизация);  only - по рецепту врача;

 - производитель; - номер серии;  UV BLOCKING -УФ защита; Апиrogenно; Хранить при температуре от +5°C до 40°C и

влажности не более 90%; - номер серии; - ознакомьтесь с Инструкцией по применению

Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: ООО «Офтверм-Логистик», 117105,

г. Москва, ул. Нагатинская, дом 1, стр. 2, этаж цоколь, офис 1 / тел. 8 (499) 404-36-46 / info@fere.ru

Производитель: Clearlab SG Pte. Ltd.-139 Joo Seng Road, Singapore 368362, www.clearlab.com / Представитель в ЕС: Clearlab Europe Ltd-Unit45 Easter Park, Benyon Road, Aldermaston, Berkshire RG7 2PQ, UK

**Проект маркировки на
Линзы контактные мягкие корректирующие дневного ношения
clearday BEYOND торические**

Наименование: мягкие контактные линзы Clearday BEYOND Toric.

Предназначение: для контактной коррекции зрения.

Режим ношения: дневное ношение, ежемесячная замена.

Состав: 6 линз (40% авефилкон А, 60% вода) в буферном соляном растворе. Подкрашены для простоты обращения.

Меры предосторожности/Предупреждения: хранить при комнатной температуре, хранить в недоступном для детей месте, не использовать при нарушении целостности блистера, не использовать при истечении срока годности, не использовать повторно, линзы отпускаются по рецепту врача офтальмолога.

Срок годности: 5 лет с даты изготовления. Инструкция: спрашивайте у врача офтальмолога.

Значение символов на упаковке: BC-радиус базовой кривизны; DIA-диаметр; D +/- xx.xx – сила линз;

CYL – цилиндр; AXIS – ось (°);  - срок годности;  - стерильно (тепловая стерилизация);  only - по рецепту врача;  -

производитель;  UV BLOCKING -УФ защита; Апиrogenно Хранить при температуре от +5°C до 40°C и влажности не более 90%;

- номер серии; - ознакомьтесь с Инструкцией по применению

Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: ООО «Офтверм-Логистик», 117105,

г. Москва, ул. Нагатинская, дом 1, стр. 2, этаж цоколь, офис 1 / тел. 8 (499) 404-36-46 / info@fere.ru

Производитель: Clearlab SG Pte. Ltd.-139 Joo Seng Road, Singapore 368362, www.clearlab.com / Представитель в ЕС: Clearlab Europe Ltd-Unit45 Easter Park, Benyon Road, Aldermaston, Berkshire RG7 2PQ, UK

ТРАНСПОРТИРОВКА

Контактные линзы можно перевозить при температурах от -50°C до +45°C.

Кратковременные отклонения от указанного интервала температур не оказывают значительного эффекта на стабильность изделия.

Целостность упаковки сохраняется при обычных процедурах погрузки и транспортировки, сохраняя стерильность изделия.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура - от +1°C до +45°C

Влажность 100% (линзы омываются слезной жидкостью)

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Контактные линзы, выполненные из материала Авефилкон А, рекомендуется хранить при температурах от +5°C до +40°C, влажность не более 90%, при которых стабильность и целостность продукта гарантирована.

Кратковременные отклонения от указанного интервала температур не оказывают значительного эффекта на стабильность изделия.

Срок годности линз: 5 лет.

УТИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отходы, образующиеся при применении мягких контактных линз, не классифицируются как опасные отходы согласно Приложению III Европейской Директивы 91/689/ЕЕС от 12 декабря 1991 «Об опасных отходах» в соответствии с перечисленными опасностями H1-H14.

С точки зрения эпидемиологической безопасности, отходы классифицируются в соответствии с классификационной системой, документированной в решении Европейской Комиссии от 03 мая 2000 2000/532/ЕС:

класс опасности:

18 01 04 – безопасные отходы, для которых не требуется специальная система сбора и утилизации с точки зрения предотвращения распространения инфекций.

По составу отходы от данного продукта приближены к твердым бытовым отходам (класс А по СанПиН 2.1.7.2790-10), и должны утилизироваться в соответствии с любыми применимыми локальными/национальными стандартами по утилизации отходов.

При использовании, транспортировке и хранении изделия не оказывают негативного воздействия на человека и окружающую среду.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует качество изделий в течение всего срока годности при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок годности изделий – 5 лет..

РЕКЛАМАЦИИ

На территории России все обращения следует направлять по адресу:

ООО «ОФТАДЕРМ-ЛОГИСТИК», 117105, г. Москва, ул. Нагатинская, дом 1, стр. 2, этаж цоколь, офис 1 / тел. 8 (499) 404-38-48 / info@oftaderm.ru



QR-код: NC0K1S050B

НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ВСЕМ, кого это может касаться:

**Я, Оу Ви Чонг Николас, ПУБЛИЧНЫЙ НОТАРИУС, должным образом
назначенный, уполномоченный на ведение дел в Республике Сингапур,
НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО
Прикрепленный Титульный лист от 19 февраля 2020 г. был заверен Кэрол Ли,
компания Clearlab SG Pte Ltd / Клиалаб СГ Пте Лтд.**

**В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕГО я, вышеупомянутый нотариус, ставлю свою подпись и
печать офиса в Сингапуре сегодня, 4 марта 2020 г.**

**/Подпись/
ПУБЛИЧНЫЙ НОТАРИУС
СИНГАПУР**

**Тисненая печать: ПУБЛИЧНЫЙ НОТАРИУС / РЕСПУБЛИКА СИНГАПУР
Печать нотариуса: Публичный нотариус / Оу Ви Чонг Николас / № 2019/0013 / 1
апреля 2019 г. – 31 марта 2020 г. / Сингапур**

**В соответствии с Правилom 8(3)(с) Закона о Публичных Нотариусах,
нотариальное свидетельство должно быть заверено Сингапурской
Юридической Академией, чтобы быть действительным.**

SAL Сингапурская Юридическая Академия

Для проверки подлинности настоящего Свидетельства Подлинности перейдите по адресу: [Legalisation.sal.sg](https://legalisation.sal.sg) или отсканируйте QR-код:



Код верификации: 90740274

Свидетельство подлинности подтверждает только подлинность подписи и должность лица, подписавшего Нотариальное Свидетельство.
Настоящее Свидетельство подлинности недействительно, если печать Сингапурской Юридической Академии удалена или изменена каким-либо образом.
Настоящее Свидетельство не заверяет или не подтверждает содержания Документа, который относится к прикрепленному Нотариальному Свидетельству.

Свидетельство

1. Страна: Сингапур

Настоящий официальный документ

2. был подписан: Оу Ви Чонг Николас

3. выступающим в качестве: публичного нотариуса

4. носит печать: публичного нотариуса

Заверено

5. Свидетельство подлинности № AC0K1S0EBH

6. В Сингапурской Юридической Академии

7. 4 марта 2020 г.

8. Мелиссой Го, заместителем директора, SAL

9. Сертификационная печать SAL: Сингапурская Юридическая Академия

10. Подпись: (/Подпись/)

Допущено:

Представитель менеджмента качества

Дата: 19 февраля 2020 г.

/Подпись/

Имя ответственного лица: Кэрол Ли

Инструкция по применению:

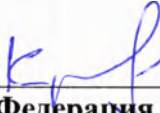
«Линзы контактные мягкие корректирующие дневного ношения clearday BEYOND»

Производства:

Clearlab SG Pte. Ltd. / Клиалаб СГ Пте. Лтд., Сингапур

/Подпись/

Печать нотариуса: Публичный нотариус / Оу Ви Чонг. Николас / № 2019/0013 / 1
апреля 2019 г. – 31 марта 2020 г. / Сингапур


Российская Федерация

Город Москва.

Двадцатого августа две тысячи двадцатого года.

Я, Прокошенкова Елена Евгеньевна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Краплина Дениса Александровича.

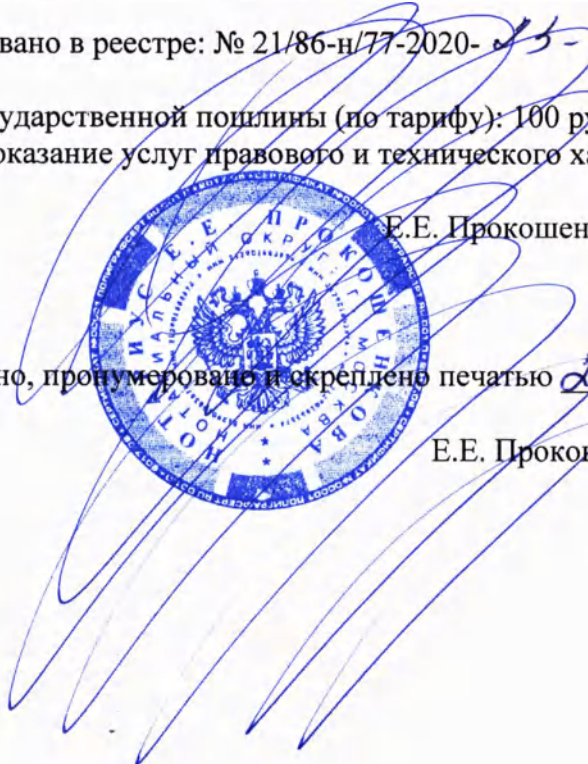
Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 21/86-н/77-2020- 25-6952

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 300 руб. 00 коп.


Е.Е. Прокошенкова

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 21 лист(-а,-ов)

Е.Е. Прокошенкова

