

Образец маркировки медицинского изделия

Питательная среда для бактериологических исследований «Колумбийский агар сухой»

по ТУ 20.59.52-307-78095326-2018

СОСТАВ, г/л:

Панкреатический гидролизат
казеина сухой10,0
Дрожжевой экстракт5,0
Пептон мясной5,0
Натрий хлористый5,0
Крахмал растворимый1,0
Агар бактериологический12,0±2,0

pH 7,0-7,4

Хранить в герметично закрытой упаковке в
сухом защищенном от света месте при тем-
пературе от 2 до 30 °С.

РУ №



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

ФБУН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ПРИКЛАДНОЙ МИКРОБИОЛОГИИ
И БИОТЕХНОЛОГИИ

**Питательная среда
для бактериологических исследований**

«Колумбийский агар сухой»

по ТУ 20.59.52-307-78095326-2018

142279 Московская обл., г.о. Серпухов,
р.п. Оболенск, тер. «Квартал А», д.10, стр. 1
(4967) тел. / факс 36-00-16, 36-00-20
E-mail: info@obolensk.org

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Колумбийского агара размешать в 1 л дистил-
лированной воды, нагреть до кипения, стерилизовать
в автоклаве при температуре 121 °С в течение 15 мин.
Среду охладить до температуры 45-50 °С и разлить
по (20±5) мл в стерильные чашки Петри.

Для приготовления кровяного агара в охлажденный
Колумбийский агар добавить 50,0 мл/л стерильной
бараньей дефибрированной крови, взболтать без
образования пены и разлить по (20±5) мл в стериль-
ные чашки Петри.

Только для in vitro диагностики.

Дополнительная информация приведена
в инструкции по применению.

Серия

Дата изготовления....

Годен до:.....

Масса нетто **250 г**

Этикетка на банку со средой

Директор ФБУН ГНЦ ПМБ




/И.А. Дятлов /

Фотоизображение медицинского изделия

Питательная среда для бактериологических исследований «Колумбийский агар сухой»

по ТУ 20.59.52-307-78095326-2018

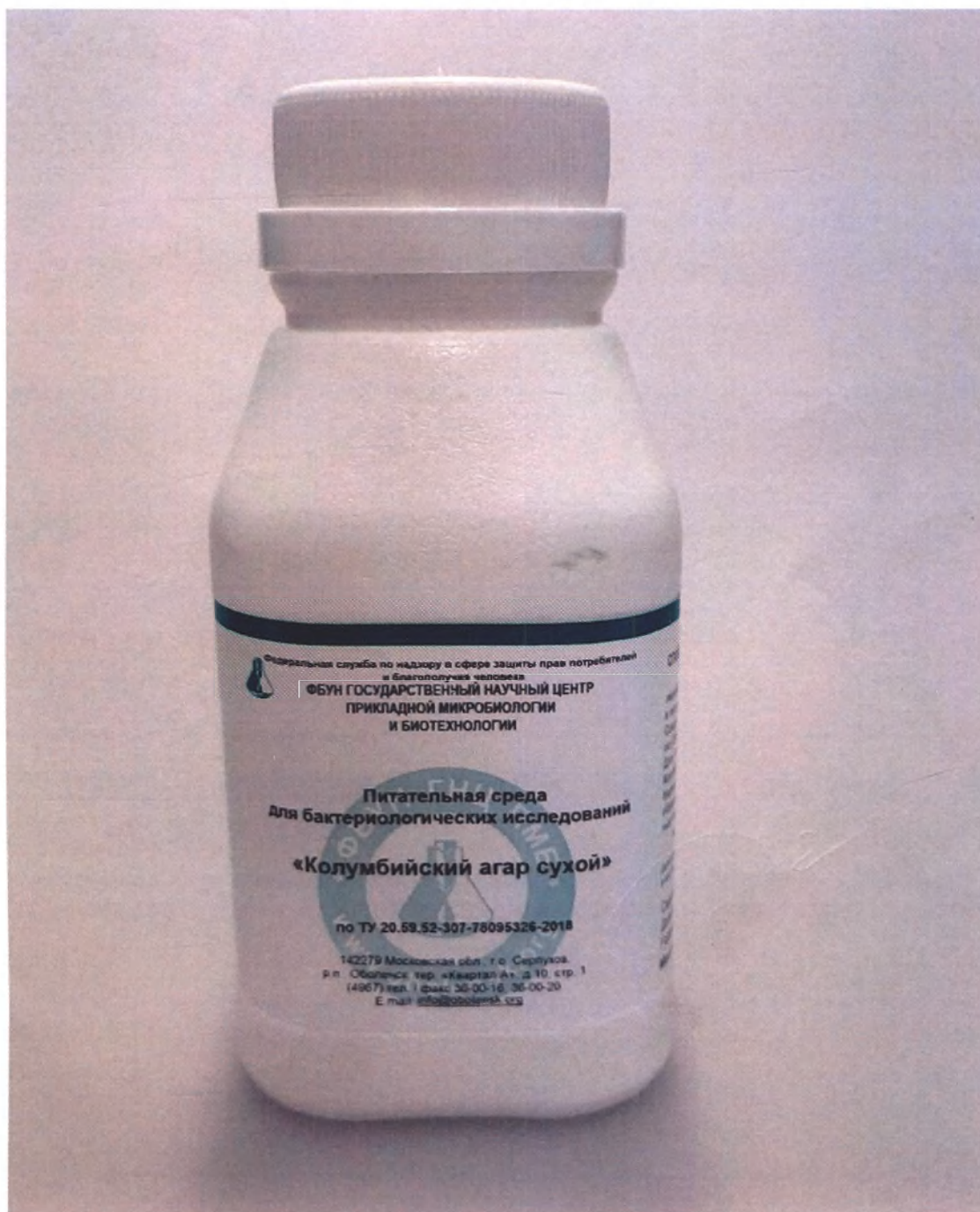

Общий вид

Директор ФБУН ГНЦ ПМБ



/И.А. Дятлов /