

Хранить при температуре 2–30 °С. Не замораживать!
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием.
Для учреждений здравоохранения


Био Трейсер ВИЧ Комбо Ag/Ab

Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения
антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы 0, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах
сыворотки, плазмы или цельной крови человека



Для проведения диагностики in vitro • набор 30 тестов

Для проведения диагностики in vitro • набор 30 тестов

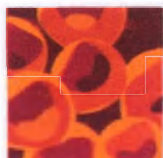

Набор реагентов

Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения
антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы 0, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах
сыворотки, плазмы или цельной крови человека

Био Трейсер ВИЧ Комбо Ag/Ab

Хранить при температуре 2–30 °С. Не замораживать!
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Комплект №1

Состав:

- тест-кассета: 30 шт

- флакон с концентратом полимерной в компарте с концентратом калийной цитратной и

Био Трейсер



Тест-система
Био Трейсер

ВИЧ Комбо Ag/Ab
30 тестов

Изготовитель:
ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва,
Тихая, д. 28, оф. 216.
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-8
www.biofocus.ru

Для проведения диагностики in vitro • набор 30 тестов



Набор реагентов

Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы 0, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека

Био Трейсер ВИЧ Комбо Ag/Ab

Для учреждений здравоохранения

Хранить при температуре 2–30 °С. Не замораживать!
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием

Био Трейсер



Тест-система
Био Трейсер

ВИЧ Комбо Ag/Ab
30 тестов

Изготовитель:
ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва,
Тихая, д. 28, оф. 216.
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-8
www.biofocus.ru



Для учреждения здравоохранения
Хранить при температуре 2–30 °С. Не замораживать!
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием

Био Трейсер ВИЧ Комбо Ag/Ab

Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения
антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах
сыворотки, плазмы или цельной крови человека



Для проведения диагностики in vitro • набор 30 тестов

Для проведения диагностики in vitro • набор 30 тестов

Набор реагентов

Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения
антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах
сыворотки, плазмы или цельной крови человека

Био Трейсер ВИЧ Комбо Ag/Ab

Хранить при температуре 2–30 °С. Не замораживать!
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Комплект №2

Состав:

- тест-кассета: 30 шт
- флакон-капельница полимерный в комплекте с крышкой навинчиваемой и пробкой-капельницей, содержащий буферный раствор - 1 шт
- одноразовая пипетка для образца: 30 шт
- инструкция по применению: 1 шт

Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва, Тихая, д. 28, оф. 216.
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru

Серия номер: 02
Дата выпуска: 07.2021
Годен до: 07.2023

РУ №
ТУ 21.20.23-007-15580960-2019



Для проведения диагностики in vitro • набор 30 тестов



Набор реагентов

Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы 0, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека

Био Трейсер ВИЧ Комбо Ag/Ab

Для учреждений здравоохранения

Хранить при температуре 2–30 °С. Не замораживать!

Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием

Био Трейсер



Тест-система
Био Трейсер

ВИЧ Комбо Ag/Ab
30 тестов

Изготовитель:
ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва,
Тихая, д. 28, оф. 216.
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru

Био Трейсер



**Тест-система
Био Трейсер**

**ВИЧ Комбо Ag/Ab
30 тестов**

Изготовитель:
ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва,
Тихая, д. 28, оф. 216.
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
_____ листов
Генеральный директор
«БИО ФОКУС» Козлов К.В.



Для проведения диагностики in vitro • набор 30 тестов



Набор реагентов

Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека

Био Трейсер ВИЧ Комбо Ag/Ab

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!
Пожалуйста прочтите инструкцию по применению перед использованием


ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Комплект №2

Состав:

- тест-кассета: 30 шт
- флакон-капсулированный полимерный в комплекте с крышечкой навинчиваемой и пробой-напильником, содержащий буферный раствор - 1 шт
- одноразовая пипетка для образцов: 30 шт
- инструкция по применению: 1 шт

Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва, Тихая, д. 28, оф. 216
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru

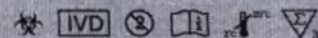

Серия номер: 10
Дата выпуска: 07.2020
Годен до: 07.2022

РУ №
ТУ 21.20.23-007-15580960-2019

Для проведения диагностики in vitro • набор 30 тестов



Набор реагентов

Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека

Био Трейсер ВИЧ Комбо Ag/Ab

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!
Пожалуйста прочтите инструкцию по применению перед использованием

Инструкция по применению
Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека

Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека

Состав:
- тест-кассета: 30 шт
- флакон-капсулированный полимерный в комплекте с крышечкой навинчиваемой и пробой-напильником, содержащий буферный раствор - 1 шт
- одноразовая пипетка для образцов: 30 шт
- инструкция по применению: 1 шт

Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва, Тихая, д. 28, оф. 216
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru

Серия номер: 10
Дата выпуска: 07.2020
Годен до: 07.2022




РУ №
ТУ 21.20.23-007-15580960-2019

Тест-кассета | Для проведения диагностики in vitro

Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва, Тихая, 28, оф. 216
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru

Тест-кассета | Для проведения диагностики in vitro
Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва, Тихая, 28, оф. 216
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!

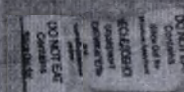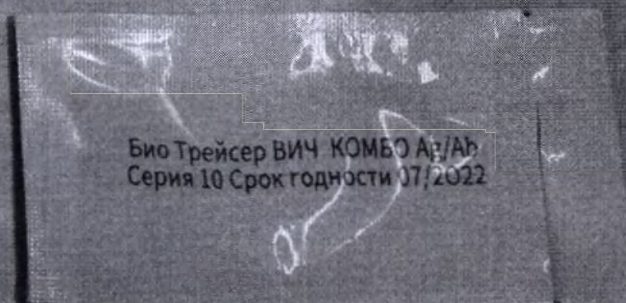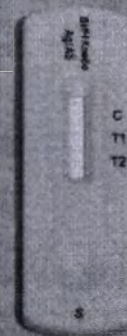

Для проведения диагностики in vitro - набор 30 тестов



Набор реагентов

Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека

Био Трейсер ВИЧ Комбо Ag/Ab

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!
Пожалуйста прочтите инструкцию по применению перед использованием

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Комплект №2


Состав:

- тест-кассета - 30 шт
- флакон-капельница полимерный в комплекте с крышкой навинчиваемой и пробкой-капельницей, содержащий буферный раствор - 1 шт
- одноразовая лопатка для образца - 30 шт
- инструкция по применению - 1 шт

Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва, Тихая, д. 28, оф. 216.
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru

Серия номер: 10
Дата выпуска: 07.2020
Годен до: 07.2022

РУ №
ТУ 21.20 23-007-15580960-2019

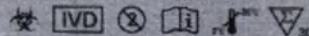

Для проведения диагностики in vitro - набор 30 тестов



Набор реагентов

Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека

Био Трейсер ВИЧ Комбо Ag/Ab

Детализированный информационный лист

Получите больше информации о продукте на нашем сайте: www.biofocus.ru

Краткая инструкция по применению
Набор реагентов «Био Трейсер ВИЧ Комбо Ag/Ab» предназначен для качественного определения антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека.

Состав:
- тест-кассета - 30 шт
- флакон-капельница полимерный в комплекте с крышкой навинчиваемой и пробкой-капельницей, содержащий буферный раствор - 1 шт
- одноразовая лопатка для образца - 30 шт
- инструкция по применению - 1 шт

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!
Пожалуйста прочтите инструкцию по применению перед использованием

Инструкция по применению

1. Подготовка образца
2. Подготовка тест-кассеты
3. Проведение диагностики
4. Интерпретация результатов

1. Подготовка образца
2. Подготовка тест-кассеты
3. Проведение диагностики
4. Интерпретация результатов

1. Подготовка образца
2. Подготовка тест-кассеты
3. Проведение диагностики
4. Интерпретация результатов

Тест-кассета | Для проведения диагностики in vitro

Изготовитель: ООО «Био Фокус»

РФ, 109387, Москва, Тихая, 28, оф. 216

Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84

Тест-кассета | Для проведения диагностики in vitro


Изготовитель: ООО «Био Фокус»

РФ, 109387, Москва, Тихая, 28, оф. 216

Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84

www.biofocus.ru

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!

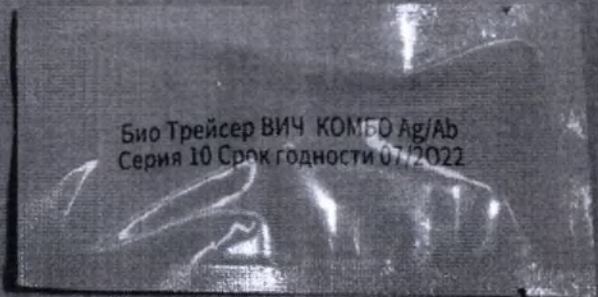

Био Трейсер ВИЧ КОМБО Ag/Ab
Серия 10 Срок годности 07/2022

О "Био Фокус"
сер ВИЧ Комб
ный раствор 3.0
10 07 2022
2

Набор реактивов
Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения
антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы 0, ВИЧ-2 типа 0, ВИЧ-2 типа 1 и обратная
серология, плазмы или цельной крови человека

Бюо Трейсер Вич Комбо Аг/Аб


Хранить при температуре 2-20°С. Не замораживать.
Применять для анализа интерпретируемого по прилагаемой схеме иммунохроматографического теста.
Для ПРОБЕБНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

- Состав:
- тест-карты: 30 шт.
 - флакон-картридж: 1 шт.
 - флакон-картридж: 1 шт.
 - флакон-картридж: 1 шт.
 - инструкция по применению: 1 шт.

Серия номер: 09
Дата выпуска: 07.2020
Годен до: 07.2022

ВН №
Т/21-20/23-03/1559999/2019

Импортирует ООО «Сирми»
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 12, стр. 200
Тел: +7 (495) 6 910 203
E-mail: info@cirmi.ru

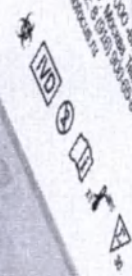

Для проведения исследования in vitro • набор 30 тестов

Набор реактивов
Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения
антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы 0, ВИЧ-2 типа 0, ВИЧ-2 типа 1 и обратная
серология, плазмы или цельной крови человека

Бюо Трейсер Вич Комбо Аг/Аб

Хранить при температуре 2-20°С. Не замораживать.
Применять для анализа интерпретируемого по прилагаемой схеме иммунохроматографического теста.
Для ПРОБЕБНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



Тест-кассета | Для проведения in vitro диагностики
Исполнитель: ООО «Био Трекер»
РФ, 109387, Москва, Тихая, 28,
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Набора реагентов

«Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 группы О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека»
«БиоТрекер ВИЧ Комбо Ag/Ab»

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 группы О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека» «БиоТрекер ВИЧ Комбо Ag/Ab» предназначен для «качественного» однократного выявления антител к ВИЧ-1 типа, ВИЧ-1 группы О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы, цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа (ИХА) с целью диагностики ВИЧ-инфекции.

Для однократного применения набора по назначению.

Для клинической лабораторной диагностики in vitro.

Потенциальные потребители изделия

Лабораторные подразделения лечебно-профилактических учреждений.

Профессиональный уровень потенциальных пользователей

Врачи клинической лабораторной диагностики, медицинские лабораторные техники.

Функциональное назначение

Вспомогательное средство в диагностике. Применение изделия не имеет популяционных и демографических аспектов.

Показания и противопоказания к применению изделия

Изделие предназначено для проведения обследования пациентов с целью диагностики ВИЧ-инфекции (болезни, вызванной ВИЧ), проявляющейся в виде других состояний, болезней, вызванных ВИЧ, проявляющейся в виде других уточненных бо-

лезней, антител к белкам оболочки вируса. Обнаружение антител к ВИЧ в сыворотке, плазме или цельной крови наиболее эффективное и распространённое средство для подтверждения или исключения возможности инфицированного процесса. Антитела к ВИЧ вырабатываются в течение первых нескольких недель и обнаруживаются в течение длительного периода. Антитела к ВИЧ в результате выработки антител для более ранней диагностики.

Иммунохроматографический тест позволяет проводить выявление антител к ВИЧ-1 типа, ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека.

СОСТАВ И КОМПЛЕКТОВАНИЕ НАБОРА

Набор включает в себя 3 базовых варианта комплектации. Комплект №1 рассчитан на исследование 30 образцов. Комплект №2 рассчитан на исследование 30 образцов. Комплект №3 рассчитан на исследование 1 образца.

Название	Основное	Комплект №1	Комплект №2
Тест-кассета	Кассета (тест-система) из пластика размером 70x20 мм, с отверстием для образца и для анализа. Обладает высокой прочностью и устойчивостью к воздействию агрессивных сред. Упакована в пакет размером 120x65 мм из фольгированного материала с ленточной печатью и антикоррозийным покрытием.	30 шт.	30 шт.
Индикаторная лента	Лента из пластика размером 5 мм		

Для проведения диагностики in vitro • набор 30 тестов



Набор реагентов

Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 группы О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека

Био Трекер ВИЧ Комбо Ag/Ab

Для учреждений здравоохранения

Хранить при температуре 2-30 °С. Не замораживать!
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием

DO NOT EAT
Contains
Silica Gel for
Moisture Adsorbent

НЕСЪЕДОБНО!
содержит
СИЛИКАГЕЛЬ
для
адсорбирования
влаги

DO NOT EAT
Contains
Silica Gel for

ООО "Био Фокус"
Био Трейсер ВИЧ Комбо А
Буферный раствор 3.5ml
Lot 09 07 2022
IVD

Био Трейсер ВИЧ КОМБО А
Серия 09 Срок годности 07/

Для проведения диагностики HIV-1 • набор 30 тестов



Набор реагентов

Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека

Био Трейсер ВИЧ Комбо Ag/Ab

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!
Пожалуйста прочтите инструкцию по применению перед использованием

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Комплект №2


Состав:

- тест-кассета: 30 шт
- флакон-каталитический поиммерный в комплекте с крышкой невинчиваемой и пробойной каталитической, содержащий буферный раствор - 1 шт
- одноразовая пипетка для образцов: 30 шт
- инструкция по применению: 1 шт


Изготовитель: ООО «Био Трейсер»
РФ, 109387, Москва, Тихая д. 28, оф. 216
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biotraser.ru

Серия номер: 09
Дата выпуска: 07.2020
Годен до: 07.2022

РУ №
ТУ 21.20 23-007-15580960-2019

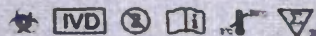

Для проведения диагностики HIV-1 • набор 30 тестов

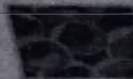

Набор реагентов

Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека

Био Трейсер ВИЧ Комбо Ag/Ab

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!
Пожалуйста прочтите инструкцию по применению перед использованием

Инструкция по применению

Набор реагентов

«Био Трейсер ВИЧ Комбо Ag/Ab» предназначен для проведения диагностики HIV-1, HIV-1 группы О, HIV-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека. «Био Трейсер ВИЧ Комбо Ag/Ab» предназначен для проведения диагностики HIV-1, HIV-1 группы О, HIV-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека.

Состав и комплектация набора

Набор реагентов «Био Трейсер ВИЧ Комбо Ag/Ab» состоит из 30 тест-кассет, 1 флакона-каталитического, 1 пробойной каталитической, 1 пипетки для образцов, 1 инструкции по применению.


Компонент	Единица измерения	Количество
Тест-кассета	шт	30
Флакон-каталитический	шт	1
Пробойная каталитическая	шт	1
Пипетка для образцов	шт	1
Инструкция по применению	шт	1

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!

Тест-кассета / Test Cassette

Изготовитель: ООО «Био Трейсер»
РФ, 109387, Москва, Тихая д. 28, оф. 216
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biotraser.ru

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!

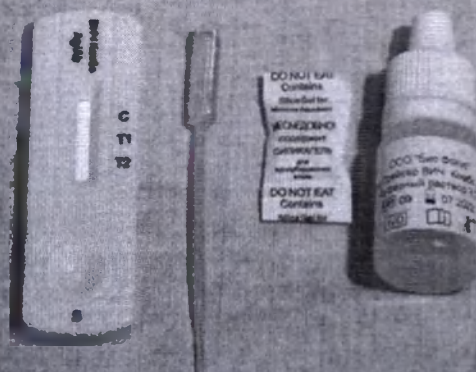

Био Трейсер ВИЧ КОМБО Ag/Ab
Серия 09 Срок годности 07/2022

Для проведения диагностики in vitro • набор 30 тестов



Набор реагентов

Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека

Био Трейсер ВИЧ Комбо Ag/Ab

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!
Пожалуйста прочтите инструкцию по применению перед использованием

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Комплект №2


Состав:

- тест-кассета: 30 шт
- флакон-капельница полимерный в комплекте с крышкой навинчиваемой и пробкой-капельницей, содержащий буферный раствор - 1 шт
- одноразовая пипетка для образцов - 30 шт
- инструкция по применению: 1 шт

Серия номер: 09
Дата выпуска: 07.2020
Годен до: 07.2022

РУ №
ТУ 21 20 23-007-15580960-2019

Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва, Тихая, д. 28, оф. 216
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biotofocus.ru

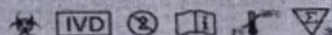

Для проведения диагностики in vitro • набор 30 тестов



Набор реагентов

Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека

Био Трейсер ВИЧ Комбо Ag/Ab

Для учреждений здравоохранения

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!
Пожалуйста прочтите инструкцию по применению перед использованием

Тест-кассета (Для проведения диагностики in vitro)
Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва, Тихая, д. 28, оф. 216
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biotofocus.ru

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!

Био Трейсер ВИЧ КОМБО Ag/Ab
Серия 09 Срок годности 07/2022



Инструкция по применению
1. Подготовка образцов
2. Подготовка тест-кассеты
3. Проведение теста
4. Интерпретация результатов

Параметр	Единица измерения	Нормативное значение	Результат
Антиген р24 ВИЧ-1	г/мл	0,05	+
Антитела к ВИЧ-1	г/мл	0,05	+
Антитела к ВИЧ-2	г/мл	0,05	+
Антитела к ВИЧ-1 группы О	г/мл	0,05	+

содержит одну чашечку


система | Для проведения диагностики in vivo

готовитель: ООО «Био Фокус»

г. 109387, Москва, Тихая, 28, 216


Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84

www.biofocus.ru

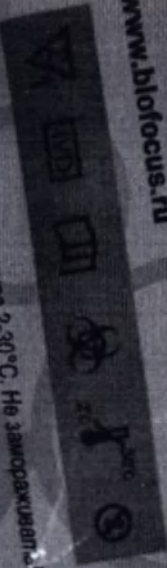


Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!


Био Трейсер ВИЧ КОМБО Ag/Ab
Серия 09 Срок годности 07/2022

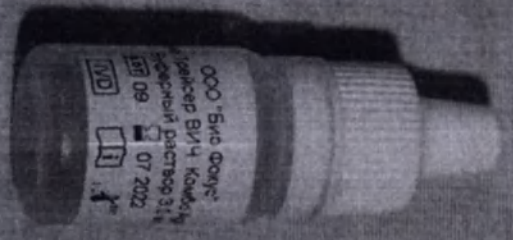

ООО «Био Фокус»
Трейсер ВИЧ КОМБО
Серия 09 Срок годности 07/2022

Био Трейсер ВИЧ КОМБО Ag/Ab
Серия 09 Срок годности 07/2022

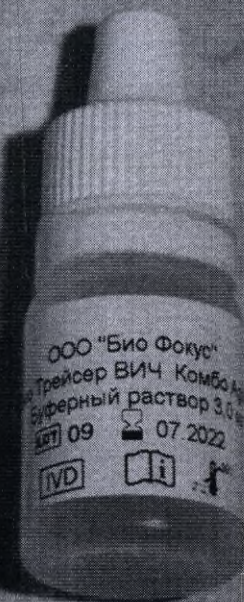


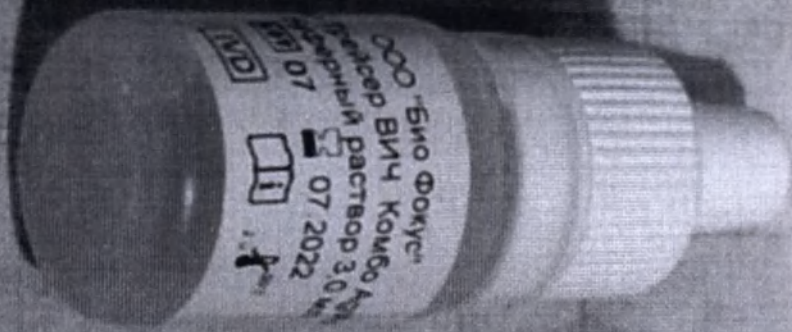





DO NOT EAT
Contains
Silica Gel for
Moisture Adsorbent

НЕСЪЕДОБНО!
содержит
СИЛИКАГЕЛЬ
для
адсорбирования
влажности

DO NOT EAT
Contains
Silica Gel for

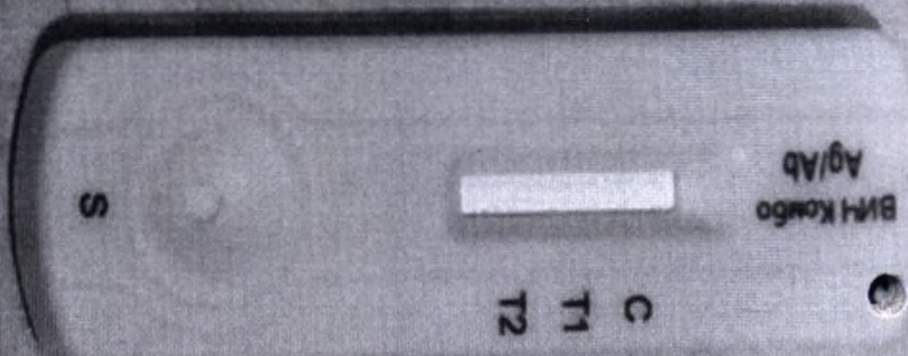

Био Трейсер ВИЧ КОМБО Ag/Ab
Серия 07 Срок годности 07/2022

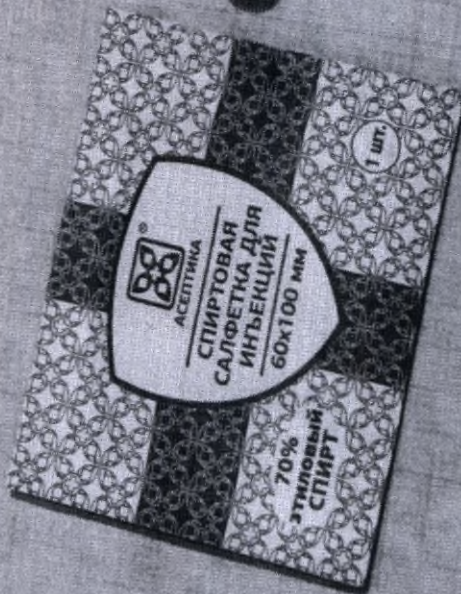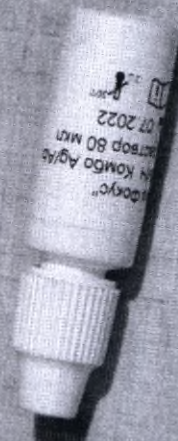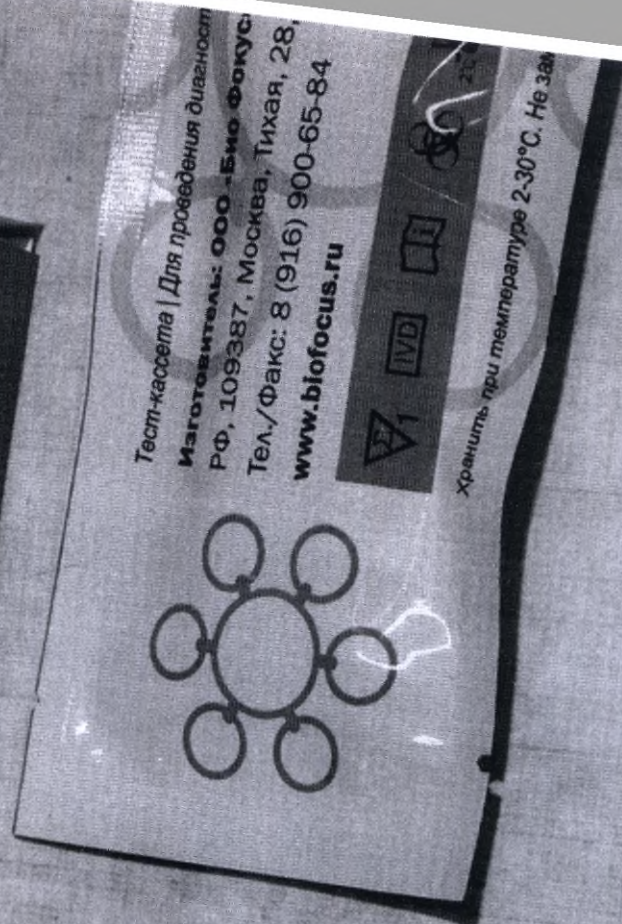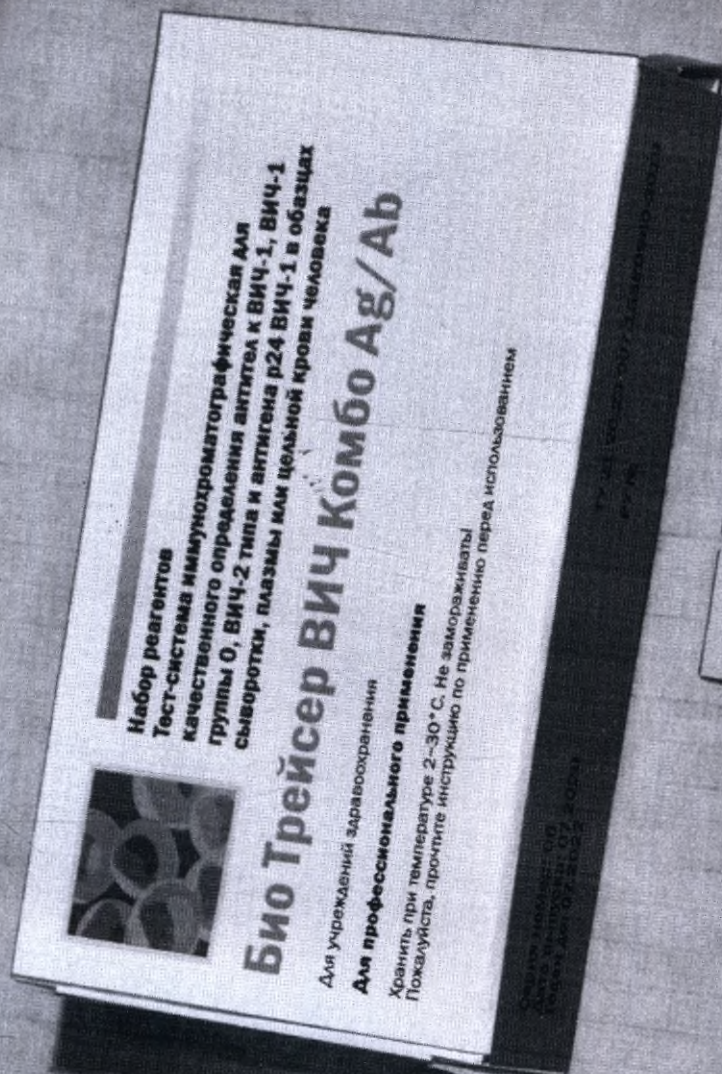

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набора реагентов

«Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека»

«БиоТрейсер ВИЧ Комбо Ag/Ab»

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека» «БиоТрейсер ВИЧ Комбо Ag/Ab» предназначен для качественного однократного быстрого выявления антител к ВИЧ-1 типа, ВИЧ-1 группы О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы, цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа (ИХА) с целью диагностики ВИЧ-инфекции.

Для однократного применения набора по назначению.
Для клинической лабораторной диагностики *in vitro*.

Потенциальные потребители изделия

Лабораторные подразделения лечебно-профилактических учреждений.

Профессиональный уровень потенциальных пользователей

Врач клинической лабораторной диагностики, медицинский персонал.

Для проведения диагностики in vitro



Набор реагентов

Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека

Био Трейсер ВИЧ Комбо Ag/Ab

Комплект №3

Состав:

- тест-кассета: 1 шт
- флакон-капельница полимерный в комплекте с крышкой навинчиваемой и пробкой-капельницей, содержащий буферный раствор: 1 шт
- одноразовая пипетка для образца: 1 шт

- ланцет-скафикатор: 1 шт
- салфетка спиртовая: 1 шт
- инструкция по применению: 1 шт

Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва, Тихая, д. 28, оф. 216
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.blofocus.ru



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор реагентов

«Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека»
«БиоТрейсер ВИЧ Комбо Ag/Ab»

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека» «БиоТрейсер ВИЧ Комбо Ag/Ab» предназначен для качественного (одноступенчатого) быстрого выявления антител к ВИЧ-1 типу, ВИЧ-1 группы О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы, цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа (ИХА) с целью диагностики ВИЧ-инфекции.

Для однократного применения набора по назначению.

Потенциальные лабораторной диагностики in vitro.

Лабораторное подразделение лечебно-профилактических учреждений.

Профессиональный уровень потенциальных пользователей.

Врачи клинической лабораторной диагностики, медицинский персонал лабораторной техники.

Функциональное назначение

Вспомогательное средство в диагностике. Применение изделия не имеет противопоказаний и лабораторных аспектов.

Показания и противопоказания к применению изделия

Изделие предназначено для проведения обследования пациентов с целью диагностики ВИЧ-инфекции (болезни, вызванной ВИЧ, протекающей в виде длительно существующей, болезненной, вызывающей ВИЧ, протекающей в виде других угнетенных состояний).

Тест-кассета | Для проведения диагностики in vitro

Изготовитель: ООО «Био Фокус»


РФ, 109387, Москва, Тихая, д. 28, оф. 216

Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84

www.blofocus.ru



Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!

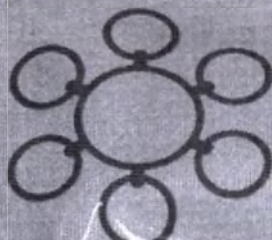



Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1
группы 0, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах
сыворотки, плазмы или цельной крови человека

Био Трейсер ВИЧ Комбо Ag/Ab

Для учреждений здравоохранения

Для профессионального применения

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!
Пожайлуста, прочтите инструкцию по применению перед использованием



Состав: 1 флакон с реагентом, 1 флакон с буфером, 1 флакон с антигенным раствором, 1 флакон с контрольным раствором, 1 флакон с тест-полосками.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


Набор реагентов «Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы 0, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека» «Био Трейсер ВИЧ Комбо Ag/Ab» предназначен для проведения тестирования на наличие антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы 0, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы, цельной крови человека качественным иммунохроматографическим методом (ИХА) с целью диагностики ВИЧ-инфекции.

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы 0, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека» «Био Трейсер ВИЧ Комбо Ag/Ab» предназначен для проведения тестирования на наличие антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы 0, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы, цельной крови человека качественным иммунохроматографическим методом (ИХА) с целью диагностики ВИЧ-инфекции.

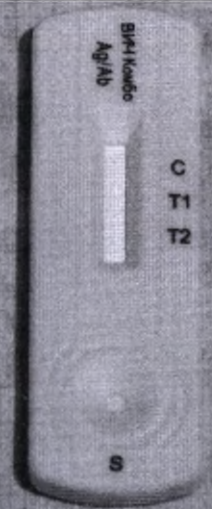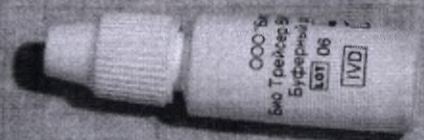

Био Трейсер ВИЧ КОМБО
Серия 06 Срок годности

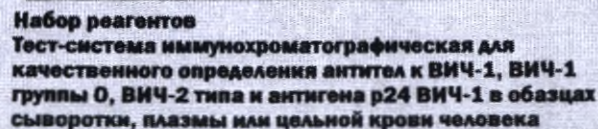

Био Трейсер ВИЧ Комбо Ag/Ab

Для учреждений здравоохранения

Для профессионального применения

Хранить при температуре 2-30°С. Не замораживать!
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Halbopu pearensis

[illegible]

НАЗНАЧЕНИЕ

такого элемента. Тест-система, используемая при исследовании О. ВБН-2 типа II и антигена p24 ВБН-1 в образцах сыворотки плазмы или цельной крови человека «Bio-Rad» (Вестер Блок), предназначен для выявления в сывороточном или плазменном растворе антигена п ВБН-1 типа ВБН-1 (группы О, ВБН-1 и антигена p24 ВБН-1 в образцах сыворотки плазмы, цельной крови человека методами иммуноэлектрофореза и иммунодиффузии (ИЭД) с целью диагностики вирусного заболевания.

Потенциальный потребитель *in vitro*.

Лабораторные исследования

112-12-01 NO-IPROFENITIN IN ACETONITRILE

WATERFOWL


добраторпей тлоуик, мулдуионсий на

Универсальное издание

Показатели и противоречивые аспекты.

Издательство предпринимательно для повышения эффективности

тов с целью диагностики нарушений деятельности ВЧ, проявляющихся в виде других состояний, болезненных изменений ВЧ, проявляющихся в виде других утомительных бо-

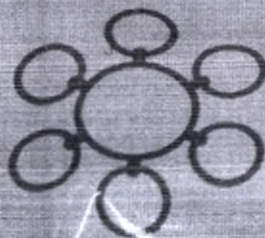


Тест-кассета | Для проведения диагностики in vitro

Изготовитель: ООО «Био Фокус»

РФ, 109387, Москва, Тихая, 28, оф. 216

Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84

www.biofocus.ru

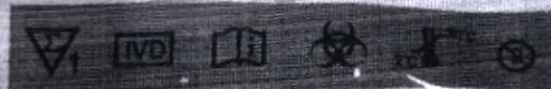

Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!



**СПИРТОВАЯ
САЛФЕТКА ДЛЯ
ИНЪЕКЦИЙ**

60x100 mm

70%

СПИРТ

1 NAME.

Для проведения диагностики in vitro



Набор реагентов

Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы 0, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека

Био Трейсер ВИЧ Комбо Ag/Ab

Комплект №3

Состав:

- тест-кассета: 1 шт
- флакон-капсулилка полимерный в комплекте с крышкой навинчиваемой и пробкой-капсулилкой, содержащий буферный раствор: 1 шт
- одноразовая пилетка для образца: 1 шт
- ланцет-скафикатор: 1 шт
- салфетка спиртовая: 1 шт
- инструкция по применению: 1 шт

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Био Фокус»
109387, Москва, Тихая, 28, оф. 216
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.blofocus.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор реагентов «Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы 0, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека» «Био Трейсер ВИЧ Комбо Ag/Ab»

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы 0, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека» «Био Трейсер ВИЧ Комбо Ag/Ab» предназначен для качественного определения антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы 0, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы, цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа (ИХА) с целью диагностики ВИЧ-инфекции.

Для клинической диагностики набора по назначению.

Потенциальные потребители и врачи.

Лабораторные подразделения лечебно-профилактических учреждений.

Профессиональный уровень, потенциальный рынок.

Важнейшей лабораторной диагностикой, медицинский персонал.

Функциональное назначение.

Восстановительное средство в диагностике. Применяемая система не имеет побочных и деградационных аспектов.

Показания и противопоказания к применению изделия.

Изделие предназначено для проведения обследования пациентов с целью диагностики ВИЧ-инфекции (болезни, вызываемой вирусом ВИЧ, проявляющейся в виде других состояний, болезней, заболеваний ВИЧ, проявляющихся в виде других заболеваний).

Тест-кассета | Для проведения диагностики in vitro

Изготовитель: ООО «Био Фокус»


РФ, 109387, Москва, Тихая, 28, оф. 216

Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84

www.blofocus.ru



Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!

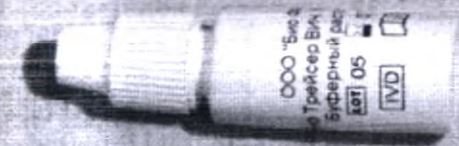

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор реагентов

«Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 группы О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека»

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 группы О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека» «БиоТрейсер ВИЧ Комбо Ag/Ab» предназначен для качественного определения антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 группы О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы, цельной крови (ИОХ) с целью диагностики ВИЧ-инфекции. Для однократного применения набора по назначению. Для клинической лабораторной диагностики ИИИ.

Потенциальные потребители: клиники, лаборатории, учреждения, лечебно-профилактические учреждения.

Профессиональный уровень: потенциальный пользователь.

Врачи клинической лабораторной диагностики, медицинский персонал.

Функциональное назначение: Вспомогательное средство в диагностике. Применение набора не имеет противопоказаний и лабораторной оценки.

Показания и противопоказания к применению набора: Набор предназначен для проведения исследования плазмы, сыворотки, цельной крови. Вет-анализатор (биологический), выделение ВИЧ, исследование в виде других, указанных в инструкции. Выделение ВИЧ, исследование в виде других, указанных в инструкции.



Набор реагентов

Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антител к ВИЧ-1, ВИЧ-2 группы О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека

Био Трейсер ВИЧ Комбо Ag/Ab

Для учреждений здравоохранения

Для профессионального применения


Хранить при температуре 2-30°С. Не замораживать! Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием

Био Трейсер ВИЧ КОМБО Ag/Ab
Серия 05 Срок годности 07/2022

DO NOT EAT
Contains
antigen/antibody
components
НЕСЪЕДОБНО
Содержит
компоненты
антигена/антитела



Для проведения диагностики in vitro

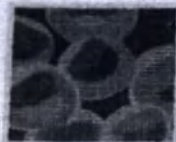

Набор реагентов
Тест-система иммунохроматографическая для
качественного определения антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1
группы 0, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах
сыворотки, плазмы или цельной крови человека

Био Трейсер ВИЧ Комбо Ag/Ab

Комплект №3

Состав:

- тест-кассета: 1 шт
- флакон-капельница полимерный в комплекте с крышкой навинчиваемой и пробой-капельницей, содержащий буферный раствор: 1 шт
- одноразовая пипетка для образца: 1 шт

- ланцет-скафикатор: 1 шт
- салфетка спиртовая: 1 шт
- инструкция по применению: 1 шт

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор реагентов «Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы 0, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека» «Био Трейсер ВИЧ Комбо Ag/Ab»

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы 0, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека» «Био Трейсер ВИЧ Комбо Ag/Ab» предназначен для качественного определения антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы 0, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека методом иммунохроматографии. Для однократного применения набора по назначению. Потенциальное применение набора по назначению.

Лабораторное подразделение лечебно-профилактических учреждений.

Профессиональный персонал, получивший специальное обучение.

Врачи клинической лабораторной диагностики, участковый патологоанатомический кабинет.

Воспользувшись средством в диагностике. Применение набора не имеет противопоказаний и лабораторных ограничений.

Показания и противопоказания к применению изделия. Изделие предназначено для проведения обследования пациента с целью диагностики ВИЧ-инфекции (белок, выделенный ВИЧ, присутствующий в виде других состояний, белок, выделенный ВИЧ, присутствующий в виде других состояний).

Тест-кассета | Для проведения диагностики in vitro

Изготовитель: ООО «Био Фокус»


РФ, 109387, Москва, Тихая, 28, оф. 216

Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84

www.blofocus.ru



Хранить при температуре 2-30°C. Не замораживать!

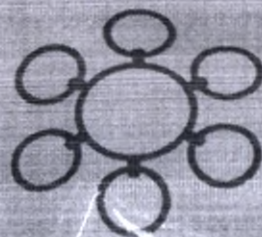

Для проведения диагностики in vitro • набор 30 тестов



Набор реагентов

Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы 0, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека

Био Трейсер ВИЧ Комбо Ag/Ab

Хранить при температуре 2–30°C. Не замораживать.
Пожалуйста прочтите инструкцию по применению перед использованием

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Комплект №1


Состав:

- тест-кассета: 30 шт
- флакон-капельница полимерный в комплекте с крышкой навинчиваемой и пробкой-капельницей, содержащий буферный раствор - 1 шт
- одноразовая пипетка для образца: 30 шт
- ланцет-скарификатор: 30 шт
- салфетка спиртовая: 30 шт
- инструкция по применению: 1 шт

Серия номер: 01
Дата выпуска: 07.2020
Годен до: 07.2022

ПУ №
ТУ 21.20.23-007-15580960-2019

Изготовитель: ООО «Био Фокус»
РФ, 109387, Москва, Тихая, д. 28, оф. 216.
Тел./Факс: 8 (916) 900-65-84
www.biofocus.ru

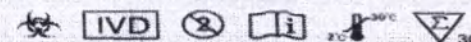

Для проведения диагностики in vitro • набор 30 тестов



Набор реагентов

Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1 группы 0, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека

Био Трейсер ВИЧ Комбо Ag/Ab

Для учреждений здравоохранения

Хранить при температуре 2–30°C. Не замораживать.
Пожалуйста, прочтите инструкцию по применению перед использованием

Бино Трейсер ВИН КОМБО Ag/Ab

DO NOT EAT
Contains
Silica Gel for
Moisture Adsorbent

НЕСЪЕДОБНО!
содержит
СИЛИКАГЕЛЬ


для
адсорбирования
влажности

DO NOT EAT
Contains
Silica Gel for

S

12
11
C

ВИН Комбо
Ag/Ab

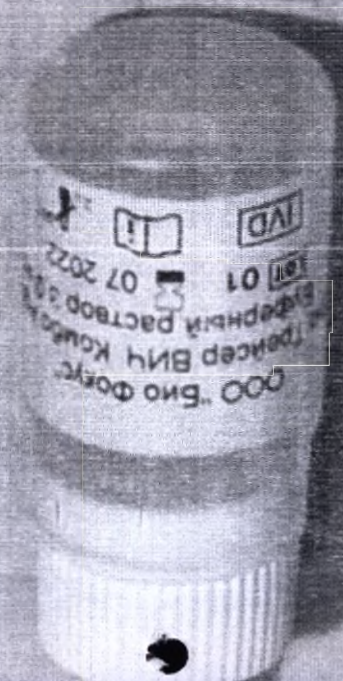

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
_____ листов
Генеральный директор
«БИО ФОКУС» Козлов К.В.

