

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «БИОФАРМУС»
Е.И. Хаустов
« 07 » 2022 г.

Инструкция по применению
Пакет-горчичник «Горчицатрон® ЭЛИТ»
по ТУ 21.20.23-111-61533319-2019

Назначение изделия:

Пакет-горчичник «Горчицатрон® ЭЛИТ» (далее – Пакет-горчичник) предназначен для применения в качестве согревающего и отвлекающего средства при лечении и профилактике острых респираторных заболеваний, бронхита, пневмонии, при болях в мышцах, невралгии, миозите, остеохондрозе.

Действующим веществом Пакета-горчичника является горчичная смесь.

Применение Пакетов-горчичников способствует расширению капилляров, усилению кровообращения и активизации обменных процессов в тканях, позволяет повысить тонус организма и сопротивляемость различным заболеваниям.

Пакет-горчичник «Горчицатрон® ЭЛИТ» предназначен для взрослых.

Изделие может применяться в домашних условиях и лечебно-профилактических учреждениях.

Параметры изделия:

Длина изделия 102-122 мм, ширина 102-122 мм, вес наполнителя – 2,5-3,5 г.

Комплект поставки:

- Пакет-горчичник «Горчицатрон® ЭЛИТ» – 10 шт.
- Коробка картонная – 1 шт.

Материалы изготовления: горчичный порошок, льняная мука; упаковка: бумага, полиэтилен, алюминий.

Способ применения:

Наружно. Предназначено для однократного применения. Пакет-горчичник опускают в воду, нагретую до температуры 37°C – 40°C на 15-20 секунд, затем накладывают на кожу. Для усиления эффекта горчичник накрывают полиэтиленовой пленкой, плотно прижимают к телу, закрепляют эластичным бинтом или другой повязкой и утепляют место нанесения. Продолжительность процедуры – 5-20 минут (до появления стойкой красноты), в зависимости от индивидуальной чувствительности больного. При ощущении сильного жжения необходимо ослабить на некоторое время прижим горчичника к телу или снять его. После снятия горчичника кожу протирают влажной теплой салфеткой или обмывают теплой водой и вытирают насухо. Для закрепления прогревающего эффекта рекомендуется находиться в тепле под одеялом не менее часа после завершения процедуры.

Стерилизация: изделие не стерильно, перед использованием не стерилизуется.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность кожи к компонентам пакета-горчичника; беременность, лактация; общее тяжелое состояние больного (лихорадочное состояние, повышенная температура тела); переломы костей; заболевания крови, кровотечения или склонность к кровотечениям; злокачественные новообразования; развивающееся гнойное воспаление с явлениями интоксикации.

Меры предосторожности:

Перед применением с целью определения оптимального курса процедур следует проконсультироваться с врачом.

При появлении неприятных эффектов (раздражений кожи или слизистых оболочек) немедленно прекратить применение пакетов-горчичников и промыть раздраженные места теплой водой.

Условия хранения: отдельно от пищевых продуктов в сухом, недоступном для детей месте при температуре от +5°C до +25°C. Беречь от огня! Защищать от воздействия прямых солнечных лучей.

Срок годности: 2 года. По истечении срока годности изделие не применять.

Утилизация: Медицинское изделие утилизируется в соответствии с действующим законодательством на момент утилизации на территории страны, в которой обращается данное медицинское изделие. Класс опасности медицинских отходов - А.

Маркировка

Символы на маркировке упаковки:



Изготовитель и организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей: Общество с ограниченной ответственностью «БИОФАРМУС» (ООО «БИОФАРМУС»), Россия, 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, стр. 49, пом. 1, комн. 65, тел.: +7 (495) 580-30-69, e-mail: info@biofarmrus.com. Место производства: Россия, 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1.

ТУ 21.20.23-111-61533319-2019

РУ № и дата выдачи

Всего профитов
произведено
скреплено печатью
31 триеста

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «БИОФАРМУС»
ХАУСТОВ Е.Н.



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО «БИОФАРМУС»

Е.И. Хаустов

« 04 » 03 2022 г.

Инструкция по применению
Пакет-горчичник «Горчицатрон® ДЕТСКИЙ»
по ТУ 21.20.23-111-61533319-2019

Назначение изделия:

Пакет-горчичник «Горчицатрон® ДЕТСКИЙ» (далее – Пакет-горчичник) предназначен для применения в качестве согревающего и отвлекающего средства при лечении и профилактике острых респираторных заболеваний, бронхита, пневмонии, при болях в мышцах, невралгии, миозите, остеохондрозе.

Действующим веществом Пакета-горчичника является горчичная смесь. Пакет-горчичник «Горчицатрон® ДЕТСКИЙ» обладает более мягким действием по сравнению с обычными горчичниками.

Применение Пакетов-горчичников способствует расширению капилляров, усилению кровообращения и активизации обменных процессов в тканях, позволяет повысить тонус организма и сопротивляемость различным заболеваниям.

Пакет-горчичник «Горчицатрон® ДЕТСКИЙ» предназначен для детей старше 1 года.

Изделие может применяться в домашних условиях и лечебно-профилактических учреждениях.

Параметры изделия:

Длина изделия 102-122 мм, ширина 102-122 мм, вес наполнителя – 2,5-3,5 г.

Комплект поставки:

- Пакет-горчичник «Горчицатрон® ДЕТСКИЙ» – 10 шт.
- Коробка картонная – 1 шт.

Материалы изготовления: горчичный порошок, льняная мука; упаковка: бумага, полиэтилен, алюминий.

Способ применения:

Наружно. Предназначено для однократного применения. Пакет-горчичник опускают в воду, нагретую до температуры 37°C – 40°C на 15-20 секунд, затем накладывают на кожу. Для усиления эффекта горчичник накрывают полиэтиленовой пленкой, плотно прижимают к телу, закрепляют эластичным бинтом или другой повязкой и утепляют место нанесения.

Продолжительность процедуры (до появления стойкой красноты) зависит от возраста ребенка, раздражающего действия и индивидуальной чувствительности больного:

Возраст ребенка	Время
с 1 года до 3 лет	от 2 до 3 мин
с 3 лет до 7 лет	от 3 до 5 мин
с 7 лет до 12 лет	от 5 до 10 мин
с 12 лет до 15 лет	от 5 до 15 мин
старше 15 лет	от 5 до 20 мин

При ощущении сильного жжения необходимо ослабить на некоторое время прижим горчичника к телу или снять его. После снятия горчичника кожу протирают влажной теплой салфеткой или обмывают теплой водой и вытирают насухо. Для закрепления прогревающего эффекта рекомендуется находиться в тепле под одеялом не менее часа после завершения процедуры.

Стерилизация: изделие не стерильно, перед использованием не стерилизуется.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность кожи к компонентам пакета-горчичника; беременность, лактация; общее тяжелое состояние больного (лихорадочное состояние, повышенная температура тела); переломы костей; заболевания

крови, кровотечения или склонность к кровотечениям; злокачественные новообразования; развивающееся гнойное воспаление с явлениями интоксикации.

Меры предосторожности:

Перед применением с целью определения оптимального курса процедур следует проконсультироваться с врачом.

При появлении неприятных эффектов (раздражений кожи или слизистых оболочек) немедленно прекратить применение пакетов-горчичников и промыть раздраженные места теплой водой.

Условия хранения: отдельно от пищевых продуктов в сухом, недоступном для детей месте при температуре от +5°C до +25°C. Беречь от огня! Защищать от воздействия прямых солнечных лучей.

Срок годности: 2 года. По истечении срока годности изделие не применять.

Утилизация: Медицинское изделие утилизируется в соответствии с действующим законодательством на момент утилизации на территории страны, в которой обращается данное медицинское изделие. Класс опасности медицинских отходов - А.

Маркировка

Символы на маркировке упаковки:



Изготовитель и организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей: Общество с ограниченной ответственностью «БИОФАРМУС» (ООО «БИОФАРМУС»), Россия, 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, стр. 49, пом. 1, комн. 65, тел.: +7 (495) 580-30-69, e-mail: info@biofarmrus.com. Место производства: Россия, 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1.

ТУ 21.20.23-111-61533319-2019

РУ № и дата выдачи

Все проито,
процессировано и
секретно погашено
Затри) смета

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «БИОФАРМУС»
ХАУСТОВ Е.И.

