

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Фирма К и К»



О.Ю. Попов

2012 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия медицинской техники

Прибор для первичной визуальной диагностики LD-V09.

Соответствует требованиям национальных стандартов:
ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 50267.0-92

Оглавление:

1. Общие сведения, наименование частей и компонентов
2. Технические данные
3. Меры предосторожности
4. Уход, хранение, ремонт и утилизация
5. Замена элементов питания
6. Сертификация и гос. регистрация
7. Гарантийные обязательства
8. Сервисное обслуживание

2012

Прибор для первичной визуальной диагностики


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель LD-V09

С помощью прибор для первичной визуальной диагностики LD-V09 Вы сможете быстро и легко проводить первичную визуальную диагностику полости рта, гортани, слизистых носоглотки, наружного слухового прохода, кожного покрова. LD-V09 удобен в использовании и ношении, включается легким нажатием на клипсу, имеет форму авторучки. Металлический корпус прибора сделан из нержавеющей стали. Специально разработанная лампа со встроенной линзой малого диаметра и оптимально рассчитанным световым потоком гарантирует отсутствие визуально не диагностируемых / сложно диагностируемых образований и достоверно исключает оптические блики и тени в трудно осматриваемых участках. Может быть использован, как в лечебных учреждениях, так и дома.

Настоящий прибор предназначен ТОЛЬКО для первичной визуализации

ЧАСТИ ПРИБОРА

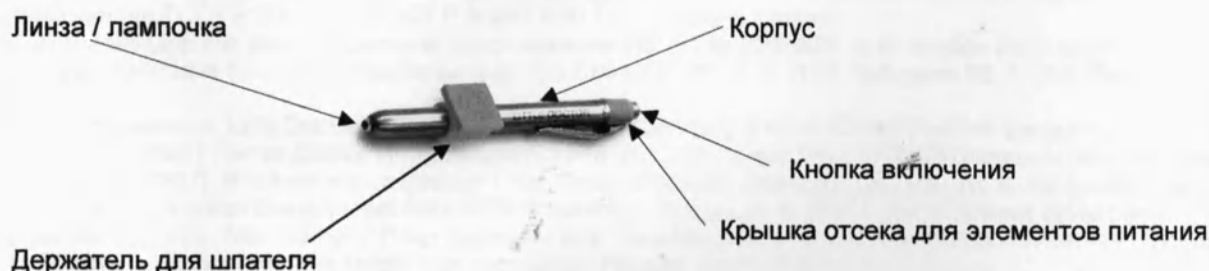

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Источник света	Встроенная лампочка 0,22 V - 0,25 A
Питание	2 x 1,5В типа "AAA" (LR03)
Макс, потреб, мощность	0,15 мВт
Срок службы элемента питания	Около 100 часов
Автоматическое отключение	Нет
Пластмассовый держатель для медицинского шпателя	3-х цветов: оранжевый, серый, фиолетовый (•••)
Габаритные размеры: Размер (без упаковки) Масса (без упаковки)	126(д)х18(ш)х19(ш) мм приблизительно 15 г
Комплектность	Прибор с элементами питания (2 шт.), пластиковый держатель для медицинского шпателя, инструкция, упаковка
Год производства	Указан в номере LOT (первые 4 цифры) на обратной стороне упаковки
Условия эксплуатации: температура относительная влажность	От+10оСдо+40°С не более 85 %RH
Условия хранения и транспортировки: температура относительная влажность	От-20 °С до +50°С не более 85 %RH

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Корпус прибора не является водозащищенным. Избегайте попадания влаги. При попадании воды на корпус прибора вытрите его мягкой сухой тканью.
2. Прибор предназначен для ПЕРВИЧНОЙ визуализации диагностики полости рта, гортани, слизистых носоглотки, наружного слухового прохода, кожного покрова.
3. Не направляйте световой луч в глаза!
4. Мелкие части прибора (пластмассовый держатель, крышка) не должны быть доступны детям. Это опасно для их здоровья.
5. Не нарушайте полярность батареек.
6. Не используйте батарейки с разной степенью заряда.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

При значительном уменьшении светового потока, необходимо заменить элементы питания на новые.

Для замены элемента питания:

1. Открутите крышку/колпачок верхней части прибора для элементов питания.
2. Переверните прибор так, чтобы батарейки выпали наружу.
3. Вставьте два новых элемента питания, соблюдая полярность.
4. Завинтите крышку/колпачок.

УХОД, ХРАНЕНИЕ, РЕМОНТ И УТИЛИЗАЦИЯ

1. Настоящий прибор необходимо оберегать от повышенной влажности, прямых солнечных лучей, ударов. ПРИБОР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОМ!

2. Не храните и не используйте прибор в непосредственной близости от обогревательных приборов и открытого огня.

3. Если прибор хранился при отрицательной температуре, перед использованием выдержите его по крайней мере 1 час в теплом месте.

4. Периодически проверяйте батарейки и вовремя заменяйте их на новые, чтобы избежать протекания кислоты и повреждения прибора.

5. ХРАНИТЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ОТ ДЕТЕЙ!

6. Не загрязняйте прибор и оберегайте его от пыли.

7. Не подвергайте прибор сильным ударам и не бросайте его.

8. При утилизации руководствуйтесь действующими в данное время правилами в Вашем регионе. Специальных условий утилизации на настоящий прибор производителем не установлено.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Производство сертифицировано по международному стандарту ISO 13485:2003. Соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 50267.0-92 Госстандарта России.

Росздравнадзор РФ: регистрационное удостоверение МЗ РФ № 2002/877 от 13 ноября 2002 года.

EC- Representative (EC- Представительство): YOULIN-MED SP. Z. O. O Ul. Rydygiera 12, 01-793 Warszawa POLAND.

Продукт компании: Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 35 Selegie Road #09-05 Parkline Shopping Centre, Singapore 188307 (Литтл Доктор Интернешнл (С) Пти. Лтд., 35 Сележ Роуд №09-05 Парклайн Шопинг Центр, Сингапур 188307). Изготовлено на заводе: Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd., No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area 226010 Nantong, Jiangsu, P. R. China (Литтл Доктор Электроник (Нантонг) Ко. Лтд., №8, Тонгхинг Род Экономик энд Техникал Девелопмент Ареа 226010 Нантонг, Джангшу, П. Р. Китай). Экспортер: Little Doctor International (S) Pte. Ltd. (Литтл Доктор Интернешнл (С) Пти. Лтд.).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На настоящий прибор установлен гарантийный срок в течение 12 месяцев с даты продажи. Гарантия не распространяется на приборы с незаполненным гарантийным талоном, приборы которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие: применения не по назначению; неосторожного использования, приведшего к повреждениям; модификации; вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом); нарушения правил эксплуатации, и/или хранения, и/или транспортировки; действий третьих лиц или непреодолимой силы. Гарантия не распространяется на элемент питания.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

РОССИЯ

Круглосуточная бесплатная линия: 8-800-200-00-37

г. Москва: (+7- 495)-7188800

Интернет: www.LittleDoctor.ru.

УКРАЇНА

Круглосуточная бесплатная линия: 8-800-30-120-80

г. Киев: (+380-44) - 4044867

Интернет: www.LittleDoctor.ua.

БЕЛАРУСЬ

Круглосуточная бесплатная линия: 8-800-200-00-37

г. Минск: (+375-17) 298-12-60

КАЗАХСТАН

Усть-Каменогорск: тел.: (+7-3232) 55-90-52

Павлодар: тел.: (+7-3182) 50-04-18

Семипалатинск: тел.: (+7-3222) 52-02-29

Интернет: www.LittleDoctor.kz.

УЗБЕКИСТАН

Шайхонтохур тумани: тел.: (+99871) 144-90-55

Всего прошнуровано и скреплено печатью **4** (четыре) листа



О. Ю. Попов

Генеральный директор ООО "Фирма К и К"