

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

Управления государственного контроля
лекарственных средств и медтехники

Р. У. ХАБРИЕВ

1998 г.

ИНСТРУКЦИЯ х)

по применению основы питательной среды для
выделения уреоплазм сухой (сульфат-марганцевый агар)

*The base of nutrient medium for isolation
Ureaplasma urealyticum dry* " "

Основа питательной среды предназначена для выделения уреоплазм из патологического материала, после добавления нормальной лошадиной сыворотки, пенициллина и амфотерицина В, мочевины.

Препарат в количестве, указанном на этикетке для приготовления конкретной серии питательной среды, размешать в 1 л дистиллированной воды, довести до кипения, кипятить 1-2 мин. Стерилизовать автоклавированием при температуре 115 °С в течение 30 мин. Перед использованием среду охладить до температуры 45-50 °С, внести 20 % нормальной лошадиной сыворотки, 3 мл 10 % стерильного раствора мочевины (готовый раствор мочевины фильтровать через мембранные фильтры со средним значением поры - 0,22 мкм), 500 ед/л амфотерицина В, 1 млн ед/л пенициллина, перемешать, разлить стерильно в чашки Петри слоем 3-4 мм.

Готовая к применению среда прозрачная, светло-желтого цвета. Приготовленную среду хранить при температуре (5±1) °С в течение 7 дней.

Бактериологической петлей инфицированный материал наносят на поверхность чашки Петри со средой. Посевы помещают в термостат и инкубируют при температуре (37±1) °С в атмосфере углекислого газа (5-10) %. Учет результатов проводят начиная с 48 часов и до 7-х суток под малым увеличением микроскопа (х50).

х) Взамен Инструкции по применению, утвержденной Миназдравом СССР
20.12.94 г.

Препарат расфасован по 180 г в банки из оранжевого стекла или в полиэтиленовые банки.

Препарат необходимо хранить в герметически закрытой упаковке в темном месте в помещении с относительной влажностью воздуха не более 60 % и температурой от 2 до 25 °С.

Срок годности препарата - 2 года.

Рекламации на качество препарата в течение срока годности следует направлять в адрес предприятия-изготовителя. Копию рекламации направляют в адрес Государственного научно-исследовательского института стандартизации и контроля медицинских биологических препаратов им. Л.А.Тарасевича: 121002, г.Москва, Сивцев-Вражек, 41, телефон 241-39-22.

Генеральный директор
НПО "Питательные среды"



М.М.Меджидов





Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
2 листа(ов)

КОПИЯ
Начальник управления
регистрации и обслуживания
качества лекарственных средств

