

«УТВЕРЖДАЮ»

Индивидуальный предприниматель
Кустарев Герман Борисович



Г. Б. Кустарев
2010 г.
М.П.

ИНСТРУКЦИЯ
По применению
Налокотник эластичный, модель 101.

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ
6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2010

1. Назначение.

Налокотник эластичный, модель 101 предназначен для создания стабильности и комфорта в локтевом суставе. Изделие эффективно используется для разгрузки поврежденного сустава и уменьшения боли различного происхождения (ревматизм, артрит), а также при ушибах и вывихах. Налокотник используется и в профилактических целях для предотвращения травматического повреждения локтевого сустава при повышенной физической нагрузке

2. Основные технические характеристики

Натуральный состав налокотника и его уникальная структура способствуют нормальному потовыделению и позволяют сохранить чувство комфорта даже при длительном ношении. Внутренний слой изделия производит функцию микромассажа, способствуя кровотоку и уменьшению отека.

3. Противопоказания к применению

Индивидуальная непереносимость материалов, используемых в процессе производства.

4. Показания к применению.

Для фиксации локтевого сустава при лечении травматических повреждений связок и воспалительных заболеваний сустава и прилегающих тканей; заболеваний, требующих незначительного согревания в области сустава

5. Порядок работы изделия.

Налокотник необходимо подбирать согласно показателям, указанным на упаковке изделия (таблица 1).

Таблица 1

Размер	Обхват выше локтя (см)	Обхват ниже локтя (см)
1 (XS)	26-28	21-24
2 (S)	28-31	24-27
3 (M)	31-34	27-30
4 (L)	34-38	30-34

6. Правила хранения и использования.

Стирать налокотник необходимо в теплой мыльной воде, температура которой не превышает +35 °С. При стирке и полоскании изделие не тереть и не выкручивать, не рекомендуется подвергать глажению.

Рекомендуемый срок использования – 1 год.

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке. Хранить в местах недоступных для детей. Не использовать после истечения срока годности.