



Инструкция по применению

Адгезив для эмали и дентина самопротравливающий
светового отверждения «СТ-Бонд»
ТУ 21.20.24-033-40151387-2020

Торговое название: СТ-Бонд

Состав

Уретандиметакрилат, БИС-ГДМА, ФОСФАТ, ОКМ-2, НЕМА Phoshate, триметакрилаттриэтаноламина (ТМАТЭА), камфорохинон, ацетон, вода дистиллированная.

Свойства

Однокомпонентный самопротравливающий адгезив не требует предварительного кислотного протравливания дентина зуба.

Отверждается светом длиной волны 450÷500 нм.

Показания к применению

Адгезив предназначен для создания адгезии к эмали и дентину при:

- реставрациях (всех типов полостей по Блэку) из светоотверждаемых композитных и компомерных материалов
- фиксации не прямых реставраций из композитных или компомерных материалов, керамики и металла с использованием полимерного материала для постоянной фиксации двойного отверждения
- восстановлении культи зуба композитными материалами
- прямом восстановлении пломб и реставраций из композитных и компомерных материалов, металлокерамики и керамики

Применение

Внимание! Не использовать с композитными материалами химического отверждения. При работе с адгезивом не следует использовать материалы, содержащие эвгенол.

Материал, хранящийся или транспортировавшийся при низких температурах, перед применением необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 1 часа.

Подготовку полости провести в соответствии с обычными методиками препарирования.

При прямых реставрациях и восстановлении культи:

- Тщательно промойте полость водой.
- Просушите полость струей воздуха, не содержащей воды и масла. Не пересушивайте!
- Выдавите необходимое количество адгезива в кювету для дозирования и не допускайте попадания прямых солнечных лучей.
- Нанесите адгезив с помощью микроаппликатора на всю поверхность полости и втирайте в течение 20 секунд.
- Раздуйте струей воздуха до прекращения движения адгезивной пленки.
- Отвердите адгезив светом длиной волны 450÷500 нм в течение 20 секунд.

При фиксации не прямых реставраций на полимерный материал для постоянной фиксации двойного отверждения:

- Полностью удалите цемент для временной фиксации из полости и с поверхности реставрации.

- Подготовьте реставрацию к фиксации в соответствии и требованиями для материала, из которого создана реставрация.
- Просушите полость струей воздуха, не содержащей воды и масла. Не пересушивайте!
- Выдавите необходимое количество адгезива в кювету для дозирования и не допускайте попадания прямых солнечных лучей.
- Нанесите адгезив с помощью микроаппликатора на всю поверхность полости и втирайте в течение 20 секунд.
- Раздуйте струей воздуха до прекращения движения адгезивной пленки.
- Отвердите адгезив светом длиной волны 450-500 нм в течение 20 секунд.

Для восстановления пломб и реставраций:

- Создайте шероховатость на поверхности пломбы из композитного или компомерного материала, или на поверхности винира из композита или керамики. В случае починки керамики снимите верхний слой керамики на 1 мм от края дефекта.
- Тщательно промойте поверхность водой и просушите воздухом.
- Подготовьте керамические виниры согласно требованиям к керамике.
- Выдавите необходимое количество адгезива в кювету для дозирования и не допускайте попадания прямых солнечных лучей.
- Нанесите адгезив с помощью микроаппликатора на всю поверхность полости и втирайте в течение 20 секунд.
- Раздуйте струей воздуха до прекращения движения адгезивной пленки.
- Отвердите адгезив светом длиной волны 450-500 нм в течение 20 секунд.

Примечание:

Непрепарированную эмаль необходимо протравить гелем для обработки зуба, содержащим ортофосфорную кислоту.

При пломбировании глубоких полостей рекомендуется применять прокладки из гидроксида кальция и стеклоиономерного цемента.

При нанесении адгезива избегайте контакта со слюной, кровью или поддесневой жидкостью.

После дозирования адгезива, флакон с адгезивом плотно закройте крышкой.

Комплектность

Адгезив для эмали и дентина самопротравливающий светового отверждения «СТ-Бонд» по ТУ 21.20.24-033-40151387-2020 в составе:

1. Адгезив для эмали и дентина самопротравливающий светового отверждения «СТ-Бонд» во флаконе - 1 шт.
2. Микроаппликаторы стоматологические - не более 100 шт.
3. Кювета 3-местная - 1 шт.
4. Инструкция по применению – 1 шт.

Противопоказания

При соблюдении правил применения побочных действий и противопоказаний нет.

Возможные побочные действия

Адгезив содержит уретановые и метакриловые производные, которые могут вызвать у пациентов аллергическую реакцию.

Меры предосторожности

Адгезив содержит уретановые и метакриловые мономеры в водно-ацетонной смеси.

В случае возникновения аллергической реакции у пациента прекратить использование адгезива.

Входящие в состав адгезива вещества могут вызвать раздражение слизистых оболочек. При попадании на слизистую и кожу немедленно промойте водой, при попадании в глаза-

промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу. Избегайте вдыхать пары, держите вдали от источников огня.

Транспортирование

Адгезив должен транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с требованиями ГОСТ 17768-90 и правилами перевоза грузов, действующими на каждом виде транспорта. Вид отправки – почтовой посылкой, автомашинами или контейнерами для соответствующего вида транспорта. Условия транспортирования – по группе условий хранения 1 по ГОСТ 15150-69 в диапазонах температур $+ (5 \div 25) ^\circ\text{C}$.

Условия хранения

Адгезив в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться по ГОСТ 15150-69 в диапазонах температур $+ (5-12) ^\circ\text{C}$ в сухом защищенном от прямых солнечных лучей помещении.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие адгезива всем требованиям технической документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок годности

Гарантийный срок годности адгезива, при хранении в интервале температур $+ (5 \div 12) ^\circ\text{C}$ в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей помещении, в упаковке предприятия-изготовителя устанавливается - 2 года со дня изготовления.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Номер партии соответствует дате производства материала и указывается на упаковке.

Условия применения

Применяется в лечебных учреждениях, стоматологических клиниках и передвижных медицинских комплексах.

Утилизация

Адгезив, упаковка и принадлежности, входящие в набор, не требуют специальных мер предосторожности при уничтожении.

Отходы относятся классу опасности А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к твердым бытовым отходам) СанПиН 2.1.7.2970-10.

Наименование и адрес предприятия-производителя/организация принимающая претензии

Общество с ограниченной ответственностью «Стоматология Дентистри» (ООО «СТОМАДЕНТ»), 140070, Россия, Московская область, г. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 11, этаж 3, офис 301.

Телефон/факс: +7(495) 514-93-47/48; 514-93-46. E-mail: info@stomadent.ru, www.stomadent.ru

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью на 3 лист.

Генеральный директор
ООО «СТОМАДЕНТ»

Ю.В.Кузовков

