



С УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ЗАО «СтомаДент»
Добровольский П.В.

Инструкция по применению материала герметика для закрытия углублений и фиссур зубов светового отверждения «ФисСил-С».

Назначение.

Герметик светового отверждения «ФисСил-С» предназначен для изоляции фиссур. Рекомендуются как средство профилактики в детской стоматологии. Отверждается с помощью света длиной волны 450-500 нм.

Способ применения.

1. Очистите всю окклюзионную поверхность профилактической пастой, не содержащей масла и фтора. Тщательно промойте водой. Рекомендуется использовать водновоздушную струю.
2. Изолируйте обрабатываемый участок, используя кофердам или ватные валики.
3. Высушите жевательную поверхность струей воздуха не менее 30 секунд. Ватным тампоном нанесите жидкость для травления на окклюзионную поверхность обрабатываемого участка. Протравите не менее 60 секунд, затем тщательно промойте струей воды в течении 30 секунд и высушите воздухом. Протравленная поверхность должна иметь меловой оттенок. Протравленную и высушенную поверхность необходимо тщательно изолировать от попадания слюны.

Внимание!

В случае попадания слюны травление повторите в течении 10 секунд, после чего протравленную поверхность промойте водой и высушите. Хорошо высушенная после травления поверхность является условием качественной герметизации фиссуры.

4. Поместите 2 капли герметика в ячейку одноразовой кюветы.

Внимание! Следите, чтобы кювета с герметиком не попала под воздействие прямых солнечных лучей, т.к. это может привести к полимеризации герметика.

5. Нанесите герметик на подготовленный участок поверхности кисточкой. Следите, чтобы герметик попадал во все углубления фиссуры.

6. Используя источник света длиной волны 450-500 нм, отвердите нанесенный герметик в течение 40 секунд, держа световод на расстоянии 1-2 мм от обрабатываемой поверхности.

7. После отверждения герметика необходимо протереть окклюзионную поверхность ватным тампоном. Качество герметизации обрабатываемой фиссуры проверьте зондом.

Меры предосторожности

Жидкость для травления содержит 35% раствор ортофосфорной кислоты. Следите, чтобы жидкость не попала на кожу, слизистую оболочку рта, в глаза, а также на одежду. При попадании необходимо немедленно промыть водой. При попадании жидкости в глаза – немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

Хранение

Комплект герметика светового отверждения «ФисСил –С» необходимо хранить при температуре не выше $+4^{\circ}\text{C}$ в течение 2-х лет в защищенном от света помещении в упаковке завода-изготовителя. Перед использованием материал необходимо выдержать при температуре около $+23^{\circ}\text{C}$ в течение 30 минут.