



ООО «Медицина Коммерция Новые Технологии»

113105, Россия, Москва,

Варшавское шоссе, 17, офис №309

тел./факс +7 (095) 786 3963

Инструкция по применению

Хирургические инструменты для установки синовиальных суставов

ПОКАЗАНИЯ

Хирургические инструменты для установки синовиальных суставов предназначены для использования при открытых операциях по имплантации эндопротезов как крупных, так и мелких суставов (тазобедренных, коленных, локтевых, запястных и др.) пациентам обоих полов, практически без ограничения возраста.

Применимы в ходе эндопротезирования при дегенеративных, воспалительных и пост-травматических поражениях; переломах костей, асептических некрозах, онкологических поражениях, замена несостоятельного протеза (резэндопротезирование).

Хирург самостоятельно определяет тип и размер необходимого инструментария, основываясь на собственном опыте и потребностях.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Данный продукт не предназначен для использования в других областях хирургии, кроме ортопедической.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Всегда проверяйте выравнивание браншей инструментов перед началом применения, во избежание возможного возникновения осложнений в работе инструментария по ходу операции. Перед началом использования следует уточнить структурный размер необходимого инструмента.

Надлежащий уход, очистка и хранение очень важны для правильного функционирования хирургического инструментария.

Все хирургические инструменты поставляются нестерильными. Инструмент должен быть очищен и простерилизован перед каждым использованием.

Для безопасной и эффективной стерилизации инструментария рекомендуется следующий цикл:

Паровая стерилизация

Превакуум / 270-275 (132-135) / 4 минуты / Закрытый или раскрытый

Превакуум / 273-279 (135-138) / 3 минуты / Раскрытый

Основной / 270-275 (132-135) / 15 минут / Закрытый или раскрытый

Основной / 250-254 (121-124) / 30 минут / Закрытый или раскрытый

Пульсирующая струя пара под давлением / 270-275 (132-135) 4 минуты.

