



Респиратор фильтрующий медицинского назначения НЕВА® -206 с регулируемыми ремнями крепления



Респиратор фильтрующий медицинского назначения НЕВА® -216 с регулируемыми ремнями крепления

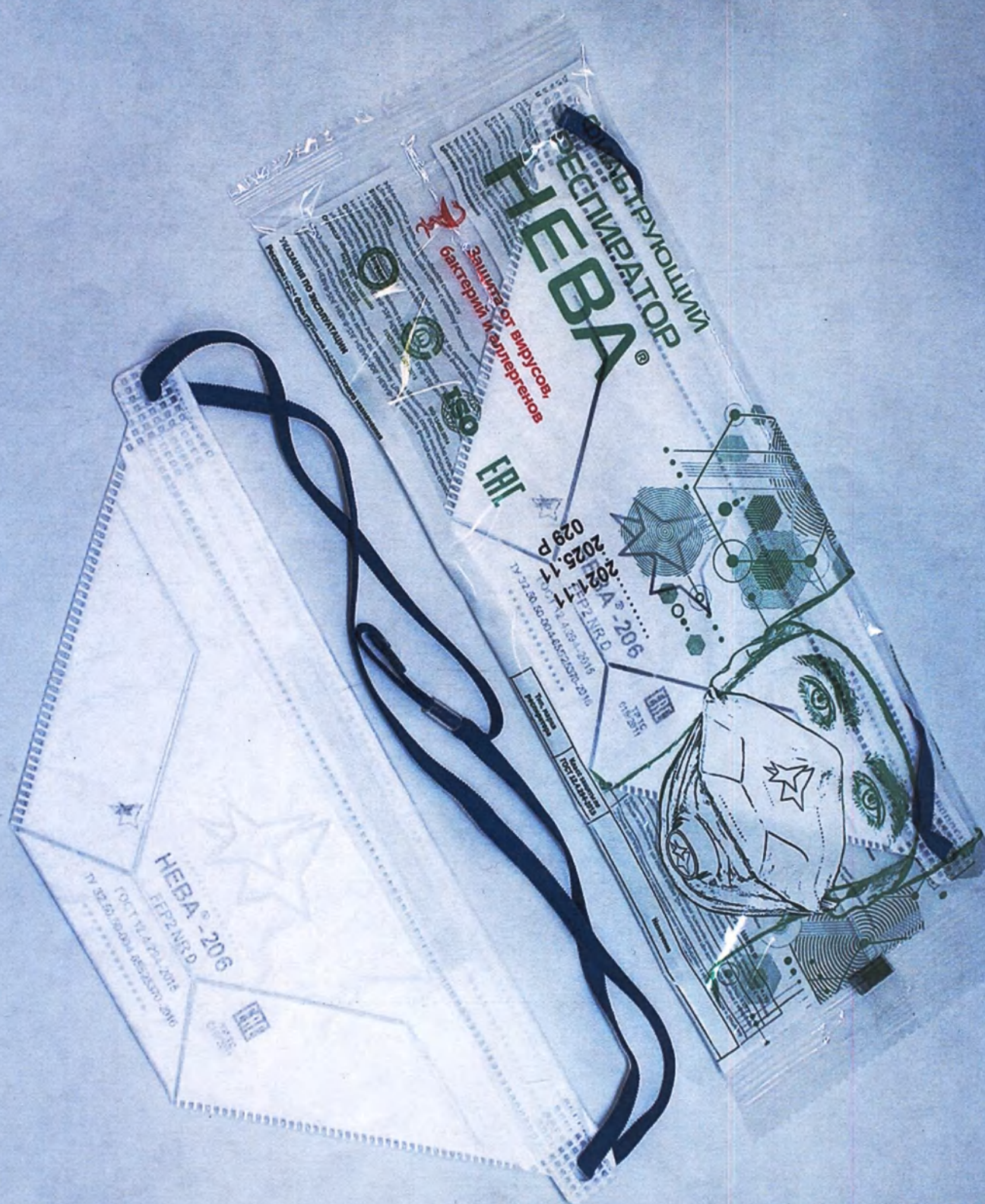

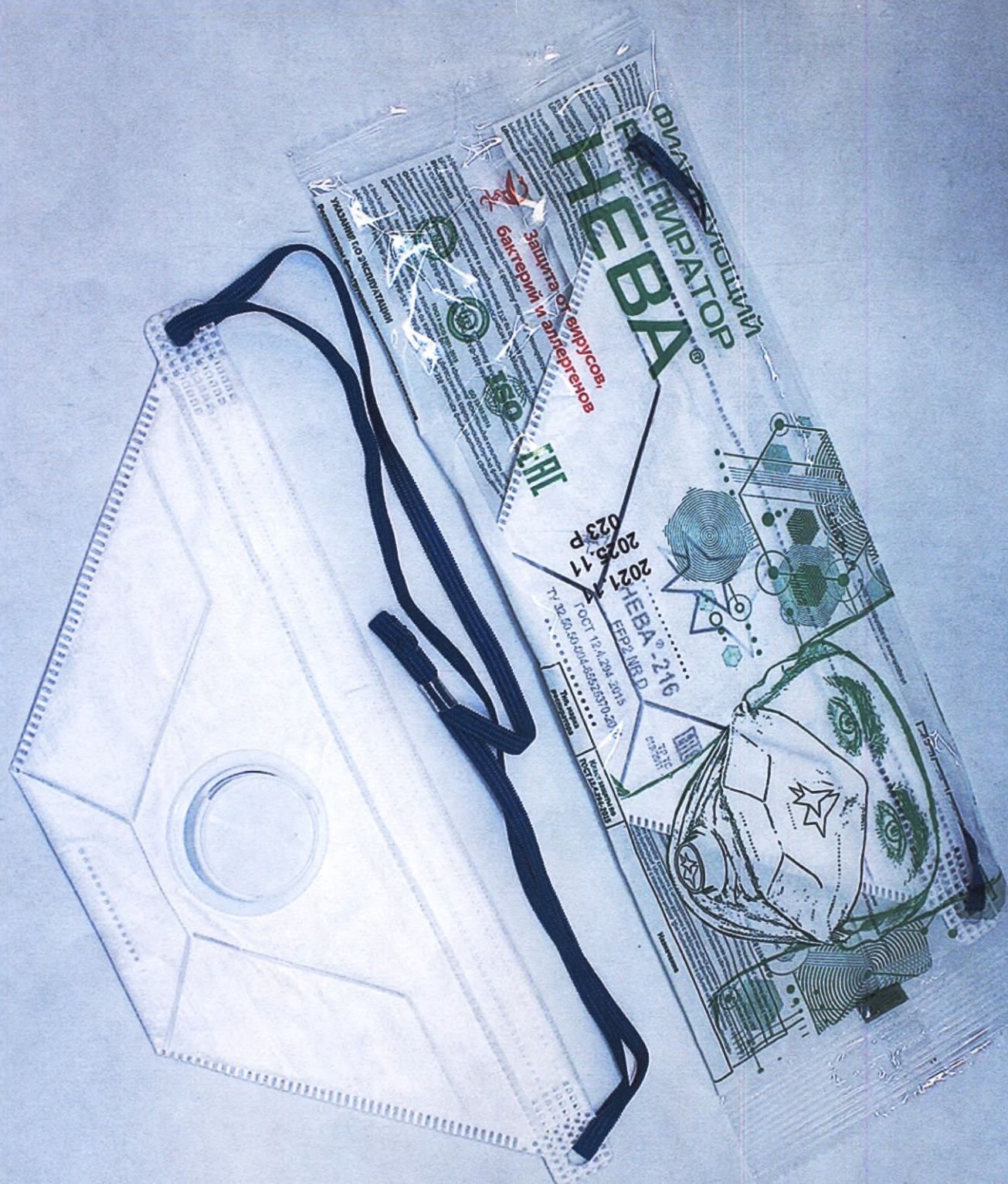

Респиратор фильтрующий медицинского назначения НЕВА®-316 с регулируемыми
ремнями крепления







Респиратор фильтрующий медицинского назначения НЕВА® -306 с нерегулируемыми
ремнями крепления



Респиратор фильтрующий медицинского назначения НЕВА® -316 с нерегулируемыми
ремнями крепления



Побочные эффекты

Индивидуальная аллергическая реакция на применяемые материалы.

Правила использования

Респиратор является средством индивидуального использования. Чистыми руками вскрыть упаковку, осмотреть респиратор на наличие дефектов. Ввести ремни крепления респиратора и расправить изделие. Завести эластичные крепления за голову и, начиная с подбородка, надеть респиратор. Расположить ремни крепления на уровне теменной и затылочной части головы. При наличии регулировки установить и зафиксировать длину ремней крепления. Обжать пластину носового зажима на переносице, равномерно расправить края респиратора на лице для исключения подсоса воздуха по полосе облегающей (прилегания). Проверить респиратор на плотность прилегания: не сдвигая респиратор, полностью накрыть его обеими руками и сделать резкий вдох. Если воздух проходит по краям респиратора, отрегулировать положение ремней крепления. Повторить проверку респиратора на плотность прилегания. Респиратор подлежит замене после окончания срока службы, а также в случае его повреждения или сильного сопротивления дыханию. Срок службы респиратора определяется его санитарно-гигиеническим состоянием и степенью физического износа. Не подлежит чистке и дезинфекции химическими растворами и реагентами. Вид и длительность контакта изделия с организмом человека: кратковременный (не более 8 часов).

Применя, условия и сроки хранения

Респиратор до использования должен храниться в упаковке изготовителя в сухих помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод при температуре окружающей среды от -30°C до +70°C и относительной влажности до 80%. Гарантийный срок хранения - 5 лет при соблюдении условий транспортирования и хранения в упаковке изготовителя. Дату изготовления и окончания срока годности смотрите на упаковке.

Транспортирование

Транспортирование респираторов осуществляется всеми видами транспорта в условиях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. Не допускается транспортирование и хранение с агрессивными и пачкающими веществами.

Требования утилизации

Респираторы после их использования по назначению утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Респираторы фильтрующие НЕВА® ТУ 32.50.50-004-65525370-2016 являются изделиями медицинского назначения (регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6856 от 31.12.2020) и соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001 + A1:2009).



Изготовитель:

ООО «Респираторный комплекс»
РФ, 188679, Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н,
городской поселок им. Морозова,
ул. Чичалова, д. 3, здание 592
тел./факс: +7 (812) 705-37-33,
e-mail: zakaz@rkszpe.ru, www.rkszpe.ru



ФИЛЬТРУЮЩИЙ РЕСПИРАТОР НЕВА®



**Защита от вирусов,
бактерий и аллергенов**



УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Респираторы фильтрующие медицинского назначения
НЕВА®-206, НЕВА®-216, НЕВА®-306, НЕВА®-316
с регулируемые/нерегулируемые ремнями крепления
ГОСТ 12.4.294-2015, ТУ 32.50.50-004-65525370-2016

Респираторы НЕВА®-206, НЕВА®-216, НЕВА®-306, НЕВА®-316 являются фильтрующими средствами индивидуальной защиты органов дыхания соразового использования для защиты от аэрозолей. Представляет собой многослойную фильтрующую полумаску канального типа с регулируемые/нерегулируемые эластичными ремнями крепления, оснащенную клапаном выдоха или без него.

Область применения

Респираторы НЕВА®-206, НЕВА®-216, НЕВА®-306, НЕВА®-316 являются медицинскими изделиями и предназначены для защиты органов дыхания медицинского персонала и населения от всех видов аэрозолей, включая микробиологические. Показанием к применению является наличие в воздухе крупных частиц и мелких частиц во время ситуаций, представляющих опасность для здоровья медицинских специалистов, пациентов и населения. Класс защиты в соответствии с таблицей.

Ограничения по применению (противопоказания)

Нельзя применять респиратор:

- имеющий сквозные отверстия и нарушающие целостности фильтрующего материала;
- в случае содержания кислорода в воздухе менее 17% от объема (холодом, закрытые емкости и т.п.)

ВНИМАНИЕ!

При применении респиратора людьми с бородой, щетиной, бакенбардами, препятствующими его плотному прилеганию, эффективность защиты респиратора снижается.

Тип, марка респиратора	Класс защиты по ГОСТ 12.4.294-2015	Назначение
НЕВА®-206 с регулируемые/нерегулируемые ремнями крепления	FFP 2 NR D	Противозащитный, без клапана выдоха. Для использования в случаях повышенной эпидемиологической опасности, при посещении больных с вирусными инфекциями, при проведении лечебных процедур, связанных с пылеобразованием или присутствием в воздухе вирусов и бактерий.
НЕВА®-216 с регулируемые/нерегулируемые ремнями крепления	FFP 2 NR D	Противозащитный, с клапаном выдоха. Для использования в случаях повышенной эпидемиологической опасности, при посещении больных с вирусными инфекциями, при проведении лечебных процедур, связанных с пылеобразованием или присутствием в воздухе вирусов и бактерий.
НЕВА®-306 с регулируемые/нерегулируемые ремнями крепления	FFP 3 NR D	Противозащитный, без клапана выдоха. Для использования при возможном контакте с наиболее опасными возбудителями заболеваний (туберкулез, атипичная пневмония, птичий грипп и т.д.).
НЕВА®-316 с регулируемые/нерегулируемые ремнями крепления	FFP 3 NR D	Противозащитный, с клапаном выдоха. Для использования при возможном контакте с наиболее опасными возбудителями заболеваний (туберкулез, атипичная пневмония, птичий грипп и т.д.).

Обозначение респираторов: НЕВА®-206 FFP2 NR D, НЕВА®-216 FFP2 NR D, НЕВА®-306 FFP3 NR D, НЕВА®-316 FFP3 NR D:

НЕВА® - марка респиратора; 6 - для применения; NR - однократового применения;
2, 3 - класс защиты по аэрозолям; в медицинских учреждениях; для использования в течение одной смены;
D - без клапана; FFP2, FFP3 - класс защиты; D - устойчив к запылению.
1 - с клапаном;

Обозначение наличия/отсутствия регулировки ремней крепления смотрите на упаковке:

R - регулируемые ремни крепления; NR - нерегулируемые ремни крепления.