

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

«Респираторный комплекс»

Астахов В.С.

10.2022



УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Респираторы фильтрующие
медицинского назначения
НЕВА®-206, НЕВА®-216, НЕВА®-306, НЕВА®-316
с регулируемыми/нерегулируемыми ремнями крепления
ГОСТ 12.4.294-2015
ТУ 32.50.50-004-65525370-2016**

Респираторы НЕВА®-206, НЕВА®-216, НЕВА®-306, НЕВА®-316 являются фильтрующими средствами индивидуальной защиты органов дыхания одноразового использования для защиты от аэрозолей. Представляют собой многослойную фильтрующую полумаску конвертного типа с регулируемыми/нерегулируемыми эластичными ремнями крепления, оснащенную клапаном выдоха или без него.

Область применения

Респираторы НЕВА®-206, НЕВА®-216, НЕВА®-306, НЕВА®-316 являются медицинскими изделиями и предназначены для защиты органов дыхания медицинского персонала и населения от всех видов аэрозолей, включая микробиологические.

Показанием к применению является наличие в воздухе крупных частиц и мелких частиц во время ситуаций, представляющих опасность для здоровья медицинских специалистов, пациентов и населения.

Класс защиты в соответствии с таблицей:

Тип, марка респиратора	Класс защиты по ГОСТ 12.4.294-2015	Назначение
НЕВА® - 206 с регулируемыми/ нерегулируемыми ремнями крепления	FFP 2 NR D	Противоаэрозольный, без клапана выдоха. Для использования в случаях повышенной эпидемиологической опасности, при посещении больных с вирусными инфекциями, при проведении лечебных процедур, связанных с пылеобразованием или присутствием в воздухе вирусов и бактерий.
НЕВА® - 216 с регулируемыми/ нерегулируемыми ремнями крепления	FFP 2 NR D	Противоаэрозольный, с клапаном выдоха. Для использования в случаях повышенной эпидемиологической опасности, при посещении больных с вирусными инфекциями, при проведении лечебных процедур, связанных с пылеобразованием или присутствием в воздухе вирусов и бактерий.
НЕВА® - 306 с регулируемыми/ нерегулируемыми ремнями крепления	FFP 3 NR D	Противоаэрозольный, без клапана выдоха. Для использования при возможном контакте с наиболее опасными возбудителями заболеваний (туберкулез, атипичная пневмония, птичий грипп и т.д.)
НЕВА® - 316 с регулируемыми/ нерегулируемыми ремнями крепления	FFP 3 NR D	Противоаэрозольный, с клапаном выдоха. Для использования при возможном контакте с наиболее опасными возбудителями заболеваний (туберкулез, атипичная пневмония, птичий грипп и т.д.)

Обозначение респираторов: НЕВА® - 206 FFP 2 NR D, NR D, НЕВА® - 216 FFP 2 NR D, НЕВА® - 306 FFP 3 NR D, НЕВА® - 316 FFP 3 NR D;

НЕВА® - марка респиратора;

2,3 – класс защиты по аэрозолям;

0- без клапана;

1- с клапаном;

6- для применения в медицинских учреждениях;

FFP 2, FFP 3 – класс защиты;

NR – одноразового применения для использования в течение одной смены;

D- устойчив к запылению.

Обозначение наличия/отсутствия регулировки ремней крепления смотрите на упаковке:

P – регулируемые ремни крепления;

NP – нерегулируемые ремни крепления.

Ограничения по применению (противопоказания)

Нельзя применять респиратор: имеющий сквозные отверстия и нарушение целостности фильтрующего материала; при наличии в окружающей среде высокотоксичных и легковозгоняющихся веществ; при нахождении в зоне открытого пламени, в случае содержания кислорода в воздухе менее 17% от объема (колоды, закрытые емкости и т.п.).

ВНИМАНИЕ!!!

При применении респиратора людьми с бородой, щетиной, бакенбардами, препятствующими его плотному прилеганию, эффективность защиты респиратора снижается.

Побочные эффекты

Индивидуальная аллергическая реакция на применяемые материалы.

Правила использования

Респиратор является средством индивидуального использования. Чистыми руками вскрыть упаковку, осмотреть респиратор на наличие дефектов. Вывести ремни крепления респиратора и расправить изделие. Завести эластичные крепления за голову и, начиная с подбородка, надеть респиратор. Расположить ремни крепления на уровне теменной и

затылочной части головы. При наличии регулировки установить и зафиксировать длину ремней крепления. Обжать пластину носового зажима на переносице, равномерно расправить края респиратора на лице для исключения подсоса воздуха по полосе обтюрации (прилегания).

Проверить респиратор на плотность прилегания: не сдвигая респиратор, полностью накрыть его обеими руками и сделать резкий вдох. Если воздух проходит по краям респиратора, отрегулировать положение ремней крепления. Повторить проверку респиратора на плотность прилегания.

Респиратор подлежит замене после окончания срока службы, а также в случае его повреждения или сильного сопротивления дыханию.

Срок службы респиратора определяется его санитарно-гигиеническим состоянием и степенью физического износа. Не подлежит чистке и дезинфекции химическими растворами и реагентами.

Вид и длительность контакта изделия с организмом человека: кратковременный (не более 8 часов).

Правила, условия и сроки хранения

Респиратор до использования должен храниться в упаковке изготовителя в сухих помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод при температурах окружающей среды от - 30°C до +70°C и относительной влажности до 80 %.

Гарантийный срок хранения - 5 лет при соблюдении условий транспортирования и хранения в упаковке изготовителя. Дату изготовления и окончание срока годности смотрите на упаковке.

Транспортирование

Транспортирование респираторов осуществляется всеми видами транспорта в условиях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений. Не допускается транспортирование и хранение с агрессивными и пачкающими веществами.

Требования утилизации

Респираторы после их использования по назначению утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Изготовитель – ООО «Респираторный комплекс»

РФ, 188679, Ленинградская обл.,

Всеволожский р-н, гп им. Морозова,

ул. Чекалова, д. 3, здание 592.

Тел./факс: +7(812)703-37-33

e-mail: zakaz@rkszpe.ru, www.rkszpe.ru

Прошито и пронумеровано
На двух листах
Генеральный директор
ООО «Респираторный комплекс»



[Handwritten signature]



ТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
Ступаченко В.В.

**Респиратор фильтрующий
медицинского назначения
НЕВА® - 206 с регулируемым ремнями крепления
класс защиты FFP2 NR D**

**для защиты от всех видов аэрозолей, включая микробиологические
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Настоящее техническое описание и руководство по эксплуатации предназначены для изучения устройства, принципа действия и правил эксплуатации респиратора «НЕВА® – 206».

1 Техническое описание

1.2 Назначение

1.1.1 Респиратор предназначен для защиты органов дыхания медицинского персонала и населения от всех видов аэрозолей, включая микробиологические.

1.1.2 Респиратор НЕВА® – 206 является медицинским изделием. Вид медицинского изделия 180770, класс потенциального риска применения медицинского изделия 1.

1.1.3 Респиратор применяется при содержании кислорода в воздухе не менее 17% по объему.

1.1.4 Респиратор сохраняет свои защитные свойства в условиях повышенных и пониженных температур (интервал температур от минус 30°C до 70°C).

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Масса респиратора НЕВА® – 206 – до 20г.

1.2.2 Сопротивление постоянному потоку воздуха при 30 дм³/мин не более 70 Па.

1.2.3 Коэффициент пропускности по тест – аэрозолям не более 6 %.

1.2.4 Респиратор НЕВА® – 206 относится к классу средней эффективности - FFP2;

1.2.5 NR - респиратор одноразового применения для использования в течение одной смены

1.2.6 D – респиратор устойчив к запылению.

1.2.7 Расшифровка записи НЕВА® – 206:

НЕВА® – марка респиратора

2 – второго класса защиты по аэрозолям,

0 – без клапана,

6 – для применения в медицинских учреждениях.

1.3 Комплектность

Респираторы поставляются комплектом, состоящим из:

- респиратор – 1 шт.;

- индивидуальный пакет с нанесенными указаниями по эксплуатации – 1 шт.

1.4 Устройство и принцип защитного действия респиратора

1.4.1 Респиратор НЕВА® – 206 представляет собой (рис.1) готовую к применению фильтрующую полумаску конвертного типа, состоящую из корпуса (1), обжимной пластины (2) и регулируемых с помощью фиксатора (4) эластичных ремней крепления (3).

1.4.2. Принцип защитного действия респираторов основан на очистке вдыхаемого воздуха путем фильтрации аэрозолей высокоэффективным фильтрующим материалом корпуса респиратора.

1.4.3 Надежность полосы обтяжки (прилегания к лицу) обеспечивается фильтрующим материалом корпуса респиратора и гибкой обжимной пластиной, служащей для обжима респиратора в области переносицы.

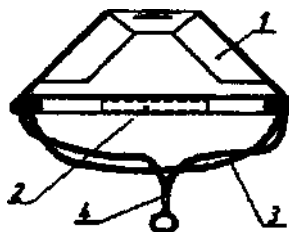


Рисунок 1 – Устройство респиратора НЕВА® – 206 с регулируемым ремнями крепления
1 – корпус, 2 – обжимная пластина, 3 – ремни крепления, 4 – фиксатор

1.5 Указания к применению

1.5.1 Респиратор должен применяться только по назначению.

1.5.2 Респиратор является средством индивидуального использования.

1.5.3 Эксплуатационные ограничения:

- респиратор НЕВА® – 206 не обеспечивает защиту от органических растворителей, высокотоксичных и легковоспламеняющихся веществ, вредных паров и газов; неприменим в зоне открытого пламени;
- при применении респиратора людьми с бородой, щетиной, бакенбардами, препятствующими плотному прилеганию полумаски, эффективность респиратора снижается.

1.5.4 Подготовка респиратора к применению:

- перед применением респиратора чистыми руками вскрыть упаковку и осмотреть респиратор на наличие дефектов: проколов, сквозных отверстий, повреждений, загрязнений фильтрующей полумаски;
- респиратор НЕВА® – 206 поставляется в готовом для применения виде и дополнительной подготовки не требует.

1.5.5 Применение респиратора

1.5.5.1 Надежность защиты от вредных аэрозолей зависит не только от исправности респиратора, но и от правильного его использования.

1.5.5.2 Порядок подготовки респиратора к работе подробно изложен в указаниях по эксплуатации, которые входят в комплект поставки респиратора.

1.5.5.3 Респиратор необходимо оберегать от механических повреждений.

1.6 Правила хранения

1.6.1 Респиратор до использования должен храниться в упаковке изготовителя в сухих помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод, вдали от теплоизлучающих приборов, воздействия влаги, масел и органических растворителей при температурах окружающей среды от минус 30°C до 70°C и относительной влажности до 80 %.

1.6.2 Не допускается совместное хранение и транспортировка респираторов с маслами, органическими растворителями, агрессивными химическими веществами, ядохимикатами и пачкающими продуктами.

1.7 Транспортирование

Транспортирование респираторов возможно всеми видами транспорта и при любой погоде в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта. При этом респираторы должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

1.8 Гарантии изготовителя

1.8.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие респираторов требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения в упаковке изготовителя.

1.8.2 Срок годности респираторов в упаковке изготовителя 5 лет с даты изготовления.

1.8.3 Респиратор безопасен для здоровья человека.

Изготовитель – ООО «Респираторный комплекс»
РФ, 188679, Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, гп им. Морозова,
ул. Чекалова, д. 3, здание 592
Тел./факс: +7(812)703-37-33
e-mail: zakaz@rkszpe.ru, www.rkszpe.ru



**Респиратор фильтрующий
медицинского назначения
НЕВА® - 206 с нерегулируемыми ремнями крепления
класс защиты FFP2 NR D**

для защиты от всех видов аэрозолей, включая микробиологические

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настоящее техническое описание и руководство по эксплуатации предназначены для изучения устройства, принципа действия и правил эксплуатации респиратора «НЕВА® – 206».

1 Техническое описание

1.1 Назначение

1.1.1 Респиратор предназначен для защиты органов дыхания медицинского персонала и населения от всех видов аэрозолей, включая микробиологические.

1.1.2 Респиратор НЕВА® – 206 является медицинским изделием. Вид медицинского изделия 180770, класс потенциального риска применения медицинского изделия 1.

1.1.3 Респиратор применяется при содержании кислорода в воздухе не менее 17% по объему.

1.1.4 Респиратор сохраняет свои защитные свойства в условиях повышенных и пониженных температур (интервал температур от минус 30°C до 70°C).

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Масса респиратора НЕВА® – 206 – до 20г.

1.2.2 Сопротивление постоянному потоку воздуха при 30 дм³/мин не более 70 Па.

1.2.3 Коэффициент проницаемости по тест – аэрозолям не более 6 %.

1.2.4 Респиратор НЕВА® – 206 относится к классу средней эффективности - FFP2;

1.2.5 NR - респиратор одноразового применения для использования в течение одной смены

1.2.6 D – респиратор устойчив к запылению.

1.2.7 Расшифровка записи НЕВА® – 206:

НЕВА® – марка респиратора

2 – второго класса защиты по аэрозолям,

0 - без клапана,

6 – для применения в медицинских учреждениях.

1.3 Комплектность

Респираторы поставляются комплектом, состоящим из:

- респиратор – 1 шт.;

- индивидуальный пакет с нанесенными указаниями по эксплуатации – 1 шт.

1.4 Устройство и принцип защитного действия респиратора

1.4.1 Респиратор НЕВА® – 206 представляет собой (рис.1) готовую к применению фильтрующую полумаску конвертного типа, состоящую из корпуса (1), обжимной пластины (2) и нерегулируемых эластичных ремней крепления (3).

1.4.2. Принцип защитного действия респираторов основан на очистке вдыхаемого воздуха путем фильтрации аэрозолей высокоэффективным фильтрующим материалом корпуса респиратора.

1.4.3 Надежность полосы obtюрации (прилегания к лицу) обеспечивается фильтрующим материалом корпуса респиратора и гибкой обжимной пластиной, служащей для обжима респиратора в области переносицы.

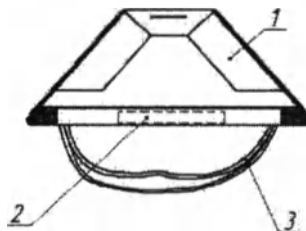


Рисунок 1 – Устройство респиратора НЕВА® – 206 с нерегулируемыми ремнями крепления
1 – корпус, 2 – обжимная пластина, 3 – нерегулируемые ремни крепления

1.5 Указания к применению

1.5.1 Респиратор должен применяться только по назначению.

1.5.2 Респиратор является средством индивидуального использования.

1.5.3 Эксплуатационные ограничения:

- респиратор НЕВА® – 206 не обеспечивает защиту от органических растворителей, высокотоксичных и легковозгорающихся веществ, вредных паров и газов; неприменим в зоне открытого пламени;
- при применении респиратора людьми с бородой, щетиной, бакенбардами, препятствующими плотному прилеганию полумаски, эффективность респиратора снижается.

1.5.4 Подготовка респиратора к применению:

- перед применением респиратора чистыми руками вскрыть упаковку и осмотреть респиратор на наличие дефектов: проколов, сквозных отверстий, повреждений, загрязнений фильтрующей полумаски;
- респиратор НЕВА® – 206 поставляется в готовом для применения виде и дополнительной подготовки не требует.

1.5.5 Применение респиратора

1.5.5.1 Надежность защиты от вредных аэрозолей зависит не только от исправности респиратора, но и от правильного его использования.

1.5.5.2 Порядок подготовки респиратора к работе подробно изложен в указаниях по эксплуатации, которые входят в комплект поставки респиратора.

1.5.5.3 Респиратор необходимо оберегать от механических повреждений.

1.6 Правила хранения

1.6.1 Респиратор до использования должен храниться в упаковке изготовителя в сухих помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод, вдали от тепломзлучающих приборов, воздействия влаги, масел и органических растворителей при температурах окружающей среды от минус 30°C до 70°C и относительной влажности до 80 %.

1.6.2 Не допускается совместное хранение и транспортировка респираторов с маслами, органическими растворителями, агрессивными химическими веществами, адохимикатами и пачкающими продуктами.

1.7 Транспортирование

Транспортирование респираторов возможно всеми видами транспорта и при любой погоде в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта. При этом респираторы должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

1.8 Гарантии изготовителя

1.8.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие респираторов требованиям технических условий при соблюдении: условий эксплуатации, транспортирования и хранения в упаковке изготовителя.

1.8.2 Срок годности респираторов в упаковке изготовителя 5 лет с даты изготовления.

1.8.3 Респиратор безопасен для здоровья человека.

Изготовитель – ООО «Респираторный комплекс»

РФ, 188679, Ленинградская обл.,

Всеволожский р-н, гп им. Морозова,

ул. Чекалова, д. 3, здание 592

Тел./факс: +7(812)703-37-33

e-mail: zakaz@rkszpe.ru, www.rkszpe.ru



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Григоренко В.В.

**Респиратор фильтрующий
медицинского назначения
НЕВА® - 216 с регулируемыми ремнями крепления
класс защиты FFP2 NR D**

**для защиты от всех видов аэрозолей, включая микробиологические
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Настоящее техническое описание и руководство по эксплуатации предназначены для изучения устройства, принципа действия и правил эксплуатации респиратора «НЕВА® - 216».

1 Техническое описание

1.1 Назначение

1.1.1 Респиратор предназначен для защиты органов дыхания медицинского персонала и населения от всех видов аэрозолей, включая микробиологические.

1.1.2 Респиратор НЕВА® - 216 является медицинским изделием. Вид медицинского изделия 180770, класс потенциального риска применения медицинского изделия I.

1.1.3 Респиратор применяется при содержании кислорода в воздухе не менее 17% по объему.

1.1.4 Респиратор сохраняет свои защитные свойства в условиях повышенных и пониженных температур (интервал температур от минус 30°C до 70°C).

1.1.5 Респиратор обеспечивает защиту персонала в течение времени (равному одной смене), необходимого для выполнения одного или нескольких полных циклов обслуживания одного пациента или группы пациентов.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Масса респиратора НЕВА® - 216 - до 25г.

1.2.2 Сопротивление постоянному потоку воздуха при 30 дм³/мин не более 70 Па.

1.2.3 Коэффициент проницаемости по тест - аэрозолям не более 6 %.

1.2.4 Респиратор НЕВА® - 216 относится к классу средней эффективности - FFP2;

1.2.5 NR - респиратор одноразового применения для использования в течение одной смены

1.2.6 D - респиратор устойчив к запылению.

1.2.7 Расшифровка записи НЕВА® - 216:

НЕВА® - марка респиратора

2 - второго класса защиты по аэрозолям,

1 - с клапаном,

6 - для применения в медицинских учреждениях.

1.3 Комплектность

Респираторы поставляются комплектом, состоящим из:

- респиратор - 1 шт.;

- индивидуальный пакет с нанесенными указаниями по эксплуатации - 1 шт.

1.4 Устройство и принцип защитного действия респиратора

1.4.1 Респиратор НЕВА® - 216 представляет собой (рис.1) готовую к применению фильтрующую полумаску конвертного типа, состоящую из корпуса (1), обжимной пластины (2), регулируемых с помощью фиксатора (5) эластичных ремней крепления (3) и клапана выдоха (4).

1.4.2 Принцип защитного действия респираторов основан на очистке вдыхаемого воздуха путем фильтрации аэрозолей высокоэффективным фильтрующим материалом корпуса респиратора.

1.4.3 Надежность полосы обтяжки (прилегания к лицу) обеспечивается фильтрующим материалом корпуса респиратора и гибкой обжимной пластиной, служащей для обжима респиратора в области переносицы.

1.4.4 Клапан выдоха (4) предназначен для облегчения дыхания при физической работе и уменьшения намокания респиратора за счет удаления влаги выдыхаемого воздуха через клапан выдоха.

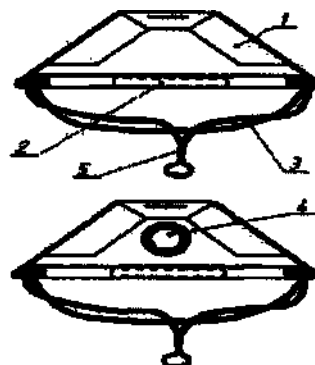


Рисунок 1 - Устройство респиратора НЕВА® - 216 с регулируемыми ремнями крепления
1 - корпус, 2 - обжимная пластина, 3 - ремни крепления, 4- клапан выдоха, 5- фиксатор

1.5 Указания к применению

1.5.1 Респиратор должен применяться только по назначению.

1.5.2 Респиратор является средством индивидуального использования.

1.5.3 Эксплуатационные ограничения:

- респиратор НЕВА® – 216 не обеспечивает защиту от органических растворителей, высокотоксичных и легковозгорающихся веществ, вредных паров и газов; неприменим в зоне открытого пламени.
- при применении респиратора людьми с бородой, щетиной, бакенбардами, препятствующими плотному прилеганию полумаски, эффективность респиратора снижается.

1.5.4 Подготовка респиратора к применению:

- перед применением респиратора чистыми руками вскрыть упаковку и осмотреть респиратор на наличие дефектов: проколов, сквозных отверстий, повреждений, загрязнений фильтрующей полумаски;
- респиратор НЕВА® – 216 поставляется в готовом для применения виде и дополнительной подготовки не требует.

1.5.5 Применение респиратора

1.5.5.1 Надежность защиты от вредных аэрозолей зависит не только от исправности респиратора, но и от правильного его использования.

1.5.5.2 Порядок подготовки респиратора к работе подробно изложен в указаниях по эксплуатации, которые входят в комплект поставки респиратора.

1.5.5.3 Респиратор необходимо оберегать от механических повреждений.

1.6 Правила хранения

1.6.1 Респиратор до использования должен храниться в упаковке изготовителя в сухих помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод, вдали от теплоизлучающих приборов, воздействия влаги, масел и органических растворителей при температурах окружающей среды от минус 30°C до 70°C и относительной влажности до 80 %.

1.6.2 Не допускается совместное хранение и транспортировка респираторов с маслами, органическими растворителями, агрессивными химическими веществами, ядохимикатами и пачкающими продуктами.

1.7 Транспортирование

Транспортирование респираторов возможно всеми видами транспорта и при любой погоде в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта. При этом респираторы должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

1.8 Гарантии изготовителя

1.8.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие респираторов требованиям технических условий при соблюдении: условий эксплуатации, транспортирования и хранения в упаковке изготовителя.

1.8.2 Срок годности респираторов в упаковке изготовителя 5 лет с даты изготовления.

1.8.3 Респиратор безопасен для здоровья человека.

Изготовитель – ООО «Респираторный комплекс»

РФ, 188679, Ленинградская обл.,

Всеволожский р-н, гп им. Морозова,

ул. Чекалова, д. 3, здание 592

Тел./факс: +7(812)703-37-33

e-mail: zakaz@rkszpe.ru, www.rkszpe.ru



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
Григорьев В.В.

**Респиратор фильтрующий
медицинского назначения
НЕВА® - 216 с нерегулируемыми ремнями крепления
класс защиты FFP2 NR D**

**для защиты от всех видов аэрозолей, включая микробиологические
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Настоящее техническое описание и руководство по эксплуатации предназначены для изучения устройства, принципа действия и правил эксплуатации респиратора «НЕВА® - 216».

1 Техническое описание

1.1 Назначение

1.1.1 Респиратор предназначен для защиты органов дыхания медицинского персонала и населения от всех видов аэрозолей, включая микробиологические.

1.1.2 Респиратор НЕВА® - 216 является медицинским изделием. Вид медицинского изделия 180770, класс потенциального риска применения медицинского изделия 1.

1.1.3 Респиратор применяется при содержании кислорода в воздухе не менее 17% по объему.

1.1.4 Респиратор сохраняет свои защитные свойства в условиях повышенных и пониженных температур (интервал температур от минус 30°C до 70°C).

1.1.5 Респиратор обеспечивает защиту персонала в течение времени (равному одной смене), необходимого для выполнения одного или нескольких полных циклов обслуживания одного пациента или группы пациентов.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Масса респиратора НЕВА® - 216 – до 25г.

1.2.2 Сопротивление постоянному потоку воздуха при 30 дм³/мин не более 70 Па.

1.2.3 Коэффициент проницаемости по тест – аэрозолям не более 6 %.

1.2.4 Респиратор НЕВА® - 216 относится к классу средней эффективности - FFP2;

1.2.5 NR - респиратор одноразового применения для использования в течение одной смены

1.2.6 D – респиратор устойчив к запылению.

1.2.7 Расшифровка записи НЕВА® - 216:

НЕВА® – марка респиратора

2 – второго класса защиты по аэрозолям,

1 - с клапаном,

6 – для применения в медицинских учреждениях.

1.3 Комплектность

Респираторы поставляются комплектом, состоящим из:

- респиратор – 1 шт.;

- индивидуальный пакет с нанесенными указаниями по эксплуатации – 1 шт.

1.4 Устройство и принцип защитного действия респиратора

1.4.1 Респиратор НЕВА® - 216 представляет собой (рис. 1) готовую к применению фильтрующую полумаску конвертного типа, состоящую из корпуса (1), обжимной пластины (2), нерегулируемых эластичных ремней крепления (3) и клапана выдоха (4).

1.4.2. Принцип защитного действия респираторов основан на очистке вдыхаемого воздуха путем фильтрации аэрозолей высокоэффективным фильтрующим материалом корпуса респиратора.

1.4.3 Надежность полосы обтюрации (прилегания к лицу) обеспечивается фильтрующим материалом корпуса респиратора и гибкой обжимной пластиной, служащей для обжима респиратора в области переносицы.

1.4.4 Клапан выдоха (4) предназначен для облегчения дыхания при физической работе и уменьшения намочения респиратора за счет удаления влаги выдыхаемого воздуха через клапан выдоха.

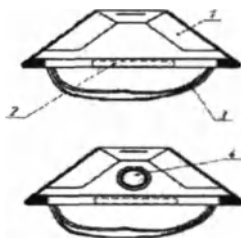


Рисунок 1 – Устройство респиратора НЕВА® - 216 с нерегулируемыми ремнями крепления
1 – корпус, 2 – обжимная пластина, 3 – ремни крепления, 4 – клапан выдоха

1.5 Указания к применению

1.5.1 Респиратор должен применяться только по назначению.

1.5.2 Респиратор является средством индивидуального использования.

1.5.3 Эксплуатационные ограничения:

- респиратор НЕВА® – 216 не обеспечивает защиту от органических растворителей, высокотоксичных и легковозгоняющихся веществ, вредных паров и газов; неприменим в зоне открытого пламени.
- при применении респиратора людьми с бородой, щетиной, бакенбардами, препятствующими плотному прилеганию полумаски, эффективность респиратора снижается.

1.5.4 Подготовка респиратора к применению:

- перед применением респиратора чистыми руками вскрыть упаковку и осмотреть респиратор на наличие дефектов: проколов, сквозных отверстий, повреждений, загрязнений фильтрующей полумаски;
- респиратор НЕВА® – 216 поставляется в готовом для применения виде и дополнительной подготовки не требует.

1.5.5 Применение респиратора

1.5.5.1 Надежность защиты от вредных аэрозолей зависит не только от исправности респиратора, но и от правильного его использования.

1.5.5.2 Порядок подготовки респиратора к работе подробно изложен в указаниях по эксплуатации, которые входят в комплект поставки респиратора.

1.5.5.3 Респиратор необходимо оберегать от механических повреждений.

1.6 Правила хранения

1.6.1 Респиратор до использования должен храниться в упаковке изготовителя в сухих помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод, вдали от теплоизлучающих приборов, воздействия влаги, масел и органических растворителей при температурах окружающей среды от минус 30°C до 70°C и относительной влажности до 80 %.

1.6.2 Не допускается совместное хранение и транспортировка респираторов с маслами, органическими растворителями, агрессивными химическими веществами, ядохимикатами и пачкающими продуктами.

1.7 Транспортирование

Транспортирование респираторов возможно всеми видами транспорта и при любой погоде в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта. При этом респираторы должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

1.8 Гарантии изготовителя

1.8.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие респираторов требованиям технических условий при соблюдении: условий эксплуатации, транспортирования и хранения в упаковке изготовителя.

1.8.2 Срок годности респираторов в упаковке изготовителя 5 лет с даты изготовления.

1.8.3 Респиратор безопасен для здоровья человека.

Изготовитель – ООО «Респираторный комплекс»

РФ, 188679, Ленинградская обл.,

Всеволожский р-н, гп им. Морозова,

ул. Чекалова, д. 3, здание 592

Тел./факс: +7(812)703-37-33

e-mail: zakaz@rkszpe.ru, www.rkszpe.ru



**Респиратор фильтрующий
медицинского назначения**

**НЕВА® - 306 с регулируемыми ремнями крепления
класс защиты FFP3 NR D**

для защиты от всех видов аэрозолей, включая микробиологические
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настоящее техническое описание и руководство по эксплуатации предназначены для изучения устройства, принципа действия и правил эксплуатации респиратора «НЕВА® – 306».

1 Техническое описание

1.1 Назначение

- 1.1.1 Респиратор предназначен для защиты органов дыхания медицинского персонала и населения от всех видов аэрозолей, включая микробиологические.
- 1.1.2 Респиратор НЕВА® – 306 является медицинским изделием. Вид медицинского изделия 180770, класс потенциального риска применения медицинского изделия 1.
- 1.1.3 Респиратор применяется при содержании кислорода в воздухе не менее 17% по объему.
- 1.1.4 Респиратор сохраняет свои защитные свойства в условиях повышенных и пониженных температур (интервал температур от минус 30°C до 70°C).
- 1.1.5 Респиратор обеспечивает защиту персонала в течение времени (равному одной смене), необходимого для выполнения одного или нескольких полных циклов обслуживания одного пациента или группы пациентов.

1.2 Технические характеристики

- 1.2.1 Масса респиратора НЕВА® – 306 – до 20г.
- 1.2.2 Сопротивление постоянному потоку воздуха при 30 дм³/мин не более 100 Па.
- 1.2.3 Коэффициент проницаемости по тест – аэрозолям не более 1 %.
- 1.2.4 Респиратор НЕВА® – 306 относится к классу высокой эффективности – FFP3;
- 1.2.5 NR - респиратор одноразового применения для использования в течение одной смены
- 1.2.6 D – респиратор устойчив к запылению.
- 1.2.7 Расшифровка записи НЕВА® – 306:
НЕВА® – марка респиратора
3 – третьего класса защиты по аэрозолям,
0 – без клапана,
6 – для применения в медицинских учреждениях.

1.3 Комплектность

Респираторы поставляются комплектом, состоящим из:

- респиратор – 1 шт.;
- индивидуальный пакет с нанесенными указаниями по эксплуатации – 1 шт.

1.4 Устройство и принцип защитного действия респиратора

1.4.1 Респиратор НЕВА® – 306 представляет собой (рис.1) готовую к применению фильтрующую полумаску конвертного типа, состоящую из корпуса (1), обжимной пластины (2) и регулируемых с помощью фиксатора (4) эластичных ремней крепления (3).

1.4.2. Принцип защитного действия респираторов основан на очистке вдыхаемого воздуха путем фильтрации аэрозолей высокоэффективным фильтрующим материалом корпуса респиратора.

1.4.3 Надежность полосы obtюрации (прилегания к лицу) обеспечивается фильтрующим материалом корпуса респиратора и гибкой обжимной пластиной, служащей для обжима респиратора в области переносицы.

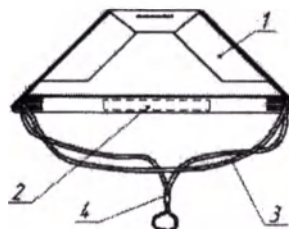


Рисунок 1 – Устройство респиратора НЕВА® – 306 с регулируемыми ремнями крепления
1 – корпус, 2 – обжимная пластина, 3 – ремни крепления, 4 – фиксатор

1.5 Указания к применению

1.5.1 Респиратор должен применяться только по назначению.

1.5.2 Респиратор является средством индивидуального использования.

1.5.3 Эксплуатационные ограничения:

- респиратор НЕВА® – 306 не обеспечивает защиту от органических растворителей, высокотоксичных и легковозгоняющихся веществ, вредных паров и газов; неприменим в зоне открытого пламени.
- при применении респиратора людьми с бородой, щетиной, бакенбардами, препятствующими плотному прилеганию полумаски, эффективность респиратора снижается.

1.5.4 Подготовка респиратора к применению:

- при получении респиратора чистыми руками вскрыть упаковку и осмотреть респиратор на наличие дефектов: проколов, сквозных отверстий, повреждений, загрязнений фильтрующей полумаски;
- респиратор НЕВА® – 306 поставляется в собранном виде и дополнительной подготовки не требует.

1.5.5 Применение респиратора

1.5.5.1 Надежность защиты от вредных аэрозолей зависит не только от исправности респиратора, но и от правильного его использования.

1.5.5.2 Порядок подготовки респиратора к работе подробно изложен в указаниях по эксплуатации, которые входит в комплект поставки респиратора.

1.5.5.3 Респиратор необходимо оберегать от механических повреждений.

1.6 Правила хранения

1.6.1 Респиратор до использования должен храниться в упаковке изготовителя в сухих помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод, вдали от теплоизлучающих приборов, воздействия влаги, масел и органических растворителей при температурах окружающей среды от минус 30°C до 70°C и относительной влажности до 80 %.

1.6.2 Не допускается совместное хранение и транспортировка респираторов с маслами, органическими растворителями, агрессивными химическими веществами, ядохимикатами и пачкающими продуктами.

1.7 Транспортирование

Транспортирование респираторов возможно всеми видами транспорта и при любой погоде в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта. При этом респираторы должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

1.8 Гарантии изготовителя

1.8.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие респираторов требованиям технических условий при соблюдении условий: эксплуатации, транспортирования и хранения в упаковке изготовителя.

1.8.2 Срок годности респираторов в упаковке изготовителя 5 лет с даты изготовления.

1.8.3 Респиратор безопасен для здоровья человека.

Изготовитель – ООО «Респираторный комплекс»

РФ, 188679, Ленинградская обл.,

Всеволожский р-н, гп им. Морозова,

ул. Чекалова, д. 3, здание 592

Тел./факс: +7(812)703-37-33

e-mail: zakaz@rkszpe.ru, www.rkszpe.ru



**Респиратор фильтрующий
медицинского назначения
НЕВА® - 306 с нерегулируемыми ремнями крепления
класс защиты FFP3 NR D**

для защиты от всех видов аэрозолей, включая микробиологические

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настоящее техническое описание и руководство по эксплуатации предназначены для изучения устройства, принципа действия и правил эксплуатации респиратора «НЕВА® - 306».

1 Техническое описание

1.1 Назначение

1.1.1 Респиратор предназначен для защиты органов дыхания медицинского персонала и населения от всех видов аэрозолей, включая микробиологические.

1.1.2 Респиратор НЕВА® - 306 является медицинским изделием. Вид медицинского изделия 180770, класс потенциального риска применения медицинского изделия 1.

1.1.3 Респиратор применяется при содержании кислорода в воздухе не менее 17% по объему.

1.1.4 Респиратор сохраняет свои защитные свойства в условиях повышенных и пониженных температур (интервал температур от минус 30°C до 70°C).

1.1.5 Респиратор обеспечивает защиту персонала в течение времени (равному одной смене), необходимого для выполнения одного или нескольких полных циклов обслуживания одного пациента или группы пациентов.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Масса респиратора НЕВА® - 306 – до 20г.

1.2.2 Сопротивление постоянному потоку воздуха при 30 дм³/мин не более 100 Па.

1.2.3 Коэффициент проницаемости по тест – аэрозолям не более 1 %.

1.2.4 Респиратор НЕВА® - 306 относится к классу высокой эффективности – FFP3;

1.2.5 NR - респиратор одnorазового применения для использования в течение одной смены

1.2.6 D – респиратор устойчив к запылению.

1.2.7 Расшифровка записи НЕВА® - 306:

НЕВА® – марка респиратора

3 – третьего класса защиты по аэрозолям,

0 – без клапана,

6 – для применения в медицинских учреждениях.

1.3 Комплектность

Респираторы поставляются комплектом, состоящим из:

- респиратор – 1 шт.;

- индивидуальный пакет с нанесенными указаниями по эксплуатации – 1 шт.

1.4 Устройство и принцип защитного действия респиратора

1.4.1 Респиратор НЕВА® - 306 представляет собой (рис.1) готовую к применению фильтрующую полумаску конвертного типа, состоящую из корпуса (1), обжимной пластины (2) и нерегулируемых эластичных ремней крепления (3).

1.4.2. Принцип защитного действия респираторов основан на очистке вдыхаемого воздуха путем фильтрации аэрозолей высокоэффективным фильтрующим материалом корпуса респиратора.

1.4.3 Надежность полосы обтяжки (прилегания к лицу) обеспечивается фильтрующим материалом корпуса респиратора и гибкой обжимной пластиной, служащей для обжима респиратора в области переносицы.

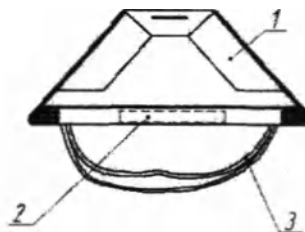


Рисунок 1 – Устройство респиратора НЕВА® - 306 с нерегулируемыми ремнями крепления
1 – корпус, 2 – обжимная пластина, 3 – ремни крепления

1.5 Указания к применению

1.5.1 Респиратор должен применяться только по назначению.

1.5.2 Респиратор является средством индивидуального использования.

1.5.3 Эксплуатационные ограничения:

- респиратор НЕВА® – 306 не обеспечивает защиту от органических растворителей, высокотоксичных и легковозгоняющихся веществ, вредных паров и газов; неприменим в зоне открытого пламени.
- при применении респиратора людьми с бородой, щетиной, бакенбардами, препятствующими плотному прилеганию полумаски, эффективность респиратора снижается.

1.5.4 Подготовка респиратора к применению:

- при получении респиратора чистыми руками вскрыть упаковку и осмотреть респиратор на наличие дефектов: проколов, сквозных отверстий, повреждений, загрязнений фильтрующей полумаски;
- респиратор НЕВА® – 306 поставляется в собранном виде и дополнительной подготовки не требует.

1.5.5 Применение респиратора

1.5.5.1 Надежность защиты от вредных аэрозолей зависит не только от исправности респиратора, но и от правильного его использования.

1.5.5.2 Порядок подготовки респиратора к работе подробно изложен в указаниях по эксплуатации, которые входят в комплект поставки респиратора.

1.5.5.3 Респиратор необходимо оберегать от механических повреждений.

1.6 Правила хранения

1.6.1 Респиратор до использования должен храниться в упаковке изготовителя в сухих помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод, вдали от теплоизлучающих приборов, воздействия влаги, масел и органических растворителей при температурах окружающей среды от минус 30°C до 70°C и относительной влажности до 80 %.

1.6.2 Не допускается совместное хранение и транспортировка респираторов с маслами, органическими растворителями, агрессивными химическими веществами, ядохимикатами и пачкающими продуктами.

1.7 Транспортирование

Транспортирование респираторов возможно всеми видами транспорта и при любой погоде в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта. При этом респираторы должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

1.8 Гарантии изготовителя

1.8.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие респираторов требованиям технических условий при соблюдении условий: эксплуатации, транспортирования и хранения в упаковке изготовителя.

1.8.2 Срок годности респираторов в упаковке изготовителя 5 лет с даты изготовления.

1.8.3 Респиратор безопасен для здоровья человека.

Изготовитель – ООО «Респираторный комплекс»

РФ, 188679, Ленинградская обл.,

Всеволожский р-н, гп им. Морозова,

ул. Чекалова, д. 3, здание 592

Тел./факс: +7(812)703-37-33

e-mail: zakaz@rkszpe.ru, www.rkszpe.ru



**Респиратор фильтрующий
медицинского назначения
НЕВА® - 316 с регулируемым ремнями крепления
класс защиты FFP3 NR D**

для защиты от всех видов аэрозолей, включая микробиологические

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настоящее техническое описание и руководство по эксплуатации предназначены для изучения устройства, принципа действия и правил эксплуатации респиратора «НЕВА® – 316».

1 Техническое описание

1.1 Назначение

1.1.1 Респиратор предназначен для защиты органов дыхания медицинского персонала и населения от всех видов аэрозолей, включая микробиологических.

1.1.2 Респиратор НЕВА® – 316 является медицинским изделием. Вид медицинского изделия 180770, класс потенциального риска применения медицинского изделия 1.

1.1.3 Респиратор применяется при содержании кислорода в воздухе не менее 17% по объему.

1.1.4 Респиратор сохраняет свои защитные свойства в условиях повышенных и пониженных температур (интервал температур от минус 30°C до 70°C).

1.1.5 Респиратор обеспечивает защиту персонала в течение времени (равному одной смене), необходимого для выполнения одного или нескольких полных циклов обслуживания одного пациента или группы пациентов.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Масса респиратора НЕВА® – 316 – до 25г.

1.2.2 Сопротивление постоянному потоку воздуха при 30 дм³/мин не более 100 Па.

1.2.3 Коэффициент проницаемости по тест – аэрозолям не более 1 %.

1.2.4 Респиратор НЕВА® – 316 относится к классу высокой эффективности – FFP3;

1.2.5 NR - респиратор однократного применения для использования в течение одной смены

1.2.6 D – респиратор устойчив к запылению.

1.2.7 Расшифровка записи НЕВА® – 316:

НЕВА® – марка респиратора

3 – третьего класса защиты по аэрозолям,

1 – с клапаном,

6 – для применения в медицинских учреждениях.

1.3 Комплектность

Респираторы поставляются комплектом, состоящим из:

- респиратор – 1 шт.;

- индивидуальный пакет с нанесенными указаниями по эксплуатации – 1 шт.

1.4 Устройство и принцип защитного действия респиратора

1.4.1 Респиратор НЕВА® – 316 представляет собой (рис.1) готовую к применению фильтрующую полумаску конвертного типа, состоящую из корпуса (1), обжимной пластины (2), регулируемых с помощью фиксатора (5) эластичных ремней крепления (3) и клапана выдоха (4).

1.4.2 Принцип защитного действия респираторов основан на очистке вдыхаемого воздуха путем фильтрации аэрозолей высокоэффективным фильтрующим материалом корпуса респиратора.

1.4.3 Надежность полосы обтяжки (прилегания к лицу) обеспечивается фильтрующим материалом корпуса респиратора и гибкой обжимной пластиной, служащей для обжима респиратора в области выдоха.

1.4.4 Клапан выдоха (4) предназначен для облегчения дыхания при физической работе и уменьшения намокания респиратора за счет удаления влаги выдыхаемого воздуха через клапан выдоха.

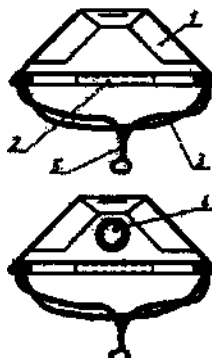


Рисунок 1 – Устройство респиратора НЕВА® – 316 с регулируемым ремнями крепления
1 – корпус, 2 – обжимная пластина, 3 – ремни крепления, 4 – клапан выдоха, 5- фиксатор.

1.5 Указания к применению

1.5.1 Респиратор должен применяться только по назначению.

1.5.2 Респиратор является средством индивидуального использования.

1.5.3 Эксплуатационные ограничения:

- респиратор НЕВА® – 316 не обеспечивает защиту от органических растворителей, высокотоксичных и легковоспламеняющихся веществ, вредных паров и газов; неприменим в зоне открытого пламени.
- при применении респиратора людьми с бородой, щетиной, бакенбардами, препятствующими плотному прилеганию полумаски, эффективность респиратора снижается.

1.5.4 Подготовка респиратора к применению:

- перед применением респиратора чистыми руками вскрыть упаковку и осмотреть респиратор на наличие дефектов: проколов, сквозных отверстий, повреждений, загрязнений фильтрующей полумаски;
- респиратор НЕВА® – 316 поставляется в готовом для применения виде и дополнительной подготовки не требует.

1.5.5 Применение респиратора

1.5.5.1 Надежность защиты от вредных аэрозолей зависит не только от исправности респиратора, но и от правильного его использования.

1.5.5.2 Порядок подготовки респиратора к работе подробно изложен в указаниях по эксплуатации, которые входят в комплект респиратора.

1.5.5.3 Респиратор необходимо оберегать от механических повреждений.

1.6 Правила хранения

1.6.1 Респиратор до использования должен храниться в упаковке изготовителя в сухих помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод, вдали от теплоизлучающих приборов, воздействия влаги, масел и органических растворителей при температурах окружающей среды от минус 30°C до 70°C и относительной влажности до 80 %.

1.6.2 Не допускается совместное хранение и транспортировка респираторов с маслами, органическими растворителями, агрессивными химическими веществами, адоксимиантами и пачкающими продуктами.

1.7 Транспортирование

Транспортирование респираторов возможно всеми видами транспорта и при любой погоде в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта. При этом респираторы должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

1.8 Гарантия изготовителя

1.8.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие респираторов требованиям технических условий при соблюдении условий: эксплуатации, транспортирования и хранения в упаковке изготовителя.

1.8.2 Срок годности респираторов в упаковке изготовителя 5 лет с даты изготовления.

1.8.3 Респиратор безопасен для здоровья человека.

Изготовитель – ООО «Респираторный комплекс»

РФ, 188679, Ленинградская обл.,

Всеволожский р-н, гп нм. Морозова,

ул. Чекалова, д. 3, здание 592.

Тел./факс: +7(812)703-37-33

e-mail: zakaz@rkszpe.ru, www.rkszpe.ru



**Респиратор фильтрующий
медицинского назначения
НЕВА® - 316 с нерегулируемыми ремнями крепления
класс защиты FFP3 NR D**

для защиты от всех видов аэрозолей, включая микробиологические

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настоящее техническое описание и руководство по эксплуатации предназначены для изучения устройства, принципа действия и правила эксплуатации респиратора «НЕВА® - 316».

1 Техническое описание

1.1 Назначение

1.1.1 Респиратор предназначен для защиты органов дыхания медицинского персонала и населения от всех видов аэрозолей, включая микробиологических.

1.1.2 Респиратор НЕВА® - 316 является медицинским изделием. Вид медицинского изделия 180770, класс потенциального риска применения медицинского изделия I.

1.1.3 Респиратор применяется при содержании кислорода в воздухе не менее 17% по объему.

1.1.4 Респиратор сохраняет свои защитные свойства в условиях повышенных и пониженных температур (интервал температур от минус 30°C до 70°C).

1.1.5 Респиратор обеспечивает защиту персонала в течение времени (равному одной смене), необходимого для выполнения одного или нескольких полных циклов обслуживания одного пациента или группы пациентов.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Масса респиратора НЕВА® - 316 - до 25г.

1.2.2 Сопротивление постоянному потоку воздуха при 30 дм³/мин не более 100 Па.

1.2.3 Коэффициент проницаемости по тест - аэрозолям не более 1 %.

1.2.4 Респиратор НЕВА® - 316 относится к классу высокой эффективности - FFP3;

1.2.5 NR - респиратор одnorазового применения для использования в течение одной смены

1.2.6 D - респиратор устойчив к запылению.

1.2.7 Расшифровка записи НЕВА® - 316:

НЕВА® - марка респиратора

3 - третьего класса защиты по аэрозолям,

1 - с клапаном,

6 - для применения в медицинских учреждениях.

1.3 Комплектность

Респираторы поставляются комплектом, состоящим из:

- респиратор - 1 шт.;

- индивидуальный пакет с нанесенными указаниями по эксплуатации - 1 шт.

1.4 Устройство и принцип защитного действия респиратора

1.4.1 Респиратор НЕВА® - 316 представляет собой (рис.1) готовую к применению фильтрующую полумаску конвертного типа, состоящую из корпуса (1), обжимной пластины (2), нерегулируемых эластичных ремней крепления (3) и клапана выдоха (4).

1.4.2. Принцип защитного действия респираторов основан на очистке вдыхаемого воздуха путем фильтрации аэрозолей высокоэффективным фильтрующим материалом корпуса респиратора.

1.4.3 Надежность полосы обтяжки (прилегания к лицу) обеспечивается фильтрующим материалом корпуса респиратора и гибкой обжимной пластиной, служащей для обжима респиратора в области переносицы.

1.4.4 Клапан выдоха (4) предназначен для облегчения дыхания при физической работе и уменьшения намокания респиратора за счет удаления влаги выдыхаемого воздуха через клапан выдоха.

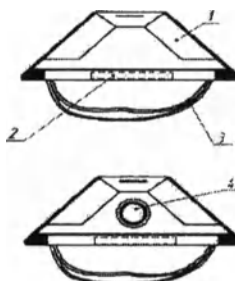


Рисунок 1 - Устройство респиратора НЕВА® - 316 с нерегулируемыми ремнями крепления
1 - корпус, 2 - обжимная пластина, 3 - ремни крепления, 4 - клапан выдоха

1.5 Указания к применению

1.5.1 Респиратор должен применяться только по назначению.

1.5.2 Респиратор является средством индивидуального использования.

1.5.3 Эксплуатационные ограничения:

- респиратор НЕВА® – 316 не обеспечивает защиту от органических растворителей, высокотоксичных и легковозгорающихся веществ, вредных паров и газов; неприменим в зоне открытого пламени.
- при применении респиратора людьми с бородой, щетиной, бакенбардами, препятствующими плотному прилеганию полумаски, эффективность респиратора снижается.

1.5.4 Подготовка респиратора к применению:

- перед применением респиратора чистыми руками вскрыть упаковку и осмотреть респиратор на наличие дефектов: проколов, сквозных отверстий, повреждений, загрязнений фильтрующей полумаски;
- респиратор НЕВА® – 316 поставляется в готовом для применения виде и дополнительной подготовки не требует.

1.5.5 Применение респиратора

1.5.5.1 Надежность защиты от вредных аэрозолей зависит не только от исправности респиратора, но и от правильного его использования.

1.5.5.2 Порядок подготовки респиратора к работе подробно изложен в указаниях по эксплуатации, которые входят в комплект респиратора.

1.5.5.3 Респиратор необходимо оберегать от механических повреждений.

1.6 Правила хранения

1.6.1 Респиратор до использования должен храниться в упаковке изготовителя в сухих помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и грунтовых вод, а также от теплоизлучающих приборов, воздействия влаги, масел и органических растворителей при температурах окружающей среды от минус 30°C до 70°C и относительной влажности до 80 %.

1.6.2 Не допускается совместное хранение и транспортировка респираторов с маслами, органическими растворителями, агрессивными химическими веществами, ядохимикатами и пачкающими продуктами.

1.7 Транспортирование

Транспортирование респираторов возможно всеми видами транспорта и при любой погоде в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта. При этом респираторы должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

1.8 Гарантии изготовителя

1.8.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие респираторов требованиям технических условий при соблюдении условий: эксплуатации, транспортирования и хранения в упаковке изготовителя.

1.8.2 Срок годности респираторов в упаковке изготовителя 5 лет с даты изготовления.

1.8.3 Респиратор безопасен для здоровья человека.

Изготовитель – ООО «Респираторный комплекс»

РФ, 188679, Ленинградская обл.,

Восевожский р-н, гп им. Морозова,

ул. Чекалова, д. 3, здание 592.

Тел./факс: +7(812)703-37-33

e-mail: gakaz@rkszpe.ru, www.rkszpe.ru

Прошито и пронумеровано
На шестьдесят листах
Генеральный директор
ООО «Респираторный комплекс»

Астахов В.С.

