


42-3671-92

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

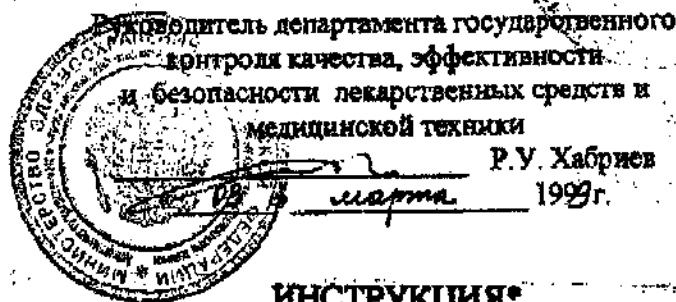

ИНСТРУКЦИЯ*

по применению питательной среды для выделения и
культивированию коклюшного микроба сухой (KYA)
Nutrient medium for isolation and cultivation of Bordetella
pertussis dry (CCA)

Питательная среда предназначена для выделения коклюшного микроба из
инфицированного материала и культивирования штаммов.

Препарат представляет собой мелкодисперсный гигроскопичный порошок
черновато-серого цвета, светочувствителен.

Препарат в количестве, указанном на этикетке для приготовления
конкретной серии питательной среды, размещивают в 1 л дистиллированной
воды, кипятят 2-3 мин до полного расплавления агара, стерилизуют
автоклавированием при температуре 110 °C в течение 30 мин. После
стерилизации размещивают путем покачивания, не допуская вспенивания и
разливают в стерильные чашки Петри по ГОСТ 25336-82E или ТУ

64-2-19-79 диаметром 100 мм слоем 5-8 мм. После застывания среду
подсушивают при температуре (37±1) °C в течение 50-60 мин, соблюдая
правила асептики. Готовую среду можно использовать в течение 14 суток
при условии ее хранения при температуре 2-8 °C.

Посев исследуемого материала проводить в соответствии с Инструкцией
по бактериологическим и серологическим исследованиям при коклюше и
паракоклюше М., 1983. Учет результатов проводить через 70-72 ч инкубации
при температуре 35-37 °C по наличию мелких, круглых с розовыми краями,
блестящих (в виде «жемчужины») колоний коклюшного микроба.

Препарат расфасован по 200г в банки из оранжевого стекла или пакеты из
трехслойной ламинированной бумаги, или в полиэтиленовые банки.

Хранить препарат необходимо в герметически закрытой упаковке в
помещении с относительной влажностью воздуха не более 60 % и
температурой от 2 до 25 °C.

*Взамен инструкции по применению, утвержденной Минздравом СССР
02.12.85 г.

Срок годности препарата – 2 года.

Рекламации на качество препарата в течение срока годности следует направлять в адрес предприятия-изготовителя и в Государственный научно-исследовательский институт стандартизации и контроля медицинских биологических препаратов им. Л.А.Тарасевича, 121002, г.Москва, пер. Сивцев-Вражек, 41, тел. 241-39-22.

Генеральный директор
НПО "Питательные среды"




М.М.Меджилов

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

2
листа(ов)

КОПИЯ ВЕРНА

Первый заместитель генерального директора
ФГУП «НПО «Микроны» МЗ РФ

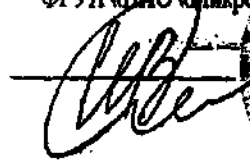

И. В. Санин

