

УТВЕРЖДАЮ
Первый



Заместитель министра
Здравоохранения СССР
И.Н. Денисов

ИНСТРУКЦИЯ

1.8.г

по применению основы питательной среды для
выделения влагалищных трихомонад, сухой

*The base of nutrient medium for isolation
Trichomonas vaginalis, dry.*

Основа питательной среды (после добавления в нее 20 % сыворотки крупного рогатого скота, 1000 ЕД/мл пенициллина и 1000 мкг/мл стрептомицина) предназначена для выделения влагалищных трихомонад из отделяемого слизистой оболочки мочеполовых органов.

Препарат в количестве, указанном на этикетке, размешать в 1 л дистиллированной воды, прокипятить 1-2 мин, разлить по флаконы и простерилизовать автоклавированием при температуре 112°C в течение 20 мин.

К охлажденной до температуры 45-50°C основе питательной среды добавить 20 % по объему сыворотки крупного рогатого скота, 1000 ЕД/мл пенициллина и 1000 мкг/мл стрептомицина, тщательно перемешать и разлить в стерильные пробирки по 4,5 мл. Поверхность среды в пробирках залить стерильным вазелиновым маслом высотой слоя 3-5 мм. Пробирки с питательной средой выдержать в термостате при температуре (36±1)°C в течение 22-24 ч для контроля стерильности среды. Готовая к применению питательная среда должна быть светло-желтого цвета.

Питательную среду хранить при температуре 4-8°C не более 14 сут.

Посев отделяемого мочеполовых органов больных трихомониазом проводят в соответствии с приказом Минздрава СССР "Об унификации лабораторных методов исследования в диагностике гонореи и трихомониаза" (от 12.07.85 г. № 936).

Посевы помещают в термостат при температуре 36±1°C.

Учет результатов проводят путем микроскопического исследования нативных препаратов на 3-5 день после посева, при отрицательных результатах - 7-9, 11-17 день. При этом со дна пробирки берут осадок и делают из него нативный препарат, который исследуют в микроскопе с темным полем зрения с объективом 40 и окуляром 7. Влагалищные трихомонады в поле зрения могут быть одиночными или располагаться скоплениями; должны быть активно движущимися. При этом должны хорошо просматриваться движения жгутиков.

СОГЛАСОВАНО
Директор ЦКБМ

Скв

А.А. Скрипкин

" 10 " октября 1989 г.

Препарат расфасован по (80 ± 1) или (350 ± 2) г.

Хранить препарат необходимо в герметически закрытых банках в помещении с относительной влажностью воздуха не более 60 % и температурой от 5 до 25 °С.

Гарантийный срок годности — 1 год.

Если по истечении гарантийного срока качество среды не снизилось, препарат можно использовать по назначению. Контроль препарата проводится в ОЦРМ и в аптеках-наркодиспансерах. При наличии у потребителя не менее 1 кг среды (тогда не определяется качество среды определяет потребитель). При получении положительных результатов срок годности среды продлевается на 1 год.

Рекламации на качество препарата гарантийного срока годности направлять в адрес производителя: ЦАССР А. Махачкала, ул. Дзержинского, 31, 4.0" (телефон: 7-33-44, 7-47-72). Рекламации направлять в адрес Федерального научно-ветеринарного института, 107070, г. Москва, ул. Короленко, 3, тел. 266-01-30.



НПО "Патентный институт"
"Специализированная аптека"

М. М. Медкидов

М. М. Медкидов

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
2 листа(ов)

