

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «НПФ «Галатея»

А.Ю.Карпов

2009г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**ЭЛЕКТРОМИОНЕЙРОСТИМУЛЯТОР
МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ
ДВЕНАДЦАТИКАНАЛЬНЫЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ ЭМНС 12К «ГАЛАТЕЯ»**

«СОГЛАСОВАНО»

Главный врач

ФГУЗ «Клиническая больница №119»

ФМБА России

В.К.Агапов

2009г.



Подп. и дата

Инв. №

Взам. №

Подп. и дата

И.з. № подл.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Электромионейростимулятор микропроцессорный двенадцатиканальный клинический ЭМНС 12К «Галатея» (далее «аппарат») предназначен для воздействия низкочастотными импульсными токами на мышцы и периферическую нервную систему человека в лечебных и эстетических целях.

Показания к применению:

- дегенеративно-дистрофические поражения позвоночника;
- артропатии;
- параличи;
- парезы;
- тоннельные невропатии;
- облитерирующие заболевания сосудов конечностей;
- хронический колит;
- хронический панкреатит;
- реабилитация после ампутации конечностей;
- восстановление и развитие упругости и силы мышц;
- лечение целлюлита;
- блокирование болевых синдромов.

Аппарат предназначен для эксплуатации в физиотерапевтических кабинетах медицинских учреждений и косметических салонов при температуре окружающей среды от +10 до +35 °С и относительной влажности до 80%.

Аппарат предназначен для использования медицинским персоналом, имеющим соответствующую специализацию, строго в соответствии с показаниями и противопоказаниями для низкочастотной электротерапии.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструктивно аппарат состоит из электронного блока, выполненного в пластиковом корпусе и подсоединяемых к нему с помощью кабелей электродов для стимуляции.

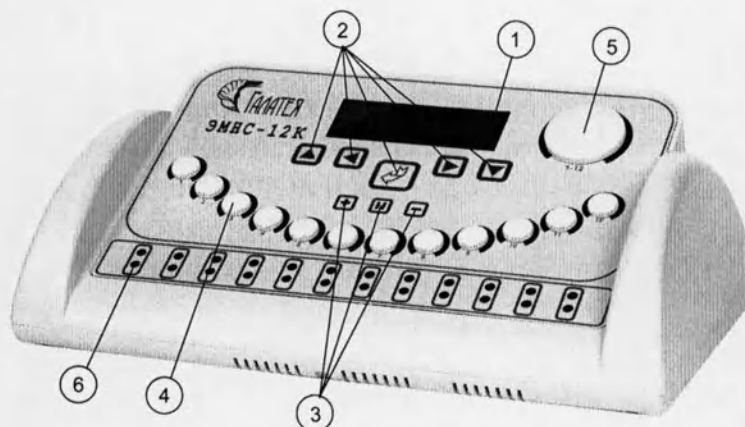


Рисунок 1. Электромионейростимулятор микропроцессорный двенадцатиканальный ЭМНС12К (электронный блок).

На передней панели электронного блока (рисунок 9) расположены:

1. Жидкокристаллический информационный индикатор (ЖКИ).
2. Кнопки выбора и установки режимов работы и параметров сигнала.
3. Индикаторы наличия выходного сигнала.
4. Регуляторы уровня выходного сигнала в каждом канале.

Подп. и дата

Взам. инв. № д

Подп. и дата

№ подл.

5. Общий регулятор уровня выходного сигнала (1 – 12).

6. Разъемы выходных каналов.

На задней стенке аппарата расположены:

- разъем для подключения сетевого шнура;
- сетевой выключатель «О – I».


Основные технические характеристики аппарата приведены в таблице 1.

Таблица 1

Напряжение питания, В	220±20
Частота напряжения питания, Гц	50
Максимальная потребляемая мощность, Вт	70
Число каналов стимуляции	12
Максимальная амплитуда выходного напряжения в канале на нагрузке 2кОм, В	60±12
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р 50267.0	II
Масса в полном комплекте не более, кг	8
Габаритные размеры, мм	440 × 265 × 155

2.1 Характеристика выходных сигналов

В общем случае выходной сигнал представляет собой периодическую последовательность, состоящую из «посылок» сигналов определенной формы с линейным нарастанием и спадом и пауз (рисунок 2).

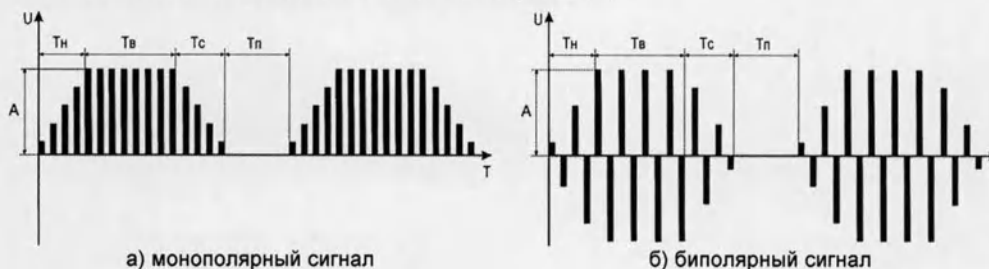

Тн – время нарастания;
Тв – время воздействия;
Тс – время спада;
Тп – время паузы;
А – амплитуда.

Рисунок 2. Общие параметры выходного сигнала.

Аппарат обеспечивает установку общих параметров выходного сигнала в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Наименование параметра	Единица измерения	Диапазон установки	Шаг установки
Время нарастания (Тн, рисунок 2)	с	0 – 1	0,1
Время воздействия (Тв, рисунок 2)	с	0 – 30	1
Время спада (Тс, рисунок 2)	с	0 – 1	0,1
Время паузы (Тп, рисунок 2)	с	0 – 30	1

Аппарат обеспечивает генерацию выходных сигналов с формами и параметрами указанными ниже.

2.1.1 Сигнал «ИМПУЛЬС 1»

Сигнал представляет собой последовательность прямоугольных монополярных или симметричных биполярных импульсов равной амплитуды.

Форма сигнала представлена на рисунке 3.

Подп. и дата

№ док. № инв. № док.

Взам. инв. № инв.


Подп. и дата

№ подл.



а) монополярный

$t_{и}$ – длительность импульсов;
 $T_{и}$ – период следования импульсов.

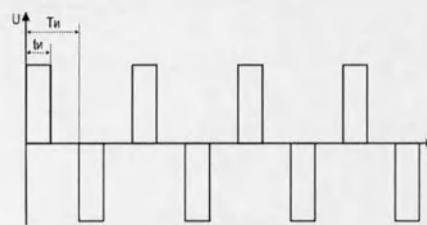

б) биполярный

Рисунок 3 Форма сигнала «ИМПУЛЬС 1».

Перечень устанавливаемых параметров сигнала и диапазон установки значений этих параметров приведен в таблице 2.

Таблица 2

Наименование параметра	Единица измерения	Диапазон установки	Шаг установки
Полярность	–	монополярный, биполярный	–
Частота ($F=1/T_{и}$, рисунок 3)	Гц	1 – 400 и 1000	в диапазоне: от 1 до 20 – 1; от 20 до 50 – 5; от 50 до 400 – 10
Длительность импульсов ($t_{и}$, рисунок 3)	мкс	50 – 2000	в диапазоне: от 50 до 200 – 10; от 200 до 500 – 50; от 500 до 2000 – 100

2.1.2 Сигнал «ИМПУЛЬС 2»

Сигнал представляет собой последовательность прямоугольных симметричных биполярных импульсов равной амплитуды. Длительность положительной фазы импульса равна длительности отрицательной фазы. Длительностью импульса считается сумма длительностей положительной и отрицательной фаз.

Форма сигнала представлена на рисунке 4.



$t_{и}$ – длительность импульсов;
 $T_{и}$ – период следования импульсов

Рисунок 4. Форма сигнала «ИМПУЛЬС 2».

Перечень устанавливаемых параметров сигнала и диапазон установки значений этих параметров приведен в таблице 3.

Таблица 3

Наименование параметра	Единица измерения	Диапазон установки	Шаг установки
Частота ($F=1/T_{и}$, рисунок 4)	Гц	1 – 400 и 1000	в диапазоне: от 1 до 20 – 1; от 20 до 50 – 5; от 50 до 400 – 10
Длительность импульсов ($t_{и}$, рисунок 4)	мкс	50 – 2000	в диапазоне: от 50 до 200 – 10; от 200 до 500 – 50; от 500 до 2000 – 100

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № док.

Подп. и дата


№ подл.

2.1.3 Сигнал «ИМПУЛЬС 3»

Сигнал представляет собой последовательность прямоугольных импульсов, параметры которых циклически изменяются во времени по следующему закону:

- в течение 1 с амплитуда A_1 , длительность импульса $t_{И1} = 1$ мс;
- в течении 1 с амплитуда $A_2 = A_1/2$, длительность импульса $t_{И2} = 2$ мс.

Форма сигнала представлена на рисунке 5.

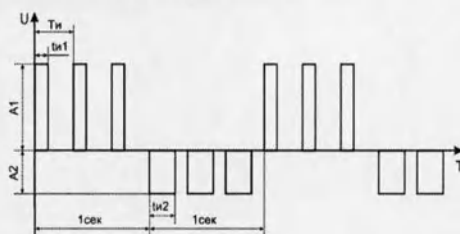

$t_{И1}$, $t_{И2}$ – длительности импульсов;
 $T_{И}$ – период следования импульсов

Рисунок 5. Форма сигнала «ИМПУЛЬС 3».

Перечень устанавливаемых параметров сигнала и диапазон установки значений этих параметров приведен в таблице 4.


Таблица 4

Наименование параметра	Единица измерения	Диапазон установки	Шаг установки
Частота ($F=1/T_{И}$, рисунок 5)	Гц	20 – 200	в диапазоне: от 20 до 50 – 5; от 50 до 200 – 10

2.1.4 Сигнал «МЕАНДР»

Сигнал представляет собой последовательность прямоугольных симметричных биполярных импульсов равной амплитуды со скважностью ($Q=T_{И} / t_{И}$) равной 2.

Форма сигнала представлена на рисунке 6.

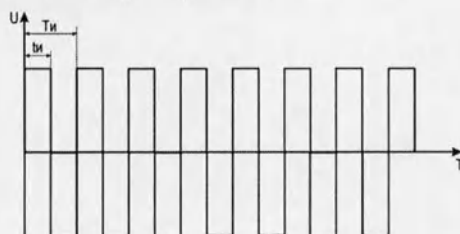

$t_{И}$ – длительность импульсов;
 $T_{И}$ – период следования импульсов

Рисунок 6. Форма сигнала «МЕАНДР».

Перечень устанавливаемых параметров сигнала и диапазон установки значений этих параметров приведен в таблице 5.

Таблица 5

Наименование параметра	Единица измерения	Диапазон установки	Шаг установки
Частота ($F=1/T_{И}$, рисунок 6)	Гц	20 – 400	в диапазоне: от 20 до 50 – 5; от 50 до 400 – 10

2.1.5 Сигнал «FM – ТОК»

Сигнал представляет собой последовательность прямоугольных монополярных или симметричных биполярных импульсов частота следования которых циклически возрастает в течении 7 с, а затем уменьшается в течении 7 с по линейному закону в диапазоне от 7 до 14 Гц.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Подп. и дата

№ подл.

И-ц

Форма сигнала представлена на рисунке 7.

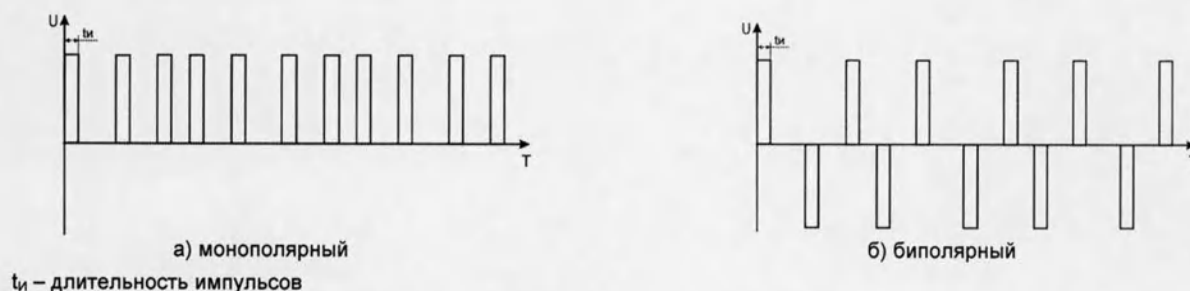


Рисунок 7. Форма сигнала «FM – ТОК».

Перечень устанавливаемых параметров сигнала и диапазон установки значений этих параметров приведен в таблице 6.

Таблица 6

Наименование параметра	Единица измерения	Диапазон установки	Шаг установки
Длительность импульсов (t_i , рисунок 7)	мкс	50 – 2000	в диапазоне: от 50 до 200 – 10; от 200 до 500 – 50; от 500 до 2000 – 100

2.1.6 Сигнал «STOCH – ТОК»

Сигнал представляет собой последовательность прямоугольных монополярных или симметричных биполярных импульсов с частотой следования изменяемой по случайному закону в установленном диапазоне.

Форма сигнала представлена на рисунке 8.

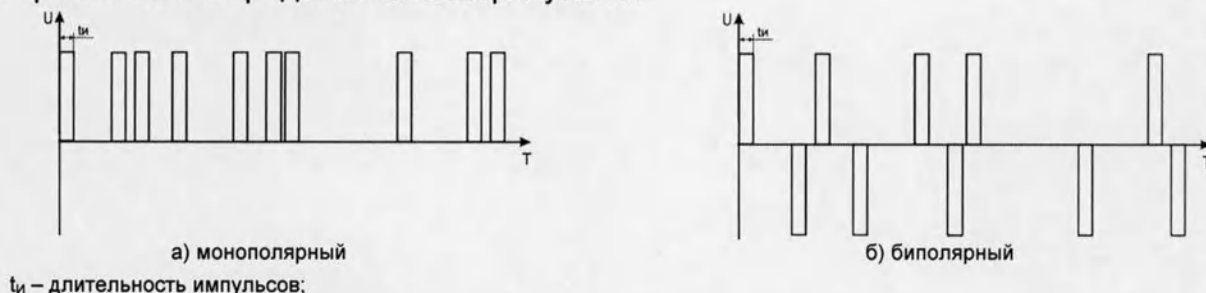


Рисунок .8. Форма сигнала «STOCH – ТОК».

Перечень устанавливаемых параметров сигнала и диапазон установки значений этих параметров приведен в таблице 7.

Таблица 7

Наименование параметра	Единица измерения	Диапазон установки	Шаг установки
Нижняя граница частоты	Гц	1 – 10	1
Верхняя граница частоты	Гц	10 – 150	в диапазоне: от 1 до 20 – 1; от 20 до 50 – 5; от 50 до 150 – 10
Длительность импульсов (t_i , рисунок 8)	мкс	50 – 2000	в диапазоне: от 50 до 200 – 10; от 200 до 500 – 50; от 500 до 2000 – 100

2.1.7 Сигнал «AMF – ТОК»

Сигнал представляет собой сигнал «МЕАНДР» модулированный по амплитуде сигналом синусоидальной формы.

Форма сигнала представлена на рисунке 9.



Рисунок 9. Форма сигнала «AMF – ТОК».

Перечень устанавливаемых параметров сигнала и диапазон установки значений этих параметров приведен в таблице 8.

Таблица 8

Наименование параметра	Единица измерения	Диапазон установки	Шаг установки
Частота несущего сигнала	Гц	1500 – 5000	500
Частота модуляции (количество «пучностей» в секунду)	Гц	5 – 30	в диапазоне: от 5 до 20 – 1; от 20 до 30 – 5;
Глубина модуляции	%	0 – 100	25

2.2 Режимы работы выходных каналов.

Аппарат обеспечивает три варианта последовательности работы выходных каналов:

- синхронный режим;
- режим «1 – 6 7 – 12»;
- режим «1 – 4 5 – 8 9 – 12».

При синхронном режиме работы генерация сигнала производится синхронно во всех выходных каналах.

При работе в режиме «1 – 6 7 – 12» генерация сигнала в течение периода времени $T_g = T_n + T_v + T_c + T_p$ (рисунок 2) производится в каналах с первого по шестой, в течении следующего периода времени T_g – в каналах с седьмого по двенадцатый. Далее процесс циклически повторяется.

При работе в режиме «1 – 4 5 – 8 9 – 12» в течении периода времени T_g генерация сигнала производится в каналах с первого по четвертый, затем в каналах с пятого по восьмой, после этого в каналах с девятого по двенадцатый.

2.3 Стандартные программы

Аппарат обеспечивает работу по 16-ти стандартным программам, объединенным в три группы:

- «Тело» – 10 программ;
- «Лицо» – 3 программы;
- «Стопа» – 3 программы.

Максимальная амплитуда выходного сигнала у программ групп «Лицо» и «Стопа» ограничена составляет 36 и 50 В соответственно.

Генерация выходного сигнала при работе по стандартным программам производится в синхронном режиме.

Перечень стандартных программ приведен в таблице 9.

Подп. и дата

№ док.

№ инв.

Взам. инв.

Подп. и дата

№ подл.

Таблица 9

№ п/п	Наименование программы
Группа «Тело»	
1	«МАССАЖ»
2	«ТОНУС 1»
3	«ТОНУС 2»
4	«ЭЛЕКТРОЛИПОЛИЗ»
5	«ТРЕНИНГ (А)»
6	«ТРЕНИНГ (В)»
7	«БОДИБИЛДИНГ»
8	«ПОДТЯЖКА БЮСТА»
9	«НЕЙРОСТИМУЛЯЦИЯ»
10	«ЛИМФОДРЕНАЖ»
Группа «Лицо»	
1	«ЭЛЕКТРОЛИПОЛИЗ»
2	«МИОСТИМУЛЯЦИЯ»
3	«ЛИМФОДРЕНАЖ»
Группа «Стопа»	
1	«РЕЛАКСАЦИЯ»
2	«ТОНИЗАЦИЯ»
3	«ЛИМФОДРЕНАЖ»

2.4 Комплексные программы

Аппарат обеспечивает работу по трем комплексным программам.

Каждая комплексная программа состоит из нескольких фаз с разными параметрами выходного сигнала. Время каждой фазы фиксировано и не может быть изменено.

Генерация выходного сигнала при работе по комплексным программам производится в синхронном режиме.

Перечень комплексных программ приведен в таблице 10.

Таблица 10

№ п/п	Наименование программы	Фазы программы	Длительность фазы, мин	Общая продолжительность программы, мин
1	«ЦЕЛЛЮЛИТ 1»	фаза 1	25	45
		фаза 2	20	
2	«ЦЕЛЛЮЛИТ 2»	фаза 1	25	45
		фаза 2	10	
		фаза 3	10	
3	«ФОРМА ТЕЛА»	фаза 1	15	35
		фаза 2	15	
		фаза 3	5	
		фаза 4	15	

Подп. и дата

Взам. инв. № дубл.

Подп. и дата

в. № подл.

Лис

8

2.5 Комплектность

Комплект поставки аппарата должен соответствовать таблице 11.

Таблица 11

№ п/п	Наименование	Количество
1	Электронный блок	1 шт.
2	Кабель для подключения электродов	12 шт.
3	Переходник для подключения одноразовых электродов*	4 шт.
4	Электрод d35	4 шт.
5	Электрод d55	4 шт.
6	Электрод d75	24 шт.
7	Фиксирующие ремни	1 комплект
8	Сетевой шнур	1 шт.
9	Паспорт	1 экз.
10	Руководство по эксплуатации	1 экз.
11	Упаковка	1 шт.

* - одноразовые электроды не входят в комплект поставки.

3 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказания к применению радиочастотной электротерапии:

- имплантированный кардиостимулятор или другое электрическое устройство;
- металлические имплантанты в зоне воздействия;
- свежие шрамы или раны, скарификация кожи в зоне воздействия;
- келоидные рубцы в зоне воздействия;
- язвы, псориаз, экзема и т.п. в зоне воздействия;
- острые инфекционные и воспалительные заболевания, герпес;
- сильное проявление акне;
- эпилепсия;
- беременность;
- нарушение свертываемости крови;
- нефропатия, хроническая почечная недостаточность;
- нарушения сердечного ритма;
- системные заболевания соединительной ткани (склеродермит, системная красная волчанка).

4 ПОДГОТОВКА АППАРАТА К РАБОТЕ

При использовании аппарата необходимо соблюдать общие правила техники безопасности при работе с электрооборудованием, а также следующие требования:

- электропитание аппарата разрешается осуществлять только в соответствии с настоящим руководством;
- аппарат разрешается использовать только в сухих помещениях, предназначенных для медицинских целей, запрещается использование аппарата во взрывоопасных зонах и кабинетах гидротерапии;
- запрещается эксплуатация аппарата с поврежденным корпусом, шнуром питания, кабелями для подключения электродов;
- запрещается эксплуатировать аппарат в одном помещении с работающей аппаратурой СВЧ или УВЧ терапии;

№ подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № док. Подп. и дата

- не допускается проведение процедуры пациентам с кардиостимуляторами;
- не допускается проведение процедуры на участках тела, содержащих металлические имплантаты и другие металлические предметы;
- необходимо проявлять осторожность в отношении пациентов с повышенной чувствительностью к электрическому току;
- пациенту и обслуживающему персоналу запрещается во время проведения процедуры касаться металлических частей другой аппаратуры, питающейся от сети электроснабжения здания, а также металлических частей, которые заземлены или имеют большую емкость относительно земли;
- необходимо регулярно проводить осмотр кабелей для подключения электродов и шнура питания на предмет выявления дефектов изоляции;
- перед проведением процедур электроды должны подвергаться дезинфекции, правила проведения дезинфекции изложены в соответствующем разделе настоящего руководства;
- после транспортировки при пониженной температуре запрещается включать аппарат, пока его температура не сравняется с температурой воздуха в помещении;
- запрещается производить ремонт и техническое обслуживание аппарата вне специализированных сервисных центров.

Установить аппарат на устойчивом основании (столе) не подверженном вибрациям.

Сетевой выключатель перевести в положение «О» (выкл.).

Подсоединить шнур питания к разъему, расположенному на задней стенке аппарата.

Подключить шнур питания к электрической сети с напряжением 220 В, 50 Гц.

Подсоединить кабели для подключения электродов к разъемам выходных каналов аппарата (поз.6 на рисунке 9).

Подсоединить электроды к кабелям.

Установить электроды на теле пациента и зафиксировать их ремнями из комплекта поставки.

ВНИМАНИЕ! Перед установкой электродов, на зону контакта каждого электрода с кожей пациента необходимо нанести электропроводный гель. Невыполнение этого требования может привести к возникновению у пациента болезненных ощущений при протекании электрического тока.

5 ПОРЯДОК РАБОТЫ АППАРАТА

Перед включением питания установить на минимум все регуляторы уровня выходного сигнала (поз.4 на рисунке 9), а также общий регулятор уровня «1 – 12» (поз.5 на рисунке 9).

Включить питание аппарата, переведя сетевой выключатель в положение «I».

На ЖКИ отображается:

СТАНДАРТНЫЕ
ПРОГРАММЫ




Выбрать режим. Выбор режима работы осуществляется нажатием на кнопки ◀ и ▶.

Вход в выбранный режим производится нажатием на кнопку ▼.

5.1 Работа в режиме «СТАНДАРТНЫЕ ПРОГРАММЫ»


После входа в режим на ЖКИ отображается:

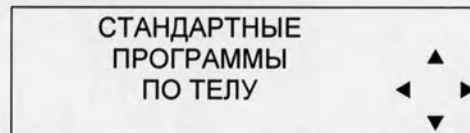

Выбор группы программ «тело», «лицо», «стопа» осуществляется нажатием на кнопки ◀ и ▶.

Вход в выбранную группу производится нажатием на кнопку ▼.


После входа в группу программ на ЖКИ отображается (на примере группы «тело»):

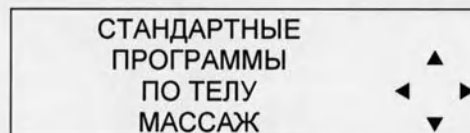

Выбор необходимой программы осуществляется нажатием на кнопки ◀ и ▶.

Вход в выбранную программу производится нажатием на кнопку ▼.

После входа в программу на ЖКИ отображается:

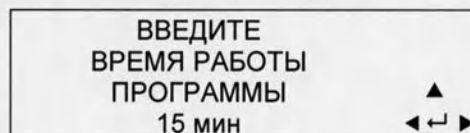


При необходимости производится корректировка времени проведения процедуры нажатием на кнопки ◀ и ▶.

Запуск программы в работу осуществляется нажатием на кнопку ⏏.

ВНИМАНИЕ! Если общий регулятор уровня выходного сигнала «1-12» не установлен в минимальное положение, на ЖКИ отображается требование уменьшить уровень. Программа не запустится в работу, пока данное требование не будет выполнено.

После запуска программы в работу на ЖКИ отображается:

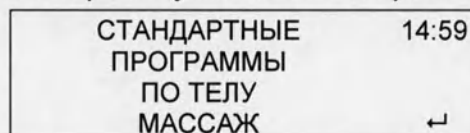

Во время работы программы на ЖКИ производится обратный отсчет времени проведения процедуры.

Индикаторы «+», «-», «II» (поз.3 на рисунке 1) отображают следующую информацию:

- индикатор «+» светится, если полярность выходного сигнала соответствует маркировке на кабелях для подключения электродов;
- индикатор «-» светится при обратной полярности выходного сигнала;
- индикатор «II» светится при отсутствии выходного сигнала.

Регулировка уровня выходного сигнала производится регуляторами поз.4 (рисунок 1) и регулятором общего уровня «1-12» поз.5 (рисунок 1).

Приостановка выполнения программы может быть осуществлена нажатием на кнопку ⏏, в этом случае на ЖКИ отображается:

И-
№ подл.
Подп. и дата
Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № доул.
Подп. и дата

СТАНДАРТНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ТЕЛУ МАССАЖ	ПАУЗА ▲ ↩
---	-----------------

Повторное нажатие на кнопку ↩ приведет к продолжению работы программы.
При нажатии кнопки ▲ произойдет выход из программы.

5.2 Работа в режиме «КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ»

Работа в данном режиме в целом аналогична работе в режиме «СТАНДАРТНЫЕ ПРОГРАММЫ».

Отличием является отсутствие этапа установки времени работы программы, поскольку комплексные программы имеют фиксированное время работы.

5.3 Работа в режиме «РУЧНЫЕ ПРОГРАММЫ»

После входа в режим на ЖКИ отображается:

РУЧНЫЕ ПРОГРАММЫ ФОРМА СИГНАЛА ИМПУЛЬС 1	▲ ◀ ▶ ▼
--	---------------

Выбор необходимой формы выходного сигнала осуществляется нажатием на кнопки ◀ и ▶.

Вход в режим установки параметров сигнала производится нажатием на кнопку ▼.

На ЖКИ отображается первый устанавливаемый параметр сигнала и его значение (в случае сигнала ИМПУЛЬС 1 – это «полярность»):

РУЧНЫЕ ПРОГРАММЫ ИМПУЛЬС 1 ПОЛЯРНОСТЬ МОНОПОЛЯРНЫЙ	▲ ◀ ▶ ▼
---	---------------

Нажатием на кнопки ◀ и ▶ осуществляется переход к следующему (предыдущему) устанавливаемому параметру.

Для изменения значения параметра (при необходимости) выполнить следующие действия:

1. Нажать кнопку ▼.
2. Нажатием на кнопки ◀ и ▶ установить требуемое значение параметра.
3. Нажать кнопку ▲.

Перечень устанавливаемых параметров для каждого вида сигнала и диапазоны установки приведены в разделе «Характеристики выходных сигналов».

После просмотра (установки) всех параметров сигнала при нажатии кнопки ▶ на ЖКИ отображается:

РУЧНЫЕ ПРОГРАММЫ ИМПУЛЬС 1 ЧТО ДАЛЬШЕ: ВЫПОЛНИТЬ?	▲ ↩ ▶
--	----------

Далее возможны следующие действия:

- выполнение программы с установленными параметрами;

№ подл. Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № докл.

№ подл. Подп. и дата

- запись программы с установленными параметрами в память аппарата.

Для **выполнения программы** нажать на кнопку , на ЖКИ отображается:

ВВЕДИТЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ 15 мин	▲ ◀ ◀ ▶ ▶
--	--------------

При необходимости производится корректировка времени проведения процедуры кнопками ◀ и ▶.

Запуск программы в работу осуществляется нажатием на кнопку .

Дальнейшая работа аналогична работе в режиме «СТАНДАРТНЫЕ ПРОГРАММЫ».

Для **перехода в режим записи программы** нажать на кнопку ▶, на ЖКИ отображается:

РУЧНЫЕ ПРОГРАММЫ ИМПУЛЬС 1 ЧТО ДАЛЬШЕ: ЗАПИСАТЬ?	▲ ◀ ◀ ▶ ▶
---	--------------

Для записи программы в память нажать на кнопку , на ЖКИ отображается:

ИМПУЛЬС 1 ЗАПИСЬ ПРОГРАММЫ ВВЕДИТЕ ИМЯ:	▲ ◀ ◀ ▶ ▶ ▼
---	-------------------

Кнопками ▲ и ▼ производится выбор первого символа программы. После этого нажатием на кнопку ▶ осуществляется переход к установке второго символа. И так далее. Общее число символов может быть 16 или меньше. Нажатием на кнопку ◀ можно вернуться и откорректировать любой символ. После набора последнего символа нажимается кнопка  и программа записывается в память.

Если в библиотеке записанных программ уже существует программа с набранным именем, на ЖКИ появится сообщение об этом и будет предложено либо перезаписать программу с новыми значениями параметров, либо изменить имя записываемой программы.

Если в памяти аппарата не окажется места для записи новой программы аппарат предложит записать новую программу вместо одной из записанных. Аппарат позволяет выбрать программу, на место которой будет записана новая.

5.4 Работа в режиме «ЗАПИСАННЫЕ ПРОГРАММЫ»

Работа в данном режиме аналогична работе в режиме «СТАНДАРТНЫЕ ПРОГРАММЫ».

Порядок записи программ представлен в разделе «Работа в режиме «РУЧНЫЕ ПРОГРАММЫ».

5.5 Удаление записанных программ

Удаление записанных программ производится в следующем порядке:

1. Выключить аппарат, переведя переключатель «0 - I» в положение «0».
2. Выдержать аппарат в выключенном состоянии не менее 30с.
3. Одновременно нажать три левые кнопки ▲, ◀ и .
4. Удерживая кнопки в нажатом состоянии включить питание аппарата, переведя переключатель «0 - I» в положение «I».

№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № доул.	Подп. и дата
ИИ				

На ЖКИ должно появиться предложение удалить все записанные программы с двумя вариантами ответа "Да" и "Нет".

Если аппарат не вышел в этот режим значит, кнопки были недожаты или неисправны. При этом все действия следует повторить сначала.

5. При выборе ответа "Да" и нажатии кнопки  из памяти аппарата будут удалены все записанные программы.

При ответе "Нет":

- кнопками  и  осуществляется выбор программ для удаления;
- кнопкой  осуществляется удаление выбранной программы;
- нажатие на кнопку  приведет к выходу из режима удаления программ.

6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аппарат представляет собой стационарный прибор, не предназначенный для работы при переносках и передвижениях, что соответствует группе 2 классификации по воспринимаемым механическим воздействиям в соответствии с ГОСТ Р 50444.

Аппарат предназначен для эксплуатации в физиотерапевтических кабинетах медицинских учреждений и косметических салонов при температуре окружающей среды от +10 до +35 °С и относительной влажности до 80%.

Необходимо оберегать аппарат от воздействия агрессивных сред, попадания влаги внутрь корпуса, предохранять от ударов

Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей на корпус аппарата.

Транспортирование аппаратов можно осуществлять всеми видами транспорта.

Размещение и крепление упаковок с изделиями во время транспортирования должно быть выполнено не более, чем в три ряда и должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения и ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

Аппараты в транспортной упаковке завода-изготовителя должны храниться на складах с размещением на стеллажах. Число рядов при складировании не должно превышать трех.

Условия транспортирования и хранения изделий в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

Дезинфекция

Для очистки аппарата и рабочих инструментов не разрешается использование абразивных материалов и агрессивных жидкостей (ацетона, скипидара, растворителей).

Корпус аппарата и электроды должны дезинфицироваться по МУ-287-113. Дезинфекция проводится 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5 % моющего средства при температуре не ниже 180 °С путем двукратного протирания салфеткой из бязи или марли.

Салфетка должна быть отжата во избежание попадания дезинфицирующего раствора внутрь корпуса аппарата.

По окончании дезинфекции со всех частей аппарата должны быть полностью удалены остатки дезинфицирующего раствора методом многократной протирки

Подп. и дата

№ док.

№ инв.

Взам. инв.

Подп. и дата

№ подл.

салфетками, смоченными в проточной воде. Попадание воды внутрь корпуса не допускается.

Части аппарата, контактирующие с телом пациента (электроды) должны дезинфицироваться до, и после процедуры.

№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Подп. и дата

Прон
пронумерованс

Генеральн
ООО «НПФ «Галатея»

ЛИСТОВ

