

Генеральный директор
ООО «БиоВитрум»
Зиновьев О.А.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Пленка для заключения гистологических микропрепаратов Tissue-Tek Coverslipping Film

Маркировка медицинского изделия на русском языке

57



ПАРТИЯ



Tissue-Tek

КАТ. № 4770

Пленка для заключения гистологических микропрепаратов
Tissue-Tek Coverslipping Film

Для использования с аппаратами для заключения гистологических срезов
под пленку Tissue-Tek Film производства SAKURA

Длина: 70 метров Ширина: 24 мм

Условия хранения пленки: хранить рулоны пленки при температуре от 10 °C до 30 °C (от 50° до 86 °F) и уровне влажности от 30 % до 70 %. Беречь от воздействия крайних температур и длительного воздействия света или очень высокой влажности. Исследования показали, что хранение пленки при температуре выше 40 °C (104 °F) на регулярной основе в течение более четырех недель может привести к образованию пузырей, трещин и/или плохому прилипанию пленки к предметному стеклу.

Условия эксплуатации: необходимо дать пленке полностью адаптироваться к условиям окружающей среды, в которой она будет использоваться. Упаковку с пленкой следует открыть и оставить в обеспыленной среде при температуре от 10 °C до 30 °C (от 50° до 86 °F) и уровне влажности от 30 % до 70 % в течение не менее 24 часов перед использованием.

Условия хранения предметных стекол: покрытые покровной пленкой предметные стекла необходимо хранить в условиях с регулируемой температурой и влажностью. Необходимо поддерживать температуру в диапазоне от 10 °C до 30 °C (от 50° до 86 °F) и уровень влажности менее 70 %. Архивные предметные стекла следует хранить в вертикальном положении, при этом покрытая пленкой поверхность одного стекла должна касаться стеклянной поверхности соседнего стекла. Испытания на ускоренное старение показали, что пленка в равной степени или более стабильна, чем предыдущий состав.



Пленка для заключения гистологических микропрепаратов
Tissue-Tek Coverslipping Film

КАТ. № 4770




Tissue-Tek

КАТ. № 4770

Пленка для заключения гистологических микропрепаратов
Tissue-Tek Coverslipping Film

Для использования с аппаратами для заключения
гистологических срезов под пленку Tissue-Tek Film
производства SAKURA

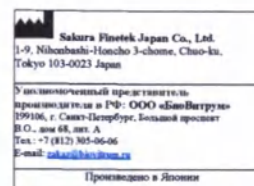

Хранение

10°C 30°C



xx.xxxx

Количество:
1 рулон
(70 метров)



Пленка для заключения гистологических микропрепаратов
Tissue-Tek Coverslipping Film

КАТ. № 4770



Pantone 199




Pantone 3005

0004482-01 ред. B

Общий вид медицинского изделия:

- Вид спереди
- Вид сзади



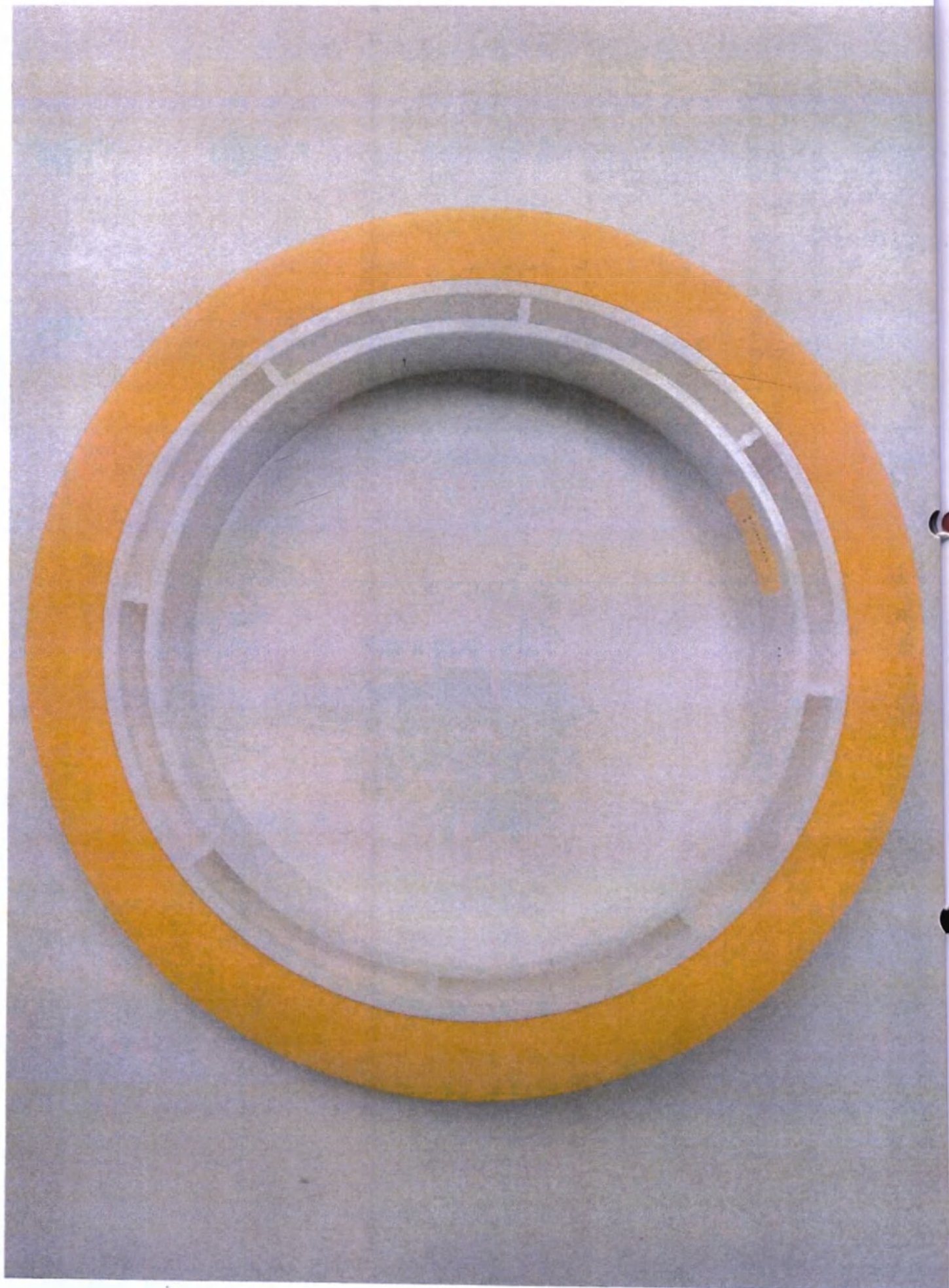

Упаковка медицинского изделия

- 1) Потребительская коробка. Вид спереди
- 2) Потребительская коробка. Вид сбоку



Tissue-Tek®
Coverslipping Film

REF 4770

For use with the Sakura Finetek Tissue-Tek Film®
and Tissue-Tek® SCA™ Coverslippers



Sakura Finetek Japan Co., Ltd.,
1-9, Nihonbashi-Honcho 3-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103-0023 Japan



Sakura Finetek Europe B.V.
Flemingweg 10a
2408 AV Alphen aan den Rijn
The Netherlands

Made in Japan



Storage 10°C - 30°C

Quantity:
1 roll
(70 meters)

LOT

472079A



2021 11

12

LOT

473109C



2022 01

12

Прошито и пронумеровано
9 (девят) листа (ов)
Генеральный директор
ООО «БиоВитрум»
О.А. Зиновьев

