



ООО «Медтехника Роботек»


125222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2 помещение 10

тел: (495) 904-26-51, 904-26-52

факс: (495) 904-26-53

<http://www.rebotec.net>

e-mail: info@rebotec.net

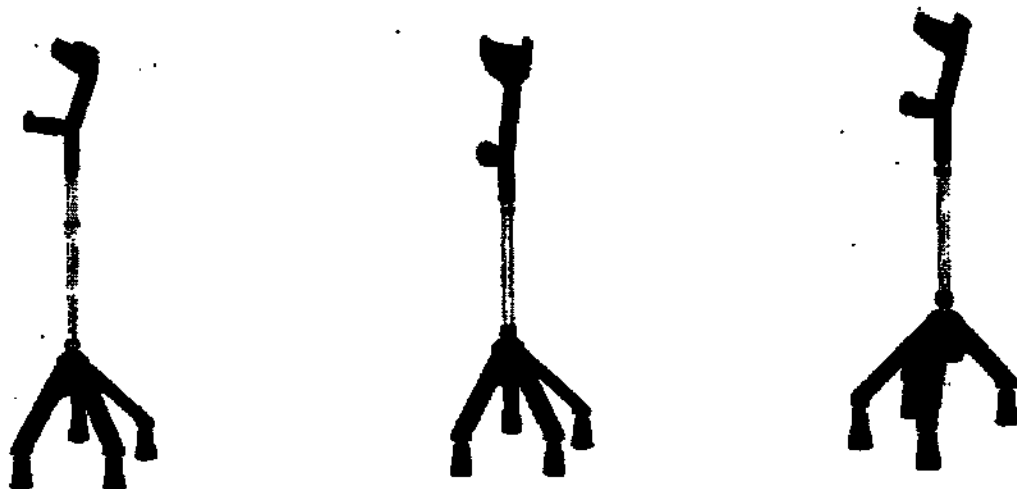

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Костыли локтевые на 4 ножках

Назначение

Костыли локтевые на 4 ножках (далее костыли) предназначены для лиц с ограниченными возможностями передвижения и служат для обеспечения повышенной безопасности при ходьбе. Данный предмет можно использовать как дома, так и на улице. Для этого строго следуйте указаниям по технике безопасности.


Дилер, специализирующийся на продаже этого вида товаров или обслуживающий медицинский персонал должны обязательно ознакомить Вас с правилами использования данного продукта и привести его в надлежащее положение!

Инструкция по монтажу и эксплуатации


Регулировка высоты костылей

Установка высоты происходит через алюминиевую трубку путем нажатия на клип-фиксатор или нажимную кнопку.

- Ослабить резьбовое соединение шумоизоляционной гайки, повернув влево (А).
- Нажимную кнопку вдавить в отверстие (В) или вынуть клип-фиксатор (С).
- Алюминиевую трубку поставить в желаемое положение.
- Нажать кнопку или зашелкнуть клип-фиксатор.
- Резьбовое соединение затянуть, прокрутив вправо (А). (Если Вы жмете потуже, тем самым избежите появления различных звуков при использовании.)

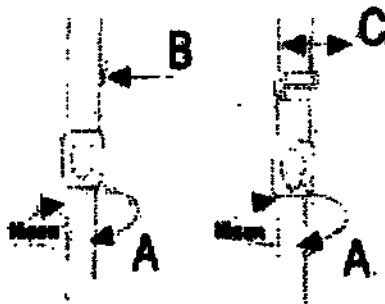


Регулировка высоты подлокотника

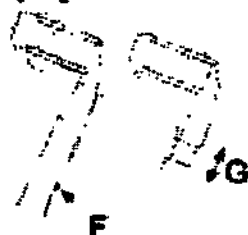

- Нажать кнопку в отверстие (F).
- Подлокотник привести в желаемое положение (G).
- Кнопку зафиксировать в отверстии (F).

Замена резинового наконечника

Использованный или поврежденный резиновый наконечник нужно обязательно заменить (Е). Снимите его с конца трубки, прикрепите новый, учитывая его размер и конструкцию. Убедитесь в том, что наконечник закреплен прочно.

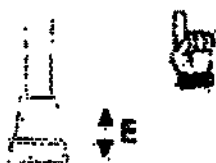

Внимание! Следите за тем, чтобы в наконечнике была металлическая пластинка. Она защищает наконечник от прорыва трубкой тростя или костыля. Результатом этого может стать повреждение напольного покрытия или падение.

Техническое обслуживание

Уход

Трубку костыли достаточно протереть влажной тряпкой и затем вытереть насухо. Все части из искусственных материалов очищайте при помощи специальных чистящих средств.

Внимание! Не используйте содержащие растворители или масляные чистящие средства.

Обслуживание

Перед каждым использованием проверяйте костыли на предмет повреждений. Убедитесь, что клип-фиксатор, нажимная кнопка и наконечник прочно закреплены, а труба находится в правильном положении. При деформации или повреждении продукт нужно немедленно проверить. Небрежный уход или ненадлежащий уход и обслуживание ведут к сокращению срока службы.

Ремонт

Для проведения ремонтных работ обратитесь к торговому представителю. В целях безопасности для ремонта в качестве замены должны использоваться только оригинальные запчасти.

Инструкция по технике безопасности

- Обратите внимание на указанный на товаре максимально допустимый вес тела!
- Перед каждым использованием проверяйте костыли на наличие повреждений.
- При преодолении препятствий с Вами должен быть сопровождающий, чтобы он смог помочь Вам удержаться на ногах в случае падения.



Внимание! Возможная опасность: падение из-за соскальзывания

- Регулярно проверяйте наконечники на наличие повреждений или износ.
- При ходьбе костыли должны быть в максимально вертикальном положении. Поэтому никогда не удаляйте их далеко от туловища.
- Используйте костыли только в качестве поддержки при ходьбе.
- Ни в коем случае не нельзя использовать в других целях: опора для того, чтобы подняться, в качестве рычага или рукоятки, перестановки мебели и т.д.
- Механические изменения производить запрещено.
- Не допускать попадания на костыли солнечных лучей в течение длительного времени (у окна, отопления, за окном автомобиля).
- Используйте костыли без защиты от скольжения на обледенелой или заснеженной поверхности.
- Будьте внимательны во время передвижения по влажной плитке, полу или незакрепленному ковровому покрытию.