



ООО «Медтехника РЕБОТЕК»

125222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2 помещение 10

тел: (495) 504-26-51, 504-26-52

факс: (495) 504-26-53

<http://www.rebotec.net>


e-mail: info@rebotec.net

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Кресла-стулья с санитарным оснащением

Наименование	Модель	Колеса/пошки	Материал
Реботек 6	335.54	5 и 24 -дюймовые колеса	TRB 3000
Реботек 6	339.24.97	5 и 24 -дюймовые колеса	TRB 3000
Реботек 6	345	5 и 24 -дюймовые колеса	TRB 3000
Реботек 6	346	5 и 24 -дюймовые колеса	TRB 3000
Реботек 6	354	5 и 24 -дюймовые колеса	TRB 3000
Реботек 6	366	5 и 24 -дюймовые колеса	TRB 3000
Реботек 6	372.33	5 и 24 -дюймовые колеса	TRB 3000


345

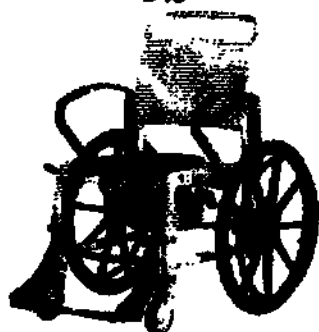

335.54

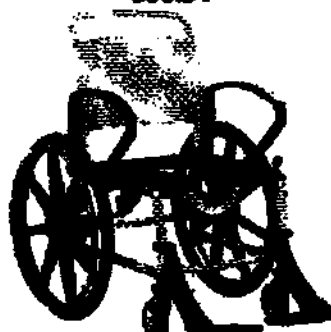

346

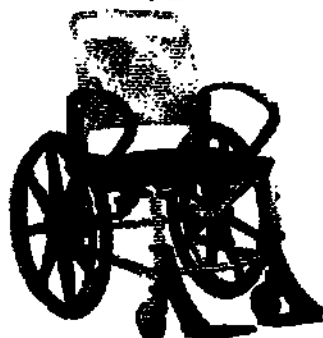

339.24.97



Использование

Настоящие кресла-стулья с санитарным оснащением предназначены для применения в домашних условиях, а также в больницах и реабилитационных центрах. Пользуясь этими стульями, пациент в меньшей степени нуждается в помощи других людей при приеме душа и туалета. Стулья имеют достаточно комфортные сиденья, эргономичные ортопедические спинки, способствующие длительному и комфортному пребыванию пациента в сидячем положении.

Дилер, специализирующийся на продаже этого вида товаров или обслуживающий медицинский персонал должны обязательно ознакомить Вас с правилами использования данного продукта и привести его в надлежащее положение!

Инструкции по монтажу и эксплуатации

1. Установите спинку, надев ее на трубки в задней части кресла.
2. Установите подлокотники.
3. Зацепите подножки в передней части кресла.
4. Наденьте зажимы подножек на трубки в передней части кресла.
5. Сборка механизма управления:
 - 5.1. Установка тормозов: прикрутите стояночные тормоза в специальное резьбовое отверстие на кресле. Не перепутайте левый и правый тормоза. Стальной клин тормоза должен быть виден сзади.
 - 5.2. Установка 24-дюймовых колес: нажмите кнопку на переднем торце, высвобождающую ось колеса, наденьте колесо на ось. После надевания колеса отпустите кнопку.
 - 5.3. Настройка тормозов: выставьте стояночные тормоза так, чтобы расстояние их резиновых накладок от шин было не более 5 мм. Проверьте их функционирование в закрытом помещении.
6. Поверните подлокотник: поставьте подлокотники в горизонтальное положение и закрепите штифтами в соответствующих отверстиях.
7. Настройте подножки: поверните подножки в удобное для Вас положение. Установите подножки на ножку стула, как показано на схеме.
8. Поворот подножек: подножки имеют возможность свободно поворачиваться на угол до 90°.
9. Снятие подножек: снимите сиденье, затем поверните подножки на 10 см и поверните на угол 90° в сторону. Теперь Вы можете свободно вынимать подножки.
10. Снятие душевого или туалетного сиденья: сиденья позволяют легко их снимать – просто нажмите на него и потяните на себя.
11. Снятие спинки: нажмите на кнопки, расположенные с тыльной стороны, и потяните вперед и вверх.
12. Установка туалетного судна: просто вставьте судно в направляющие, расположенные сзади стула.

Чистка и уход

Каркас стула полностью выполнен из пластика. Очистка стула очень проста и может проводиться обычными чистящими и моющими средствами. Следуйте указаниям в документации производителя. Все движущиеся части обработаны смазкой для длительного использования. Из соображений безопасности и во избежание аварий (за все время использования выявлены не были), проведите экспертизу в представительстве компании REBOTEC или в своем медицинском реабилитационном центре.


Требования безопасности

Обратите внимание на указанный на товаре максимально допустимый вес тела!

Всегда ставьте стул только в горизонтальное положение! Даже если вы на нем не сидите. Никогда не ставьте стул на ступеньки. На стул можно садиться только при установленном подлокотнике. При неровно посаженных законечниках устойчивость нарушается. Не переносите стул вместе с пациентом.

Технические характеристики

Наименование	Модель	Масса, кг	Нагрузка, кг
Реботек 6	335.54	18,5	100
Реботек 6	339.24.97	21,6	100
Реботек 6	345	20,5	100
Реботек 6	346	21,6	100
Реботек 6	354	20,2	100
Реботек 6	366	20,5	100
Реботек 6	372.33	20,2	100

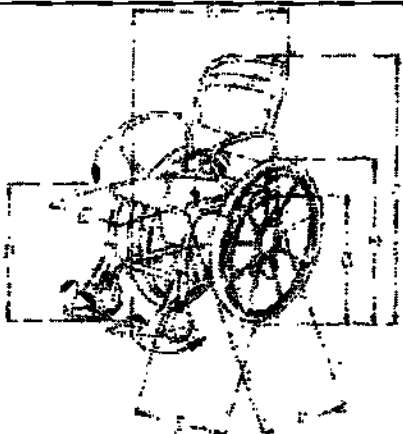Размеры	100 кг	
A. Высота	102 см	
B. Ширина	67 см	
C. Длина	78 см	
D. Высота сидения	51-54,5	
E. Ширина сидения	45 см	
F. Длина сидения	43 см	
H. Диаметр колеса	61 см	

По заказу, дополнительно кресла туалетные могут оснащаться следующими принадлежностями:

Запасные части и принадлежности	
Модель	Назначение
169...30	Наконечник
201...10	Кольцо фиксирующее
301	Туалетное судно с крышкой
303.00	Туалетное судно для мод. 339..97
305	Туалетное очко с гигиеническим судном и откидной крышкой
307	Крышка для туалетного очка
308.54	Сиденье для душа пластиковое
309.54	Крепеж для судна пластиковый
312.10.00	Ремень для мод. 339..97
440.10.01	Туалетное сиденье с держателем судна
440.10.02	Спинка для мод. 339..97
440.10.03	Мягкая полиуретановая крышка для мод. 339..97
440...57	Опора стопы левая
440...59	Опора стопы правая
440...60	Прокладка на спинку стула из TRB 3000
440...62	Мягкая полиуретановая крышка
440...66	Сиденье стандартное (материал Текстан ®)
440...67	Адаптер высоты опоры стопы
440...69	Стабилизатор задний
440...70	Передний стабилизатор стандартный
440...73	Передний стабилизатор гигиенический
440...80	Колеса передние диаметром Ø12,5 см
440...81	Колеса передние диаметром Ø12,5 см с тормозами (к)
440...82	Колеса передние диаметром Ø12,5 см с тормозами (ч)
440...86	Колеса диаметром Ø60 см
444.02.39	Спинка с ручками и подголовником для модели 339..97
444.10.04	Сиденье мягкое с держателем судна
450.10.05	Замок для ручек для мод. 339..97
470...22	Карго бокс на трубу диаметром Ø22 мм (емкость транспортная)
470...25	Карго бокс на трубу диаметром Ø25 мм (емкость транспортная)

Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи. Исключение составляют изнашивающиеся детали, и повреждения, причиненные вследствие ненадлежащего обращения. Для Вашей безопасности и из условий взаимозаменяемости деталей, ремонт и обслуживание продукции должен быть произведен в компании ООО «Медтехника РЕБОТЕК» с применением только оригинальных запчастей и деталей.

Гарантийный срок хранения - 36 месяцев

Дата продажи: _____ 2008 г.

Штамп ОТК



ООО «Медтехника РЕБОТЕК»

125222, г. Москва, ул. Генерала Белебородова, д.35/2 помещение 10

тел: (495) 504-26-51, 504-26-52

факс: (495) 504-26-53

<http://www.rebotec.net>


e-mail: info@rebotec.net

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Кресла-стулья с санитарным оснащением

Наименование	Модель	Колеса/ножки	Материал
Реботек 6	332.54	Ножки	TRB 3000
Реботек 6	333	Ножки	TRB 3000
Реботек 6	340	Ножки	TRB 3000
Реботек 6	341	Ножки	TRB 3000
Реботек 6	347	Ножки	TRB 3000
Реботек 6	348	Ножки	TRB 3000
Реботек 6	349	Ножки	TRB 3000
Реботек 6	370.33	Ножки	TRB 3000


332.54

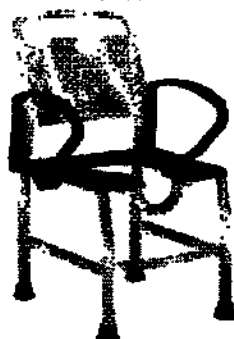


333

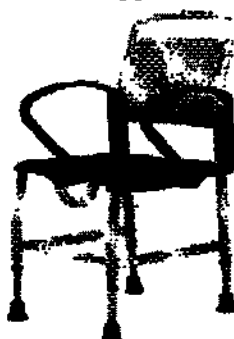

340

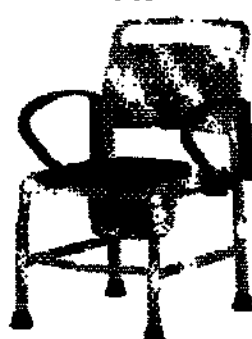

341

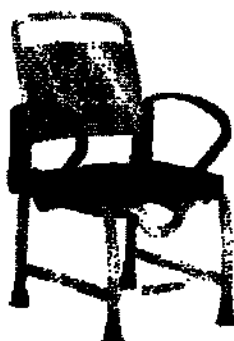

347



348



Применение

Настоящие кресла-стулья с санитарным оснащением предназначены для применения в домашних условиях, а также в больницах и реабилитационных центрах. Пользуясь этими стульями, пациент в меньшей степени нуждается в помощи других людей при приеме душа и туалета. Стулья имеют достаточно комфортные сиденья, эргономичные ортопедические спинки, способствующие длительному и комфортному пребыванию пациента в сидячем положении.

Дилер, специализирующийся на продаже этого вида товаров или обслуживающий медицинский персонал должны обязательно ознакомить Вас с правилами использования данного продукта и привести его в надлежащее положение!

Инструкции по монтажу и эксплуатации

1. Установите сиденье на выступы рамы стула и нажмите на него.
2. После этого установите подлокотники.
3. **Установите подлокотник:** поставьте подлокотники в горизонтальное положение и закрепите штифтами в соответствующих отверстиях.
4. **Снятие душевого или туалетного сиденья:** съемные сиденья позволяют легко их снимать – просто нажмите на него и потяните на себя.
5. **Снятие спинки:** нажмите на кнопки, расположенные с тыльной стороны, и потяните вперед и вверх.
6. **Установка туалетного судна:** просто вставьте судно в направляющие, расположенные сзади стула. Чтобы вытащить – повторите предыдущую операцию в обратном порядке.

Замена резиновой наконечника

Использованный или поврежденный резиновый наконечник нужно обязательно заменить (Е). Снимите его с конца трубки, прикрепите новый, учитывая его размер и конструкцию, убедитесь в том, что наконечник закреплен прочно.



Внимание! Следите за тем, чтобы в наконечнике была металлическая пластинка. Она защищает наконечник от прорыва трубкой костыля. Результатом этого может стать повреждение напольного покрытия или падение.

Чистка и уход

Каркас стула полностью выполнен из пластика. Очистка стула очень проста и может проводиться обычными чистящими и моющими средствами. Все движущиеся части обработаны смазкой для длительного использования. Из соображений безопасности и во избежание аварий (за все время использования выявлены не были), проведите экспертизу в представительстве компании REBOTEC или в своем медицинском

реабилитационном центре. Небрежный уход или ненадлежащий уход и обслуживание ведут к сокращению срока службы.

Для проведения ремонтных работ обратитесь к торговому представителю. В целях безопасности для ремонта в качестве замены должны использоваться только оригинальные запчасти.


Требования безопасности

Обратите внимание на указанный на товаре максимально допустимый вес тела!

Всегда ставьте стул только в горизонтальное положение! Даже если вы на нем не сидите. Никогда не ставьте стул на ступеньки. На стул можно садиться только при установленных подлокотниках. При веровню посаженных наконечниках устойчивость нарушается. Не переносите стул вместе с пациентом.

Технические характеристики

Наименование	Модель	Масса, кг	Нагрузка, кг
Реботек 6	332.54	8,2	100
Реботек 6	333	8,0	100
Реботек 6	340	11,0	100
Реботек 6	341	11,5	100
Реботек 6	347	11,0	100
Реботек 6	348	11,5	100
Реботек 6	349	10,5	100
Реботек 6	370.33	10,5	100

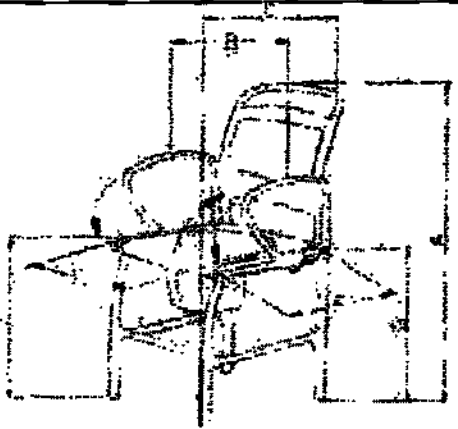Размеры	100 кг	
А. Высота	101 см	
В. Ширина	57 см	
С. Длина	62 см	
Д. Высота	47-55 см	
Е. Ширина сидения	45 см	
Ф. Длина сидения	43 см	
Н. Диаметр колеса	12,5 см	

По заказу, дополнительно кресла туалетные могут оснащаться следующими принадлежностями:

По заказу, дополнительно кресла туалетные могут оснащаться следующими принадлежностями:

Запасные части и принадлежности	
Модель	Назначение
169...30	Наконечник
201...10	Кольцо фиксирующее
301..	Туалетное судно с крышкой
303.00	Туалетное судно для мод. 339..97
305..	Туалетное очко с гигиеническим судном и откидной крышкой
307...	Крышка для туалетного очка
308.54	Сиденье ля дуна пластиковое
309.54	Крепёж для судна пластиковый
312.10.00	Ремень для мод. 339..97
440.10.01	Туалетное сиденье с держателем судна
440.10.02	Спинка для мод 339..97
440.10.03	Мягкая полиуретановая крышка для мод. 339..97
440...57	Опора стопы левая
440...59	Опора стопы правая
440...60	Прокладка на спинку стула из TRB 3000
440...62	Мягкая полиуретановая крышка
440...66	Сиденье стандартное (материал Текстан)
440...67	Адаптер высоты опоры стопы
440...69	Стабилизатор задний
440...70	Передний стабилизатор стандартный
440...73	Передний стабилизатор гигиенический
440...80	Колеса передние диаметром Ø125 см
440...81	Колеса передние диаметром Ø125 см с тормозами (к)
440...82	Колеса передние диаметром Ø125 см с тормозами (ч)
440...86	Колеса диаметром Ø60 см
444.02.39	Спинка с ручками и подголовником для мод. 339..97
444.10.04	Сиденье мягкое с держателем судна
450.10.05	Замок для ручек для мод. 339..97
470...22	Карго бокс на трубу диаметром Ø22 мм (ёмкость транспортная)
470...25	Карго бокс на трубу диаметром Ø25 мм (ёмкость транспортная)

Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи. Исключение составляют изнашивающиеся детали, и повреждения, причиненные вследствие ненадлежащего обращения. Для Вашей безопасности и из условий взаимозаменяемости деталей, ремонт и обслуживание продукции должен быть произведен в компании ООО «Мехтехника РЕБОТЕК» с применением только оригинальных запчастей и деталей.

Гарантийный срок хранения - 36 месяцев

Дата продажи: « _____ » 2008 г.

Печать ОТК



ООО «Медтехника РЕБОТЕК»

125222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2 помещение 10

тел: (495) 504-26-51, 504-26-52

факс: (495) 504-26-53

<http://www.rebotec.net>

e-mail: info@rebotec.net

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кресла-стулья с санитарным оснащением

Наименование	Модель	Колеса/ножки	Материал
Реботек 6	334	5-дюймовые колеса	TRB 3000
Реботек 6	343	5-дюймовые колеса	TRB 3000
Реботек 6	342.54	5-дюймовые колеса	TRB 3000
Реботек 6	344	5-дюймовые колеса	TRB 3000
Реботек 6	339...97	3/4/5-дюймовые колеса	TRB 3000
Реботек 6	369.54	5-дюймовые колеса	TRB 3000
Реботек 6	352	5-дюймовые колеса	TRB 3000
Реботек 6	358	5-дюймовые колеса	TRB 3000
Реботек 6	359	5-дюймовые колеса	TRB 3000
Реботек 6	360.54	5-дюймовые колеса	TRB 3000
Реботек 6	361.54	5-дюймовые колеса	TRB 3000
Реботек 6	365	5-дюймовые колеса	TRB 3000
Реботек 6	371.33	5-дюймовые колеса	TRB 3000

334...



343...



344...



339...97



369.54



361.54



Применение

Настоящие кресла-стулья с санитарным оснащением предназначены для применения в домашних условиях, а также в больницах и реабилитационных центрах. Пользуясь этими стульями, пациент в меньшей степени нуждается в помощи других людей при приеме душа и туалета. Стулья имеют достаточную комфортные сидения, эргономичные ортопедические спинки, способствующие длительному и комфортному пребыванию пациента в сидячем положении.

Дилер, специализирующийся на продаже этого вида товаров или обслуживающий медицинский персонал должны обязательно ознакомить Вас с правилами использования данного продукта и привести его в надлежащее положение!

Инструкции по монтажу и эксплуатации

1. Установите спинку, надев ее на трубки в задней части кресла.
2. Установите подлокотники, соедините со спинкой.
3. Зацепите подножки в передней части кресла и зафиксируйте их в пазах.
4. **Поверните подлокотник:** поставьте подлокотники в горизонтальное положение и закрепите штифтами в соответствующих отверстиях.
5. **Настройте подножки:** поверните подножки в удобное для Вас положение. Установите подножки на ножку стула, как показано на схеме.
6. **Поворот подножек:** подножки имеют возможность свободно поворачиваться на угол до 90°.
7. **Снятие подножек:** снимите сидение как показано на поз. 11. Затем поверните подножки на 10 см и поверните на угол 90° в сторону. Теперь Вы можете свободно вынимать подножки.
8. **Снятие душевого или туалетного сидения:** съемные сидения позволяют легко их снимать – просто нажмите на него и потяните на себя.
9. **Снятие спинки:** нажмите на кнопки, расположенные с тыльной стороны, и потяните вперед и вверх.
10. **Установка туалетного судна:** просто вставьте судно в направляющие, расположенные сзади стула. Чтобы вытащить – повторите предыдущую операцию в обратном порядке.

Чистка и уход

Каркас стула полностью выполнен из пластика. Очистка стула очень проста и может проводиться обычными чистящими и моющими средствами. Следуйте указанием в документации производителя. Все движущиеся части обработаны смазкой для длительного использования.

Из соображений безопасности и во избежание аварий (за все время использования выявлены не были), проведите экспертизу в представительстве компании REBOTEC или в своем медицинском реабилитационном центре.