



ООО «Медтехника Реботек»


125222, г. Москва, ул. Генерала Баюбородова, д.35Б помещение 10

телефон: (495) 504-26-51, 504-26-52

факс: (495) 504-26-53

<http://www.rebotec.net>

e-mail: info@rebotec.net

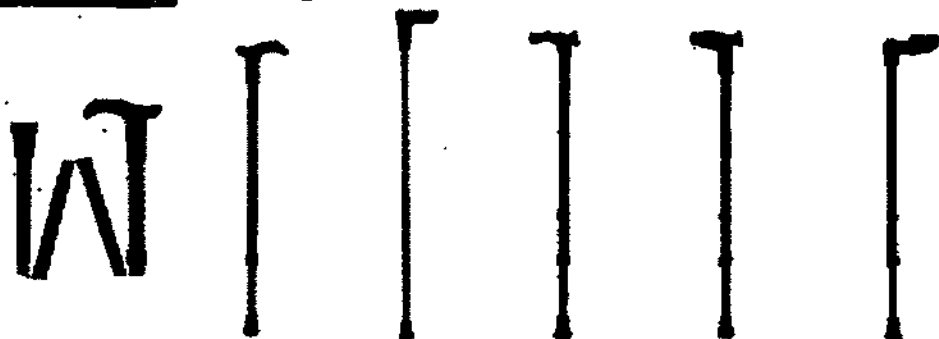

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Трость опорная

Назначение

Трости опорные предназначены для лиц с ограниченными возможностями передвижения и служат для обеспечения надежности при ходьбе. Данный продукт можно использовать как дома, так и на улице. Для этого строго следуйте указаниям по технике безопасности.


Дилер, специализирующийся на продаже этого вида товаров или обслуживающий медицинский персонал должны обязательно ознакомить Вас с правилами использования данного продукта и привести его в надлежащее положение!

Инструкции по монтажу и эксплуатации

Установка высоты происходит через алюминиевую трубку путем нажатия на клип-фиксатор или нажимную кнопку

Установка высоты тростей

- Ослабить резьбовое соединение шумоизоляционной гайки, повернув влево (А).
- Нажимную кнопку вдавить в отверстие (В) или вынуть клип-фиксатор (С).
- Алюминиевую трубку поставить в желаемое положение.
- Нажать кнопку или защелкнуть клип-фиксатор.
- Резьбовое соединение затянуть, прокрутив вправо (А) (если Вы затянете потуже, тем самым избежите появления различных звуков при использовании).

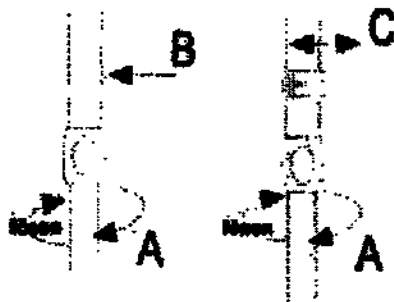

Установка высоты тростей (147.10, 149.10, 134.10, 135.10)

- Слегка зажмите стальную трубку.
- При зажиме в тисках используйте соответствующие планки.
- Распилите трубу при помощи лобзика под углом 90 градусов к оси трубы.
- Избегайте образования заусенцев на кромке распила и затем зачистите.
- Вставьте втулку в трубу и установите противоскользящую насадку.
- Установить наконечник.

Замена резинового наконечника

Использованный или поврежденный резиновый наконечник нужно обязательно заменить (Е). Снимите его с конца трубки, прикрепите новый, учитывая его размер и конструкцию (см. технические характеристики), убедитесь в том, что наконечник закреплен прочно.



Внимание! Следите за тем, чтобы в наконечнике была металлическая втулка. Она защищает наконечник от прорыва трубкой костыля. Результатом этого может стать повреждение опорного покрытия или падение.

Техническое обслуживание

Уход

Трубку трости достаточно протереть влажной тряпкой и затем вытереть насухо. Все части из искусственных материалов очищайте при помощи специальных чистящих средств.

Внимание! Не используйте содержащие растворители или масляные чистящие средства.

Обслуживание

Перед каждым использованием проверяйте трости на предмет повреждений. Убедитесь, что клип-фиксатор, нажимная кнопка и наконечник прочно закреплены, а труба находится в правильном положении. При деформации или повреждении трости нужно немедленно проверить. Небрежный уход или ненадлежащий уход и обслуживание ведут к сокращению срока службы.

Ремонт

Для проведения ремонтных работ обратитесь к торговому представителю. В целях безопасности для ремонта в качестве замены должны использоваться только оригинальные запчасти.

Инструкции по технике безопасности

- Обратите внимание на указанный на товаре максимально допустимый вес тела!
- Перед каждым использованием проверяйте трость на наличие повреждений.
- При преодолении препятствий с Вами должен быть сопровождающий, чтобы он смог помочь Вам удержаться на ногах в случае падения.
- Если же падение неизбежно, постарайтесь отбросить костыли в сторону, чтобы Вы не упали на них.

- При прохождении лестницы одной рукой держитесь за перила, другой опирайтесь на костыль.



Внимание! Возможная опасность: падение из-за соскальзывания

- Регулярно проверяйте наконечники на наличие повреждений или износ.
- При ходьбе трость должна быть в максимально вертикальном положении. Поэтому иногда не удаляйте её далеко от туловища.
- Используйте костыли только в качестве поддержки при ходьбе.
- Ни в коем случае не нельзя использовать в других целях: опора для того, чтобы подняться, в качестве рычага или рукоятки, перестановки мебели и т.д.
- Механические изменения производить запрещено.
- Не вешать на костыли посторонние предметы (сумка, кошелек и т.д.).
- Не допускать попадания на костыли солнечных лучей в течение длительного времени (у окна, отопления, за окном автомобиля).
- Не используйте костыли без защиты от скольжения на обледенелой или заснеженной поверхности.
- Будьте внимательны во время передвижения по влажной плитке, полу или незакрепленному ковровому покрытию.

Технические характеристики

Наименование трости	Модель *	Нагрузка, кг	Вес, гр	Высота, см	Рукоятка	Центр**
Ресток 1	133.10.30	100	370	83,5-93,5	эргономическая	10/14/16/29/32/40
Ресток 1	136.10.30	100	360	83,5-93,5	анатомическая	10/14/16/29/32/40
Ресток 2	138.10.30	100	360	83,5-93,5	анатомическая	10/14/16/29/32/40
Ресток 1	146.10.30	100	390	83,5-93,5	анатомическая	10/14/16/29/32/40
Ресток 1	148.10.30	100	390	83,5-93,5	анатомическая	10/14/16/29/32/40
Ресток 1	131	100	320	73,0-95,0	анатомическая	10/14/16/29/32/40
Ресток 1	132	100	370	73,0-95,0	анатомическая	10/14/16/29/32/40
Ресток 1	133	100	370	73,0-95,0	эргономическая	10/14/16/29/32/40
Ресток 1	134.10	150	500	117,5	анатом. мягкая	10
Ресток 1	135.16	100	370	107,5	анатом. мягкая	16
Ресток 1	136/134П	100	360	73,0-95,0	анатомическая	10/14/16/29/32/40
Ресток 1	139/141П	100	370	73,0-95,0	анатомическая	10/14/16/29/32/40
Ресток 1	142/144П	100	410	73,0-95,0	анатомическая	10/14/16
Ресток 1	143/145П	100	370	73,0-95,0	анатомическая	10/14/16/29/32/40
Ресток 1	146/148П	100	390	71,5-94,0	анатомическая	10/14/16/29/32/40
Ресток 1	147.10/149.10	100	320	104	анатомическая	10/14/16/29/32/40
Ресток 1	133.29.12	100	370	71,5-94	эргономическая	10/14/16/29/32/40
Ресток 1	136...12	100	360	71,5-94	анатомическая	10/14/16/29/32/40
Ресток 1	138...12	100	360	71,5-94	анатомическая	10/14/16/29/32/40
Ресток 1	146.53.12	100	390	71,5-94,0	анатомическая	10/14/16/29/32/40
Ресток 1	148.53.12	100	390	71,5-94,0	анатомическая	10/14/16/29/32/40

* Л/П - левая/правая рука

** 00-базис; 10-среднестой; 14-верхний; 16-аппарат; 29-базис; 32 и 33-среднестой; 40-верхний