



ООО «Медтехника Реботек»


125222, г. Москва, ул. Генерала Батоборова, д.35/2 помещение 10

телефон: (495) 504-26-51, 504-26-52

факс: (495) 504-26-53

<http://www.rebotek.net>

e-mail: info@rebotek.net

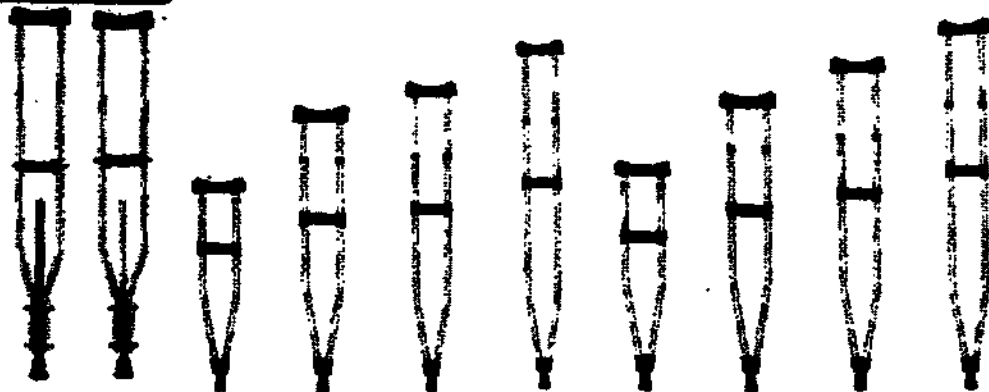

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Костыли подмышечные

Показания

Костыли подмышечные предназначены для людей с ограниченными функциями опорно-двигательного аппарата (как нижних, так и верхних конечностей) и служат для безопасности передвижения. Их можно использовать как в помещении, так и вне его. Непременно обратите внимание на меры предосторожности.

Дилер, специализирующийся на продаже этого вида товаров или обслуживающий медицинский персонал должны обязательно ознакомить Вас с правилами использования данного продукта и привести его в надлежащее положение!

Указания по монтажу и эксплуатации

Установка высоты костыля

Для установки нужной высоты рукоятки и опоры для руки изложите красные зажимы (A – B) с помощью соответствующего инструмента. Вставьте инструмент в пространство между ручкой и зажимом (D) и поверните его.

Внимание! Из-за напряжения матерчатая зажим может отскочить!

Установка подмышечных костыля

Сначала установите необходимую высоту валика (F-F).

Обратите внимание на отверстия (6,2 мм) в алюминиевых трубках.

Установка опоры для руки

Установите нужную высоту опоры для руки (C-C).


Обратите внимание на отверстия (6,2 мм) в алюминиевых трубках (A – B).

Обратите внимание также на то, что боковые линейные рукоятки покрывают сверху и снизу отверстие (J).

При установке высоты подмышечника красная дробка (G) должна находиться глубоко в отверстии, как и зажимы (A – B). Теперь окончательно зафиксируйте красные зажимы (H) в их позиции.

Окончательная проверка

Проверьте прочное положение валика в позиции (F – F) и прочное положение опоры для руки в позиции (C – C). Костыли готовы к использованию.

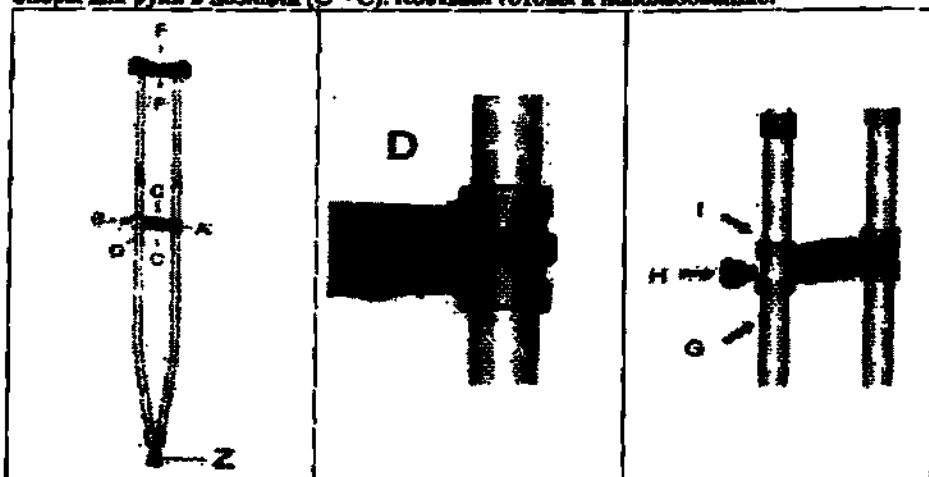


Установка высоты костыля (модель 128.10 и 129.00)

С помощью гаечного ключа откручиваем колпачковые гайки (K) и вытаскиваем болты. Передвигаем нижнюю трубку на нужную высоту – обращая внимание на отверстия для фиксации – вставляем болты и снова закручиваем гайки (K).

Установка высоты рукоятки

С помощью гаечного ключа откручиваем колпачковые гайки (J) и вытаскиваем болты. Соответствующую рукоятку – правую или левую – устанавливаем в нужное положение (обратить внимание на отверстия для фиксации). Вставляем болты и снова закручиваем гайки (J).

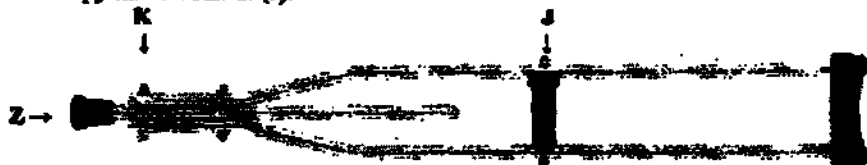

Замена резинового наконечника у костылей

Использованный или поврежденный резиновый наконечник нужно обязательно заменить (Z). Снимите наконечник с конца трубки, прикрепите новый, учитывая его размер и конструкцию, убедитесь в том, что наконечник закреплен прочно.



Внимание! Следите за тем, чтобы в наконечнике была металлическая пластинка. Она защищает наконечник от прорыва трубкой костыля. Результатом этого может стать повреждение внешнего покрытия или падение.

Техническое обслуживание

Уход

Трубку костыли достаточно протереть влажной тряпкой и затем вытереть насухо. Все части из искусственных материалов очищайте при помощи специальных чистящих средств.

Внимание! Не используйте чистящие средства, содержащие растворители или масляные компоненты!

Обслуживание

При каждом использовании проверяйте костыли на предмет повреждений. Проверьте прочность и правильность положения зажимов, наконечника, болтовые соединения, а также положение валика и трубок. В случае неисправности или деформации срочно обратитесь для проверки. Небрежный или ненадлежащий уход и обслуживание ведут к сокращению срока службы.

Ремонт

Для проведения ремонтных работ обратитесь к торговому представителю. В целях безопасности для ремонта в качестве замены должны использоваться только оригинальные запчасти.

Инструкции по технике безопасности

- Обратите внимание на указанный на товаре максимально допустимый вес тела!
- Перед каждым использованием проверяйте костыли на наличие повреждений.
- При преодолении препятствий с Вами должен быть сопровождающий, чтобы он смог помочь Вам удержаться на ногах в случае падения.
- Если же падение неизбежно, постарайтесь отбросить костыли в сторону, чтобы Вы не упали на них.
- При прохождении лестницы одной рукой держитесь за перила, другой опирайтесь на костыль.



Внимание! Возможная опасность: падение из-за соскальзывания

- Регулярно проверяйте наконечник на наличие повреждений или износ.
- При ходьбе костыли должны быть в максимально вертикальном положении. Поэтому никогда не удаляйте их далеко от туловища.
- Используйте костыли только в качестве подставки при ходьбе.
- Ни в коем случае не нельзя использовать в других целях: опора для того, чтобы подняться, в качестве рычага или рукоятки, перестановки мебели и т.д.
- Механические изменения производить запрещено.
- Не вешать на костыли посторонние предметы (сумка, кошелек и т.д.).
- Не допускать попадания на костыли солнечных лучей в течение длительного времени (у окна, отопления, за окном автомобиля).
- Не используйте костыли без защиты от скольжения на обледенелой или заснеженной поверхности.
- Будьте внимательны во время передвижения по влажной плитке, полу или незакрепленному ковровому покрытию.